

正面

130 mm

对折线

Conseils pour éviter les fuites de lait et astuces de pompage pour tirer plus de lait maternel.

- 1 Veillez à ce que le tire-lait soit correctement assemblé.
- 2 Penchez-vous en avant pour vous assurer que votre mamelon est centré dans le canal de la bride. Le tire-lait doit être fermement appliqué contre votre sein.



- 3 Nous recommandons aux utilisatrices de porter un soutien-gorge d'allaitement couvrant tout le corps afin de former un joint étanche entre leurs seins et la bride.
- 4 Penchez-vous légèrement en avant pour retirer le tire-lait du sein après la séance de pompage.

Astuces

- 1) La durée de vie prévue des pièces lavables est comprise entre 1 et 3 mois. Il est recommandé de remplacer les pièces lavables après un stockage prolongé ou avant de tirer le lait pour votre prochain enfant.
- 2) Le tire-lait s'éteint automatiquement après 30 minutes de pompage.
- 3) En cas d'irritation ou de gêne, utilisez votre doigt pour rompre le joint entre la tétérelle et le tissu mammaire, cessez toute utilisation et consultez un professionnel de santé.

Si vous avez des questions, veuillez contacter par E-mail. support@momcozy.com


4

momcozy

Tire-lait portable

Consignes d'installation (voir le manuel d'utilisation pour plus de détails)
*Assurez-vous d'avoir les mains propres avant de procéder à l'installation.

- 1 Installez le collecteur de lait et fixez le couvercle pour qu'il soit bien étanche.

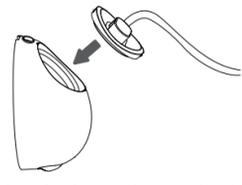

- 2 Poussez délicatement la valve dans le collecteur de lait. Assurez-vous qu'il n'y ait aucun écart.






Si vous avez besoin d'aide, veuillez vous référer à la vidéo du guide d'utilisation pour trouver des solutions. Scannez le code QR ci-dessus pour accéder à la vidéo du guide d'utilisation.


1

背面

- 3 Alignez d'abord le collecteur de lait avec la partie supérieure de la bride, puis appuyez sur le pourtour pour assurer une jonction étanche.

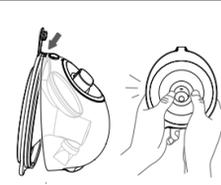

- 4 Reliez l'extrémité longue du tuyau au moteur du tire-lait.

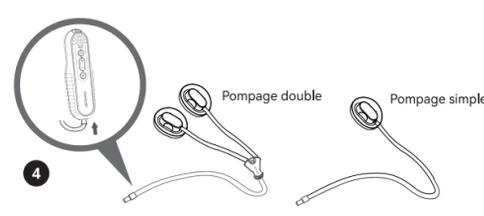

Versement du lait

Veillez à tenir le collecteur de lait dans le bon sens lorsque vous versez le lait. Versez ensuite le lait par le canal de la bride.

Si vous avez des questions, veuillez contacter par E-mail. support@momcozy.com


2

Nettoyage et stérilisation

*** Pièces non lavables**
Tuyau
Moteur de la pompe



*** Pièces lavables**
Tétérelle
Valve
Collecteur de lait

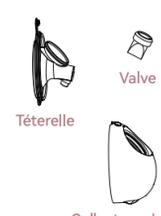


Nettoyage et stérilisation des pièces lavables

1. Nettoyez avec de l'eau savonneuse (40-60 °C) pendant 3 à 5 minutes.
2. Pour la stérilisation, utilisez une casserole d'eau bouillante, une cocotte ou un stérilisateur. À une température de 100 °C (212 °F) pendant 5 à 10 minutes.

* Il est déconseillé de stériliser les pièces de la pompe au micro-ondes ou dans un stérilisateur UV. Les températures élevées (> 110 °C) réduisent leur durée de vie et posent des risques pour la sécurité.

Panneau de commande

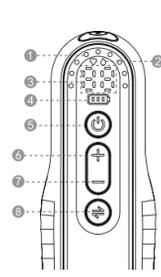

- 1 Témoin de niveau d'aspiration
- 2 Indicateur de mode
- 3 Affichage de la durée de fonctionnement/du niveau d'aspiration
- 4 Affichage de la batterie
- 5 Marche/Arrêt
- 6 Augmenter
- 7 Diminuer
- 8 Sélection du mode

- Appuyez longuement sur pour mettre en marche ou arrêter l'appareil ;
- Une pression courte sur permet d'interrompre ou de poursuivre le pompage.
- Stimulation Expression Mixte

3

180 mm