

ACTIVESHOP[®]

VARTOTOJO VADOVAS

Elektrinė kosmetinė kėdė 2240 Eclipse 3 varikliai



Importuotojas:


z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Lenkija

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2024

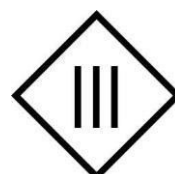

Prieš naudodami kosmetinę kėdę perskaitykite instrukciją ir atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Įsitinkinkite, kad pašalintos visos pakavimo medžiagos.
2. Įsitinkinkite, kad kėdė yra techniškai tvarkinga.
3. Pastatykite kosmetinę kėdę toje vietoje, kur ji bus naudojama.
4. Įkiškite elektros tinklo kištuką į tinkamą lizdą.

Pastaba! Vaikams ir nepatyrusiems asmenims draudžiama naudotis šiuo prietaisu. Vaikai turi būti prižiūrimi ir neturi žaisti šalia kosmetinės kėdės.

Prietaiso matmenys:



Kėdės ilgis atsilošimo padėtyje siekia 2,3 metro. Aukštį galima reguliuoti nuo 56 cm iki 76 cm. Todėl jis puikiai tinka ir aukštiems žmonėms gydyti.




A



B



Įrenginio dizainas:

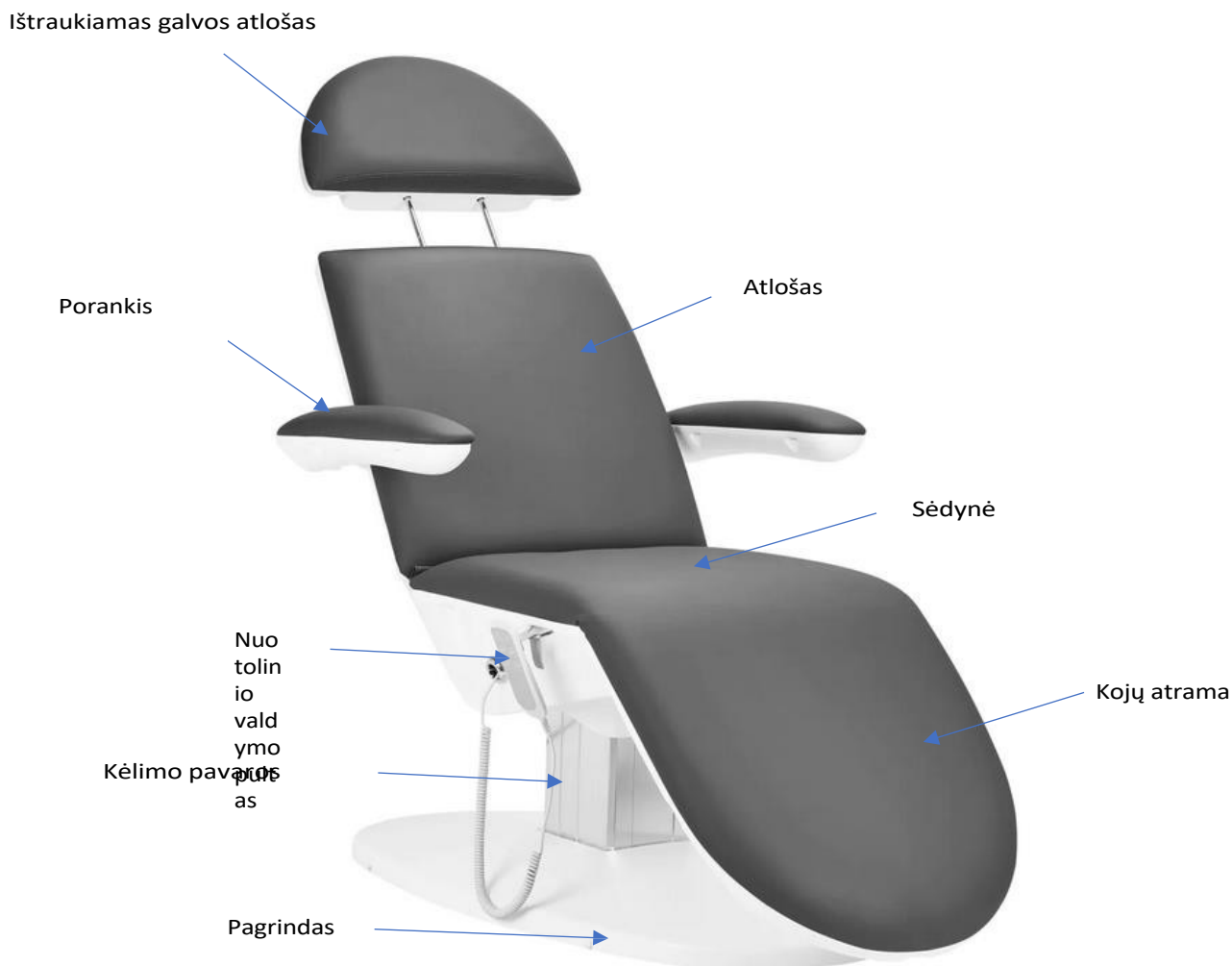

Įspėjimas

1. Kojų atrama nėra skirta išlaikyti visą suaugusio žmogaus svorį.
2. Nesėdėkite tiesiai ant porankio ar pėdų atramos.
4. Nekelkite didesnio svorio, nei gali išlaikyti sėdynė.
5. Įsitikinkite, kad atstumas tarp kištukinių lizdų neviršija 2 metrų.

Įspėjimas

1. Saugumo sumetimais maitinimo laidą visada įjunkite į įžemintą elektros lizdą.
2. Nepriiškite maitinimo laido prie įrenginio. Keldami arba traukdami už maitinimo laido galite jį sugadinti. Įsitikinkite, kad avariniu atveju maitinimo laidą galima lengvai ištraukti.
3. Prieš perkeldami elektrinį grožio krėslą, nuimkite maitinimo laidą, kad jis neužstrigtų tarp kai kurių krėslo dalių.
4. Jei maitinimo laidas pažeistas, nedelsdami jį atjunkite, nenaudokite kėdės ir kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Naudokite tik originalų maitinimo laidą.
5. Neleiskite valdyti nuotolinio valdymo pulto asmeniui, kuris nevykdo gydymo.
6. Nedėkite jokių daiktų po kėde.
7. Įsitikinkite, kad aplink kėdę yra pakankamai laisvos vietos, kad ją būtų galima laisvai sulankstyti ir išskleisti.
8. Įsitikinkite, kad aplink kėdę nėra aštrių ar kenksmingų daiktų, kurie galėtų pažeisti įrenginį.
9. Nemodifikuokite įrenginio patys. Jei kėdė veikia netinkamai, nustokite ją naudoti ir kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.


Įrenginio funkcijos:

Kėdė turi išskleidžiamą galvos atramą, kad būtų pritaikyta įvairaus ūgio naudotojams. Galvos atramą galima pailginti iki 9 cm.

Norėdami išskleisti galvos atlošą, paimekite jį iš abiejų pusių ir patraukite į viršų.



Rankinio valdymo funkcija (nugaros pakėlimo kampas 0-70°, kojų pakėlimo kampas 0-30°)

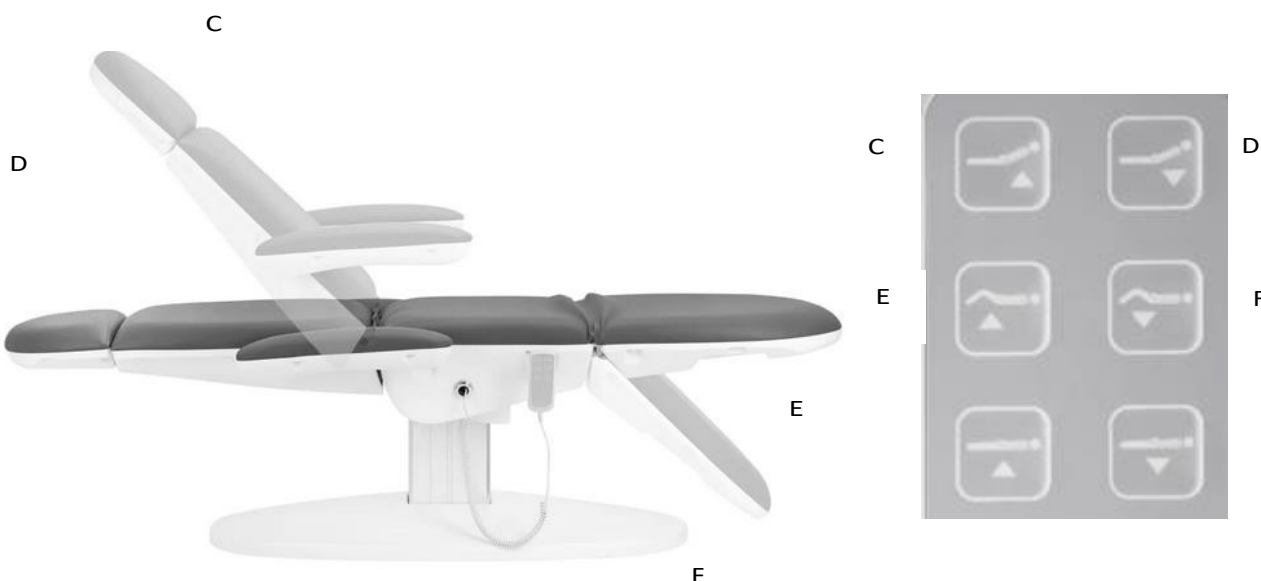

Porankio įrengimas:

Prieš montuodami porankį, sėdynę pastatykite į horizontalią padėtį. Įstumkite porankį į atlošo šone esančią angą. Porankis turi būti tvirtai pritvirtintas. Pasukite jį į dešinę arba į kairę, kad tinkamai įsitvirtintų. Tą patį padarykite ir su kitu porankiu. Porankis yra statmenai žemei (nepriklausomai nuo sėdynės kampo). Jį galima pasukti 180° kampu.

Prietaiso valymas ir dezinfekavimas:

- Prieš valydami atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
- Kad kėdės paviršius būtų geros būklės, reguliariai jį valykite. Nepamirškite valyti ir dezinfekuoti kėdės po kiekvieno naudojimo. Rekomenduojame kruopščią dezinfekciją atlikti kartą per mėnesį.

I Metaliniai ir plastikiniai paviršiai

– Norėdami nuvalyti metalinius ir plastikinius paviršius bei valdiklius, nuvalykite juos drėgna drėgna šluoste. Sunkiai pasiekiamoms vietoms ar kampams valyti puikiai tiks mažas šepetėlis. Nenaudokite per daug skysčio prietaisui valyti. Tada prietaisą dezinfekuokite tinkamu skysčiu.

II Nerūdijančio plieno paviršiai

– Geriausiai tinka valyti švelniu ploviklio tirpalu. Stiprioms dėmėms pašalinti galima naudoti amoniaką ir daugumą tirpiklių. Venkite chloro turinčių tirpalų.

III Dažyti arba chromuoti metaliniai paviršiai

- Valymui nenaudokite vandens srovių (dušų, aukšto slėgio vandens patrankų).
- Nevalykite esant aukštai temperatūrai ir didelei drėgmei, taip pat nelaikykite įrenginio tokiomis sąlygomis, kurios gali sukelti skysčio užteršimą.
- Valymui nenaudokite tirpiklių ar rūgščių.

IV Kėdės paviršius

– Kėdės paviršių tolygiai nuvalykite specialiu odos valikliu ir tada nušluostykite švaria, minkšta šluoste.

Priežiūra

Prieš atliekant techninę priežiūrą prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio.

1. Remonto darbus turi atlikti patyrę ir gamintojo įgalioti darbuotojai. Neįgalioto personalo atliekami remonto darbai gali sužaloti arba sugadinti prietaisą, už kuriuos gamintojas neatsako.
2. Naudokite tik originalias gamintojo patvirtintas atsargines dalis.
3. Nenaudokite elektrinio grožio krėslo ar priedų, jei jie tinkamai neveikia.
4. Visi techninės priežiūros ir remonto darbai turi būti dokumentuojami.

Priežiūros priemonės

Kartą per savaitę patikrinkite valdiklius ir jų laidus. Ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius patikrinkite toliau nurodytų elementų būklę ir veikimą:

1. Maitinimo laidą ir jo tvirtinimą
2. variklio laidus
3. Valdymo blokas ir jo laidai
4. Ar priedai yra pritvirtinti
5. Normalus užrakto sistemos veikimas

Jei pastebėjote kokių nors defektų, nustokite naudoti įrangą ir kreipkitės į įgaliotąjį tarnybą. Atidaryti arba pakeisti pavaros / valdymo bloką gali tik patyrę arba įgalioti darbuotojai. Jei kuri nors įrangos dalis pažeista, atjunkite maitinimo laidą ir nustokite ja naudotis. Tada praneškite apie tai aptarnavimo tarnybai.

Gedimų šalinimas Problema	Sprendimo būdai
Rankinis valdymas nereaguoja	Patikrinkite, ar sąsaja, jungianti rankinio valdymo liniją rankinis valdymas yra atsilaisvinęs (patikrinkite, ar nėra problemų su spausdintine plokšte), nepamirškite pažymėti originalo kištuko padėtį.
Variklis nereaguoja	Pakeiskite variklio kištuko padėtį

SAUGOS PRIEMONĖS

1. Šis prietaisas yra profesionali įranga, skirta naudoti kosmetinėse operacijose. Naudojant prietaisą tik kvalifikuotam kosmetikos specialistų personalui, galima išvengti nepageidaujamo poveikio gydymo metu.
2. Prietaiso negalima ardyti ar bandyti naudoti kitais tikslais, nei nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje. Visus aptarnavimo ir remonto darbus turi atlikti tik įgaliotasis techninės priežiūros specialistas (ACTIVESHOP Sp. z o.o. įmonė).
3. Nemontuokite ir nenaudokite prietaiso šalia skysčių, drėgnose vietose arba šlapiomis rankomis - kad į prietaisą nepatektų skysčių.
4. Toliau nurodytais atvejais nedelsdami ištraukite prietaisą iš elektros lizdo ir kreipkitės į ACTIVESHOP Sp. z o.o. įgaliotąjį servisą:
(a) į prietaisą pateko skysčio, (b) prietaisas skleidžia keistą kvapą, dūmus arba skleidžia keistus garsus, c) pažeistas maitinimo laidas, d) prietaisas buvo apverstas arba pažeistas jo korpusas.
5. Ant kabelių nedėkite jokių daiktų. Nestatykite prietaiso ten, kur kas nors gali užlipti ant maitinimo laido.
6. Saugumo sumetimais ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo kiekvieną kartą, kai baigsite dirbti su prietaisu.
7. Nieko neįkiškite į prietaiso angą. Jei į angą pateko pašalinis daiktas, ištraukite laidą iš lizdo ir kreipkitės į platintoją arba gamintoją.
8. Nestatykite prietaiso ant nestabilaus vežimėlio, lentynos ar transporto priemonės. Nukritęs prietaisas gali būti sugadintas.
9. Siekiant užtikrinti fiksuotą prietaiso tarnavimo laiką, rekomenduojama išlaikyti vienos minutės intervalą prieš dar kartą paspaudžiant maitinimo mygtuką (tarp įjungimo ir išjungimo ir atvirkščiai).
10. Maitinimo šaltinis turi atitikti vardinėje plokštelėje nurodytas specifikacijas. Priešingu atveju kyla pavojus, kad prietaisas veiks netinkamai, bus sugadintas ar net sudegs.

DĖMESIO:

1. Sugedus kabeliui maitinimo šaltiniui arba kitiems gedimams, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą - taip išvengsite pavojaus.
2. Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni kaip 8 metų vaikai, taip pat asmenys, kurių fizinės ir protinės galimybės yra sumažėjusios, ir asmenys, neturintys patirties ir žinių apie įrangą, jei jie yra prižiūrimi arba instruktuojami apie saugų naudojimąsi įranga, kad suprastų su tuo susijusią riziką.
3. Prietaisas neskirtas žaisti vaikams. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
4. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai šalia yra vaikų arba asmenų, neturinčių pakankamai žinių apie prietaiso naudojimą.
5. Šis elektros prietaisas nėra žaislas. Netinkamas elektros prietaiso naudojimas ar sąlytis su juo gali kelti pavojų sveikatai arba sukelti mirtį, todėl prietaisas turi būti naudojamas ir laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

PRIETAISO ŠALINIMAS



Panaudotus elektros prietaisus, armatūrą ir pakuotes utilizuokite perdirbimo centruose, laikydamiesi aplinkos apsaugos principų. Elektros prietaisų negalima išmesti į buitinių atliekų kontenerius. Laikykitės šio tipo įrangos šalinimo taisyklių. Siekiant apsaugoti aplinką pagal Direktyvą 2012/19/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, panaudotus elektros įrenginius reikia rinkti atskirai ir perduoti į šiuos surinkimo punktus elektroninės ir elektros įrangos atliekų surinkimas. Pasibaigus naudingo tarnavimo laikui, senuose prietaisuose yra visiškai perdirbamų komponentų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbti. Todėl jie turėtų būti atiduodami į atitinkamus surinkimo punktus, taip pat bendrovei ACTIVESHOP Ltd.

SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Prietaisas turėtų būti transportuojamas nuo (-) 20 °C iki (+) 50 °C temperatūroje tik originalioje pakuotėje. Laikykite prietaisą gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 75 %. Darbinė temperatūra nuo (+) 10 °C iki (+) 40 °C. Sandėliavimo ir transportavimo procesų metu prietaiso negalima mėtyti ar mėtyti, jis negali būti veikiamas mechaninių smūgių ar atmosferos veiksnių.

