

正面

120mm


**momcozy**

Puettava rintapumppu


**Asennusohjeet** (katso lisätietoja käyttöoppaasta)

\*Pese kädet ennen asennusta.

1. Liitä kalvo ja venttiili linkittimeen.

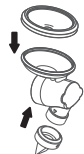


2. Liitä koottu linkitin maidonkerääjään.

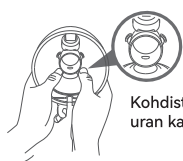


Kohdista "korva" uran kanssa

3. Liitä rintasuppilo maidonkerääjään.

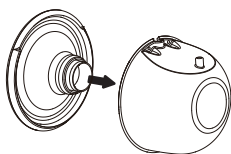


4. Kokoa pumppu ja maidonkerääjä.

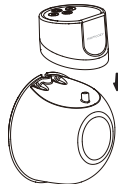


### Maidon kaataminen

Pidä maidonkerääjää oikein päin kaataessasi maitoa.

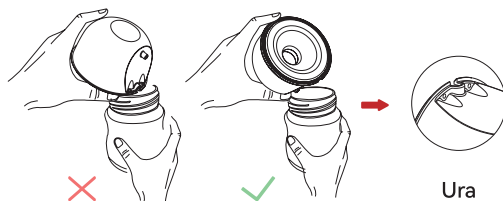

Ura


Katso lisätietoja vianmääritysvideosta, jos asennuksen tai pumppauksen aikana ilmenee ongelmia. Siirry vianmääritysvideon skannaamalla QR-koodi.

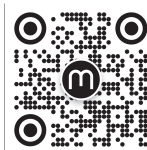

反面

### Maidon vuotamisen estäminen sekä rintamaidon pumppausvinkkejä

1. Nojautu eteenpäin ja varmista, että nänni on keskellä rintasuppiloa. Rintapumpun on oltava tiukasti rintaa vasten.

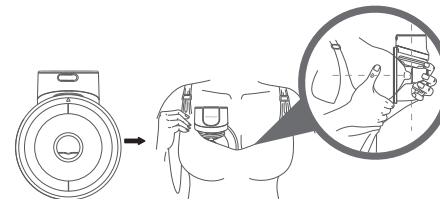

2. Suosittelemme käyttäjiä käyttämään tukevia imetysrintaliivejä, jotka auttavat muodostamaan tiiviin tiivisteen rintojen ja rintasuppilon välille.

3. Varmista, että pumppu on hyvin koottu.

4. Istu tai seiso pumppauksen aikana, älä makaa.

### Puhdistus ja sterilointi

**\*Ei-pestävät osat:**



Pumpun moottori

**\*Pestävät osat:**



Maidonkerääjä



Rintasuppilo



Kalvo



Linkitin



Venttiili

Suosittellemme puhdistamaan pestävät osat saippuavedellä (40–60 °C) 3–5 minuutin ajan.

Käytä sterilointiin kiehuvaa vettä / höyryä / sterilointiastiaa, jonka lämpötila on enintään 100 °C (212 °F). Keitä ja steriloi osia 5–10 minuutin ajan.

\*Rintapumpun osia ei kannata steriloida mikroaaltouunissa, sillä se lyhentää osien käyttöikää.

### Vinkkejä:

- Pestävien osien odotettu käyttöikä on 1–3 kuukautta. Pestävät osat on suositeltavaa vaihtaa pitkäaikaisen säilytyksen jälkeen tai ennen maidon pumppaamista toiselle lapselle.
- Rintapumppu sammuu automaattisesti, kun sitä ei ole käytetty 30 minuuttiin. Jos ilmenee ärsytystä tai epämieluisia tunteita, lopeta käyttö ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä sähköpostitse.

[support@momcozy.com](mailto:support@momcozy.com)