


momcozy

Draagbare Borstkolf

V1 Pro

Model number: BP137

Gebruikershandleiding

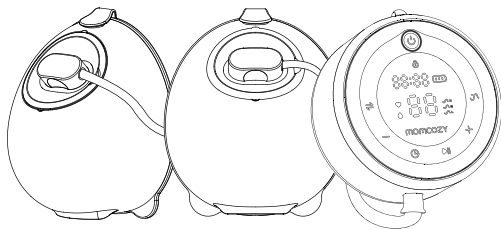

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

→ **NEDERLANDS**

INHOUDSOPGAVE

1. Introductie product	01
2. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen	01
3. Contra-indicaties	02
4. Veiligheidsinformatie	02
5. Productbeschrijving	05
6. Gebruiksaanwijzing	08
7. Reizen	27
8. Conditie opslag	27
9. Specificatie	27
10. Onderhoud en reserveonderdelen	28
11. Conformiteitsverklaring	29
12. Probleemoplossing	29
13. Verwijdering	31
14. Garantie	31
15. Verklaring reizen of internationaal gebruik	31
16. Fabrikant informatie	32
17. Belangrijke veiligheidsinformatie	32

1. Introductie product

De draagbare borstkolf van Momcozy is bedoeld voor gebruik door vrouwen die borstvoeding geven om moedermelk af te kolven en op te vangen. De draagbare borstkolf van Momcozy vormt een vacuüm rond de tepel om moedermelk af te kolven. De melk wordt opgevangen in een melkopvangbak.

Het apparaat heeft een stimulatiestand, expressiestand en gemengde stand. In de stimulatiestand begint de borstkolf met een snel en kort zuigpatroon om de melk te laten stromen. In de expressiestand begint de borstkolf met een langzaam zuigpatroon voor het afkolven van melk, waarbij er dieper en langzamer wordt gezogen. In de gemengde stand begint de borstkolf met een snel en kort zuigpatroon en vervolgens met een langzaam en lang zuigpatroon. Om te voorkomen dat er melk in het vacuümsysteem stroomt, bevatten de melkopvangsets een siliconen membraan dat de melstroom fysiek scheidt van het vacuümsysteem.

Het apparaat is bedoeld voor één gebruiker.

2. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

De waarschuwingstekens en grafische symbolen in de handleiding zorgen ervoor dat u het product veilig en correct gebruikt en dat u en anderen geen letsel oplopen. Waarschuwingstekens en grafische symbolen worden als volgt beschreven:

Waarschuwings-/voorzorgssymbolen	
 Waarschuwing	Een waarschuwing wijst de lezer op een situatie die, indien deze niet voorkomen wordt, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben. Het kan ook potentiële ernstige bijwerkingen en veiligheidsgevaaren beschrijven.
 Voorzorgsmaatregelen	Een waarschuwing die de lezer op een mogelijk gevaarlijke situatie wijst. Als deze situatie niet wordt vermeden, kan dit leiden tot licht of matig letsel bij de gebruiker of de patiënt. Bovendien kan deze waarschuwing schade aan de apparatuur of andere eigendommen tot gevolg hebben. Het wordt ook gebruikt om te waarschuwen voor onveilige werkwijzen. Hieronder valt de speciale zorg die nodig is voor een veilig en effectief gebruik van het apparaat en de zorg die nodig is om schade aan een apparaat als gevolg van gebruik of misbruik te voorkomen.
Contra-indicaties	Contra-indicaties zijn omstandigheden waaronder het hulpmiddel niet mag worden gebruikt, omdat het risico van het gebruik duidelijk groter is dan het mogelijke voordeel. Sommige personen kunnen het hulpmiddel niet vanwege hun gezondheidstoestand.
Opmerkingen	Wijst erop dat er aandacht moet worden besteed; als u niet oplet, kan dit leiden tot onjuist gebruik van het product of beschadiging van het apparaat.

Beschrijving symbool

	LOGO CE		LOGO UKCA
	Droog houden		Stapel limiet 5 lagen
 MEHRWEG	LOGO Recyclen		Raadpleeg de instructiehandleiding.
	Batchcode		Producten die in contact komen met voedingsmiddelen
	LOGO FCC		Serienummer
	Distributieverpakkingen mogen niet aan zonlicht worden blootgesteld		Vervaldatum
IP22	The first number 2: Protected against solid foreign objects of 12.5mm diameter and greater. The second number 2: Protected against vertically falling water drops when enclosure tilted up to 15°.		
	Disposal in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE)		
	Het eerste nummer 2: Wordt beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen met een diameter van 12,5 mm en groter. Het tweede nummer 2: Wordt beschermd tegen verticaal vallende waterdruppels wanneer de behuizing een hoek van maximaal 15° maakt		
	Geautoriseerde VK-vertegenwoordigers		Franse ERP-verpakking
	Geautoriseerde vertegenwoordigers EU		

3. Contra-indicaties

Gebruik deze borstkolf niet als u een actief geïmplantéerd apparaat hebt dat beïnvloed kan worden door een magnetisch veld (bijv. pacemaker; implanteerbare cardioverter-defibrillator).

4. Veiligheidsinformatie

Bij het gebruik van elektrische producten, vooral als er kinderen bij zijn, moet u altijd de volgende basisveiligheidsinformatie in acht nemen.

4.1 Waarschuwing

- 1) Gebruik dit apparaat niet als u een pacemaker, geïmplanteerde defibrillator of ander geïmplanteed metalen of elektronisch apparaat hebt. Een dergelijk gebruik kan elektrische storing of de dood tot gevolg hebben.
- 2) Deze borstkolf is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis. Deze personen mogen deze borstkolf alleen gebruiken onder toezicht van of met de juiste instructies over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- 3) Gevaar: Om het risico op een elektrische schok te verminderen:
 - Haal altijd onmiddellijk na het opladen de stekker uit het stopcontact.
 - Niet gebruiken tijdens het baden, douche, autorijden of zwemmen.
 - Grijp niet naar elektrische producten die in het water zijn gevallen, haal onmiddellijk de stekker van de stroomadapter uit het stopcontact.
- 4) De draagbare borstkolf van Momcozy is een persoonlijk verzorgingsartikel en mag om hygiënische redenen nooit gedeeld of doorverkocht worden tussen moeders. Een van bovenstaande acties zal de garantie ongeldig maken.
- 5) Als u een moeder bent die geïnfecteerd is met Hepatitis B, Hepatitis C of humaan immunodeficiëntievirus (HIV), zal het afkolven van moedermelk met de draagbare borstkolf van Momcozy het risico van overdracht van het virus op uw baby via uw moedermelk niet verminderen of wegnemen.
- 6) Er is nauwlettend toezicht nodig wanneer het product in de buurt van kinderen of invaliden wordt gebruikt. Laat kinderen of huisdieren niet spelen met de motor, het verpakkingsmateriaal of de accessoires.
- 7) Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding.
- 8) Gebruik geen andere hulpstukken of andere onderdelen voor de melkopvang dan die door de fabrikant worden aanbevolen.
- 9) Controleer de voedingsadapter voor het opladen, gebruik nooit een beschadigde voedingsadapter.
- 10) Laat het product nooit onbeheerd achter tijdens het opladen.
- 11) Houd het product en alle hulpstukken uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- 12) Gebruik het apparaat nooit terwijl u slaapt of slaperig bent.

- 13) Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar spuitbussen worden gebruikt of zuurstof wordt toegediend.
- 14) Gebruik het apparaat niet in de buurt van explosief of ontvlambaar materiaal, in een MRI-omgeving, in een decompressiekamer of in de buurt van een open haard of straalkachel.
- 15) Vermijd wurging door de oplaadkabel.
- 16) Gebruikers mogen het product niet repareren. Als u dit toch doet, vervalt uw garantie. Stuur het apparaat voor reparaties naar de fabrikant of een aangewezen franchisedistributeur.
- 17) Schakel de borstkolf altijd uit voordat u het afkolfgedeelte van uw borst verwijdt, om het vacuüm op te heffen.
- 18) Aangedreven borstkolven die ontworpen zijn voor één gebruiker mogen nooit verhuurd of gedeeld worden.
- 19) Gebruik de borstkolf nooit als u zwanger bent, want afkolven kan weeën opwekken.
- 20) De hoge temperatuur van het toegepaste deel kan max. 43,9°C bereiken. Een te hoge temperatuur kan brandwonden op de huid veroorzaken, dus zorg ervoor dat uw borsthuid intact en gezond is voor gebruik. Schakel het apparaat uit als u voelt dat het oververhit is. Om verbranding door lage temperaturen te voorkomen, mag het apparaat niet langer dan 30 minuten achtereen gebruikt worden. Zorg dat er tussen twee gebruiksmomenten minstens 5 minuten zitten zodat het apparaat kan afkoelen.
- 21) Voor de levensduur van het product (d.w.z. de gebruiksduur) Het apparaat is niet houdbaar, de gebruiksduur van het product is 500 uur. De verwachte levensduur van de afwasbare onderdelen is één tot drie maanden. Controleer voor gebruik of het product normaal werkt. Gebruik na de gebruiksduur kan leiden tot verslechtering van de productprestaties. Het product kan bijvoorbeeld het vacuüm niet goed regelen, een te hoog vacuüm kan letsel veroorzaken.
- 22) Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen;
- 23) Kinderen mogen niet met het apparaat spelen;
- 24) Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd;
- 25) Een batterij in vuur of een hete oven gooien, of een batterij mechanisch breken of snijden, wat tot een explosie kan leiden;
- 26) Het achterlaten van een batterij in een omgeving met een extreem hoge temperatuur, wat kan leiden tot een explosie of het lekken van een ontvlambare vloeistof of gas;
- 27) Een batterij blootstellen aan extreem lage luchtdruk, wat kan leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistof of gas.

4.2 Voorzorg

- Plaats of bewaar het product niet op een plek waar het kan vallen of in een badkuip of gootsteen kan worden getrokken.
- Niet in water of een andere vloeistof plaatsen of laten vallen.
- Dompel het apparaat om geen enkele reden onder in vloeistof en stel het apparaat niet bloot aan extreme schokken, zoals het laten vallen van de pomp.
- Ga niet langer dan vijf minuten achter elkaar door met kolven als het niet lukt om melk af te kolven. Probeer op een ander moment van de dag te kolven.
- Als u ongemak voelt, kan het zuigen onderbroken worden door een vinger tussen de borst en borstschild te steken.
- Als irritatie of ongemak optreedt, stop dan met het gebruik en raadpleeg een zorgverlener.
- Als de behuizing van de voedingsadapter of de bedrading losraakt, uit elkaar raakt of gerafeld is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de voedingsadapter en neem contact op met de fabrikant van het apparaat. Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als u rook of brand opmerkt uit de pompeenheid of de voedingsadapter.


Aanduiding: Als u tijdens het afkolven overmatige warmte van de draagbare borstkolf voelt, moet u onmiddellijk stoppen met afkolven en de kolf verwijderen.

Opmerkingen:

Vermijd direct zonlicht op het hoofdapparaat.

5. Productbeschrijving

Het product bestaat voornamelijk uit een hoofdapparaat en een melkopvangset, enz.

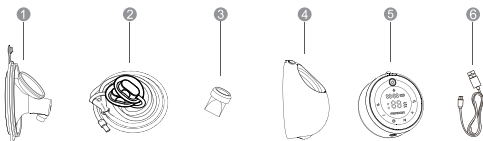

Afb. 1 omschrijving apparaat


Beschrijving van het borstkolfapparaat

NR.	Item	Beschrijving
①	Dubbel afgedicht borstschild (24 mm)	Al deze onderdelen vormen samen de melkopvangset.
②	Slangen	
③	Ventiel	
④	Melkopvangbak (180 ml)	
⑤	Hoofdapparaat	Motor pomp
⑥	USB Type-C-kabel	De inputzijde is een USB 2.0-interface, de outputzijde is een Type-C-interface

Andere meegeleverde accessoires:

Inzetstuk borstschild
Ventiel
Kap van het borstschild

Maatliniaal borstschild
Handleiding om snel te beginnen
Gebruikershandleiding

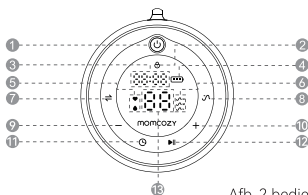

Afb. 2 bedieningspaneel

- | | | |
|--|-----------------------|--------------------|
| ① Aan/Uit: Lang indrukken om het apparaat in/uit te schakelen; | ② Schermvergrendeling | ③ Gebruiksduur |
| ④ Batterijweergave | ⑤ Modusindicator | ⑥ Cyclusindicator |
| ⑦ De gewenste modus kiezen | ⑧ Cyclusselectie | ⑨ Verhogen |
| ⑩ Verlagen | ⑪ Timer | ⑫ Pauze / Doorgaan |
| ⑬ Weergave zuigkrachtniveau | | |

Knopen en leds	Functies
	Lang indrukken om het apparaat aan of uit te zetten; kort indrukken om het scherm in de slaapstand te zetten. Druk op een willekeurige knop om het scherm te activeren.
	Pauseren / Doorgaan met uw kolfsessie.
	De gewenste modus kiezen
	Verlaag het zuigniveau
	Verhoog het zuigniveau
	Stimulatiestand In deze stand begint de borstkolf met een snel en kort zuigpatroon om de melk te laten stromen.
	Expressiestand De borstkolf begint met een langzaam en lang zuigpatroon voor het afkolven van melk, waarbij de zuigkracht dieper is.
	Gemengde stand In deze stand begint de borstkolf met een snel en kort zuigpatroon, gevolgd door een langzaam en lang zuigpatroon.
	Weergave gebruiksduur
	Schermmvergrendeling
	Cyclusselectie
	Timer

6. Gebruiksaanwijzing

6.1 De borstkolf van stroom voorzien

Er zijn twee stroomopties beschikbaar voor je kolfessie.

6.1.1 Door de oplaadbare ingebouwde batterij

Laad de kolf twee uur op voor het eerste gebruik. Er zijn drie indicatorbalkjes als de borstkolf volledig is opgeladen.


6.1.2 Door de laadkabel

Steek de laadkabel in de poort bovenop de motor van de kolf.

6.2 De batterij opladen

Laad het product volledig op voordat u het voor de eerste keer inschakelt. De borstkolf wordt gevoed door de interne oplaadbare lithiumbatterij.


Ons product wordt geleverd met een oplaadkabel (USB2.0/Type-C-kabel), maar niet met een voedingsadapter. Koop zelf de voedingsadapter voordat u het apparaat oplaadt. Zorg ervoor dat u een voedingsadapter gebruikt die geschikt is voor de USB 2.0-interface en dat de voedingsadapter een ingangsvermogen heeft van AC 100~240V 50/60 Hz en een uitgangsvermogen van DC 5V=2A.

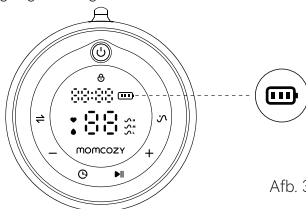

Afb. 3

De batterij opladen zoals hieronder vermeld:

- Steek het USB-uiteinde van de oplaadkabel in de USB-interface van de netadapter;
- Steek de stekker van de voedingsadapter in het stopcontact;
- Steek het type-C-uiteinde van de oplaadkabel in de oplaadpoort.

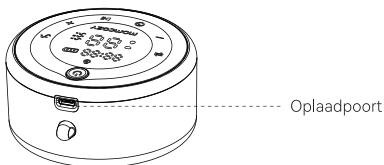

Afb. 4 Positie van laadpoort

Het duurt ongeveer 120 minuten voordat het apparaat volledig is opgeladen. Als de borstkolf is opgeladen, loopt het balkje van de batterij-indicator één voor één op, van één balkje naar drie balkjes, schakelt dan uit en herhaalt dit proces tot de borstkolf volledig is opgeladen. De weergave van drie balkjes geeft aan dat de batterij vol is.

Haal de stekker van de netadapter uit het stopcontact, verwijder de oplaadkabel uit de netadapter en het hoofdapparaat nadat het opladen voltooid is.



Waarschuwing

- De oplaadkabel wordt alleen gebruikt om verbinding te maken tussen de stroomadapter en de draagbare borstkolf van Momcozy voor het opladen. Sluit de kabel niet aan op andere apparatuur, anders kan het een elektrische schok veroorzaken!
- Als de behuizing van de voedingsadapter losraakt, uit elkaar raakt of uitgerafeld is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de voedingsadapter en neem contact op met de fabrikant van de voedingsadapter.
- Als de oplaadkabel beschadigd, gebroken of gebarsten is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de oplaadkabel en neem contact op met de fabrikant om deze te vervangen (Zie de laatste pagina van deze handleiding voor contactgegevens).
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als u rook of brand opmerkt uit de pompeenheid of de voedingsadapter.



Let op:

Het gebruik van een verkeerd type adapter of de aankoop van een adapter van slechte kwaliteit kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen en uw eigendommen en gezondheid beschadigen. Koop een adapter die voldoet aan de normen IEC 60601-1 en IEC 60601-1-2 in professionele marktsegmenten. De uitgang van de voedingsadapter moet geschikt zijn voor gelijkstroom 5V = 2A.

Opmerkingen:

- Probeer de oplaadbare batterij niet zelf te vervangen als de werktijd van de batterij korter is dan voorheen en u deze wilt vervangen nadat de batterij volledig is opgeladen. Neem contact op met de fabrikant voor vervanging. Zelf demonteren en vervangen van de batterij kan schade aan het hoofdaparaat en de batterij veroorzaken.
- Als het product lange tijd niet gebruikt wordt, zal de batterij langzaam ontladen. Om schade aan de batterij als gevolg van een te lage spanning gedurende lange tijd te voorkomen, dient u het apparaat om de drie maanden op te laden.

6.3 Reiniging en desinfectie

6.3.1 Algemene beschrijving/voorwaarde

Moedermelk geven is een van de beste dingen die u kunt doen voor de gezondheid en ontwikkeling van uw baby. Uw melk afkolven is één manier om uw baby moedermelk te geven. Het is belangrijk om de onderdelen van uw borstkolf schoon te houden, want ziektekiemen kunnen snel groeien in moedermelk of melkresten die op de onderdelen van de kolf achterblijven. Als u deze stappen volgt, kunt u besmetting voorkomen en uw baby beschermen tegen infecties. Als uw baby te vroeg geboren is of andere gezondheidsproblemen heeft, hebben de zorgverleners van uw baby mogelijk meer aanbevelingen voor het veilig afkolven van moedermelk.

1) VOOR ELK GEBRUIK

Inspecteer en monteer een schone kolfset.

Reinig de pompmotor met ontsmettingsdoekjes.

2) NA ELK GEBRUIK


Bewaar de melk veilig: Gebruik bewaarzakjes voor moedermelk of schone, voedselveilige bakjes om afgekolfd moedermelk in te bewaren. Zorg ervoor dat de potjes van glas of plastic zijn met goed sluitende deksels. Label ze met de datum en tijd en plaats ze onmiddellijk in een koelkast, vriezer of koeltas met ijsblokjes. Zorg voor een schoon kolfgebied: Reinig het oppervlak van de motor van de kolf met ontsmettingsdoekjes.

3) Onderdelen die gereinigd en gedesinfecteerd moeten worden
Reinig en desinfecteer alle onderdelen die in contact komen met de borst en moedermelk voordat u de borstkolf voor het eerst gebruikt en na elk gebruik. Reinigen en ontsmetten zijn niet hetzelfde. Het is noodzakelijk om de kolf apart te reinigen en te desinfecteren, zodat moeders en baby's beschermd zijn en de borstkolf goed blijft werken.

• Onderdelen die in contact komen met de moedermelk en de huid van de borst: onderdelen van de melkopvangset, waaronder het borstschild, deksel, membraan, ventiel en melkopvangbak.

4) Vóór reiniging/desinfectie:

- Was uw handen goed met water en zeep gedurende 20 seconden.
- Haal alle onderdelen als volgt uit elkaar:

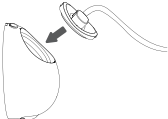 Afb. 5	 Afb. 6
1). Maak de slangen los van de borstkolf.	2). Maak de slangen los van de melkopvangbak.
 Afb. 7	 Afb. 8
3). Verwijder het borstschild uit de melkopvangbak.	4) Maak de slangen los van de melkopvangbak.



Let op:

Plaats het hoofdaparaat, de oplaadkabel of de adapter (als u een adapter hebt gekocht) nooit in water of een vaatwasser. Dit veroorzaakt namelijk permanente schade aan deze onderdelen.

6.3.2 Onderdelen die in contact komen met de melk reinigen en desinfecteren

Stap 1: Reinigen

Reinig het apparaat handmatig! Het is niet gecontroleerd of het veilig is om dit product in de vaatwasser te reinigen en te desinfecteren.



Waarschuwing

Gebruik geen antibacteriële of schurende schoonmaakmiddelen om de onderdelen van de borstkolf schoon te maken, want dit kan schade veroorzaken.

1) Zet de volgende onderdelen klaar:

- Zeep en heet water
- Water van drinkwaterkwaliteit
- Schone wasbak die alleen voor babyvoeding wordt gebruikt
- Schone borstel die alleen voor babyvoeding wordt gebruikt
- Ongebruikte theedoek of papieren handdoekje

2) Afspoelen: Spoel de onderdelen van de melkopvangset en eventuele andere voedingsmiddelen door ze onder stromend water te houden om de resterende melk of vuil te verwijderen. Het water kan warm of koud zijn, net wat u prettiger vindt.

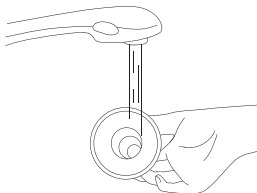


Fig. 9

3) Onderdelen van de melkopvangbak wassen:

- Plaats de onderdelen van de melkopvangbak in een schone wasbak die alleen voor babyvoeding wordt gebruikt. • Was niet direct in de gootsteen, omdat deze bacteriën kan bevatten die deze onderdelen kunnen besmetten.
- Week de onderdelen van de melkopvangset 3~5 minuten in een warm sopje van 40-60 °C (104-140 °F).

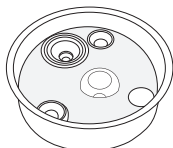


Fig.10

- Gebruik een schone borstel die alleen voor babyvoeding wordt gebruikt om de onderdelen te reinigen.
- 4) Spoel nogmaals: Spoel de artikelen af door ze onder stromend water te houden, of door ze onder te dompelen in schoon water in een aparte bak die alleen voor het schoonmaken van babyvoedingsartikelen wordt gebruikt. Als het product nog vuil is, herhaalt u stap 3 en spoelt u het opnieuw totdat er geen vuil meer op zit.
- 5) Laat grondig aan de lucht drogen: Plaats de onderdelen van de melkopvangset, het wasbakje en de flessenborstel op een schone, ongebruikte theedoek of papieren handdoek op een plek die beschermd is tegen vuil en stof. Gebruik geen theedoek om de onderdelen droog te wrijven of te deppen, omdat hierdoor bacteriën op de onderdelen overgedragen kunnen worden!

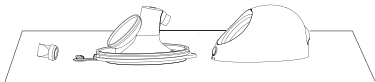


Fig.11

- 6) Wasbak en flessenborstel schoonmaken: Spoel de wasbakken en borstel goed af en laat ze na elk gebruik aan de lucht drogen. Was ze om de paar dagen met de hand met zeep en warm water. Is uw baby jonger dan 3 maanden, te vroeg geboren of heeft de baby een verzwakt immuunsysteem door een ziekte (zoals HIV) of behandeling (zoals chemotherapie voor kanker), was de wasbak en de flessenborstel dan na elk gebruik.

Na reiniging:

Voor extra verwijdering van bacteriën desinfecteert u de onderdelen van de melkopvangset, het wasbakje en de flessenborstel minstens eenmaal per dag nadat ze gereinigd zijn. Items kunnen gedesinfecteerd worden met kokend water op een desinfectiestand. Desinfecteren is vooral belangrijk als uw baby minder dan 3 maanden oud is, te vroeg geboren is of een zwak immuunsysteem heeft door ziekte of behandeling. Zie stap 2 voor het desinfecteren van onderdelen die met melk in contact komen.

Stap 2: Desinfectie**Let op:**

- Steriliseer de kolfonderdelen niet in een magnetron of uv-sterilisator. Hoge temperaturen ($>110^{\circ}\text{C}$) verkorten de levensduur en veroorzaken veiligheidsrisico's.
- Steriliseer het deksel niet.

Controleer vóór het desinfecteren of u een schoongemaakte melkopvangset, flessenborstels en wasbakken hebt met behulp van de bovenstaande methoden. Ontsmet alle voorwerpen die met melk in contact komen (zelfs de flessenborstel en de wasbak!) door een van de volgende methoden te gebruiken.

1) Zet de volgende onderdelen klaar:

- Een huishoudpan
- Water van drinkwaterkwaliteit
- Schone tangen

**Let op:**

Voorkom tijdens het desinfecteren met kokend water dat de fles of andere onderdelen de zijkanten van de pan raken. Dit kan onomkeerbare vervorming of beschadiging van het product veroorzaken.

2) Plaats de gedemonteerde melkopvangset in de pan en vul de pan met voldoende water om de te desinfecteren onderdelen te bedekken. Laat het water 5-10 minuten koken en zorg ervoor dat de delen de zijkanten van de pan niet raken.

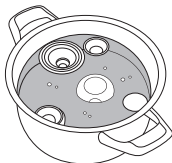



Fig.12

3) Verwijder de items met een schone tang.



Afb. 13

4) Laat grondig aan de lucht drogen.

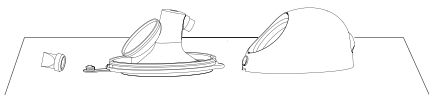

Afb. 14

Stap 3: Veilig bewaren

Berg droge items veilig op totdat u ze nodig hebt. Zorg ervoor dat de schone kolfonderdelen, flessenborstels en wasbakjes goed aan de lucht gedroogd zijn voordat u ze opbergt. De artikelen moeten volledig droog zijn om te voorkomen dat bacteriën en schimmels groeien. Bewaar droge voorwerpen in een schone, beschermde plaats om besmetting te voorkomen.

1. Handen wassen: Was uw handen goed met water en zeep.
2. In elkaar zetten: Zet de schone, droge kolfonderdelen weer in elkaar.
3. Veilig bewaren: Plaats de opnieuw geassembleerde kolfonderdelen en andere voedingsonderdelen, het wasbakje en de droge flessenborstel op een schone, beschermde plek. Bijvoorbeeld in een gesloten keukenkastje dat alleen gebruikt wordt voor het bewaren van schoon serviesgoed.

6.3.3 De andere onderdelen reinigen / desinfecteren

Het omhulsel van het hoofddapparaat moet de eerste keer en na elk gebruik worden gereinigd en gedesinfecteerd. De andere onderdelen komen tijdens het afkolven niet in contact met het menselijk lichaam of de melk en hoeven alleen gereinigd te worden als ze vuil zijn. Reinig/desinfecteer de items bij kamertemperatuur 5°C~ 40°C zoals hieronder aangegeven:

Bereid de onderstaande items voor:

- Desinfectie
- Doekjes met 70% isopropylalcohol
- Schone zachte doek

Reinigingsmethode:

1. Was eerst uw handen met handdesinfectie voor u begint met deze reinigingsprocedure.
2. Verwijder alle achtergebleven stoffen van het hoofdapparaat en/of de oplaadkabel met een schone zachte doek.
3. Neem een doekje met 70% isopropylalcohol om over de onderdelen te vegen totdat er geen zichtbare verontreinigingen meer zijn.
4. Droog het apparaat door het gedurende 10 minuten op kamertemperatuur om de achtergebleven reinigungsoplossing op het product te laten verdampen.

Desinfectiemethode:

Reinig de behuizing van het hoofdapparaat volgens de bovenstaande methode vóór het desinfecteren.

1. Desinfecteer de behuizing van het hoofdapparaat met een zachte doek die 3 minuten met 70% isopropanol is bevochtigd.
2. Droog het apparaat door het gedurende 10 minuten op kamertemperatuur om de achtergebleven desinfectieoplossing te laten verdampen.

6.4 Gebruiksaanwijzing

6.4.1 Voorbereiding voor gebruik



Let op:


1. Was uw handen met water en zeep, en inspecteer en monteer een schone kolfset.

2. Duur van de kolf sessie:

Dit product wordt aangedreven door een oplaadbare lithiumbatterij. Nadat het volledig is opgeladen, kunt u er 8-9 sessies (ongeveer 270 minuten) mee kolven, 30 minuten per sessie. Een typische kolf sessie duurt ongeveer 10-15 minuten per borst, maar u moet alleen zo lang kolven als voor u comfortabel en productief is.

1. Kies de maat van het borstschild

Deze borstkolf wordt geleverd met een 24 mm siliconen borstschild. Als het meegeleverde borstschild niet past, kunt u verschillende borstschilden en inzetstukken voor borstschilden van 21 mm, 19 mm en 17 mm op Amazon/momcozy.com kopen. Typ "momcozy borstkolfaccessoires" in de zoekbalk en zoek de maat en inzetstuk borstschild die bij u passen.

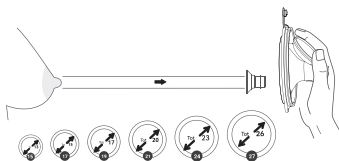

Afb. 15 kies de juiste maat

Maten tepel (mm)	11-13	13-15	15-17	17-20	20-23	23-26	26-29
Borstschild (mm)	15	17	19	21	24	27	30


Afb. 16 Maattabel borstschild

2. Stimuleer de tepel

- Stimuleer uw tepel om een volledige omvang te krijgen (sla deze stap niet over!).
- Plaats de tepel in het kleinste gaatje dat u comfortabel past zonder het te forceren.
- Kies het gaatje waar de basis van uw tepel comfortabel in past.
- Meet uw maten op aan de hand van de maattabel.

3. Test de maat van het borstschild

- Om de juiste grootte van het borstschild te vinden, moet u er eerst voor zorgen dat u het borstschild op de juiste plaats op uw borst plaatst.
- Druk het borstschild op uw borst totdat er geen opening meer is. Zorg ervoor dat uw tepel precies in het midden van het borstschild zit.

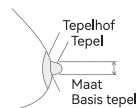

Afb.17



Afb.18

Te klein

Te klein: Als uw tepel tijdens het kolven tegen de binnenwand van het borstschild blijft wrijven, is dit borstschild te klein voor u.

Past goed

Geschikte maat: Als uw tepel tijdens het kolven soepel beweegt zonder over de binnenwand van het borstschild te wrijven of deze te raken, en als er bijna geen tepelhof naar binnen gezogen wordt, dan is dit borstschild geschikt voor u.

Te groot

Te groot: Als tijdens het kolven een groot gedeelte van het tepelhof naar binnen wordt gezogen, is dit borstschild te groot voor u.



4. ZORG VOOR DE JUISTE BH

Fig.19

- ❶ Gemaakt van rekbaar stof
- ❷ Geen beugel of vulling
- ❸ Heeft een omslag
- ❹ Volledige bedekking

 Afb. 20	 Afb. 21
GEEN TUSSENRUIMTE Wanneer u de borstkolf in uw beha plaatst, moet het siliconen borstschild van deze borstkolf stevig tegen uw huid gedrukt worden, zonder tussenruimte.	ALS HET BEWEEGT Als u voelt dat de borstkolf beweegt tijdens het gebruik, trek dan uw bh-bandje strakker aan om de borstkolf opnieuw af te stellen, of kies een andere bh.

5. VOORGESTELDE HOUDING

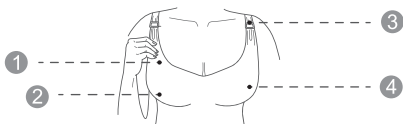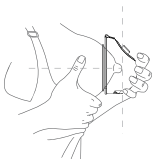

Let op:

Ga tijdens het kolven altijd rechtop zitten of staan om te voorkomen dat de melk weglekt. Deze borstkolf mag niet gebruikt worden als u ligt of slaapt om ervoor te zorgen dat de juiste stand gehandhaafd blijft tijdens het gebruik.

HOUDING

Zorg ervoor dat de borstkolf en de melkopvang altijd in een verticale hoek staan. Anders loopt de melk eruit.



Afb. 22 juiste houding

6.4.2 Montage van de borstkolf



Let op:

Zorg ervoor dat u de onderdelen van de borstkolf die in contact komen met melk of de borst, hebt gereinigd en gedesinfecteerd.





Waarschuwing

- Wees voorzichtig, aangezien de onderdelen van de borstkolf erg heet kunnen zijn als u ze heeft gedesinfecteerd door ze uit te koken. Om brandwonden te voorkomen, mag u de borstkolf pas in elkaar zetten als de gedesinfecteerde onderdelen afgekoeld zijn.
- Was uw handen grondig met water en zeep voordat u onderdelen van de borstkolf en borsten aanraakt om besmetting te voorkomen. Raak de binnenkant van de melkopvangset niet aan.

Opmerkingen:

- De juiste plaatsing van het borstschild, het membraan, de melkopvangbak, het ventiel, deksel enz. is essentieel voor een goede vacuümvorming in de borstkolf.
- Inspecteer de afzonderlijke onderdelen vóór elk gebruik visueel op barsten, scheuren, verkleuring of beschadiging. Als u schade aan het apparaat constateert, stop dan met het gebruik totdat de onderdelen vervangen zijn.

Was uw handen grondig met water en zeep en monteer de borstkolf dan als volgt:

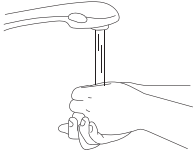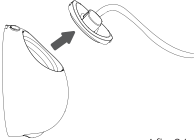 Afb. 23	 Afb. 24
1. Was uw handen grondig met water en zeep.	2. Duw de ventiel voorzichtig in de melkopvangbak. Controleer of er geen tussenruimten zijn.
 Afb. 25	 Afb. 26
3. Lijn eerst de melkopvangbak uit met de bovenkant van het borstschild en druk dan goed aan voor een stevige verbinding..	4. Bevestig het membraan met de melkopvangbak en zet het deksel vast om een goede afsluiting te krijgen.



Afb. 27

5. Sluit het lange uiteinde van de slang aan op de motor van de kolf.

De borstkolf is nu klaar is voor gebruik.

6.4.3 Instructies kolven



Waarschuwing

- Voordat u het kolfgedeelte van uw borst verwijdt, moet u de borstkolf altijd uitschakelen om het vacuüm op te heffen.
- Ga niet langer dan vijf minuten achter elkaar door met kolven als het niet lukt om melk af te kolven. Probeer op een ander moment van de dag te kolven.
- Als het afkolven erg oncomfortabel of pijnlijk wordt, stop dan met het gebruik van de borstkolf en raadpleeg uw arts.



Let op:

- Het melkkniveau tijdens het kolven controleren om te voorkomen dat er te veel melk wordt gekolfd.

1. Enkel kolven


- a. Zet één melkopvangbak in elkaar.
- b. Steek het ongebruikte slanguiteinde in de Y-vormige slanguiteindehouder.
- c. Zet de borstkolf in elkaar voor enkel kolven.
- d. Stop de borstkolf in je beha.

2. Dubbel kolven

- a. Zet twee melkopvangbakken in elkaar.
- b. Zet de borstkolf in elkaar voor dubbel kolven.
- c. Stop de borstkolf in je beha.

3. Uitlijnen

a. Voordat u gaat kolven, moet u ervoor zorgen dat de borstkolf stevig op uw borst is gedrukt, zonder tussenruimte.

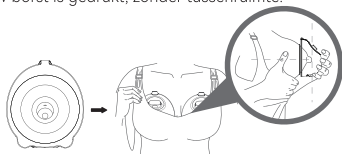


Afb. 28

b. Om uit te lijnen houdt u het borstschild tegen uw borst, om te zien of uw tepel in het midden van de tunnel van borstschild zit. Het kan zijn dat u voorover moet buigen.

c. Nadat u het borstschild hebt uitgelijnd, kijkt u door het borstschild om te controleren dat uw tepel in het midden zit voordat u gaat afkolven. Het puntje van uw tepel mag de bovenkant, zijkanten of onderkant van de tunnel van het borstschild NIET raken. Als dit wel het geval is, probeer het dan opnieuw.

Eerste perspectief

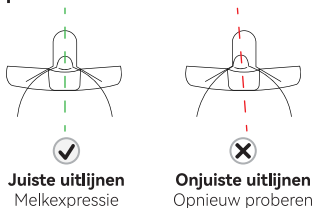

Afb. 29

是

Opmerking:


De juiste uitlijning van de tepel is de belangrijkste factor voor een comfortabele expressie en goede werking.

De tepel moet voor het kolven correct in het borstschild geplaatst worden om ongemak te voorkomen.

Zie sectie 7.4.1 Voorbereiding voor gebruik - Kies de maat van het borstschild.

4. Zet de borstkolf vast in de beha

Zet de borstkolf vast in de beha en zorg ervoor dat de pomp stevig tegen de borst gedrukt blijft. Trek indien nodig de beha strakker om de borstkolf goed op zijn plaats te houden en begin te kolven.

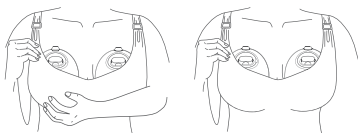

Afb. 30

5. Start met kolven

Schuif de borstkolf niet rechtstreeks in uw beha, volg de stapsgewijze instructies.

Ontkoppel de oplader voor gebruik.

A. Zet de borstkolf aan

Druk lang op de knop Aan / Uit /  om de borstkolf aan te zetten.

B. Selecteer de stand

De standen: Stimulatiestand  en Expressiestand  en gemengde Stand 

Druk kort op de knop Modus selecteren om over te wisselen tussen 3 standen.

C. Selecteer het vacuümniveau

De borstkolf van Momcozy heeft 15 vacuümdrukinstellingen voor elke stand. Zo hebt u controle over wat comfortabel aanvoelt en het meest efficiënt werkt in alle standen.

Zodra u zich ongemakkelijk voelt, gebruikt u de knop Verhogen / Verlagen   om het vacuüm aan te passen.

D. Schermvergrendeling

Na het starten van de borstkolf, als er gedurende 30 seconden geen bediening plaatsvindt, begint het vergrendelscherm  te knipperen en blijft het na 3 seconden constant branden. De toetsenverlichting gaat ook uit zodat u uw borstkolfinstellingen niet per ongeluk kunt wijzigen door op een toets te drukken. Druk kort op de aan/uit-knop  om te ontgrendelen.

Nadat het scherm is vergrendeld en er 10 seconden lang geen bediening is geweest, gaan de scherm- en toetsenbordverlichting automatisch uit. Als u een toets aanraakt, wordt het scherm verlicht, en als u kort op de aan/uit-knop drukt  wordt het ontgrendeld.

E. Druk

Zorg er altijd voor dat u op een comfortabel niveau kolft.

F. Cycluselectie

Onder elk zuigniveau kunt u kiezen uit drie cyclusopties:

H-  betekent een hoge cyclus onder het huidige zuigniveau,

M-  betekent een middelmatige cyclus onder het huidige zuigniveau,

L-  betekent een lage cyclus onder het huidige zuigniveau.

De borstkolf staat bij het opstarten standaard ingesteld op een medium cyclus onder elk zuigniveau. U kunt de cyclus wijzigen met behulp van de cyclusinstelknop  om een comfortabel ritme om te kolven te vinden. Wanneer u naar een andere stand overschakelt, onthoudt de borstkolf het huidige niveau en cyclus in die stand.

Elke vrouw is anders, dus pas de instelling van de cyclussnelheid aan om de snelheid te vinden die voor u het beste werkt.

G. De timer van de borstkolf instellen

De standaard timer op de borstkolf begint vanaf 30 minuten af te tellen. Volg de onderstaande stappen als u een andere tijd wilt instellen: Druk op de timerknop voordat u begint met afkolven . Het indicatorlampje  begint te knipperen. Gebruik de "+" en "-" toetsen   om de koltijd in te stellen in stappen van vijf minuten. U kunt een timer instellen voor maximaal 40 minuten en minimaal 5 minuten.

Tip: Een hogere vacuümdruk betekent niet altijd een hoger melkvolume. Als u uw tepel te veel belast, kan dit de melkproductie verminderen. Zorg er altijd voor dat u op een comfortabel niveau kolft. Als u geen zuigkracht voelt, controleer dan of de borstkolf goed geïnstalleerd is.



Let op:

- * De borstkolf mag niet gebruikt worden tijdens het liggen, inspannende activiteiten of activiteiten met risico op letsel.
- * Het gebruik van een borstkolf mag geen pijn veroorzaken. Probeer niet te kolven met een te hoge of oncomfortabele vacuümdrukinstelling. Als u tijdens het kolven erg veel ongemak of pijn voelt, stop dan met kolven, verbreek de afsluiting rond uw tepel en stop de sessie.

6. Pauze / Doorgaan met kolven

Druk op de knop Pauze / Doorgaan om het afkolven te stoppen en u ziet de afkoltijd op het ledscherm.

Druk nogmaals op de knop Pauze / Doorgaan om uw kolfsessie te hervatten.

7. Zet de borstkolf uit

Druk lang op de knop Aan / Uit /om de borstkolf uit te zetten.

8. Verwijderen van de borstkolf

Gebruik uw vinger om de afsluiting tussen het borstschild en het borstweefsel te verbreken. Leun iets voorover om de borstkolf na het kolven van de borst te halen en houd de openingszijde van de kolf naar boven om te voorkomen dat er melk over de kolf stroomt.



Afb. 31

Wij raden de gebruiker aan om de kolfsessie te stoppen zodra het melkvolume van de melkopvangbak de 180 ml nadert, om overlopen te voorkomen.



Waarschuwing

- Zet afgekolfde melk onmiddellijk in de koelkast of vries het in, of bewaar het 2-4 uur bij een temperatuur van 16 °C ~ 25 °C voordat u uw baby voedt.

6.5 Borstvoeding bewaren

6.5.1 Borstvoeding op de juiste manier bewaren

Door de aanbevolen bewaar- en bereidingstechnieken te volgen, kan de veiligheid en kwaliteit van afgekolfde moedermelk voor de gezondheid van de baby behouden blijven.

Dit zijn algemene richtlijnen voor het bewaren van moedermelk bij verschillende temperaturen. Verschillende factoren zijn van invloed op hoe lang moedermelk veilig bewaard kan worden. Deze factoren zijn onder andere het melkvolume, de kamertemperatuur wanneer de melk wordt afgekolfd, temperatuurschommelingen in de koelkast en vriezer en de reinheid van de omgeving.

Moedermelk bewaren na het afkolven:

- Koel de melk indien mogelijk direct na het afkolven. U kunt de melk in de koelkast zetten, in een koelbox of geïsoleerde koelbox doen, of in kleine porties (2 tot 4 ons/59 tot 118 ml) invriezen voor latere voedingen.
- Gebruik bewaarzakjes voor moedermelk of schone, voedselveilige bakjes om afgekolfde moedermelk in te bewaren. Zorg ervoor dat de verpakkingen van glas of plastic zijn en goed sluitende deksels hebben.
- Vermijd flessen met het recyclingsymbool nummer 7, dat aangeeft dat de verpakking gemaakt kan zijn van BPA-bevattend plastic.
- Verwijder lucht vóór het sealen.
- Leg zakken plat in de vriezer. Scheid de zakken met papieren handdoeken om te voorkomen dat ze aan elkaar plakken.
- Bewaar moedermelk nooit in wegwerpflesjes of plastic zakken die niet bedoeld zijn voor het bewaren van moedermelk.
- Draai de verpakking voorzichtig om het roomgedeelte van de moedermelk, dat naar boven kan komen, weer door de rest van de melk te mengen. Schud de melk niet. Hierdoor kunnen sommige waardevolle delen van de melk afbreken.
- Vers afgekolfde of gekolfde melk kan worden bewaard:

Type moedermelk	Locaties en temperaturen voor bewaren		
	Aanrecht 77°F (25°C) of kouder (kamertemperatuur)	Koelkast 40°F (4°C)	Vriezer 0 °F (-18°C) of kouder
Vers gekolfld	Tot 4 uur	Tot 4 dagen	Binnen 6 maanden is het beste Tot 12 maanden is acceptabel
Ontdooid, eerder bevroren	1-2 uur	Tot 1 dag (24 uur)	Vries moedermelk NOOIT opnieuw in nadat deze ontdooid is
Restjes van een voeding (baby heeft de fles niet opgedronken)	Gebruik binnen 2 uur nadat de baby klaar is met voeden		

Deze richtlijnen zijn alleen voor gezonde voldragen baby's en kunnen voor premature of zieke baby's afwijken. Raadpleeg uw zorgverlener.

Bewaartips:

- Plak een duidelijk etiket op het bewaarbakje met de datum waarop de melk is afgekolfd en vermeld de naam van uw kind als u de melk aan de kinderopvang geeft.
- Bewaar moedermelk niet in de deur van de koelkast of vriezer. Zo beschermt u de moedermelk tegen temperatuurschommelingen door het openen en sluiten van de deur.
- Als u denkt dat u pas afgekolfde moedermelk niet binnen 4 dagen zult gebruiken, vries de melk dan meteen in. Dit helpt de kwaliteit van de moedermelk te beschermen.
- Wanneer u moedermelk invriest:
 - Bewaar kleine hoeveelheden om te voorkomen dat u melk verspilt die misschien niet volledig gebruikt wordt. Bewaar in 2 tot 4 ons (59 tot 118 ml) of de hoeveelheid die bij één voeding wordt gegeven.
 - Laat ongeveer een centimeter ruimte vrij aan de bovenkant van de verpakking, omdat moedermelk uitzet als het bevriest.
 - Moedermelk kan in een geïsoleerde koelbox met bevroren ijspakken maximaal 24 uur worden bewaard als u reist. Gebruik de melk op uw bestemming meteen, bewaar het in de koelkast of vries het in.

6.5.2 Veilig ontdooien van moedermelk

- Ontdooi altijd eerst de oudste moedermelk. Onthoud: als eerste erin, als eerste eruit. Na verloop van tijd kan de kwaliteit van moedermelk afnemen.
- Er zijn verschillende manieren om uw moedermelk te ontdooien:
 - Een nacht in de koelkast.
 - In een bak met warm of lauw water.
 - Onder lauw stromend water.
- Ontdooi of verwarm moedermelk nooit in de magnetron. Microgolven kunnen voedingsstoffen in moedermelk vernietigen en hete plekken creëren, waardoor de mond van een baby kan verbranden.

- Als u moedermelk in de koelkast ontdooit, gebruik het dan binnen 24 uur. Begin met het aftellen van de 24 uur wanneer de moedermelk volledig ontdooit is, niet vanaf het moment dat u de moedermelk uit de vriezer haalde.
- Zodra moedermelk op kamertemperatuur is gebracht of opgewarmd, moet u het binnen 2 uur gebruiken.
- Vries moedermelk nooit opnieuw in nadat deze ontdooit is.

7. Reizen

Gebruik tijdens het reizen de meegeleverde oplaadkabel en stel deze in op de juiste stroombron voor uw actuele locatie. Raadpleeg voordat u in het vliegtuig stapt de luchtvaartmaatschappij voor advies over het vervoeren of gebruiken van deze kolf in het vliegtuig.

Temperatuur: -20 tot 60 °C / -4 tot 140 °F

Relatieve vochtigheid: 15% - 90%

Omgevingsdruk: 70 - 106kPa

8. Condities opslag

De borstkolf opbergen

- * Opslag voor korte periode
- * Houd de borstkolf uit direct zonlicht. Bewaar de borstkolf en de bijbehorende accessoires op een veilige, schone en droge plaats en buiten het bereik van kinderen.
- * Langdurige opslag
Ten eerste moet u de borstkolf opladen voordat u deze langdurig opbergt, zodat de levensduur van deze borstkolf verlengd kan worden. Ten tweede, bewaar hem op een plek uit de buurt van direct zonlicht om verkleuring te voorkomen. Ten derde, reinig en droog de afwasbare onderdelen voordat u ze opbergt.
- * Temperatuur: -20 tot 60 °C / -4 tot 140 °F
- * Relatieve vochtigheid: 15% - 90%
- * Omgevingsdruk: 90 tot 106 kPa

9. Specificatie

Modelnummer	BP137
Naam	Draagbare borstkolf
Vereisten voor stroomvoorziening	Input: 100-240Vac, 50/60Hz; Voeding: 5V = 2A (Charge through provided USB 2.0/Type-C Charging cable and self-purchased power adapter)
Voeding	Gelijkstroomvoeding 3.7 V / 2300 mAh, oplaadbare lithium-ion batterij
Opties borstkolf	Enkele borstkolf
Zuigstanden	Stimulatiestand, Expressiestand en Gemengde stand

Vacuümbereik	Stimulatiestand: -30~-150 mmHg Expressiestand: -60~-300 mmHg Gemengde stand: -60~-300 mmHg
Snelheid cyclus	Stimulatiestand: 48~98 cyclus/min Expressiestand: 22~60 cyclus/min Gemengde stand: 53~76 cyclus/min
Afmetingen borstkolf	97.09mm X 104.12mm X 50mm (pump motor) 134mm X 109.2mm X 67.6mm (milk collector)
Gewicht (met alle accessoires)	240g (pump motor weight) 120g (single milk collector weight)
Gebruiksduur van het product	500 uur
Geluidsniveau	<48 dB
Beschermingstype tegen elektrische schok	Intern aangedreven apparatuur
Gebruiksomstandigheden	Temperatuur: 0 °C tot 40 °C, vochtigheid: 15% tot 90%, Atmosferische druk: 70 kPa tot 106 kPa
Omgeving transport en opslag	Temperatuur: -20 °C tot 60 °C, vochtigheid: 15% tot 90%, Atmosferische druk: 70 kPa tot 106 kPa
Oplaaadtijd batterij	120 minuten
Gebruikstijd batterij	270 minuten

10. Onderhoud en reserveonderdelen

Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd: Als u dit apparaat opent of ermee knoeit, vervalt de garantie. Indien het apparaat gerepareerd moet worden, moet het teruggestuurd worden naar het bedrijf dat de apparatuur heeft geleverd of rechtstreeks naar de verkoper. Wijzigingen van welke aard ook zijn verboden.

De FABRIKANT zal op verzoek schakelschema's, onderdelenlijsten, beschrijvingen, kalibratie-instructies of andere informatie beschikbaar stellen die het ONDERHOUDSPERSONEEL zal helpen om die onderdelen van het apparaat te repareren die door de FABRIKANT zijn aangewezen als onderdelen die door het ONDERHOUDSPERSONEEL gerepareerd kunnen worden. Als het product lange tijd niet gebruikt wordt, zal de batterij langzaam ontladen. Om schade aan de batterij als gevolg van een te lage spanning gedurende lange tijd te voorkomen, dient u het apparaat om de drie maanden op te laden.



Waarschuwing

Waarschuwing: het vervangen van lithiumbatterijen door onvoldoende opgeleid personeel kan gevaar opleveren.

Reinig of onderhoud het apparaat niet terwijl het in gebruik of tijdens het opladen is.

11. Conformiteitsverklaring

EU-conformiteitsverklaring: Shenzhen Root Innovation Technology Co., Ltd. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de LVD-richtlijn 2014/35/EU en EMC-richtlijn 2014/30/EU.

12. Probleemoplossing

Problemen	Oplossingen
Borstkolf werkt niet	- Als het afkolven nog niet heeft plaatsgevonden, overweeg dan om de kolf langer aan de borst te laten om te kijken of het afkolven mogelijk vertraagd is. Opmerking: De initiële melkafscheidingstijd is uniek voor elke persoon en varieert door vele factoren. - Controleer de uitlijning van de tepel, pauzeer de borstkolf en haal de borstkolf van de borst. Lijn de borstkolf opnieuw uit zoals hieronder beschreven. - Mogelijk hebt u niet de juiste maat borstschild (Zie sectie 7.3 Gebruiksaanwijzing - Kies de maat van het borstschild).
De melk stroomt niet	- Pauzeer de borstkolf en haal hem van de borst. Lijn het apparaat opnieuw correct uit. (Zie sectie 7.3 Gebruiksaanwijzing - Uitlijnen). - U kunt de borstkolf ook van het borstschild losmaken om opnieuw uit te lijnen. Centreer vervolgens uw tepel in de tunnel van het borstschild en breng de borstkolf naar uw borst (Zie sectie 7.3 Gebruiksaanwijzing - Uitlijnen).
Moet opnieuw uitgelijnd worden	- Pauzeer de borstkolf en haal hem van de borst. Lijn het apparaat opnieuw correct uit. (Zie sectie 7.3 Gebruiksaanwijzing - Uitlijnen). - U kunt de borstkolf ook van het borstschild losmaken om opnieuw uit te lijnen. Centreer vervolgens uw tepel in de tunnel van het borstschild en breng de borstkolf naar uw borst (Zie sectie 7.3 Gebruiksaanwijzing - Uitlijnen).

Ongemak tijdens het afkolven	• Als u overmatig ongemak ervaart, probeer dan het volgende (Zie sectie 7.3 Gebruiksaanwijzing – Uitleijnen): • Zorg ervoor dat u de borstkolf van Momcozy stevig tegen de borst drukt tijdens de stimuleringsfase. • Maak de beha strakker om er zeker van te zijn dat de borstkolf van Momcozy stevig tegen de borst gehouden wordt. • Verlaag de zuigkracht. • Lijn de borstkolf van Momcozy opnieuw uit. • Het kan zijn dat u te lang kolft. De borstkolf van Momcozy schakelt automatisch uit na 30 minuten. • Mogelijk hebt u niet de juiste maat borstschild (Zie sectie 7.3 Gebruiksaanwijzing – Kies de maat van het borstschild). Stop en ga naar een professional of borstvoedingsdeskundige.
Verminderde (lage) zuigkracht van de borstkolf	• De borstkolf heeft 9 zuigkrachtinstellingen. Druk op de knop Verhogen om de zuigkracht te verhogen. • Controleer de toestand van uw afwasbare onderdelen. Deze moeten na drie maanden gebruik worden vervangen. • Als dat niet werkt, probeer dan het volgende: 1. Controleer de verbindingen tussen alle afwasbare onderdelen om er zeker van te zijn dat ze goed vastzitten. 2. Inspecteer alle afwasbare onderdelen zorgvuldig en vervang ze als ze beschadigd zijn. 3. Controleer of de voeding aan staat. 4. Druk de borstkolf veilig tegen de borst.
Stop met kolven	• De borstkolf schakelt automatisch uit na 30 minuten. • Druk kort op de knop Aan / Uit / Pauze om de borstkolf te pauzeren, druk nogmaals om verder te gaan.
De borstkolf stopt niet met kolven	• Druk op de knop Aan / Uit / Pauzeer knop. • Als het probleem aanhoudt, verbreek dan de afsluiting door een vinger tussen het borstweefsel en het borstschild te steken. Druk dan op de Aan / Uit / Pauzeknop om de borstkolf uit te zetten.
Borstkolf of oplader wordt nat (ondergedompeld in water).	• Droog de borstkolf onmiddellijk. Zet de borstkolf rechtop met de oplaadpoort omlaag en de zuigkrachtregelaars omhoog, en laat deze een nacht aan de lucht drogen. Gebruik de borstkolf of de oplader niet binnen 24 uur. • Neem contact op met de klantenservice.
De borstkolf laadt niet op.	• Zorg ervoor dat de USB Type-C-kabel met standaardlader (niet meegeleverd) volledig is aangesloten op de oplaadpoort van de borstkolf.

Opmerking: Als de bovenstaande methoden het probleem nog steeds niet oplossen, neem dan contact op met de fabrikant, zie de laatste pagina voor contactinformatie.

13. Verwijdering



Gooi dit product aan het einde van de levenscyclus niet bij het normale huisvuil, maar breng het naar een inzamelpunt voor recycling van elektronische apparatuur en batterijen.

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kan mogelijk schadelijke gevolgen hebben voor het milieu. Onjuiste verwijdering kan leiden tot ophoping van schadelijke gifstoffen in de lucht, het water en de bodem, wat schadelijk is voor de menselijke gezondheid. U bent verplicht om het apparaat op de juiste manier weg te gooien. Raadpleeg uw gemeente voor informatie over afvalverwijdering.

14. Garantie

Neem contact op met de fabrikant in geval van een garantieclaim. De contactgegevens vindt u op de laatste pagina van deze gebruikershandleiding. Als u het apparaat moet opsturen, voeg dan een kopie van uw aankoopbewijs bij met een duidelijke beschrijving van het defect.

De garantievoorwaarden zijn zoals hieronder beschreven:

1. De garantieperiode voor het apparaat is één jaar vanaf de aankoopdatum. In geval van een garantieclaim moet de aankoopdatum worden aangetoond met de kassabon of factuur.
2. Reparaties onder garantie verlengen de garantieperiode voor het apparaat of voor de vervangende onderdelen niet.
3. De volgende gevallen zijn uitgesloten van garantie
 - Alle schade die is ontstaan door onjuiste bediening, bijv. het niet naleven van de gebruiksaanwijzing.
 - Alle schade die is ontstaan door reparaties of knoeien door de klant of onbevoegde derden.
 - Schade die is ontstaan tijdens het transport van de fabrikant naar de consument of tijdens het transport naar het servicecentrum.
 - Accessoires die onderhevig zijn aan normale slijtage.
 - Schade aan het apparaat als gevolg van eigenhandig demonteren van apparaten.
 - Aansprakelijkheid voor directe of indirecte gevolgschade veroorzaakt door het apparaat is uitgesloten, zelfs als de schade aan het apparaat geaccepteerd is als garantieclaim.

15. Verklaring reizen of internationaal gebruik

Aangezien de prestaties van de draagbare borstkolf van Momcozy beïnvloed kunnen worden door de externe omgeving, verzoeken wij u, gezien de onzekerheid en instabiliteit van de reisomgeving, het apparaat niet te gebruiken tijdens het reizen of in het vliegtuig.

De draagbare borstkolf van Momcozy kan internationaal gebruikt worden. Het moet echter gebruikt en opgeslagen worden in de omgeving zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat het ingangsvermogen van uw voedingsadapter AC 100~240V 50/60 Hz is en het uitgangsvermogen gelijkstroom 5V 1A, en dat u een converter heeft om het juiste voltage van het beoogde land aan te passen. Om er zeker van te zijn dat de draagbare borstkolf van Momcozy niet beschadigd wordt tijdens het dragen, controleert u de volgende items voor gebruik om te verzekeren dat het normaal kan werken:

- Controleer de draagbare borstkolf van Momcozy om er zeker van te zijn dat het vrij is van schade. Voor elk gebruik, controleert u de status van uw draagbare borstkolf van Momcozy om er zeker van te zijn dat het normaal kan werken. Als er een afwijking is, stop dan met het gebruik ervan.

16. Fabrikantinformatie

Fabrikant: Shenzhen Root Innovation Technology Co., Ltd.

Adres: #2-201, Verdieping 2, Hasee Computer Building, No.2 Beier Rd, Bantian Straat, Longgang, Shenzhen, Guangdong, China, 518129

E-mail: support@momcozy.com

Neem contact met ons op als u hulp nodig hebt bij het instellen, gebruiken of onderhouden van het apparaat of als u onverwachte bediening of gebeurtenissen wilt melden.

17. Belangrijke veiligheidsinformatie

• Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen;

- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen;
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Een batterij blootstellen aan extreem lage luchtdruk, kan leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistof of gas.

图档名称	Momcozy V1pro吸奶器说明书-荷兰语			版本号	C0	日期	2025-02-28
规格尺寸	80*130 (h) mm	印刷颜色	CMYK	设计师			
材质工艺	封面105g铜版纸过油+内页80g 书纸/胶装						
项目负责人	肖莹	文案编写/审核人	肖莹		设计审核人	/	
备注	出血线为3mm；红色线为刀模，请勿印刷；图档版权归深圳市路特佳成网络科技有限公司所有，私自泄露、修改、使用文档所产生的一切责任后果我司将追究到底。						ROOT路特