



# momcozy Mobile Style™

## Guía de funcionamiento



Si tiene algún problema con el dispositivo puede ver el vídeo de la guía de operación para obtener más soluciones.

## Guía de medición del pezón




Se recomienda que el tamaño del embudo sea de menos de 24 mm, use el inserto del embudo para que se ajuste mejor.

**Nota:** El inserto solo se puede aplicar a un embudo de 24 mm, no a uno de 27 mm.


Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico. [support@momcozy.com](mailto:support@momcozy.com)

1


## Directrices de instalación

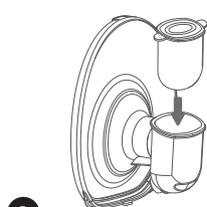


**1** Conecte el diafragma a la pestaña y aplique una ligera presión alrededor del borde hasta que el diafragma quede bien sellado.

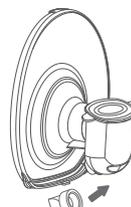

**2** Presione la válvula en el embudo y compruebe que no queda ningún espacio.

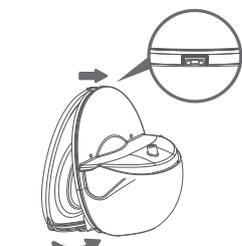


**3** En primer lugar, alinee la salida de leche superior y luego presione el borde del embudo con la palma de las manos para asegurar que esté bien colocado.

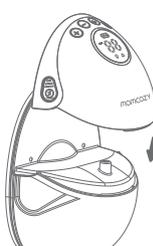

**4** Coloque el motor del extractor y el recolector de leche.

2

## Instalación del diafragma

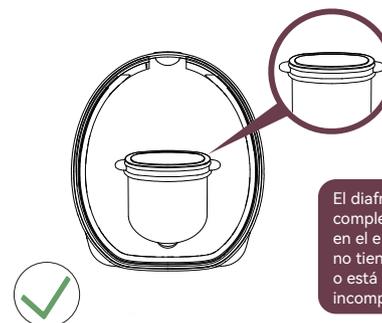

El diafragma está completamente presionado en el enlazador del embudo, no tiene ninguna inclinación o está conectado de manera incompleta.




Aquí hay un espacio, no se ha fijado bien en su sitio.

Aquí hay un espacio, no se ha fijado bien en su sitio.

El diafragma no está presionado completamente, por lo que muestra una inclinación y no está conectado de manera segura.

3


## Instalación del recolector de leche

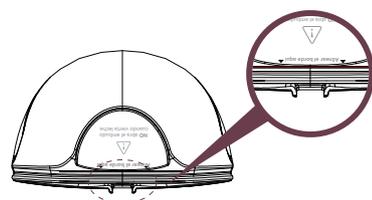

Alinee el borde del embudo con esta línea



Compruebe que la boquilla de la leche en el embudo esté alineada correctamente y esté nivelada con la parte inferior del colector de leche, sin inclinación.

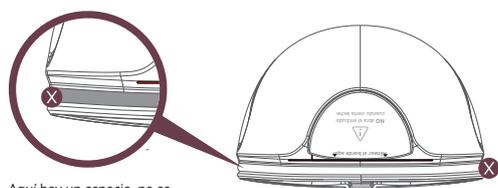

Aquí hay un espacio, no se ha fijado bien en su sitio.



Si el embudo no está alineado con la línea de posición o no cierra bien (no se sella), pueden quedar espacios por los que podría salir la leche.

4

## Funciones del panel de control



- 1 Indicador del tiempo de funcionamiento / nivel de succión
- 2 Visualización de la batería
- 3 Encendido / Apagado / Pausa
- 4 Selección de modo
- 5 Disminuir
- 6 Aumentar

- \* Mantenga pulsado para encender/apagar;
- \* Pulse brevemente para pausar / continuar con la sesión de extracción.
- \* **Estimulación:** Patrón de succión rápido y corto para conseguir que la leche empiece a salir.
- \* **Extracción de leche:** Patrón de succión lenta para sacar la leche.
- \* **Mixto:** Patrón de succión rápido y corto seguido de un patrón de succión lento y largo.

## Verter la leche



**Nota: ¡No desconecte el embudo directamente cuando vierta leche!**



Separe el motor de la bomba y vierta la leche usando la salida que se encuentra en la parte de arriba del colector de leche.

5

## Limpieza y esterilización

### \* Piezas no lavables

Motor del extractor



### \* Piezas lavables



Embudo

Válvula

Recolector de leche



### Limpieza y esterilización de las piezas lavables

1. Limpie el dispositivo con agua jabonosa (40-60 °C/100-140 °F) durante 3-5 minutos.
2. Se recomienda esterilizar el producto con agua hirviendo o vapor. No use el microondas o UV para esterilizar, ya que estos métodos podrían dañar las piezas y hacer que se reduzca la vida útil del dispositivo.

### Notas importantes

- 1) La vida útil prevista de las piezas lavables es de 1 a 3 meses. Se recomienda sustituir las piezas lavables después de un almacenamiento prolongado o antes de extraer leche para su próximo hijo.
- 2) El extractor de leche se apagará de manera automática cuando hayan pasado 30 minutos.
- 3) Si siente alguna molestia o escozor, introduzca suavemente el dedo entre el embudo y el pecho para liberar el sello, deje de usar la bomba y consulte con un proveedor de atención médica.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico. [support@momcozy.com](mailto:support@momcozy.com)

6