



08

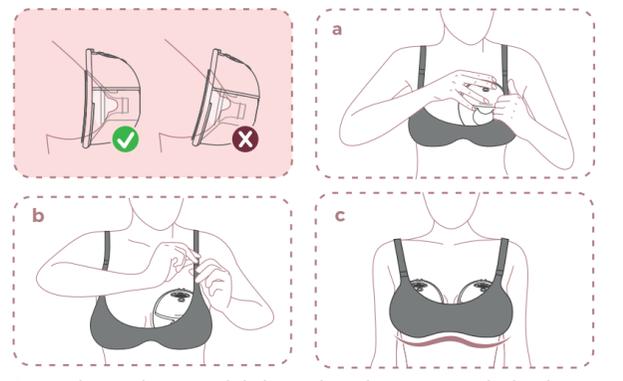

Compruebe que el extractor de leche se adapte de manera cómoda al pecho sin ningún espacio.

09

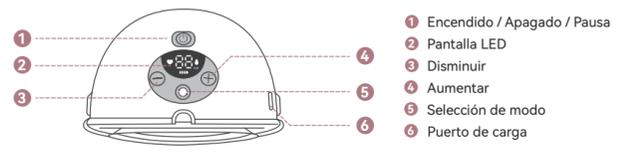


- * Mantenga pulsado para encender/apagar.
- * Pulse brevemente para pausar / continuar con la sesión de extracción.
- * **Estimulación:** Patrón de succión rápido y corto para conseguir que la leche empiece a salir.
- * **Extracción de leche:** Patrón de succión lenta para sacar la leche.
- * **Mixto:** Patrón de succión rápido y corto seguido de un patrón de succión lento y largo.

09



10

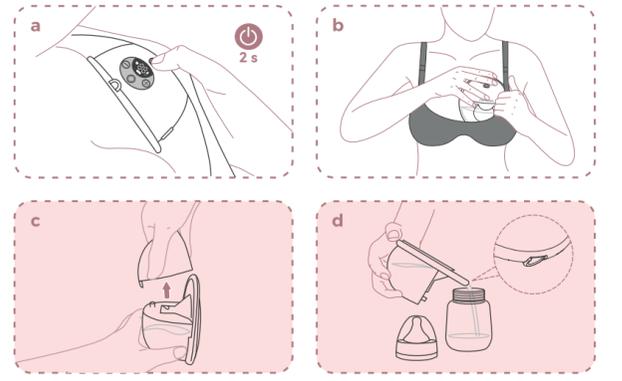

MOMCOZY

Extractor de leche portátil

M5



Guía de usuario


MOMCOZY
www.momcozy.com

Guía de funcionamiento Guía de medición del pezón




Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico. support@momcozy.com

01

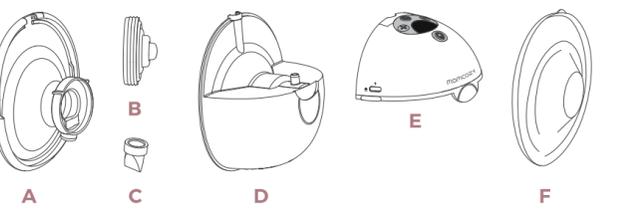


- A Embudo de doble sellado de 24 mm
- B Diafragma
- C Válvula
- D Recolector de leche (160 ml)
- E Motor del extractor
- F Tapa


02

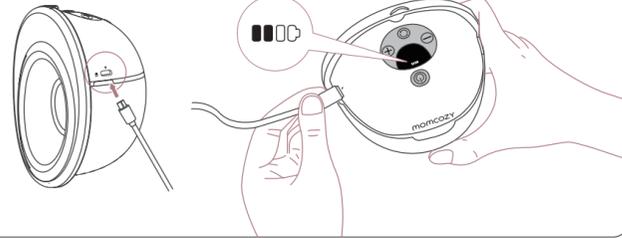


03

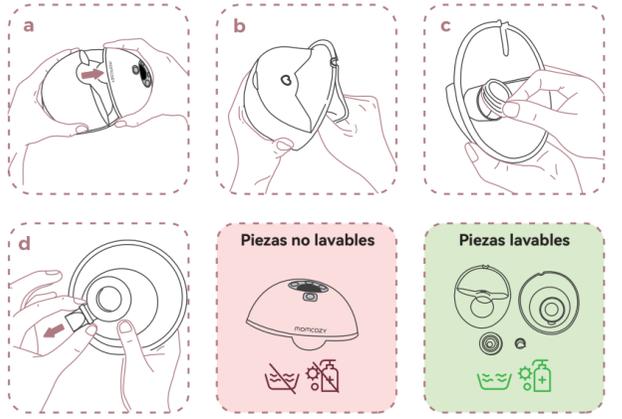


04

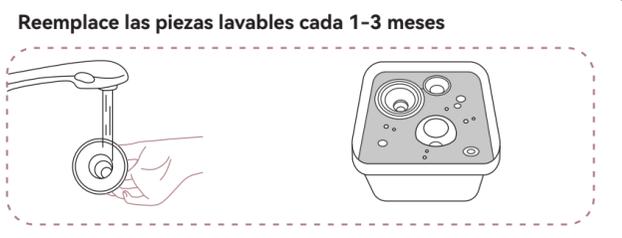


05

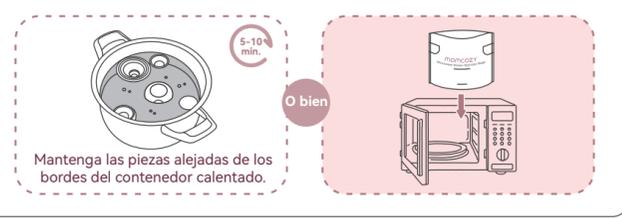

06

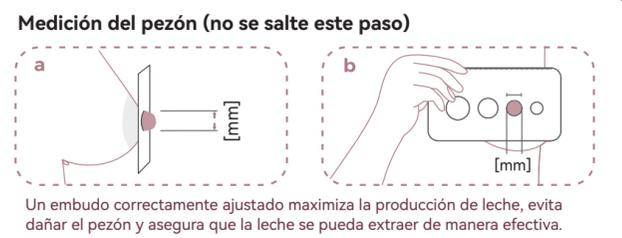

06

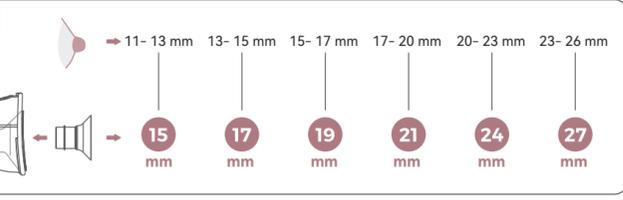

07

