

正面

130 mm

对折线



Cómo evitar las fugas de leche y consejos para obtener más leche materna durante la extracción

- 1 Asegúrese de que el extractor está bien montado.
- 2 Inclínese hacia delante para asegurarse de que el pezón está centrado en la abertura de la pestaña. El extractor de leche debería quedar sujeto con firmeza contra el pecho.
- 3 Recomendamos a las usuarias que utilicen un sujetador de lactancia con cobertura total para que se forme un sello hermético entre el pecho y la pestaña.
- 4 Inclínese ligeramente hacia adelante para retirar el extractor del pecho después de la sesión de extracción.

Consejos

- 1) La vida útil prevista de las piezas lavables es de 1 a 3 meses. Se recomienda sustituir las piezas lavables después de un almacenamiento prolongado o antes de extraer leche para su próximo hijo.
- 2) El extractor se apagará automáticamente después de 30 minutos de uso.
- 3) Si se produce irritación o molestias, rompa la succión insertando un dedo entre el pecho y la pestaña, interrumpa el uso y consulte a un médico.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico.
4 support@momcozy.com

momcozy

Extractor de leche portátil

Instrucciones de montaje (consulte el manual de usuario para obtener más información)
*Asegúrese de tener las manos limpias antes de montarlo.

- 1 Acople el recolector de leche y fije la tapa para que se selle de forma hermética.

- 2 Introduzca suavemente la válvula en el recolector de leche. Verifique que no quedan huecos.

Para mayor comodidad, consulte el vídeo de la guía de funcionamiento para obtener más soluciones. Para acceder al vídeo de la guía de funcionamiento, escanee el código QR de arriba.

1

背面

- 3 Primero alinee el recolector de leche con la parte superior de la pestaña, luego presione alrededor para verificar que están conectados herméticamente.

- 4 Conecte el extremo largo del tubo al motor del extractor.

Extracción doble Extracción simple

Verter la leche

Asegúrese de sujetar el recolector de leche materna en la dirección correcta cuando vierta la leche. A continuación, vierta la leche por la abertura de la pestaña.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico.
2 support@momcozy.com

Limpieza y esterilización

***Piezas no lavables**
Tubos
Motor del extractor

***Piezas lavables**
Pestaña
Válvula
Recolector de leche

Limpieza y esterilización de las piezas lavables

1. Limpielas con agua jabonosa (40-60 °C) durante 3-5 minutos.
2. Es necesario utilizar agua hirviendo / vapor / un recipiente de esterilización para la esterilización, a 100 °C (212 °F) durante 5-10 minutos.

* No se recomienda esterilizar las piezas del extractor en un microondas o esterilizador por rayos UV. Las altas temperaturas (> 110 °C) acortarán su vida útil y provocarán riesgos para la seguridad.

Panel de control

- 1 Indicador de nivel de succión
- 2 Indicador de modo
- 3 Indicador del tiempo de funcionamiento / nivel de succión
- 4 Visualización de la batería
- 5 Encendido / Apagado
- 6 Aumentar
- 7 Disminuir
- 8 Selección de modo

* Mantenga pulsado para encender/apagar;
* Pulse brevemente para pausar / continuar con la sesión de extracción.
* Estimulación Extracción Mixto

3

180 mm