

Solution Intégrée

Pour collecter, conserver, décongeler et réchauffer le colostrum

Le **Protecteur de colostrum** peut désormais être décongelé et réchauffé dans le **Chauffe-lait sans eau Waterless Milk Warmer**.

Insérer le **Protecteur de colostrum** de Medela dans l'orifice pour seringue afin de réchauffer et décongeler efficacement le colostrum.

La **double paroi** du **Protecteur de colostrum** agit comme un isolant, ce qui **nécessite un peu plus de temps** dans le chauffe-lait.

*Pour réchauffer 2 ml de colostrum congelé, vous devez d'abord le décongeler, puis le réchauffer à partir d'un état réfrigéré, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Suivre ce tableau pour le **Protecteur de Colostrum**



Chauffe-lait sans eau Entrée par mL Volume				
Actual Volume (mL)	Pour Décongeler	Chauffer à partir de Tempéré	Chauffer à partir de Réfrigéré	Chauffer à partir de Congelé
1	1	3	2	1
2	3	3	4	Décongeler 3' Réchauffer 4'
3	6	5	7	3
4	13	12	14	7
5	30	30	30	11
6	45	40	40	18

Ces instructions ne s'appliquent à aucun autre type de récipient.

Consulter le document « Mode d'emploi » pour obtenir des instructions complètes..