
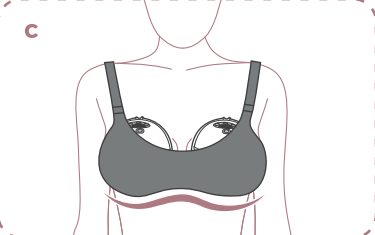
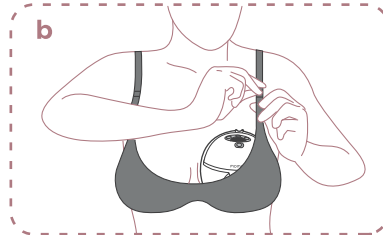
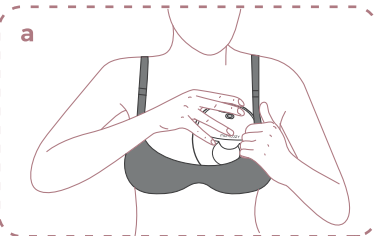



08

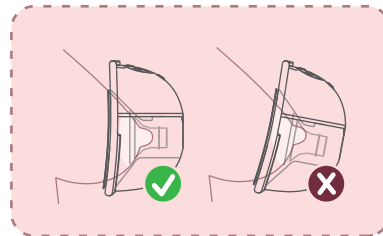

Ensure that the breast pump fits snugly against the breast without any gaps.

Vérifiez que le tire-lait épouse bien le sein, sans aucun espace.

09

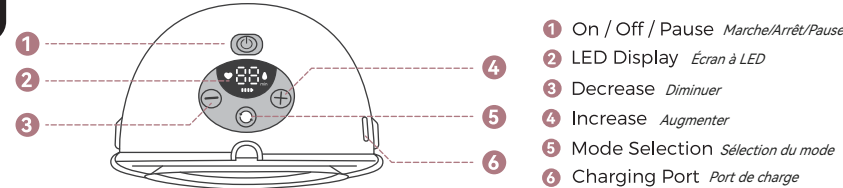


- * Long press and hold to turn On / Off;
Une pression longue sur permet de mettre en marche ou arrêter l'appareil;
- * Short press to pause / continue pumping session.
Une pression courte sur permet d'interrompre ou de poursuivre le pompage.
- * Stimulation: Quick and short sucking pattern to get your milk to start flowing.
Stimulation: Suction rapide et courte pour faire commencer à couler le lait.
- * Expression: Slow sucking pattern for milk expression.
Expression: Suction lente pour exprimer le lait.
- * Mixed: Quick and short sucking pattern followed by a slow and long sucking pattern.
Mode mixte: Suction rapide et courte suivie d'une suction lente et longue.

09

Low Battery
blinking
Batterie faible
clignotant





In Charging
lights up one by one
En charge
s'allume un témoin à la fois

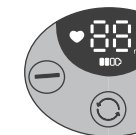

Fully Charged
stays on solid
Entièrement chargé
témoin allumé fixe



10

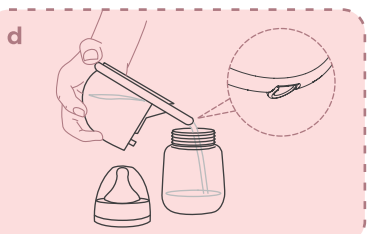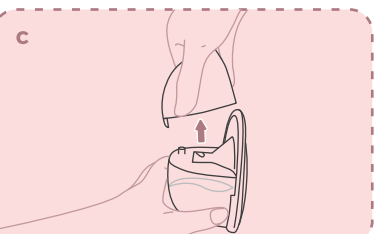

momcozy

www.momcozy.com

momcozy

Wearable Breast Pump

Tire-lait Portatif

M5




User Guide

Guide de l'utilisateur

Operating Guide

Manuel d'utilisation

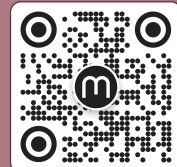

Nipple Measuring Guides

Guides de mesure des mamelons




If you have any questions, please contact us by email.

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter par e-mail.

support@momcozy.com


01

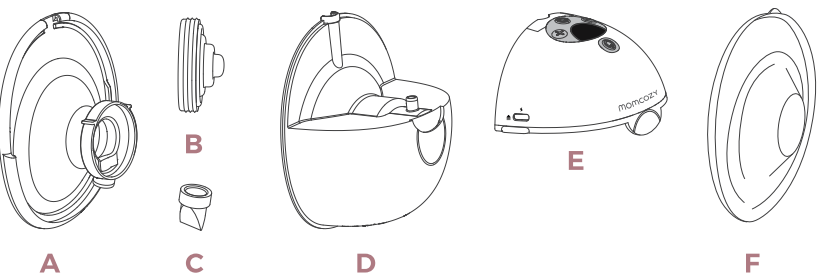


- A** 24mm Double-sealed Flange
Tétérerie à double joint 24 mm
- B** Diaphragm
Membrane
- C** Valve
Valve

- D** Milk collector (160ml)
Collecteur de lait (160 ml)
- E** Pump Motor
Moteur de la pompe
- F** Dust cover
Protège-poussière

02

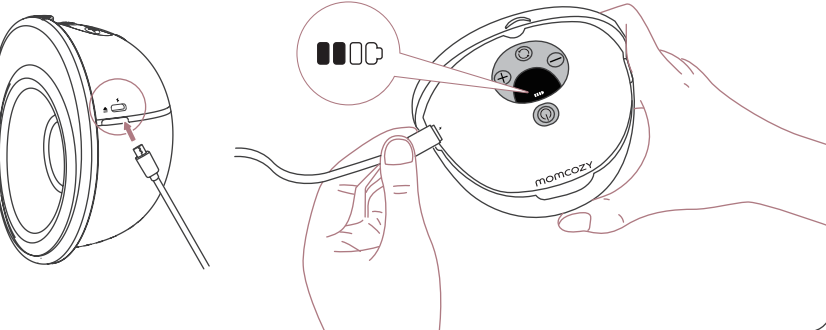


03

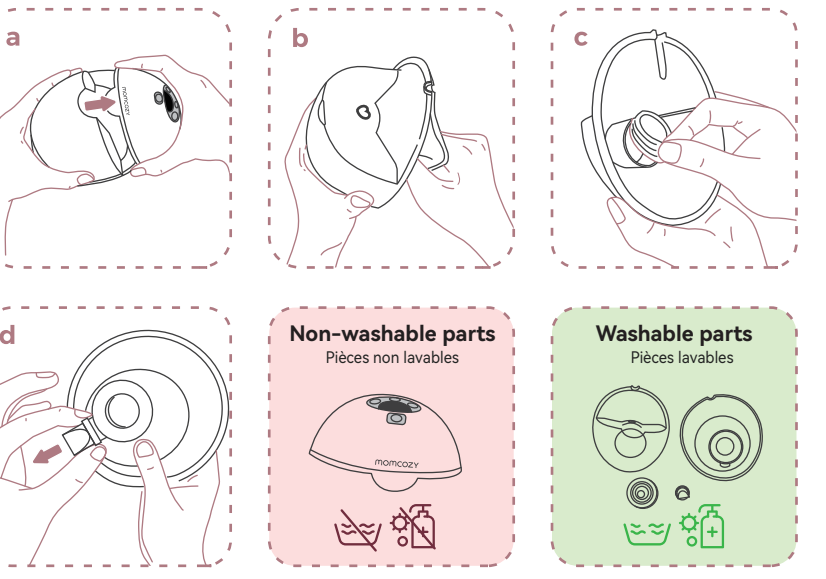


04

Replace washable parts 1-3 months

Remplacez les pièces lavables tous les 1 à 3 mois

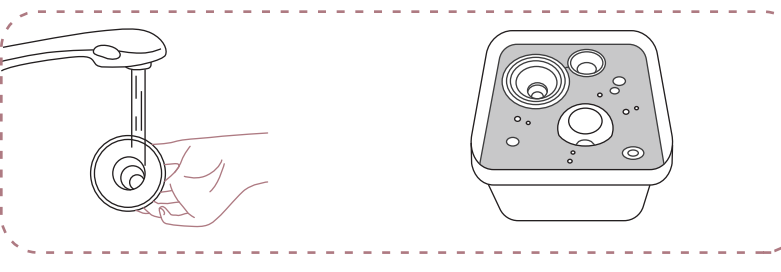


05

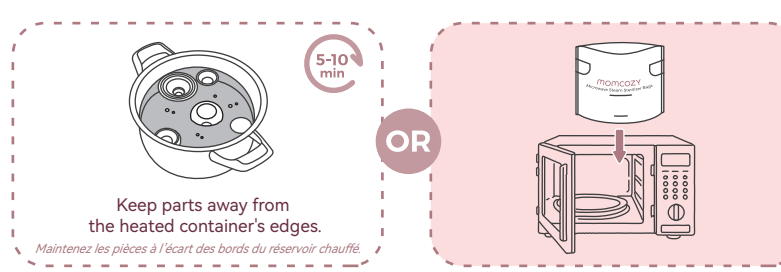

06

Nipple Measuring (Don't skip this step)


Mesure des mamelons (ne sautez pas cette étape)

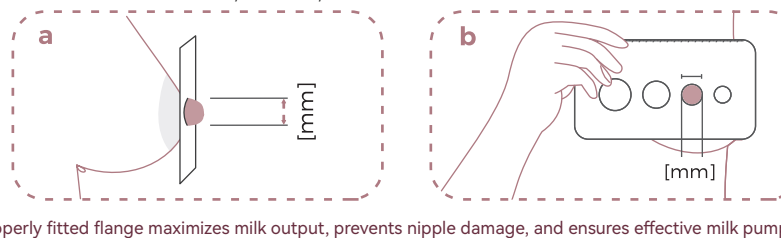

A properly fitted flange maximizes milk output, prevents nipple damage, and ensures effective milk pumping.

Une tétérerie correctement ajustée maximise la production de lait, évite de blesser les mamelons, et garantit un pompage efficace du lait.

06

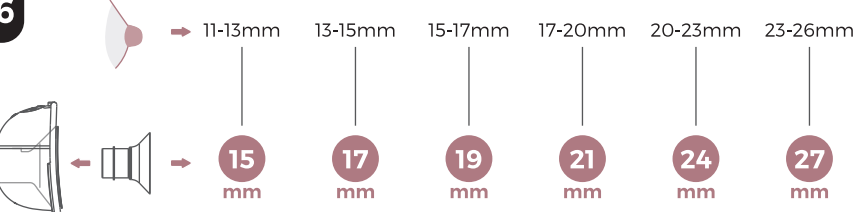

07

