

对折线

正面

130 mm

Limpeza e esterilização

***Peças não laváveis**
Motor da bomba tira-leite
Tubo



***Peças laváveis**


Funil


Válvula


Coletor de leite

Limpeza e esterilização das peças laváveis.

- Lave com água e sabão (40-60 °C) durante 3-5 minutos.
- Utilize água a ferver/vapor/panela de esterilização para esterilização. São necessários 100 °C (212 °F) durante 5-10 minutos.

* Não se recomenda a esterilização das peças da bomba num micro-ondas nem num esterilizador UV. As temperaturas elevadas (> 110 °C) reduzirão a sua vida útil e causarão riscos de segurança.


Sugestões

- A vida útil prevista para as peças laváveis é de 1 a 3 meses. Recomenda-se que substitua as peças laváveis após um longo período de armazenamento ou antes de extrair leite para outra criança.
- A bomba tira-leite desliga-se automaticamente após utilizá-la durante 30 minutos.
- Se sentir irritação ou desconforto, utilize o dedo para parar a sucção entre o funil e o tecido mamário. Interrompa a utilização do dispositivo e consulte um/uma profissional de saúde.

MOMCOZY

Bombas tira-leite V1 Pro

Qualidade hospitalar

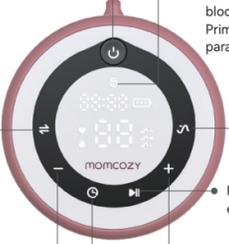

Ligar/desligar: Prima sem soltar (2 seg)

Desbloquear & As luzes do teclado desligam/ligam: Prima brevemente

Se não houver qualquer operação durante 30 segundos, o ecrã de bloqueio ligar-se-á. Prima brevemente para desbloquear.

3 modos de seleção:

- ♥ Modo de estimulação
- Modo de extração
- ♥● Modo misto

Seleção de ciclo: H/M/L

Pausar/continuar a extração de leite

01-15 Níveis de sucção: Prima brevemente o botão - / + para ajustar a sucção

Temporizador: Prima brevemente o botão ⌚ & - / + para ajustar

Se tiver alguma dúvida, contacte-nos por e-mail.
support@momcozy.com

背面

Diretrizes de instalação

(consulte o manual de utilização para obter mais informações)
*Certifique-se de que as suas mãos estão limpas antes da instalação.

- 


Fixe o diafragma ao coletor de leite e aperte a tampa para vedar bem.
- 

Empurre delicadamente a válvula para o interior do coletor de leite. Certifique-se de que não existe qualquer folga.




Para sua conveniência, consulte o vídeo do guia de funcionamento para obter mais soluções. Leia Digitalize o código QR acima para aceder ao vídeo do guia de funcionamento.

Se tiver alguma dúvida, contacte-nos por e-mail.
support@momcozy.com

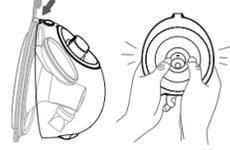- 


Primeiro, alinhe o coletor de leite com a parte superior do funil e, em seguida, pressione para garantir uma ligação firme.

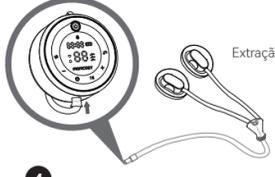

Extração dupla



Extração única

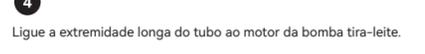- 

Ligue a extremidade longa do tubo ao motor da bomba tira-leite.

Transbordo de leite



Certifique-se de que segura o coletor de leite materno na direção correta quando extrair o leite. Em seguida, vorta o leite no túnel do funil.

180 mm