




momcozy Mobile Flow™ Snabbstartguide

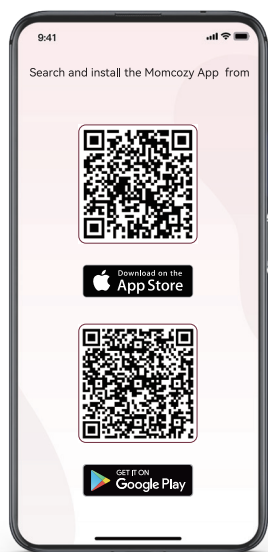



Steg 1:

För att komma igång, sök efter Momcozy-appen i din smartphones appbutik, antingen Google Play Store eller App Store. Appen är kompatibel med iOS 13 och Android 8.0 eller senare versioner. Observera att appens Bluetooth-anslutning kan bero på vilken smartphone som är ansluten till enheten.

1


Steg 2:

Registrera ditt konto efter installationen. Om du har ett Momcozy-konto, logga in.

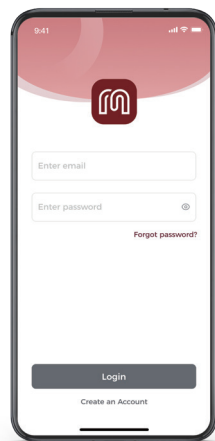
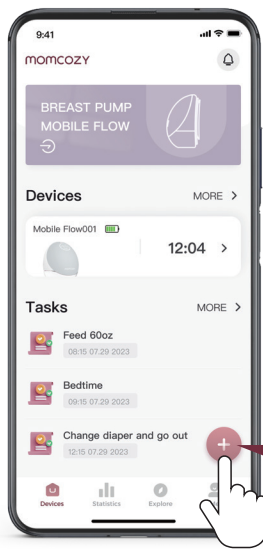


Steg 3:

Se till att du har aktiverat Bluetooth på din telefon och att bröstpumpen är påslagen. Lägg till enheter med hjälp av knapparna "+" och "Enheter".

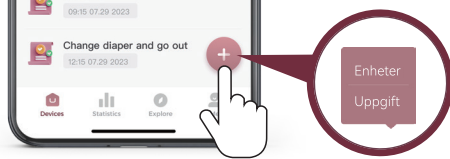

2

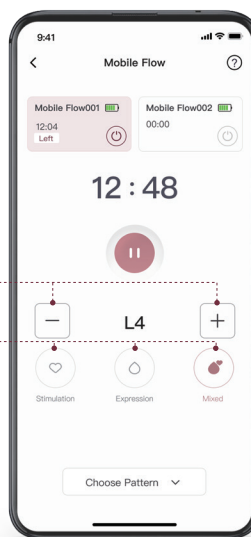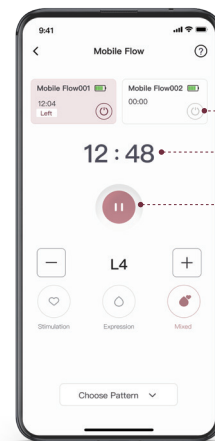


Av
Drifttid
Pausa/Fortsätt

Sugnivå
Val av läge


Steg 4:
Efter anslutning använder du appen för att styra bröstpumpen.

3


Installationsriktlinjer

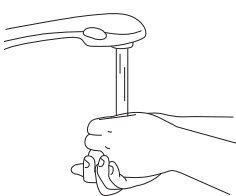


1
Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten.

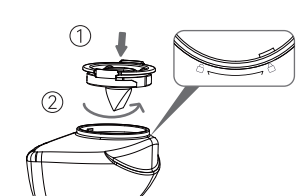

2
Sätt ihop mjölkuppsamlaren genom att vrida den i riktning mot låsikonen vid flaskans mynning.

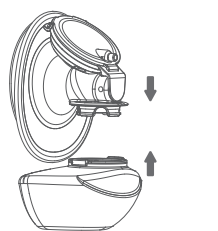

3
Fäst flänsen i flaskans mynning och montera med mjölkuppsamlaren.

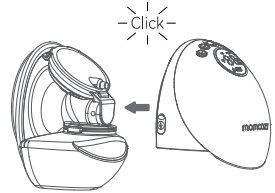

4
Montera motorn och flänsen.

4


Rengöring och sterilisering

*Icke-tvättbara delar

Pumpmotor



*Tvättbara delar

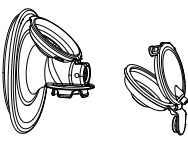

Fläns

Membran



Mjölkuppsamlare



Ventil

Rengöring och sterilisering av tvättbara delar
1. Rengör med tvål/vatten (40–60 °C) 3–5 minuter.
2. Använd kokande vatten/ångsteriliseringsgryta för sterilisering. 5–10 minuter i 100 °C (212 °F) krävs.

* Det rekommenderas att inte sterilisera pumpdelar i en mikrovågsugn eller UV-sterilisator. Hög temperatur (> 110 °C) kommer att förkorta deras livslängd och orsaka säkerhetsrisker.

För eventuella produktproblem, se videon med bruksanvisningen för ytterligare lösningar. Skanna QR-koden nedan för att öppna videon med bruksanvisningen.



5

Batteriindikator



- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1 Batteridisplay | 2 Påminnelse om mjölkspill |
| 3 Långt tryck: Slå på/av | 4 Val av läge |
| 5 Kort tryck: Pausa/Fortsätt | 6 Bluetooth-indikator |
| 6 Växla riktning | 7 Drifttid- / sugnivådisplay |
| 7 Drifttid- / sugnivådisplay | 8 Lagesindikator |
| 8 Öka / Minska | |

Tips

- Den förväntade livslängden för de tvättbara delarna är en till tre månader. Det rekommenderas att byta ut de tvättbara delarna efter långtidsförvaring eller innan du pumpar till ditt nästa barn.
- Bröstpumpen stängs av automatiskt efter att ha pumpat i 30 minuter.
- I händelse av irritation eller obehag, använd fingret för att bryta förseglingen mellan flänsen och bröstvävnaden, avbryt användningen och kontakta en vårdgivare.

Kontakta oss via email om du har några frågor:
support@momcozy.com

6