


# momcozy

Kannettava  
rintapumppu

## S9 Pro

### Käyttöohje

(For OTC Type of Use)

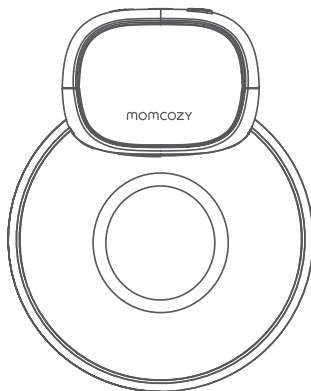

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten.

→ SUOMI

# SISÄLTÖ

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Tuotteen johdanto                                             | 02 |
| 2. Varoitukset ja varotoimet                                     | 02 |
| 3. Vasta-aiheet                                                  | 03 |
| 4. Turvallisuustiedot                                            | 03 |
| 5. Tuotteen kuvaus                                               | 06 |
| 6. Käyttöohjeet                                                  | 08 |
| 7. Säilytysolosuhteet                                            | 26 |
| 8. Tekniset tiedot                                               | 27 |
| 9. Huolto ja varaosat                                            | 28 |
| 10. Vaatimustenmukaisuusvakuutus                                 | 28 |
| 11. Vianmääritys                                                 | 28 |
| 12. Hävittäminen                                                 | 30 |
| 13. Takuu                                                        | 30 |
| 14. Matkustamista tai kansainvälistä käyttöä<br>koskeva lausunto | 31 |
| 15. Valmistajan tiedot                                           | 31 |

# 1. Tuotteen johdanto

Imettävät naiset voivat pumpata ja kerätä maitoa rinnoista Momcozy-rintapumpulla. Momcozy-rintapumppu pumpppaa maitoa luomalla alipaineen nänнин ympärille. Maito kerätään maidonkerääjään.

Laitteessa on stimulointitila, puristustila ja yhdistelmätila. Stimulointitilassa rintapumppu saa maidon virtaamaan nopean ja lyhyen imemiskuvion mukaan. Puristustilassa rintapumppu pumpppaa maitoa syvemältä ja hitaammin hitaan imemiskuvion mukaan. Yhdistelmätilassa rintapumppu aloittaa pumpppauksen nopean ja lyhyen imemiskuvion mukaan ja jatkaa sitten hitaan ja pitkän imemiskuvion mukaan. Rintapumpussa on silikonikalvo, joka estää maidon virtaamisen alipainejärjestelmään pitämällä fyysisesti maidon kanssa kosketuksiin joutuvan väylän erillään alipainejärjestelmästä. Laite on tarkoitettu yhdelle käyttäjälle.

# 2. Varoitukset ja varotoimet

Käyttöoppaassa esitettävien varoitusmerkkien ja symbolien tarkoituksena on auttaa käyttämään tuotetta turvallisesti ja oikein sekä estää käyttäjän ja muiden vahingoittumisen. Seuraavassa taulukossa kuvataan tarkemmin varoitusmerkit ja symbolit:

| Varoitusten/varotoimien symbolit                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Varoitus</b>    | Varoitus varoittaa lukijaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, josta voi olla seurauksena kuolema tai vakava vamma, jos tilannetta ei vältetä. Tällä symbolilla voidaan myös kuvata mahdollisia vakavia haittavaikutuksia ja turvallisuusriskejä.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <br><b>Varotoimet</b> | Tämä symboli varoittaa lukijaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, josta voi olla seurauksena käyttäjän tai potilaan lievä tai kohtalainen loukkaantuminen tai laitteen tai muun omaisuuden vahingoittuminen, jos tilannetta ei vältetä. Tällä symbolilla voidaan myös varoittaa vaarallisista käytännöistä. Käyttäjän on tällöin toimittava erityisen huolellisesti varmistaakseen laitteen turvallisen ja tehokkaan käytön sekä välttääkseen laitteen käytöstä tai väärinkäytöstä johtuvan laitteen vahingoittumisen. |
| <b>Vasta-aiheet</b>                                                                                     | Vasta-aiheet tarkoittavat tilanteita, joissa laitetta ei saa käyttää, koska käyttöön liittyy selkeästi enemmän riskejä kuin hyötyjä. Tiettyjen henkilöiden ei tule käyttää laitetta heidän terveydentilansa vuoksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Huomiot</b>                                                                                          | Edellyttää kiinnittämään huomiota, sillä huomiotta jättäminen voi johtaa tuotteen virheelliseen käyttöön tai laitteen vaurioitumiseen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Symbolin kuvaus

|             |                                                                                                                                                                                                                |  |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|
|             | CE-merkintä                                                                                                                                                                                                    |  | UKCA-merkintä                                      |
|             | Säilytettävä kuivana                                                                                                                                                                                           |  | Pinottavissa enintään 5 päällekkäin                |
| <br>MEHRWEG | Eräkoodi                                                                                                                                                                                                       |  | Katso käyttöohjeet.                                |
|             | Eräkoodi                                                                                                                                                                                                       |  | Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuva laite |
|             | FCC-merkintä                                                                                                                                                                                                   |  | Sarjanumero                                        |
|             | Jakelupakkaukset tulee suojata auringonvalolta                                                                                                                                                                 |  | Viimeinen käyttöpäivä                              |
| <b>IP22</b> | Ensimmäinen numero 2: Suojattu halkaisijaltaan vähintään 12,5 mm:n kiinteitä vieraita esineitä vastaan. Toinen numero 2: Suojattu pystysuoraan putoavilta vesipisaroilta, kun kotelo on suunnattu 15°:een asti |  |                                                    |
|             | Hävittäminen direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaisesti                                                                                                                                                          |  |                                                    |
|             | Tätä laitetta ei ole testattu magneettikuvausympäristössä, eikä sitä saa käyttää magneettikuvausympäristöissä, kun potilaat käyttävät laitetta. Älä vie laitetta magneettikuvaushuoneeseen.                    |  |                                                    |
|             | Edustaja Yhdistyneessä kuningaskunnassa                                                                                                                                                                        |  | Ranskalainen ERP-pakkaus                           |
|             | Valtuutettu edustaja EU:ssa                                                                                                                                                                                    |  |                                                    |

### 3. Vasta-aiheet

Älä käytä tätä pumppea, jos sinulla on aktiivinen implantoitu laite, johon magneettikenttä voisi vaikuttaa (esim. sydämentahdistin, implantoitu rytminsäätölaite).

### 4. Turvallisuustiedot

Noudata aina seuraavia perusturvallisuustietoja käyttäessäsi sähkölaitteita, erityisesti jos lapsia on paikalla.

## 4.1 Varoitus

- 1) Älä käytä tätä laitetta, jos sinulla on sydämentahdistin, implantoitu defibrillaattori tai muu implantoitu metallinen tai elektroninen laite. Laitteen käyttö voi aiheuttaa sähköisiä häiriöitä tai kuoleman.
- 2) Tätä laitetta eivät saa käyttää sellaiset henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt eivät ole tavanomaisella tasolla, tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa. Tällaiset henkilöt voivat käyttää tätä rintapumpua vain, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä tai on antanut heille asianmukaiset ohjeet laitteen käytöstä.
- 3) Vaara: Sähköiskun vaaraa voi vähentää seuraavasti:
  - Irrota sähkölaitteet pistorasiasta aina heti latauksen jälkeen.
  - Tuotetta ei saa käyttää kylpemisen, suihkussa käymisen, ajamisen tai uimisen aikana.
  - Älä tartu veteen pudonneeseen sähkötuotteeseen, vaan irrota virtasovitin pistorasiasta välittömästi.
- 4) Momcozy-rintapumppu on henkilökohtainen hoitotuote, jota ei saa hygieniasyistä koskaan antaa tai myydä toisille äideille. Nämä mitätöivät takuun.
- 5) Jos sinulla on hepatiitti B-, hepatiitti C- tai HIV-tartunta, rintamaidon pumppaaminen Momcozy-rintapumpulla ei vähennä tai poista riskiä viruksen välittymisestä vauvalle rintamaidon kautta.
- 6) Tuotteen käyttäminen lasten tai vammaisten läheisyydessä edellyttää tarkkaa valvontaa. Älä anna lasten tai lemmikkien leikkiä moottoriyksiköllä, pakkausmateriaaleilla tai lisävarusteilla.
- 7) Käytä tuotetta ainoastaan tässä käyttöoppaassa kuvattuihin käyttötarkoituksiin.
- 8) Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia lisävarusteita tai muita maidon keräämiseen tarkoitettuja komponentteja.
- 9) Tarkista virtasovitin ennen lataamista. Älä koskaan käytä vaurioitunutta virtasovitinta.
- 10) Älä koskaan jätä tuotetta ilman valvontaa latauksen aikana.
- 11) Älä aseta tuotetta ja lisävarusteita kuumille pinnoille.
- 12) Älä koskaan käytä tuotetta nukkuessasi tai väsyneenä.
- 13) Älä käytä laitetta paikoissa, joissa käytetään aerosolisuihkeita tai annetaan happea.
- 14) Älä käytä laitetta räjähtävien tai syttyvien materiaalien läheisyydessä, magneettikuvausympäristössä, ylipainehappokammiossa tai takan tai lämmittimien lähellä.
- 15) Vältä latauskaapelin aiheuttama kuristuminen.
- 16) Käyttäjät eivät saa korjata tuotetta. Tuotteen korjaaminen itse mitätöi takuun. Tuotteen voi lähettää korjattavaksi valmistajalle tai valtuutetulle jälleenmyyjälle.
- 17) Vapauta alipaine kytkemällä rintapumpun virta pois päältä, ennen kuin otat pumpun pois rinnan päältä.
- 18) Yksittäisille käyttäjille tarkoitettuja sähkökäyttöisiä rintapumppeja ei saa koskaan vuokrata tai jakaa.
- 19) Älä käytä rintapumppeja raskaana, sillä pumppaus voi käynnistää synnytyksen.
- 20) Sovelletun osan enimmäislämpötila on 43,9 °C. Liian korkea lämpötila voi aiheuttaa palovammoja. Varmista ennen käyttöä, että rintojen ihon on ehjä ja terve. Jos havaitset ylikuumenemista, kytke laite pois päältä. Tuotetta saa käyttää kerrallaan enintään 30 minuuttia. Laitteen on annettava jäähtyä vähintään viiden minuutin ajan käyttökertojen välillä.

## 21) Tuotteen käyttöikä

Tuotteen käyttöikä on 500 tuntia. Pestävien osien odotettu käyttöikä on 1–3 kuukautta.

Tarkista ennen käyttöä, että tuote toimii normaalisti. Tuotteen toiminta saattaa heikentyä odotetun käyttöiän jälkeen. Tuote ei esimerkiksi pysty hallitsemaan alipainetta asianmukaisesti, ja liian suuri alipaine voi aiheuttaa vammoja.

- 22) Tätä laitetta voivat käyttää henkilöt, joiden fyysinen, aistinväräinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut, tai joilta puuttuu tarvittavaa kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai opastetaan käyttämään laitetta turvallisesti sekä ymmärtämään siihen liittyvät vaaratekijät.
- 23) Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- 24) Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- 25) Akun hävittäminen polttamalla tai akun mekaaninen hajottaminen tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdysriskin.
- 26) Akun jättäminen erittäin korkeaan lämpötilaan voi aiheuttaa räjähdysriskin tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen.
- 27) Akun jättäminen erittäin alhaiseen ilmanpaineeseen voi aiheuttaa räjähdysriskin tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen.

## 4.2 Precaution


- Älä aseta tuotetta sellaiseen paikkaan, josta se voi pudota tai päätyä kylpyammeeseen, lavuaariin tai uima-altaaseen.
- Älä aseta tai pudota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä upota tuotetta mihinkään nesteeseen tai kohdistaa siihen äärimmäisiä iskuja, kuten pumpun pudotus.
- Pumpkaa kerrallaan enintään viiden minuutin ajan, vaikka et onnistuisi pumpaamaan yhtään maitoa. Yritä saada maitoa herumaan toisena ajankohtana.
- Jos pumpppaus tuntuu epämuksulta, imu voidaan katkaista asettamalla sormi rinnan ja rintasuppilon väliin.
- Jos ilmenee ärsytystä tai epämuksuvia tuntemuksia, lopeta käyttö ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.
- Jos virtasovittimen kotelo tai johdot löystyvät, irtoavat tai rispaantuvat, lopeta virtasovittimen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä laitteen valmistajaan. Lopeta laitteen käyttö välittömästi, jos havaitset pumpppyksikön tai virtasovittimen savuavan tai palavan.
- Ilmoitus: Jos rintapumppu kuumenee liikaa pumpppauksen aikana, lopeta pumpppaus välittömästi ja ota pumppu pois paikaltaan.

### Huomiot:

Suoraa pääyksikkö suoralta auringonvalolta.

## 5. Tuotteen kuvaus

Tuotteessa on pääyksikkö ja maidonkeräyssarja jne.

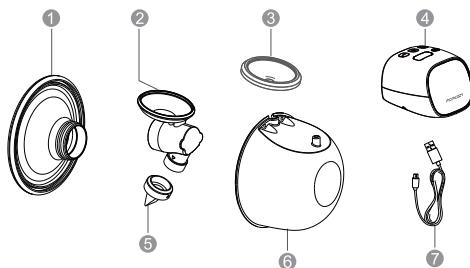


Kuva 1. Laitteen kuvaus

| Rintapumpun kuvaus |                        |                                                                |
|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nro.               | Osa                    | Kuvaus                                                         |
| ①                  | Rintasuppilo           | Kaikki nämä osat muodostavat maidonkeräyssarjan.               |
| ②                  | Linkitin               |                                                                |
| ③                  | Kalvo                  |                                                                |
| ④                  | Pääyksikkö             | Pumpun moottori                                                |
| ⑤                  | Silikoniventtiili      | Kaikki nämä osat muodostavat maidonkeräyssarjan.               |
| ⑥                  | Maidonkerääjä (180 ml) |                                                                |
| ⑦                  | USB Type-C -kaapeli    | Tulopäässä on USB 2.0 -liitäntä ja lähtöpäässä Type-C-liitäntä |

## Muut lisävarusteet:

Rintasuppilon suojus  
Rintasuppilon koon  
mittausväline  
Pikaopas

Rintasuppilon lisäosa  
Käyttöopas  
Silikoniventtiili

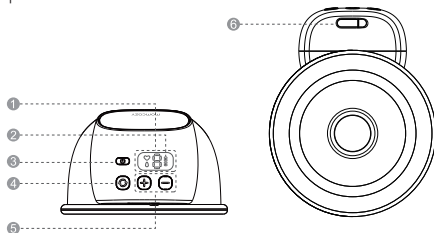

Kuva 2. Ohjauspaneeli

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| ① LED-näyttö                    | ② Akun varaustason osoitus |
| ③ On / Off / Keskeytys -painike | ④ Toimintatilan valinta    |
| ⑤ Lisäys/vähennys               | ⑥ Latausportti             |

| Painikkeet | Toiminnot                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Kytke virta päälle tai pois päältä painamalla pitkään. Keskeytä pumppaus painamalla kerran ja jatka pumppausta painamalla mitä tahansa painiketta. |
|            | Toimintatilan valinta                                                                                                                              |
|            | Pienennä imutehoa                                                                                                                                  |
|            | Lisää imutehoa                                                                                                                                     |
|            | Stimulointitila: Tässä tilassa rintapumppu saa maidon virtaamaan nopean ja lyhyen imemiskuvion mukaan.                                             |

|                                                                                   |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Puristustila: Tässä tilassa rintapumppu pumpppaa maitoa syvemmältä ja hitaammin hitaan imemiskuvion mukaan. |
|  | Imutason osoitus: Rintapumpussa on yhdeksän eri imutilaa.                                                   |
|  | Akun varauksen osoitus                                                                                      |

| Kuvaus akun varaustason osoituksesta                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Akku vähissä    | Ensimmäinen merkkivalo vilkkuu.                                                                                                                                                                                                     |
|  | Ladataan        | Pumpun lataamisen aikana akun merkkivalot syttyvät yksitellen näyttäen akun varaustason (25 %, 50 %, 75 % ja 100 %), minkä jälkeen valot sammuvat ja tämä alkaa uudelleen. Tätä kestää siihen asti, että pumppu on ladattu täyteen. |
|  | Ladattu täyteen | Palaa valkoisena                                                                                                                                                                                                                    |

## 6. Käyttöohjeet

### 6.1 Akun lataaminen

Lataa tuote ennen ensimmäistä käyttökertaa. Rintapumpulle virtaa syötetään sisäisestä ladattavasta litiumakusta.

Tuotteidemme mukana toimitetaan latauskaapeli (USB2.0 / Type-C) mutta ei virtasovitinta. Hanki virtasovitin itse ennen lataamista. Osta USB 2.0 -liitäntää vastaava virtasovitin ja varmista, että virtasovittimen syöttöteho on AC 100~240 V 50/60 Hz ja lähtöteho DC 5 V 1 A.


- Kun ensimmäinen akun merkkivalopalkki vilkkuu, akun varaus on vähissä ja käyttöaikaa on jäljellä 30 minuuttia. Lataa laite.
- Täyteen ladattua laitetta voidaan käyttää 8–9 pumppauskertaa (noin 270 minuuttia) 30 minuuttia kerrallaan.



Kuva 3

### Lataa akku seuraavasti:

- Aseta latauskaapelin USB-pää virtasovittimen USB-liitäntään.
- Työssä virtasovittimen pistoke pistorasiaan.
- Työnnä latauskaapelin Type-C-pää latausporttiin.

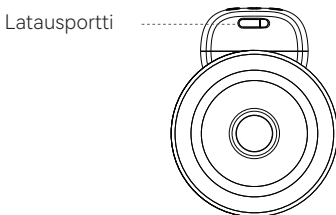

Kuva 4. Latausportin sijainti

Laite latautuu täyteen noin 150 minuutissa. Lataamisen aikana akun merkkivalot syttyvät yksitellen näyttäen akun varaustason (25 %, 50 %, 75 % ja 100 %), minkä jälkeen valot sammuvat ja tämä alkaa uudelleen. Tätä kestää siihen asti, että pumppu on ladattu täyteen. Kun akku on ladattu täyteen, neljä valoa palaa valkoisena.

Irrota virtasovitin pistorasiasta sekä irrota latauskaapeli virtalähteestä ja pääyksiköstä latauksen päättyttyä.



## Varoitus

- Rintapumppua ei saa käyttää lataamisen aikana!
- Latauskaapelia käytetään ainoastaan verkkosovittimen ja Momcozy-rintapumpun välillä lataamista varten. Älä liitä latauskaapelia muihin laitteisiin, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun!
- Jos virtasovittimen kotelo löystyy, irtoaa tai rispaantuu, lopeta virtasovittimen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä virtasovittimen valmistajaan.
- Jos latauskaapeli on vaurioitunut, katkenut tai rispaantunut, lopeta latauskaapelin käyttö välittömästi ja tilaa uusi kaapeli valmistajalta (yhteystiedot ovat tämän käyttöoppaan viimeisellä sivulla).
- Lopeta laitteen käyttö välittömästi, jos havaitset pumppuyksikön tai virtasovittimen savuavan tai palavan.



## Huomio:

Väärän sovittimen käyttäminen tai heikkolaatuisen sovittimen ostaminen voi heikentää laitteen turvallisuutta ja vahingoittaa omaisuutta ja terveyttä. Osta sovitin, joka täyttää IEC 60601-1- ja IEC 60601-1-2 -standardien vaatimukset, ja varmista, että virtasovittimen lähtöteho on DC 5 V 1 A.

## Huomiot:

- Jos täyteen ladatun akun käyttöaika on aiempaa lyhyempi, älä yritä vaihtaa akkua itse.
- Pyydä valmistajaa vaihtamaan akku. Akun purkaminen ja vaihtaminen itse saattaa vaurioittaa pääyksikköä ja akkua.
- Akun varaus purkautuu hitaasti, kun tuotetta ei käytetä pitkään aikaan. Lataa laite kolme kuukauden välein, jotta akku ei vaurioidu alhaisen jännitteen vuoksi.

## 6.2 Puhdistus ja desinfiointi

### 6.2.1 Yleinen kuvaus/vaatimus

Rintamaidon tarjoaminen auttaa tukemaan vauvan terveyttä ja kehittymistä. Voit ruokkia rintamaitoa vauvalle pumppaamalla maitoa. Pumpun osien puhtauden varmistaminen on äärimmäisen tärkeää, koska rintamaidossa tai pumpun osiin jäävissä rintamaidon jäämissä voi kasvaa nopeasti bakteereita. Näiden ohjeiden noudattaminen voi auttaa ehkäisemään kontaminaation ja suojaamaan vauvaa tartunnoilta. Jos vauvasi on keskosvauva tai jos hänellä on muita terveysongelmia, voit pyytää lisää suosituksia rintamaidon turvallisesta pumppaamisesta vauvan terveydenhuoltopalveluiden tarjoajalta.

## 1) ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖKERTAA

Tarkista ja kokoa puhdistettu pumppusarja.  
Puhdista pumpun moottori puhdistusliinoilla.

## 2) JOKAISEN KÄYTTÖKERRAN JÄLKEEN

Säilytä maito asianmukaisesti: Säilytä äidinmaitoa äidinmaidolle tarkoitetuissa säilytyspusseissa tai puhtaissa, elintarvikekäyttöön soveltuvissa astioissa. Käytä lasisia tai muovisia astioita, joissa on tiiviit kannet. Merkitse astioihin päivämäärä ja kellonaika ja aseta ne välittömästi jääkaappiin, pakastimeen tai jääpusseilla täytettyyn kylmälaukkuun. Puhdista pumppausalue: Puhdista pumpun moottori puhdistusliinoilla.



## 3) Puhdistettavat ja desinfioitavat osat

Puhdista ja desinfioi kaikki rinnan ja äidinmaidon kanssa kosketuksiin joutuvat osat ennen rintapumpun ensimmäistä käyttökertaa ja jokaisen käyttökerran jälkeen.

- Maidon kanssa kosketuksiin joutuvat osat: maidonkeräyssarjan osat, mukaan lukien rintasuppilo, linkitin, kalvo, venttiili ja maidonkerääjä.
- Ainoastaan rinnan ihon kanssa kosketuksiin joutuvat osat: rintasuppilo.

## 4) Ennen puhdistusta/desinfointia:

- Pese käsiä huolellisesti saippualla ja vedellä 20 sekunnin ajan.
- Pura kaikki osat seuraavasti:
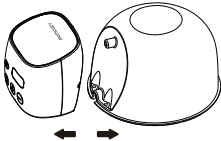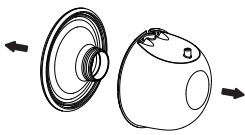
|                                                                                                  |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Kuva 5</p>  |  <p>Kuva 6</p>  |
| <p>1). Irrota pumpun moottori päärungosta.</p>                                                   | <p>2). Irrota rintasuppilo maidonkerääjästä.</p>                                                 |
|  <p>Kuva 7</p> |  <p>Kuva 8</p> |
| <p>3). Irrota linkitin maidonkerääjästä.</p>                                                     | <p>4). Irrota kalvo ja venttiili linkittimestä.</p>                                              |



## Huomio:

Älä koskaan aseta pääyksikköä, latauskaapelia tai sovitinta (jos olet ostanut sovittimen) veteen tai astianpesukoneeseen, sillä se vahingoittaa näitä osia pysyvästi.

## 6.2.2 Maidon kanssa kosketuksiin joutuvien osien puhdistus ja desinfiointi

### Vaihe 1: Puhdistus

Puhdista laite manuaalisesti! Tämä tuotteen puhdistamista ja desinfiointia astianpesukoneessa ei ole varmistettu turvallisesti.




### Varoitus

Älä puhdista rintapumpun osia antibakteerisilla tai hankaavilla puhdistusaineilla, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.

#### 1) Valmistelee seuraavat:

- saippua ja kuuma vesi
- juomavesi
- puhdas pesuallas, jota käytetään ainoastaan vauvojen ruokintatarvikkeiden puhdistamiseen
- puhdas harja, jota käytetään ainoastaan vauvojen ruokintatarvikkeiden puhdistamiseen
- käyttämätön tiskirätti tai talouspaperi


2) Huuhtelee: Poista maito- tai likajäämät huuhtelemalla maidonkeräyssarjan ja muiden ruokintatarvikkeiden osat juoksevan veden alla. Voit käyttää huuhtelemiseen lämmintä tai kylmää vettä.

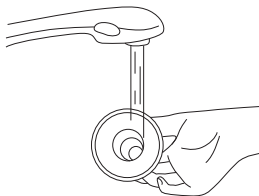

Kuva 9

### 3) Pese maidonkeräyssarjan osat:

- Aseta maidonkeräyssarjan osat puhtaaseen pesualtaaseen, jota käytetään ainoastaan vauvojen ruokintatarvikkeiden puhdistamiseen. Älä pese osia suoraan altaassa, koska se voi sisältää bakteereja, jotka voivat kontaminoida nämä osat.
- Liota maidonkeräyssarjan osia lämpimässä 40–60-asteisessa (104–140 °F) saippuavedessä 3~5 minuutin ajan.

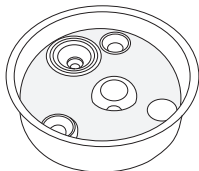


Kuva 10

- Puhdas harja, jota käytetään ainoastaan vauvojen ruokintatarvikkeiden puhdistamiseen.

4) Huuhtelee uudelleen: Huuhtelee osia juoksevan veden alla tai upottamalla ne veteen erillisessä altaassa, jota käytetään ainoastaan vauvojen ruokintatarvikkeiden puhdistamiseen. Jos osissa on edelleen likaa, toista vaihe 3 ja huuhtelee osat uudelleen, kunnes likaa ei ole enää näkyvissä.

5) Anna kuivua hyvin: Aseta maidonkeräyssarjan osat, pesuallas ja pulloharja puhtaan, käyttämättömän tiskirätin tai talouspaperin päälle lialta ja pölyltä suojattuun paikkaan. Älä kuivaa osia tiskirätillä, sillä se saattaa siirtää bakteereja osiin!

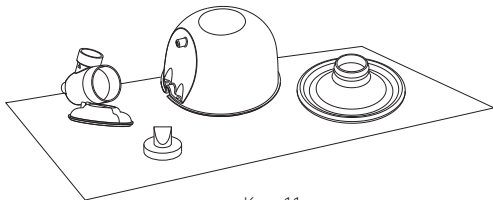

Kuva 11

**6) Puhdista pesuallas ja pulloharja:** Huuhtelee pesualtaat ja harja hyvin ja anna niiden kuivua jokaisen käyttökerran jälkeen. Pese ne muutaman päivän välein käsin saippualla ja lämpimällä vedellä. Jos vauva on alle kolmen kuukauden ikäinen, keskosvauva tai jos hänen immuunijärjestelmänsä on heikentynyt sairauden (kuten HIV) vuoksi, pese allas ja pulloharja jokaisen käyttökerran jälkeen.

**Puhdistamisen jälkeen:**

Voit poistaa bakteerit huolellisemmin desinfiomalla maidonkeräyssarjan osat, pesuallas ja pulloharja vähintään kerran päivässä niiden puhdistuksen jälkeen. Osat voidaan desinfioida kiehuvalla vedellä. Desinfiointi on erityisen tärkeää, jos vauva on alle kolme kuukauden ikäinen, keskosvauva tai jos hänen immuunijärjestelmänsä on heikentynyt sairauden tai lääkinnällisen hoidon vuoksi.

Katso lisätietoja maidon kanssa kosketuksiin joutuvien osien desinfiointista kohdasta 2.

**Vaihe 2: Desinfiointi**

**Huomio: Älä steriloi pumpun osia mikroaaltouunissa tai UV-sterilointilaitteessa.**

**Korkea lämpötila (> 110 °C) lyhentää osien käyttöikää ja aiheuttaa turvallisuusriskejä.**

Varmista ennen desinfiointia, että maidonkeräyssarja, pulloharjat ja pesualtaat on puhdistettu edellä kuvatulla tavalla. Desinfioi kaikki maidon kanssa kosketuksiin joutuvat osat (myös pulloharja ja pesuallas!) jollakin seuraavista menetelmistä.


1) Valmistele seuraavat:

- kattila
- juomavesi
- puhtaat pihdit

**Huomio:**

Estä pullon tai muiden osien joutuminen kosketuksiin kattilan reunojen kanssa desinfioidessasi osia kiehuvaan veteen. Tämä voi vaurioittaa tuotetta peruuttamattomasti.

2) Aseta purettu maidonkeräyssarja kattilaan ja täytä kattilaan niin paljon vettä, että desinfioitavat osat peittyvät. Anna veden kiehua 5–10 minuutin ajan ja varmista, että osat eivät kosketa kattilan reunoja.

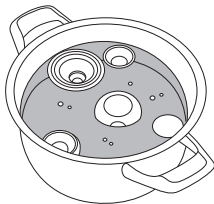


Kuva 12

3) Ota osat kattilasta puhtailla pihdeillä.



Kuva 13

4) Anna kuivua hyvin.

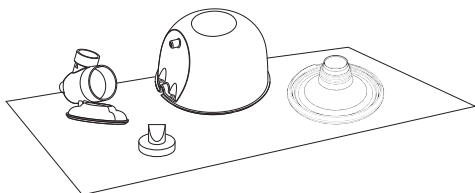

Kuva 14

Vaihe 3: Säilytä asianmukaisesti

Säilytä kuivia osia asianmukaisesti seuraavaa käyttökertaa varten. Varmista, että puhdistetut pumpun osat, pulloharjat ja pesualtaat ovat kuivuneet kunnolla ennen varastointia. Osien on oltava täysin kuivia, jotta niihin ei pääse kasvamaan bakteereja ja homeita. Estä osien kontaminoituminen säilyttämällä niitä puhtaassa paikassa.

1. Pese kädet: Pese kädet hyvin saippualla ja vedellä.
2. Kokoa osat: Kokoa puhtaat ja kuivuneet pumpun osat.
3. Säilytä asianmukaisesti: Aseta kootut pumpun osat ja muut tarvikkeet, pesuallas ja kuiva pulloharja puhtaaseen paikkaan, kuten suljettuun keittiökaappiin, jota käytetään vain puhtaiden astioiden säilyttämiseen.

## 6.2.3 Muiden osien puhdistaminen/desinfiointi

Pääyksikön pinta on puhdistettava ja desinfiotava ennen ensimmäistä käyttökertaa ja jokaisen käyttökerran jälkeen. Muut osat eivät joudu kosketuksiin ihmiskehon tai maidon kanssa pumppauksen aikana, joten ne on puhdistettava vain silloin, kun ne ovat likaisia.

Puhdista/desinfioi osat 5~40 °C:ssa seuraavasti:

### Valmisteile seuraavat:

- desinfiointiaine
- 70 % alkoholia sisältävät puhdistusliinat
- puhdas puhdistusliina

### Puhdistaminen:

1. Pese kädet desinfiointiaineella ennen osien puhdistamista.
2. Pyyhi kaikki vieraat aineet pääyksiköstä ja latauskaapelista puhtaalla ja pehmeällä liinalla.
3. Pyyhi osat 70 % alkoholia sisältävillä puhdistusliinoilla, kunnes näkyvää likaa ei ole enää havaittavissa.
4. Kuivaa laitetta huoneenlämmössä 10 minuutin ajan siten, että tuotteeseen jäänyt puhdistusliuos haihtuu.

### Desinfiointi:

Puhdista pääyksikön pinta edellä kuvatulla tavalla ennen desinfiointia.

1. Desinfioi pääyksikön pintaa 70-prosenttiseen isopropanoliin kostutetulla pehmeällä liinalla kolmen minuutin ajan.
2. Kuivaa pääyksikköä huoneenlämmössä 10 minuutin ajan siten, että tuotteeseen jäänyt desinfiointiliuos haihtuu.

## 6.3 Käyttöohjeet

### 6.3.1 Valmistelu ennen käyttöä




#### Huomio:

1. Pese kädet saippualla ja vedellä, ja tarkista ja kokoa puhdistettu pumppusarja.
2. Pumppauksen kesto:  
Tuotteelle virtaa syötetään ladattavasta litiumakusta. Täyteen ladattua laitetta voidaan käyttää 8–9 pumppauskertaa (noin 270 minuuttia) 30 minuuttia kerrallaan. Tyypillisesti pumppaus kestää noin 10–15 minuuttia rintaa kohti. Pumpkaa maitoa kuitenkin vain niin kauan kuin se on sinulle mukavaa ja maitoa heruu.

## 1. Valitse rintasuppilon koko

Tämän Momcozy-rintapumpun mukana toimitetaan vain 24 mm:n silikoninen rintasuppilo. Jos mukana toimitettava rintasuppilo ei sovi sinulle, erikokoisia rintasuppiloita ja lisäosia on ostettavissa Amazonista tai osoitteesta momcozy.com. Kirjoita hakupalkkiin "momcozy" ja etsi itsellesi sopivan kokoinen rintasuppilo ja lisäosa.

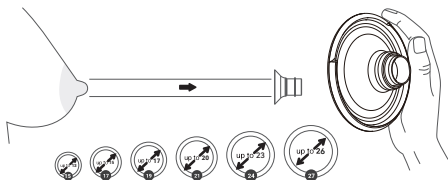


Kuva 15. Oikean koon valinta

## 2. Stimuloi nänniä

- Stimuloi nänniä siten, että se turpoaa täyteen kokoonsa (älä ohita tätä vaihetta!).
- Aseta nänni pienimpään reikään, johon se mahtuu helposti ilman pakottamista.
- Valitse reikä, joka mahtuu vaivattomasti nännin tyveen.
- Ota mitat kokotaulukon perusteella.

## 3. Testaa rintasuppilon sopivuutta

- Sijoita rintasuppilo oikeaan kohtaan rintaa, jotta voit löytää sopivan kokoinen rintasuppilon.
- Paina rintasuppiloa rintaa vasten, kunnes väliin ei jää rakoa. Varmista, että nänni on aivan rintasuppilon keskellä.

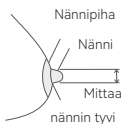

Kuva 16



Kuva 17

### Liian pieni

Liian pieni: tämä rintasuppilo on liian pieni, jos nänni hankaa pumppauksen aikana rintasuppilon sisäseinää vasten.

### Sopivan kokoinen

Sopiva koko: tämä rintasuppilo sopii sinulle, jos nänni liikkuu pumppauksen aikana sujuvasti hankaamatta tai koskettamatta rintasuppilon sisäseinämää ja lähes yhtään nännipihaa ei imetä rintasuppilon sisään.

### Liian suuri


Liian suuri: tämä rintasuppilo on liian suuri, jos suuri alue nännipihaa imetään rintasuppilon sisään pumppauksen aikana.

## 4. Valitse sopivat rintaliivit




Kuva 18

- ❶ Valmistettu joustavasta kankaasta
- ❷ Ei kaaritukea tai toppausta
- ❸ Avattava läppä
- ❹ Täysi peittävyys

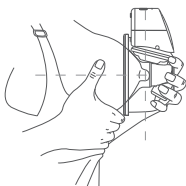

Kuva 19

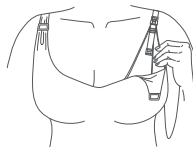

Kuva 20

### EI RAKOA

Kun asetat pumpun rintaliivien sisään, pumpun silikonisen rintasuppilon on painuttava tiukasti ihoa vasten ilman rakoa.

### JOS SE LIIKKUU

Jos huomaat, että pumppu liikkuu käytön aikana, säädä pumppua kiristämällä rintaliivien olkaisia tai valitse toiset rintaliivit.

## 5. Suositeltava asento



### Huomio:

Istu tai seiso pumppauksen aikana, jotta maitoa ei pääse valumaan. Tätä pumppua ei tule käyttää makuuasennossa tai nukkuessa, jotta pumppu pysyy oikeassa asennossa käytön aikana.

### ASENTO

Varmista, että pumppu ja maidonkerääjä pysyvät aina pystyasennossa. Muussa tapauksessa maitoa valuu.



Kuva 21. Oikea asento

## 6.3.2 Pumpun kokoaminen



### Huomio:

Varmista, että olet puhdistanut ja desinfioinut maidon tai rinnan kanssa kosketuksiin joutuvat rintapumpun osat.






### Varoitus


- Käsittele keittämällä desinfioituja rintapumpun osia varoen, sillä ne voivat olla todella kuumia. Vältä palovammat aloittamalla rintapumpun kokoaminen vasta, kun desinfioidut osat ovat jäähtyneet.
- Pese kädet huolellisesti saippualla ja vedellä, ennen kuin kosketat rintapumpun osia ja rintoja. Älä kosketa maidonkeräyssarjan sisäpuolta.

## Huomiot:

- Asianmukaisen alipaineen luominen edellyttää rintasuppilon, kalvon, maidonkerääjän, venttiilin jne. asianmukaista sijoittamista.
- Tarkista ennen jokaista käyttökertaa silmämääräisesti, onko yksittäisissä komponenteissa halkeamia, lohkeamia, repeämiä, värjäymiä tai vaurioita. Jos havaitset laitteessa vaurioita, lopeta laitteen käyttö, kunnes osat on vaihdettu.

Pese kädet huolellisesti saippualla ja vedellä. Kokoa sitten pumpppua seuraavasti:
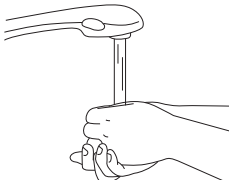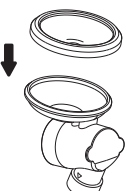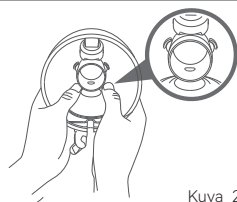
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Kuva 22</p>                                    |  <p>Kuva 23</p>                                                                                             |
| <p>1. Pese kädet huolellisesti saippualla ja vedellä.</p>                                                                           | <p>2. Kiinnitä silikonikalvo linkittimeen ja paina kevyesti sen reunaa, jotta silikonikalvo asettuu tiiviisti paikalleen linkittimeen.</p>                                                   |
|  <p>Kuva 24</p>                                   |  <p>Kuva 25</p>                                                                                            |
| <p>3. Liitä silikoniventtiili linkittimen päähän ja paina silikoniventtiiliä kevyesti, jotta se asettuu tiiviisti linkittimeen.</p> | <p>4. Aseta koottu linkitinosa maidonkerääjään ja kohdista linkittimen "korvan" lovi maidonkerääjän sisäisen uran kanssa. Paina silikonikalvo tiiviisti maidonkerääjän pyöreään reikään.</p> |
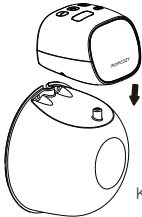
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Kuva 26</p>                           |  <p>Kuva 27</p>                                                          |
| <p>5. Liitä rintasuppilo päärunkoon. Paina rintasuppiloa peukaloilla siten, että se asettuu tiukasti reunan ympärille.</p> | <p>6. Aseta maidonkerääjässä oleva lieriömäinen kieleke pumpun moottorin reikään ja kohdista sitten maidonkerääjän ura pumpun moottorin loven kanssa.</p> |

Rintapumppu on nyt käyttövalmis.

### 6.3.3 Pumppausohjeet



#### Varoitus

- Vapauta alipaine kytkemällä rintapumppu pois päältä, ennen kuin otat pumpun pois rinnan päältä.
- Pumpkaa kerrallaan enintään viiden minuutin ajan, vaikka et onnistuisi pumppaamaan yhtään maitoa. Yritä saada maitoa herumaan toisena ajankohtana.
- Jos pumppaus tuntuu todella epämiellyttävältä tai kivuliaalta, lopeta pumpun käyttö ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.




#### Huomio:

- Maidon määrän seuraaminen pumppauksen aikana auttaa estämään ylitäyttymisen.

#### 1. Pumpun asettaminen paikalleen

a. Varmista ennen pumppaamista, että pumppu on asetettu tiukasti rintaa vasten ja että väliin ei ole jäänyt rakoa (kuva 28).

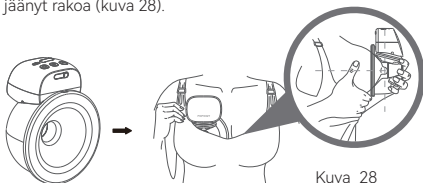


Kuva 28


b. Aseta pumppu paikalleen pitämällä rintasuppiloo rintaa vasten siten, että nänni näkyy rintasuppilon keskellä. Voit joutua nojautumaan eteenpäin.

c. Kun olet asettanut pumpun paikalleen, varmista ennen pumppauksen aloittamista, että nänni on rintasuppilon keskellä. Nännin kärki ei saa koskettaa rintasuppilon yläosaa, reunoja tai alaosaa. Jos nänni osuu rintasuppiloon, yritä uudelleen.

## Ensimmäisen persoonan kuvakulma

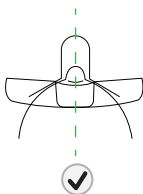

**Oikea asento**  
Maidon heruminen

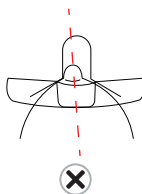

**Virheellinen asento**  
Yritä uudelleen

Kuva 29


## Huomautus:

Nännin oikea asento auttaa varmistamaan mukavan ja tehokkaan pumppauksen. Pumppauksen tuntuminen epämukavalta voidaan välttää asettamalla nänni oikein rintasuppiloon.

Katso kohta 7.3.1 Valmistelu ennen käyttöä – valitse rintasuppilon koko.

### 2. Pumpun asettaminen rintaliiveihin

Aseta pumppu rintaliiveihin ja varmista, että pumppu on painettu kunnolla rintaa vasten. Kiristä rintaliivejä tarvittaessa, jotta pumppu pysyy kunnolla paikallaan ja voit aloittaa pumppauksen.

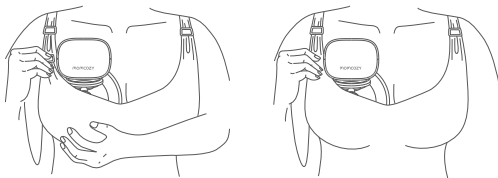

Kuva 30

### 3. Pumppauksen aloittaminen

Älä liu'uta pumpppua suoraan rintaliiveihin, vaan noudata vaihteittaisia ohjeita. Irrota laturi ennen käyttöä.

#### A. Käynnistä pumpppu

Kytke pumpppu päälle painamalla On / Off / Keskeytys -painiketta kahden sekunnin ajan.

- Pumpun ensimmäisellä käyttökerralla oletustila on yhdistelmätila.
- Alipaineen oletustaso on 1 (tällä hetkellä imutasoa osoittava LED-näyttö 1 näyttää tasoa 1).

#### B. Valitse toimintatila

Toimintatilat: Stimulointitila ja yhdistelmätila. Pumpun ensimmäisellä käyttökerralla oletusasetus on stimulointitilan imutaso 1.

Muistitoiminto: Pumpppu muistaa ja käynnistää seuraavalla käyttökerralla edellisen imutason ja toimintatilan.

Voit vaihtaa kolmen toimintatilan välillä painamalla toimintatilan valintapainiketta.

#### C. Valitse alipainetaso.

Momcozy-pumppussa on kussakin toimintatilassa yhdeksän alipaineasetusta, joista voit valita mukavimman ja tehokkaimman asetuksen.

Kun alipaine tuntuu nännissä, voit etsiä haluamasi asetuksen molemmissa toimintatiloissa säätämällä alipainetta lisäys- ja vähennyspainikkeilla. LED-näyttö sammuu, kun se on ollut käyttämättömänä 20 sekuntia. Voit käynnistää LED-näytön uudelleen painamalla mitä tahansa painiketta.

Vinkki: Suurempi alipaine ei aina tehosta maidon pumppausta. Nännin liiallinen rasitus voi vähentää maidon herumista. Pumppaa maitoa aina mukavalta tuntuvalla tasolla. Jos imu ei tunnu, varmista, että pumpppu on koottu oikein.



### Huomio:

- \* Momcozy-pumppua ei voi käyttää latauksen aikana. Irrota laite aina laturista ja sulje latausluukku ennen käyttöä.
- \* Momcozy-pumppua ei tule käyttää makuuasennossa, rasittuneena tai mahdollisesti haitallisen toiminnan aikana.
- \* Rintapumpun käyttäminen ei saa aiheuttaa kipua. Älä yritä saada maitoa herumaan liian suurella tai epämiellyttävällä alipaineasetuksella. Jos pumppaus on epämiellyttävää tai aiheuttaa kipua, lopeta pumppaus, katkaise tiiviste sormella nännin ympäriltä ja lopeta tuotteen käyttö.

### 4. Pumppauksen keskeyttäminen/aloittaminen


Jos haluat keskeyttää pumppauksen, paina virtapainiketta, jolloin toimintatilan merkkivalo alkaa vilkkua. Jos jatkaa pumppausta painamalla mitä tahansa painiketta.

## 5. Pumpun kytkeminen pois päältä

Kytke pumppu pois päältä painamalla virtapainiketta kahden sekunnin ajan. Lisäksi tuote sammuu automaattisesti 30 minuutin pumpppauksen jälkeen. Huomio: Pumpppauksen keskeyttäminen tai aloittaminen tai toimintatilan ja alipainetason valitseminen eivät käynnistä pumpppausaikaa alusta.

## 6. Pumpun irrottaminen

Katkaise sormellasi rintasuppilon ja rintakudoksen välinen tiiviste. Irrota pumppu rinnasta pumpppauksen jälkeen nojaamalla hieman eteenpäin. Estä maidon valuminen pitämällä rintasuppilon aukkopuoli ylöspäin.

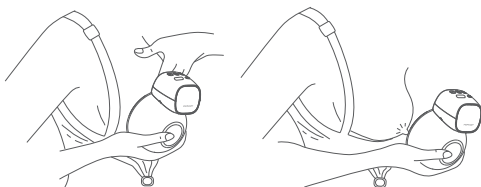

Kuva 31

Suosittellemme ylivuotojen välttämiseksi lopettamaan pumpppauksen, kun maitoa on kertynyt maidonkerääjään lähes 120 ml. Kaada pumpatut maidot muihin korkillisiin maidonkerääjiin tai maidon säilytyspusseihin. Kierrä toisen maidonkerääjän korkki tiukasti kiinni ja vie maito säilytykseen.



### Varoitus

- Tuotteen mukana toimitettavat maidonkerääjät on tarkoitettu maidon keräämiseen pumpppauksen aikana. Jos haluat ruokkia vauvaa tai säilyttää pumpattua rintamaitoa, käytä toista korkillista maidonkerääjää.



### Varoitus

- Jäähdytä tai pakasta pumpattu maito välittömästi tai säilytä sitä 16–25 °C:n lämpötilassa 2–4 tuntia ennen vauvan ruokkimista.

## 6.4 Rintamaidon säilyttäminen

### 6.4.1 Rintamaidon asianmukainen säilyttäminen

Pumpatun äidinmaidon turvallisuus ja laatu voidaan varmistaa noudattamalla suositeltuja säilytys- ja valmistustekniikoita.

Nämä ovat yleisiä rintamaidon säilytyslämpötiloja koskevia ohjeita.

Rintamaidon säilymiseen vaikuttavat monet eri tekijät, kuten maidon määrä, ympäristön lämpötila maitoa pumpattaessa, jääkaapin ja pakastimen lämpötilavaihtelut ja ympäristön puhtaus.

#### Pumpatun rintamaidon säilyttäminen:

- Jäähdytä tai pakasta maito mahdollisuuksien mukaan välittömästi pumpkauksen jälkeen. Maidon voi säilyttää jääkaapissa, eristetyssä kylmälaukussa tai pienissä erissä (2–4 unssia/0,5–1 dl) pakastimessa.
- Säilytä äidinmaitoa äidinmaidolle tarkoitetuissa säilytyspusseissa tai puhtaissa, elintarvikekäyttöön soveltuissa astioissa. Säilytä maitoa muovisissa tai lasisissa astioissa, joissa on tiiviit kannet.  
-- Älä säilytä maitoa pulloissa, joissa on kierrätysymboli 7, joka tarkoittaa, että pullo voi olla valmistettu BPA:ta sisältävästä muovista.  
Poista pakkauksesta ylimääräiset ilmat ennen sulkemista.
- Jäädytä pussit litteäksi. Estä pussien tarttuminen toisiinsa asettamalla palat talouspaperia pussien väliin.
- Älä koskaan säilytä rintamaitoa kertakäyttöisissä pullonsuojissa tai muovipusseissa, joita ei ole tarkoitettu rintamaidon säilytykseen.
- Sekoita rintamaidon kermainen osa, joka saattaa nousta pinnalle, takaisin maidon joukkoon pyörittelemällä astiaa kevyesti. Älä ravista maitoa. Tämä saattaa hajottaa joitakin maidon arvokkaista osista.
- Juuri pumpatun maidon säilytysolosuhteet:

| Rintamaidon tyyppi                                              | Säilytyspaikat ja -lämpötilat                                        |                              |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                 | Työtaso 25 °C (77 °F) tai kylmempi (huoneenlämpö)                    | Jääkaappi 4 °C (40 °F)       | Pakastin -18 °C (0 °F) tai kylmempi                      |
| Juuri pumpattu maito                                            | Enintään 4 tuntia.                                                   | Enintään 4 päivää.           | Suositus on 6 kuukautta<br>Enintään 12 kuukautta         |
| Pakastimesta sulatettu maito                                    | 1–2 tuntia                                                           | Enintään 1 päivä (24 tuntia) | Sulatettua rintamaitoa EI SAA KOSKAAN pakastaa uudelleen |
| Ruokinnasta jäljelle jäänyt maito, jota vauva ei jaksanut syödä | Käytä kahden tunnin kuluessa siitä, kun vauva on lopettanut syömisen |                              |                                                          |

Nämä ohjeet koskevat vain terveitä täysiaikaisia vauvoja. Keskosvauvat ja sairaat vauvat saattavat edellyttää erilaisia vaatimuksia. Kysy neuvoja terveydenhuollon ammattilaiselta.

### Säilytysvinkkejä:

- Merkitse maidon säilytysastiaan selkeästi pumpppauspäivä ja myös lapsen nimi, jos maito annetaan säilytettäväksi lastenhoitajalle.
- Älä säilytä rintamaitoa jääkaapin tai pakastimen ovelle. Tämä auttaa suojaamaan rintamaitoa oven avaamisen ja sulkemisen aiheuttamilta lämpötilan muutoksilta.
- Pakasta rintamaito heti pumpppauksen jälkeen, jos et usko sen tulevan käyttöön neljän päivän kuluessa. Tämä auttaa varmistamaan rintamaidon laadun.
- Rintamaidon pakastaminen:
- Pakasta maito pienissä erissä, jotta käyttämättömät maidot eivät mene hukkaan.  
Pakasta maito 2–4 unssin (0,5–1 dl:n) erissä tai kerta-annoksina.
- Jätä astiaan noin sentin verran ylimääräistä tilaa, sillä rintamaito laajenee jäätyessään.
- Rintamaitoa voi säilyttää eristetyssä kylmävaraajilla täytetyssä kylmälaukussa enintään 24 tunnin ajan matkan aikana. Määränpäässä voit käyttää maidon heti tai säilyttää sen jääkaapissa tai pakastimessa.

## 6.4.2 Rintamaidon asianmukainen sulattaminen

- Sulata aina vanhin rintamaito ensin. Muista käyttää aina vanhimmat maidon ensin. Rintamaidon laatu voi heikentyä ajan myötä.
- Rintamaidon voi sulattaa monella tapaa:
- jääkaapissa yön yli
- astiassa lämpimässä tai haaleassa vedessä
- haalean juoksevan veden alla
- Älä koskaan sulata tai kuumenna rintamaitoa mikroaaltouunissa. Lämmittäminen mikroaaltouunissa voi tuhota äidinmaidon ravintoaineita ja kuumentaa maidon osittain liian kuumaksi, mikä voi polttaa vauvan suun.
- Käytä jääkaapissa sulatettu rintamaito 24 tunnin kuluessa. Aloita 24 tunnin aikarajan laskeminen siitä hetkestä, kun rintamaito on täysin sulanut.
- Käytä huoneenlämpöön jätetty tai lämmitetty rintamaito kahden tunnin kuluessa.
- Sulatettua rintamaitoa ei saa koskaan pakastaa uudelleen.

## 7. Säilytysolosuhteet

### Pumpun säilyttäminen

- \* Lyhytaikainen säilytys
- \* Suojaa rintapumppu suoralta auringonvalolta. Säilytä rintapumppu ja sen lisävarusteet turvallisessa, puhtaassa ja kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
- \* Pitkäaikainen säilytys  
Voit pidentää pumpun käyttöikää lataamalla sen ennen pitkäaikaista varastointia. Estä pumpun värjättyminen suojaamalla se suoralta auringonvalolta. Puhdista ja kuivaa pestävissä olevat osat ennen varastointia.
- \* Lämpötila: -20 – 60 °C / -4 – 140 °F
- \* Suhteellinen kosteus: 15–90 %
- \* Ilmanpaine: 90–106 kPa

## 8. Tekniset tiedot

|                                   |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mallin numero                     | S9 Pro                                                                                                                                            |
| Nimi                              | Puettava rintapumppu                                                                                                                              |
| Tehovaatimukset                   | Syöttö: 5V $\overline{=}$ 1A<br>Teho: 5 W                                                                                                         |
| Virtalähde                        | DC 3,7 V/ 1600 mAh:n ladattava litiumakku                                                                                                         |
| Pumppu                            | Yksi pumppu                                                                                                                                       |
| Imutilat                          | Stimulointitila, puristustila, yhdistelmätila                                                                                                     |
| Alipainealue                      | Stimulointitila: -52 ~ -113 ( $\pm 5$ ) mmHg<br>Puristustila: -105 ~ -240 ( $\pm 5$ ) mmHg<br>Yhdistelmätila: -52 ~ -240 ( $\pm 5$ ) mmHg         |
| Syklinopeus                       | Stimulointitila: 50 ~ 120 ( $\pm 2$ ) sykliä/min<br>Puristustila: 23 ~ 57 ( $\pm 2$ ) sykliä/min<br>Yhdistelmätila: 6 ~ 16 ( $\pm 2$ ) sykliä/min |
| Pumpun mitat                      | 140 mm x 112 mm x 73 mm                                                                                                                           |
| Paino (sis. kaikki lisävarusteet) | 250 g                                                                                                                                             |
| Tuotteen käyttöikä                | 500 tuntia                                                                                                                                        |
| Melutaso                          | <50 dB                                                                                                                                            |
| Suojaustaso sähköiskua vastaan    | Sisäisellä virtalähteellä varustettu laite                                                                                                        |
| Käyttöolosuhteet                  | Lämpötila: 0–40 °C, ilmankosteus: 15–90 %, ilmanpaine: 70–106 kPa                                                                                 |
| Kuljetus- ja säilytysolosuhteet   | Lämpötila: -20–60 °C, ilmankosteus: 15–90 %, ilmanpaine: 70–106 kPa                                                                               |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Akun latausaika | 120 minuuttia |
| Akun käyttöaika | 150 minuuttia |

## 9. Huolto ja varaosat

Laite sisältää osia, jotka eivät ole käyttäjän huollettavissa. Tämän laitteen avaaminen tai peukaloitinta mitätöi takuun. Viallinen laite on lähetettävä korjattavaksi laitteen valmistajalle tai suoraan jälleenmyyjälle. Laitteeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia.

VALMISTAJA toimittaa pyynnöstä piirikaaviot, komponenttiluettelot, kuvaukset, kalibrointiohjeet tai muut tiedot, joiden avulla KORJAAJA voi korjata sellaiset laitteen osat, jotka VALMISTAJA on nimennyt KORJAAJAN korjaamaan. Akun varaus purkautuu hitaasti, kun tuotetta ei käytetä pitkään aikaan. Lataa laite kolme kuukauden välein, jotta akku ei vaurioidu alhaisen jännitteen vuoksi.



### Varoitus

Varoitus: litiumakkua ei saa vaihtaa ilman asianmukaista koulutusta, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Älä puhdista tai huolla käytössä tai latauksessa olevaa laitetta.

## 10. Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus: Shenzhen Root Innovation Technology Co., Ltd. vakuuttaa, että tämä laite täyttää LVD-direktiivin 2014/35/EU ja EMC-direktiivin 2014/30/EU olennaiset vaatimukset ja muut asiaa koskevat määräykset.

## 11. Vianmääritys

| Ongelmat        | Ratkaisut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pumppu ei toimi | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jos maito ei ole vielä alkanut herua, jatka pumppaamista ja seuraa, alkaako maito herua viiveellä. Huomautus: Maidon heruminen on yksilöllistä, ja siihen vaikuttavat monet eri tekijät.</li> <li>Tarkista nännin asento, keskeytä pumppaus ja ota pumppu pois rinnalta. Aseta pumppu takaisin paikoilleen alla kuvatulla tavalla.</li> <li>Rintasuppilo saattaa olla väärän kokoinen (katso lisätietoja kohdasta 7.3 Käyttöohjeet – valitse rintasuppilon koko).</li> </ul> |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maito ei heru                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keskeytä pumpppaus ja ota pumpppu pois rinnalta. Aseta pumpppu takaisin paikoilleen oikealla tavalla. (Katso lisätietoja kohdasta 7.3 Käyttöohjeet – Pumpun asettaminen paikalleen).</li> <li>• Voit myös kokeilla irrottaa pumpun rintasuppilosta ja koota pumpun sitten uudelleen. Aseta sitten nänni rintasuppilon keskelle ja aseta pumpppu rintaa vasten (katso lisätietoja kohdasta 7.3 Käyttöohjeet – Pumpun asettaminen paikalleen).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pumpppu on asetettava paremmin paikoilleen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keskeytä pumpppaus ja ota pumpppu pois rinnalta. Aseta pumpppu takaisin paikoilleen oikealla tavalla. (Katso lisätietoja kohdasta 7.3 Käyttöohjeet – Pumpun asettaminen paikalleen).</li> <li>• Voit myös kokeilla irrottaa pumpun rintasuppilosta ja koota pumpun sitten uudelleen. Aseta sitten nänni rintasuppilon keskelle ja aseta pumpppu rintaa vasten (katso lisätietoja kohdasta 7.3 Käyttöohjeet – Pumpun asettaminen paikalleen).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kipu pumpppauksen aikana                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jos pumpppaus aiheuttaa kipua, kokeile seuraavia vinkkejä (katso lisätietoja kohdasta 7.3 Käyttöohjeet – Pumpun asettaminen paikalleen):</li> <li>• Paina Momcozy-pumppua tiukasti rintaa vasten stimulointivaiheen aikana.</li> <li>• Kiristä rintaliivejä, jotta Momcozy-pumpppu pysyy tiukasti rintaa vasten.</li> <li>• Pienennä imutehoa.</li> <li>• Aseta Momcozy-pumpppu takaisin paikoilleen.</li> <li>• Pumpppaus on saattanut kestää liian kauan. Momcozy-pumpppu sammuu automaattisesti 30 minuutin jälkeen.</li> <li>• Rintasuppilo saattaa olla väärän kokoinen (katso lisätietoja kohdasta 7.3 Käyttöohjeet – valitse rintasuppilon koko). Lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteyttä ammattilaiseen tai imetyksen asiantuntijaan.</li> </ul> |
| Heikentynyt imuteho                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pumpussa on yhdeksän imuasetusta. Lisää imutehoa painamalla lisäyspainiketta.</li> <li>• Tarkista pestävien osien kunto. Osat on vaihdettava kolmen kuukauden käytön jälkeen.</li> <li>• Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, kokeile seuraavaa:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarkista, että kaikki pestävät osat on kiinnitetty asianmukaisesti.</li> <li>2. Tarkista silmämaisesta kaikki pestävät osat ja vaihda vaurioituneet osat.</li> <li>3. Tarkista, että virta on kytketty päälle.</li> <li>4. Paina pumppua tiukasti rintaa vasten.</li> </ol> </li> </ul>                                                                                                                                                                |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pumppaus loppui                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pumppaus loppuu automaattisesti 30 minuutin kuluttua.</li> <li>• Virtapainikkeen painallus keskeyttää pumppauksen. Voit jatkaa pumppausta painamalla painiketta uudelleen.</li> </ul>                                                                       |
| Pumppu ei lopeta pumppausta                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paina On / Off / Keskeytys -painiketta.</li> <li>• Jos ongelma jatkuu, tiiviste voidaan katkaista asettamalla sormi rintakudoksen ja rintasuppilon väliin. Kytke sitten pumppu pois päältä painamalla On / Off / Keskeytys -painiketta.</li> </ul>          |
| Pumppu tai laturi on kastunut (uponnut veteen) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuivaa pumppu välittömästi. Aseta pumppu pystyasentoon siten, että latausportti osoittaa alaspäin ja imusäätimet ylöspäin. Anna pumpun sitten kuivua yön yli. Älä käytä pumppua ja laturia 24 tuntiin.</li> <li>• Ota yhteyttä asiakaspalveluun.</li> </ul> |
| Pumppu ei lataudu.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varmista, että USB Type-C -latauskaapeli on liitetty asianmukaisesti pumpun latausporttiin.</li> </ul>                                                                                                                                                      |

Huomio: Jos ongelma ei ratkea näillä vinkeillä, ota yhteyttä valmistajaan (katso lisätiedot viimeiseltä sivulta).

## 12. Hävittäminen



Älä hävitä käytöstä poistettavaa tuotetta tavanomaisen kotitalousjätteen seassa. Toimita laite elektroniikkalaitteiden ja akkujen kierrätyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu voi aiheuttaa haitallisia ympäristövaikutuksia. Virheellinen hävitystapa voi kerryttää haitallisia myrkkyjä ilmaan, veteen ja maaperään, mikä on haitallista ihmisten terveydelle. Velvollisuutesi on hävittää laite oikein. Saat lisätietoja tuotteen hävittämisestä paikallisilta viranomaisilta.

## 13. Takuu

Takuuvaatimukset tulee esittää tuotteen valmistajalle (yhteystiedot löytyvät tämän käyttöoppaan viimeiseltä sivulta). Jos lähetät laitteen tutkittavaksi, liitä mukaan kopio kuitista ja selkeä kuvaus viasta.

Takuuehdot:

1. Laitteelle on myönnetty yhden vuoden takuu ostopäivästä alkaen. Takuuvaatimusta esitettäessä ostopäivä on todistettava kuitilla tai laskulla.
2. Takuukorjaukset eivät pidennä laitteen tai varaosien takuuaikaa.
3. Takuu ei kata seuraavia tapauksia:
  - kaikki väärinkäytöstä, kuten käyttöohjeiden laiminlyönnistä, aiheutuvat vahingot
  - kaikki asiakkaan tai luvattoman kolmannen osapuolen tekemistä korjauksista tai peukaloinneista johtuvat vahingot
  - vahingot, jotka syntyvät kuljetuksessa valmistajalta kuluttajalle tai kuljetuksen aikana huoltokeskukseen
  - lisävarusteiden normaali kuluminen
  - laitteen luvattomasta purkamisesta aiheutuvat vahingot
  - vastuu laitteen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista on rajattu soveltamisalan ulkopuolelle, vaikka laitteen vahinko hyväksyttäisiin takuuvaatimuksena.

## 14. Matkustamista tai kansainvälistä käyttöä koskeva lausunto

Älä käytä Momcozy-rintapumppua matkan aikana epävarmoissa ja epävakaisissa ympäristöissä, kuten lentokoneessa, sillä ulkoinen ympäristö voi vaikuttaa laitteen toimintaan.

Momcozy-rintapumppua voi käyttää ympäri maailmaa. Sitä on kuitenkin käytettävä ja säilytettävä tässä käyttöoppaassa kuvatussa ympäristössä. Varmista, että virtasovittimen syöttöteho on AC 100~240 V 50/60 Hz ja lähtöteho DC 5 V 1 A. Käytä tarvittaessa muuntajaa, jolla voit muuntaa jännitteen vastaamaan kohdemaan jännitettä. Varmista seuraavasti, että Momcozy-rintapumppu ei ole vahingoittunut matkan aikana:

- Tarkista, että Momcozy-rintapumppu ei ole vahingoittunut. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että Momcozy-rintapumppu toimii asianmukaisesti. Jos rintapumppu toimii poikkeavalla tavalla, lopeta käyttö.

## 15. Valmistajan tiedot

Valmistaja: Shenzhen Root Innovation Technology Co., Ltd.

Osoite: #2-201, Floor 2, Hasee Computer Building, No.2 Beier Rd, Bantian Street, Longgang, Shenzhen, Guangdong, Kiina, 518129

Sähköposti: support@momcozy.com

Jos tarvitset laitteen käyttöönottoon, käyttöön tai huoltoon liittyviä neuvoja tai jos haluat ilmoittaa odottamattomasta toiminnasta tai tapahtumista, ota meihin yhteyttä.