

# 正面

120mm

## MOMCOZY Tire-lait portable

**Consignes d'installation** (voir le manuel d'utilisation pour plus de détails)

\*Assurez-vous d'avoir les mains propres avant de procéder à l'installation.

1. Connectez la membrane et la valve à l'élément de liaison.




2. Reliez l'élément de liaison assemblé au collecteur de lait.




Alignez l'« oreille » avec la rainure

3. Reliez la bride au collecteur de lait.

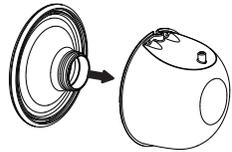


4. Assemblez la pompe et le collecteur de lait.

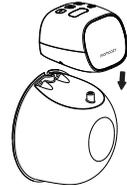


### Versement du lait

Tenez le collecteur de lait dans le bon sens lorsque vous versez le lait.

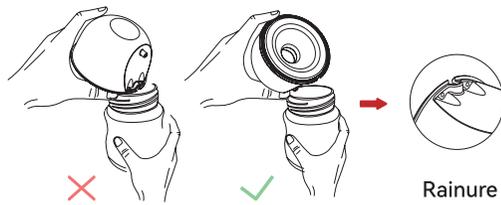

Rainure


Veillez consulter la vidéo de dépannage pour obtenir d'autres solutions en cas de problème survenant lors de l'installation ou de la séance de pompage.  
Pour accéder à la vidéo de dépannage, scannez le code QR.

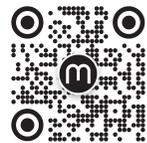

# 反面

## Conseils pour éviter les fuites de lait et astuces de pompage pour tirer plus de lait maternel

1. Penchez-vous en avant pour vous assurer que votre mamelon est centré dans le canal de la bride. Le tire-lait doit être fermement appliqué contre votre sein.

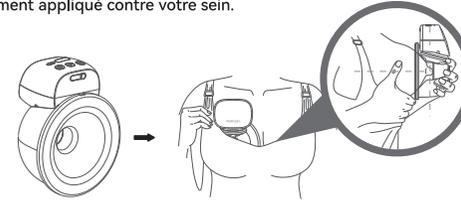

2. Nous recommandons aux utilisatrices de porter un soutien-gorge d'allaitement couvrant tout le corps afin de former un joint étanche entre leurs seins et la bride.

3. Veillez à ce que le tire-lait soit correctement assemblé.

4. Lors du pompage, veuillez vous tenir assise ou debout, et non allongée.

## Nettoyage et stérilisation

\*Pièces non lavables :



Moteur de la pompe

\*Pièces lavables :



Collecteur de lait



Téterelle



Membrane



Élément de liaison



Valve

Nous recommandons d'utiliser de l'eau savonneuse (40-60 °C) pour nettoyer les pièces lavables pendant 3 à 5 minutes.

Pour la stérilisation, utilisez de l'eau bouillante / de la vapeur / un pot de stérilisation, dont la température ne dépasse pas 100 °C (212 °F). Faites bouillir et stérilisez les pièces pendant 5 à 10 minutes.

\*Il n'est pas recommandé de stériliser les accessoires du tire-lait au micro-ondes, ce qui réduirait la durée de vie des accessoires.

## Astuces :

- La durée de vie prévue des pièces lavables est de 1 à 3 mois. Il est recommandé de remplacer les pièces lavables après un stockage prolongé ou avant de tirer le lait pour votre prochain enfant.
- Le tire-lait s'arrête automatiquement après 30 minutes de pompage. En cas d'irritation ou d'inconfort, cessez d'utiliser le tire-lait et consultez un professionnel de la santé.

Si vous avez des questions, veuillez contacter par E-mail.

[support@momcozy.com](mailto:support@momcozy.com)

150mm