

RESMED

AutoSet™ CS-A

ADAPTIVE SERVO-VENTILATOR



Welcome Guide

Norsk

Velkommen

Takk for at du valgte AutoSet CS-A. Les Velkommen og Informasjon-veilederne i sin helhet før du bruker enheten.



En oversikt over AutoSet CS-A

AutoSet CS-A-systemet inneholder følgende elementer:

- AutoSet CS-A-enhet
- Luftslange
- 90 W strømforsyningsenhet
- S9-reiseveske
- SD-kort
- Beskyttende mappe for S9 SD-kort.

Ekstrakomponenter inkluderer:

- H5i-fukter med oppvarming
- Standard luftslange
- SlimLine luftslange
- 3 m luftslange
- ClimateLine luftslange med oppvarming
- ClimateLine^{MAX} luftslange med oppvarming
- 30 W strømforsyningsenhet (støtter ikke H5i)
- Batteripakke for Power Station II
- Likestrøm/likestrøm-omformer 24 V/90 W.

Å reise med AutoSet CS-A

Når du reiser kun med AutoSet CS-A:

- Pass på at du pakker SlimLine eller Standard luftslange, ettersom ClimateLine eller ClimateLine^{MAX} luftslange med oppvarming ikke er utformet for å kobles direkte til enheten.
- Pass på at du kjøper og har med deg med den godkjente strømledningen for den regionen der du skal bruke enheten.



Klargjøring

1. Koble likestrømskontakten på strømforsyningsenheten til baksiden på enheten.
2. Koble strømledningen til strømforsyningsenheten.
3. Sett den andre enden av strømledningen inn i strømuttaket.
4. Koble den ene enden av luftslangen godt til lufttuttaket.
5. Koble det monterte maskesystemet til den ledige enden av luftslangen.

Merknader:

- Pass alltid på at AutoSet CS-A plasseres et sted der alarmlampeindikatorene er godt synlige.
- Se brukerveiledningen for masken for informasjon om montering av masken.
- Informasjon om anbefalte masker er tilgjengelig på www.resmed.com på siden Products (produkter) under Service & Support (service og støtte).

Grunnleggende om AutoSet CS-A

Tast:

Hjem



Fuktighetsnivå



Rampe



Slange med
oppvarming



Climate Control



Start/Stop



Innstillingshjul



Alarmdemping



Oppsett-meny



Informasjonsmeny



Oppsett-meny*

Lar deg endre innstillinger eller gå ut
av menyen.

Informasjonsmeny*

Lar deg se din søvnstatistikk eller gå
ut av menyen.

LCD-skjerm

Viser menyer, behandlingsskjermer
og påminnelser.

Start/stopp- knapp

Starter eller
stopper
behandlingen.

Alarmdemping

Trykk en gang for
å dempe alarmer.
Trykk en gang til for
å avslutte demping.

Innstillingshjul

Ved å dreie på hjulet kan du bla gjennom
menyen og endre innstillinger. Ved å trykke
på hjulet kan du gå inn på en meny og
bekrefte valg.

Alarm- og behandlingsslamper

Gul – blinker under en alarm. Blå –
lyser under behandling (hvis aktivert
av lege).

*Informasjon- og Oppsett-menyen er deaktivert hvis S9 Essentials har blitt
aktivert av kliniker.

Justere rampetiden

Rampetiden er perioden hvor trykket øker fra et lavt starttrykk til behandlingstrykket og er konstruert for å gjøre begynnelsen av behandlingen mer behagelig. Slik justerer du rampetiden:



1. Fra HJEM-skjermbildet dreier du på  til skjermbildet for RAMPE vises i blått.
2. Trykk på . Utvalget er uthøvet i oransje.
3. Drei på  til rampetiden du trenger, vises.
4. Trykk på  for å bekrefte valget.

Å bruke Masketilpasning

Du kan bruke Masketilpasning for å få masken til å sitte godt. Denne funksjonen tilfører CPAP-trykk i tre minutter før du starter behandlingen. I denne perioden kan du kontrollere og justere hvordan masken sitter, slik at lekkasje begrenses.

1. Ta på masken som beskrevet i brukerveiledningen for masken.
2. I HJEM-skjermbildet trykker du og holder  inne i tre sekunder.

Et av de følgende MASKETILP-skjermbildene vises:



3. Hvis det trengs, justerer du masken, maskeputen og hodestroppen til Masketilpasningen viser God. Etter tre minutter går trykket tilbake til det innstilte trykket, og behandlingen starter. Du kan avslutte Masketilpasning når som helst ved å trykke på .

S9 Essentials


S9 Essentials er utformet for å gjøre interaksjon med anordningen og meny navigering enklere for deg. Hvis S9 Essentials er aktivert av kliniker, deaktiverer den informasjons- og oppsettsfunksjonen slik at du ganske enkelt kan starte og stoppe behandlingen og justere rampe, fukting og Climate Control.

Velge masketype

Slik velger du masketype:



1. Trykk på . INNSTILLINGER-skjermbildet vises.

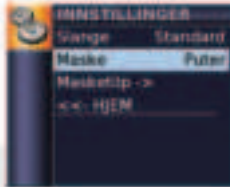

2. Dreii på  til masken vises i blått.




3. Trykk på . Utvalget er uthevet i oransje.



4. Dreii på  til maskeinnstillingen du trenger, vises.



5. Trykk på  for å bekrefte valget.

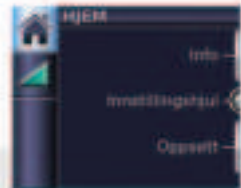

6. Trykk på  for å gå tilbake til HJEM-skjermbildet.

Merk: Det er ikke mulig å velge masketypen hvis S9 Essentials har blitt aktivert av kliniker.



Komme i gang

1. Kontroller at strømmen er koblet til.
2. Juster rampetiden eller fuktighetsnivået ved behov.
3. Ta på masken som beskrevet i brukerveiledningen for masken.
4. For å starte behandlingen puster du ganske enkelt inn i masken og/eller trykker på .
5. Legg deg ned og legg luftslangen slik at den kan beveges fritt hvis du snur deg mens du sover.
6. Behandlingen stanses når som helst ved å ta av deg masken og/eller trykke på .

Merknader:

- Hvis legen har aktivert SmartStart, starter enheten automatisk når du puster inn i masken, og den stopper automatisk når du tar av deg masken.
- Ved strømbrytning under behandling starter enheten automatisk opp behandlingen på nytt når strømmen er tilbake.

Visning av behandlingsskjermene

Avhengig av hvordan systemet er konfigurert og av hvilken modus som er valgt, får du se et av de følgende eksempelskjermene når behandlingen har startet:




- ✓ H5i-fukter




- ✓ H5i-fukter
- ✓ ClimateLine/ClimateLine^{MAX}
- ✓ Climate Control – Auto



- ✓ H5i-fukter
- ✓ ClimateLine/ClimateLine^{MAX}
- ✓ Climate Control – Manuell

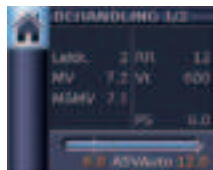

- ✓ Behandlingsdata med valgfritt tilbehør

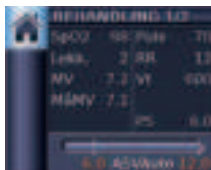

- ✓ Oksymetridata via oksymeteradapteren

Trykksøylen er merket med faste, loddrette linjer som viser ekspirasjons- og inspirasjonstrykk. Mens behandlingen rampes (vises av et oransje rampeikon) eller er variabel, vises trykkverdiene i oransje. Når en innstilt verdi er nådd, vises disse verdiene i hvitt.

I CPAP-modus vises kun det innstilte trykket.


I ASV-modus viser de faste, loddrette linjene på trykksøylen minimums- og maksimumstrykk.

I ASVAuto-modus oppdateres ekspirasjons- og inspirasjonsverdiene som vises på trykksøylen, kontinuerlig.


Visning av Informasjonsmenyen

Informasjonsmenyen har en rekke skjermbilder som viser din søvnkvalitet, søvnrapport og betjeningsinformasjon.


For visning av Informasjonsmenyen, trykk  fra HJEM-skjermbildet.

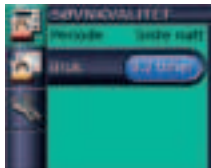

- ✓ I Søvnkvalitet-skjermbildet kan du alltid se hvor mange timer du brukte på forrige økt, og hvis det er aktivert av legen, vises Masketilpasnings- og AHI-data.

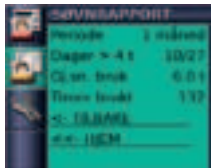

- ✓ På Søvnrapporten kan bare perioden endres – andre verdier er kun til visning.

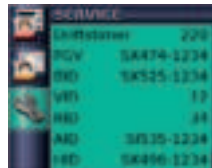


- ✓ I Service-informasjon vises enhetens totale driftstimer (inkludert oppvarmings-/ nedkjølingstider for luftfukteren), samt programvareidentifikasjoner.

For å gå tilbake til HJEM-skjermbildet, trykk .

Vise alarmer

AutoSet CS-A er utstyrt med en alarmmodul som kontinuerlig overvåker både behandlings- og enhetstilstandene. Alarmer aktiveres bare når behandling pågår. En alarmtilstand indikeres av en hørbar lyd, en blinkende, gul alarmlampe og en melding på skjermen. Når enheten er slått på, blinker den gule alarmlampen og alarmen lyder for å bekrefte at alarmen virker.

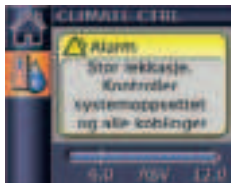

✓ Alarm aktivert

Når en alarm aktiveres, vises en tilhørende alarmmelding. Hvis flere alarmer er aktive, vises den siste alarmmeldingen. Når disse er avklart, kan hver enkelt melding leses.



✓ Alarm avklart

For å avklare en alarmmelding, trykk på . Da kan du gå tilbake til forrige skjermbilde. Hvis alarmtilstanden vedvarer, slår alarmen seg på igjen.

Merknader: Strømsvikt- og Alarmsviktalarmer avklares ved at det trykkes på .



✓ Flere alarmer

For å se listen over alarmmeldinger går du til Behandlingsskjermbildet og trykker på  til Behandlingsskjermbilde 2 vises.

Dempe alarmen

Trykk på  én gang for å dempe en alarm i to minutter. Hvis tilstanden vedvarer, lyder alarmen igjen etter to minutter. Trykk på  en gang til for å slå på alarmen igjen. Alarmlampen vil lyse så lenge tilstanden varer.

Rengjøring og vedlikehold

Det skal regelmessig utføres rengjøring og vedlikehold som beskrevet i dette kapittelet. Se brukerveiledningene for masken og luftfukteren for å få detaljerte instruksjoner om stell av de enhetene.

Daglig

Koble fra luftslangen ved å trekke i fingergrepene på mansjetten. Heng den på et rent, tørt sted til neste gang den skal brukes.

Merknader:

- *Heng ikke luftslangen i direkte sollys, da dette kan føre til at slangen over tid blir hard og til slutt sprekker.*
- *Luftslangen må ikke vaskes i vaskemaskin eller oppvaskmaskin.*

Ukentlig

1. Fjern luftslangen fra enheten og masken.
2. Vask luftslangen i varmt vann med et mildt vaskemiddel.
3. Skyll grundig og heng opp til tørk.
4. Før neste gangs bruk, koble luftslangen til luftuttaket og masken.

Månedlig

1. Tørk av utsiden av enheten med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel.
2. Kontroller om luftfilteret har hull og er tilstoppet med smuss eller støv. Skift ut luftfilteret ved behov.

Skifte luftfilteret

Skift luftfilteret hver sjetten måned (eller oftere om nødvendig).

1. Fjern luftfilterdekslet fra baksiden av enheten.
2. Ta ut og kasser det gamle luftfilteret.
3. Sett inn et nytt ResMed-luftfilter og kontroller at det sitter flatt i luftfilterdekslet.
4. Sett på luftfilterdekslet.

Merknader:

- *Pass på at luftfilteret og luftfilterdekslet er montert til enhver tid.*
- *Ikke vask luftfilteret. Luftfilteret er ikke vaskbart eller gjenbrukbart.*

Luftfilterdeksel

Luftfilter



SD-kort

Et SD-kort følger med for innsamling av behandlingsdata fra enheten og for å gi innstillingsoppdateringer fra legen. Når du får beskjed om det, kobler du enheten fra strømuttaket, fjerner SD-kortet, setter det inn i den beskyttende mappen og sender det til legen din.

Ta ut kort

1. Trykk inn SD-kortet for å løse det ut.
2. Ta ut kortet.
3. Sett kortet i den beskyttende mappen.
4. Send den beskyttende mappen tilbake til legen som anvist.

For ytterligere informasjon om å fjerne og sette inn kortet, se Beskyttende mappe for S9 SD-kort som leveres sammen med enheten. Ta vare på den beskyttende mappen for S9 SD-kortet for fremtidig bruk.



Merknader:

- Se informasjonsveiledningen for å få feilsøkinginformasjon.
- Se www.resmed.com for å få mer produktinformasjon.



368901-nor/2 2017-11
AutoSet CS-A
WELCOME
EUR2/APAC



Manufacturer: ResMed Pty Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia.

See www.resmed.com for other ResMed locations worldwide.

For patent information, see www.resmed.com/ip.

S9, AutoSet CS, H5i, ClimateLine, SlimLine and SmartStart are trademarks of ResMed. S9, ClimateLine, SlimLine and SmartStart are registered in U.S. Patent and Trademark Office.

© 2017 ResMed.

CE 0123