



08

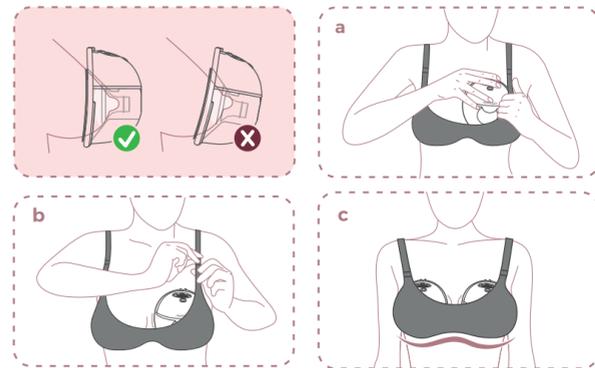

Assicurarsi che il tiralatte si adatti perfettamente al seno, senza lasciare spazi.

09

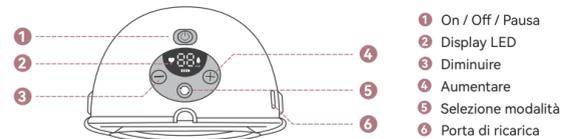


- 1 On / Off / Pausa
 - 2 Display LED
 - 3 Diminuire
 - 4 Aumentare
 - 5 Selezione modalità
 - 6 Porta di ricarica
- * Tenere premuto a lungo per attivare/ disattivare;
 * Premere brevemente per mettere in pausa / continuare la sessione di pompaggio.
 * **Stimolazione:** schema di suzione rapido e breve per iniziare a far fluire il latte.
 * **Estrazione:** schema di suzione lento per l'estrazione del latte.
 * **Misto:** schema di suzione rapido e corto seguito da uno schema di suzione lento e lungo.

09



10

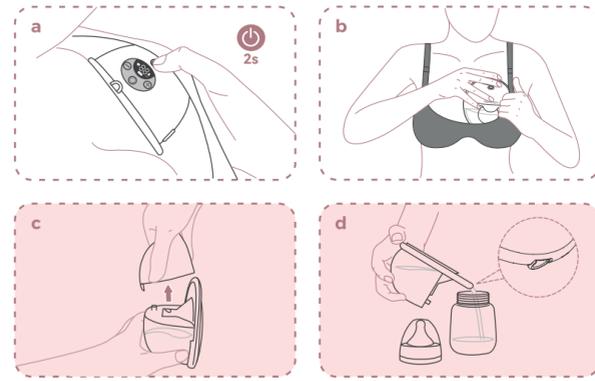

momcozy
www.momcozy.com

momcozy

Tiralatte indossabile

M5



Guida per l'utente

Manuale d'uso




Guide per la misurazione del capezzolo




Se avete domande, contattateci via e-mail.
support@momcozy.com

01

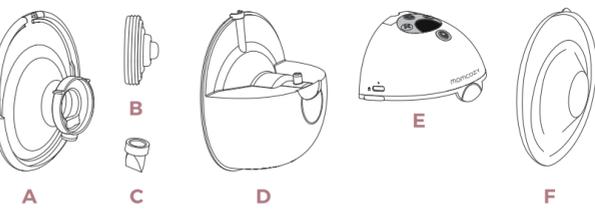


- A Flangia a doppia tenuta da 24 mm
- B Membrana
- C Valvola
- D Raccogliatore del latte (160 ml)
- E Motore del tiralatte
- F Parapolvere


02

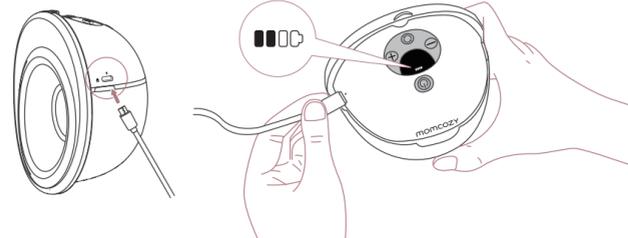

03

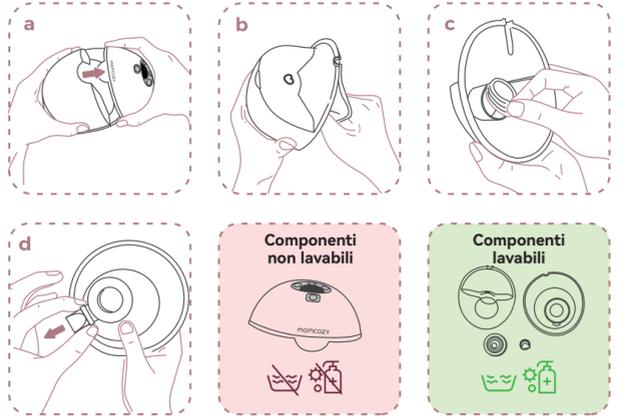


04

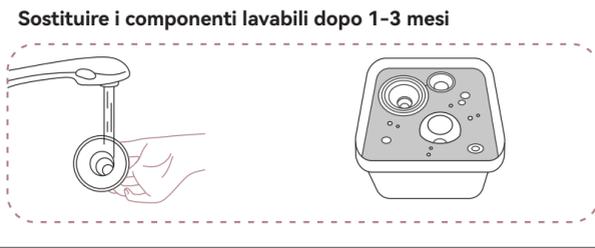

05



06

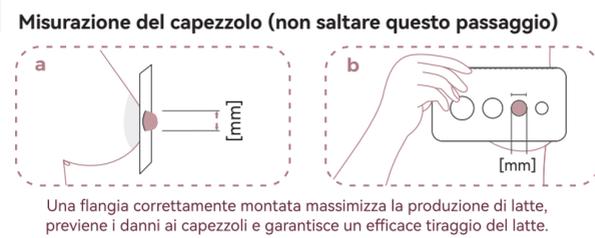

06



07

