


momcozy

Nositelná odsávačka
mateřského mléka

V1 Pro

Model number: BP137

Uživatelská příručka

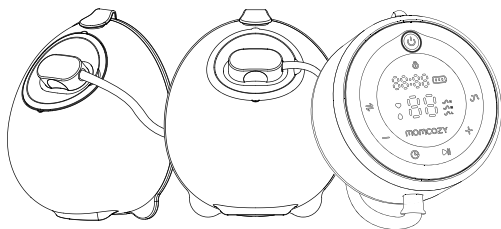

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtete tuto uživatelskou příručku a tuto příručku si uschovejte pro budoucí potřebu.

→ ČESKY

OBSAH

1. Představení výrobku - - - - -	01
2. Výstražné pokyny a bezpečnostní opatření - - - - -	01
3. Kontraindikace - - - - -	02
4. Bezpečnostní informace - - - - -	02
5. Popis výrobku - - - - -	05
6. Provozní pokyny - - - - -	08
7. Přesun - - - - -	27
8. Podmínky skladování - - - - -	27
9. Specifikace - - - - -	27
10. Údržba a náhradní díly - - - - -	28
11. Prohlášení o shodě - - - - -	29
12. Řešení problémů - - - - -	29
13. Likvidace - - - - -	31
14. Záruka - - - - -	31
15. Prohlášení o používání na cestách nebo v zahraničí - - - - -	31
16. Informace o výrobci - - - - -	32
17. Důležité bezpečnostní informace - - - - -	32

1. Představení výrobku

Nositelná odsávačka mateřského mléka Momcozy je určena kojícím ženám k odstříkávání a sběru mléka z prsou. Nositelná odsávačka mateřského mléka Momcozy vytváří kolem bradavky podtlak, který umožňuje odstříkávání mateřského mléka. Mléko se shromažďuje ve sběrné nádobce mléka.

Přístroj zahrnuje režim stimulace, režim odsávání a smíšený režim. V režimu stimulace začne odsávačka mléka rychlým a krátkým sáním, aby mléko začalo téct. V režimu odstříkávání začíná odsávačka pomalým sáním pro odstříkávání mléka, přičemž odsává hlouběji a pomaleji. Ve smíšeném režimu začne odsávačka mateřského mléka rychlým a krátkým sáním a poté pomalým a dlouhým sáním. Aby se zabránilo vtékání mléka do vakuového systému, obsahují sady pro sběr mléka silikonovou membránu, která fyzicky odděluje dráhu kontaktu s mlékem od vakuového systému.

Zařízení je určeno pro jednoho uživatele.

2. Výstražné pokyny a bezpečnostní opatření

Výstražné značky a grafické symboly v návodu k obsluze jsou určeny k tomu, abyste výrobek používali bezpečně a správně a abyste zabránili zranění sebe i ostatních. Výstražné značky a grafické symboly jsou popsány následovně:

Výstražné/bezpečnostní symboly	
 Varování	Varování upozorňuje čtenáře na situaci, která by v případě, že jí nebude zabráněno, mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Může také popisovat možné závažné nežádoucí reakce a bezpečnostní rizika.
 Bezpečnostní opatření	Označuje upozornění na nebezpečí, které čtenáře varuje před potenciálně nebezpečnou situací, která, pokud se jí nevyhne, může mít za následek lehké nebo středně těžké zranění uživatele nebo pacienta nebo poškození zařízení či jiného majetku. Může být také použito k varování před nebezpečnými postupy. Zahrnuje zvláštní péči nezbytnou pro bezpečné a účinné používání prostředku a péči nezbytnou k zabránění poškození prostředku, ke kterému může dojít v důsledku používání nebo nesprávného používání.
Kontraindikace	Kontraindikace jsou stavy, za kterých by se prostředek neměl používat, protože riziko použití zjevně převažuje nad možným přínosem. Mohou existovat osoby, u kterých by se prostředek neměl používat vzhledem k jejich zdravotnímu stavu.
Poznámky	Označuje nutnost věnovat pozornost, při nevěnování pozornosti může dojít k nesprávnému použití výrobku nebo poškození majetku přístroje.

Popis symbolu

	LOGO CE		LOGO UKCA
	Udržujte v suchu		Limit počtu vrstev 5
 MEHRWEG	Recyklace LOGO		Viz návod k použití.
	Kód šarže		Výrobky určené pro styk s potravinami
	LOGO FCC		Sériové číslo
	Distribuční obaly nesmí být vystaveny slunečnímu záření		Datum spotřeby
IP22	První číslo 2: Chráněno před pevnými cizími předměty o průměru 12,5 mm a větším. Druhé číslo 2: Chráněno proti svisle padajícím kapkám vody při naklonění krytu do 15°		
	Likvidace v souladu se směrnicí 2012/19/EU (OEEZ)		
	Tento přístroj nebyl testován pro použití v prostředí magnetické rezonance a neměl by být používán vystaven prostředí magnetické rezonance, pokud jej mají pacienti na sobě. Uchovávejte jej mimo místnost s magnetickou rezonancí.		
	Zplnomocněný zástupce pro Spojené království		Francouzské ERP balení
	Zplnomocněný zástupce pro EU		

3. Kontraindikace

Nepoužívejte tuto odsávačku, pokud máte aktivní implantované zařízení, které by mohlo být ovlivněno magnetickým polem (např. kardiostimulátor, implantabilní kardioverter-defibrilátor).

4. Bezpečnostní informace

Při používání elektrických výrobků, zejména v přítomnosti dětí, je třeba vždy dodržovat následující základní bezpečnostní informace.

4.1 Varování

- 1) Nepoužívejte tento přístroj, pokud máte kardiostimulátor, implantovaný defibrilátor nebo jiné implantované kovové či elektronické zařízení. Takové použití by mohlo způsobit elektrické rušení nebo smrt.
- 2) Tato odsávačka mateřského mléka není určena pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí. Takové osoby mohou tuto odsávačku používat pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud byly o používání přístroje řádně poučeny.
- 3) Nebezpečí: Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem:
 - Po nabíjení vždy ihned odpojte elektrická zařízení ze zásuvky.
 - Nepoužívejte při koupání, sprchování, řízení nebo plavání.
 - Nesahejte na elektrický výrobek, který spadl do vody, okamžitě odpojte napájecí adaptér ze zásuvky.
- 4) Nositelná odsávačka mateřského mléka Momcozy je předmětem osobní péče a z hygienických důvodů by nikdy neměla být sdílena mezi matkami nebo přeprodávána z jedné matky na druhou. Obě tyto činnosti vedou ke ztrátě záruky.
- 5) Pokud jste matka, která je nakažena hepatitidou B, hepatitidou C nebo virem lidského imunodeficitu (HIV), odsávání mateřského mléka pomocí nositelné odsávačky Momcozy nesníží ani neodstraní riziko přenosu viru na vaše dítě prostřednictvím mateřského mléka.
- 6) Při používání výrobku v blízkosti dětí nebo tělesně postižených osob je nutný přísný dohled. Nedovolte dětem ani domácím zvířatům, aby si hrály s motorovou jednotkou, obalovým materiálem nebo příslušenstvím.
- 7) Výrobek používejte pouze k určenému použití, jak je popsáno v tomto návodu.
- 8) Nepoužívejte jiné nástavce nebo jiné součásti pro sběr mléka než ty, které doporučuje výrobce.
- 9) Před nabíjením zkontrolujte napájecí adaptér, nikdy nepoužívejte poškozený napájecí adaptér.
- 10) Nikdy nenechávejte výrobek během nabíjení bez dozoru.
- 11) Výrobek a všechny nástavce uchovávejte mimo dosah vyhřívaných povrchů.
- 12) Nikdy jej nepoužívejte ve spánku nebo v ospalosti.
- 13) Nepoužívejte jej tam, kde se používají aerosolové rozprašovače nebo kde se podává kyslík.

- 14) Přístroj nepoužívejte v blízkosti výbušných nebo hořlavých materiálů, v prostředí magnetické rezonance, v hyperbarické komoře nebo v blízkosti krbu či sálavého topení.
- 15) Zabráňte uškrcení způsobenému nabíjecím kabelem.
- 16) Uživatelé nesmějí výrobek opravovat. Pokud tak učiníte, záruka pozbývá platnosti. V případě opravy se obraťte na výrobce nebo určeného franšizového distributora.
- 17) Před vyjmutím těla odsávačky z prsu odsávačku vždy vypněte, aby se uvolnil podtlak.
- 18) Elektrické odsávačky mateřského mléka, které jsou určeny pro jednu uživatelku, by se nikdy neměly půjčovat nebo sdílet.
- 19) Nikdy nepoužívejte odsávačku mateřského mléka, když jste těhotná, protože odsávání může vyvolat porod.
- 20) Vysoká teplota aplikované části může dosáhnout max. 43,9°C, nadměrná teplota může způsobit popálení pokožky, před použitím se ujistěte, že pokožka prsou musí být neporušená a zdravá. Pokud máte pocit přehřátí, vypněte zařízení. Aby nedošlo k popálení nízkou teplotou, nesmí maximální nepřetržité používání pokaždé překročit 30 min, interval mezi dvěma použitými musí být alespoň 5 min, aby zařízení vychladlo.
- 21) Pro životnost výrobku (tj. provozní životnost)
Přístroj nemá žádnou trvanlivost, životnost výrobku je 500 hodin. Předpokládaná provozní životnost omyvatelných částí je jeden až tři měsíce. Před použitím zkontrolujte, zda výrobek může normálně fungovat. Používání nad rámec životnosti může vést ke zhoršení výkonu výrobku. Například výrobek nemůže správně řídit podtlak, nadměrný podtlak může způsobit zranění.
- 22) Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím;
- 23) Se spotřebičem si nesmí hrát děti;
- 24) Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru;
- 25) Vhození baterie do ohně nebo horké trouby, mechanické drcení nebo řezání baterie, které může mít za následek výbuch;
- 26) Ponechání baterie v okolním prostředí s extrémně vysokou teplotou, které může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu;
- 27) Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.

4.2 Bezpečnostní opatření


- Výrobek neumisťujte ani neskladujte na místech, kde by mohl spadnout nebo být vtažen do vany, umyvadla nebo bazénu.
 - Výrobek neumisťujte ani neupouštějte do vody nebo jiné tekutiny.
 - Z jakéhokoli důvodu neponořujte přístroj do žádné kapaliny a nevystavujte jej extrémním nárazům, například při pádu odsávačky.
- Pokud se vám nepodaří odsát žádné mléko, nepokračujte v odstříkávání déle než pět minut v kuse. Zkuste odstříkat mléko v jinou denní dobu.
- Pokud pociťujete nepříjemné pocity, můžete sání přerušit vložení prstu mezi prs a přírubu.
 - Pokud dojde k podráždění nebo nepříjemným pocitům, přestaňte odsávačku používat a vyhledejte lékaře.
 - Pokud se uvolní, oddělí nebo roztřepe kryt nebo kabeláž napájecího adaptéru, okamžitě přestaňte napájecí adaptér používat a kontaktujte výrobce zařízení. Pokud zaznamenáte kouř nebo plameny z jednotky odsávačky nebo napájecího adaptéru, okamžitě přestaňte zařízení používat.
- Prohlášení: Pokud při odsávání pociťujete nadměrné teplo z nositelné odsávačky mateřského mléka, okamžitě přestaňte odsávat a odsávačku vyjměte.

Poznámky:

Vyhňte se přímému slunečnímu záření na hlavní jednotku.

5. Popis výrobku

Výrobek se skládá především z hlavní jednotky a sběrné sady na mléko.

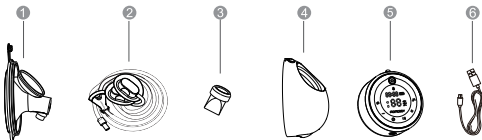

Obr.1 popis jednotky

Popis jednotky odsávačky mateřského mléka

Č.	Položka	Popis
1	Příruba s dvojitým těsněním(24mm)	Všechny tyto součásti tvoří sadu pro sběr mléka.
2	Hadice	
3	Ventil	
4	Sběrná nádržka na mléko (180 ml)	
5	Hlavní jednotka	Motor odsávačky
6	Kabel USB typu C	Vstupní konec je rozhraní USB 2.0, výstupní konec je rozhraní typu C

Další dodávané příslušenství:

Vložka příruby


Ventil

Kryt příruby

Pravítko velikosti příruby

Stručný průvodce

Uživatelská příručka

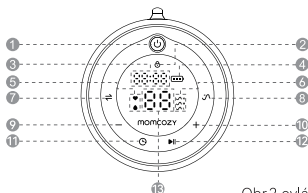

Obr.2 ovládací panel

1 Zap/Vyp: Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete zařízení;

4 Zobrazení baterie

7 Volba režimu

10 Zvýšení

13 Zobrazení úrovně sání

2 Zámek obrazovky

5 Indikátor režimu

8 Volba cyklu

11 Časovač

3 Doba provozu

6 Indikátor cyklu

9 Snížení

12 Pauza / Pokračovat

Tlačítka a LED diody	Funkce
	Dlouhým stisknutím zařízení zapnete/vypnete; krátkým stisknutím obrazovku uspíte a stisknutím libovolného tlačítka obrazovku aktivujete.
	Přerušete/pokračujete v odsávání.
	Volba režimu
	Snížení úrovně sání
	Zvýšení úrovně sání
	Režim stimulace V tomto režimu začne odsávačka mateřského mléka rychle a krátce sát, aby začalo téct mléko.
	Režim odstříkávání Odsávačka začíná pomalým a dlouhým sáním pro odstříkávání mléka, kdy je sání hlubší.
	Směšený režim V tomto režimu začíná odsávačka mléka rychlým a krátkým sáním, po kterém následuje pomalé a dlouhé sání.
	Ukazatel doby provozu
	Zámek obrazovky
	Volba cyklu
	Časovač

6. Provozní pokyny

6.1 Napájení odsávačky mateřského mléka

Pro odsávání máte k dispozici dvě možnosti napájení.

6.1.1 Pomocí vestavěné dobíjecí baterie

Před prvním použitím odsávačku dvě hodiny nabíjejte. Když je odsávačka plně nabitá, zobrazí se tři indikační čárky.


6.1.2 Pomocí nabíjecího kabelu

Zapojte nabíjecí kabel do portu na horní straně motoru odsávačky.

6.2 Nabíjení baterie

Před prvním použitím výrobek nabijte. Odsávačka mateřského mléka je napájena pomocí vnitřní dobíjecí lithiové baterie.


Náš výrobek je dodáván s nabíjecím kabelem (USB2.0/vedení typu C), ale nikoli s napájecím adaptérem. Napájecí adaptér si prosím před nabíjením zakupte sami. Ujistěte se, že jste zakoupili napájecí adaptér, který odpovídá rozhraní USB 2.0, a ujistěte se, že vstupní napájení napájecího adaptéru je AC 100–240V 50/60 Hz a výstupní napájení je DC 5V=2A.

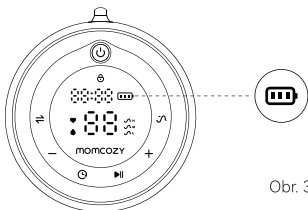

Obr. 3

Nabíjejte baterii podle následujícího postupu:

- Zasuňte USB konec nabíjecího kabelu do USB rozhraní napájecího adaptéru;
- Zasuňte zástrčku napájecího adaptéru do síťové zásuvky;
- Zasuňte konec nabíjecího kabelu typu C do nabíjecího portu.

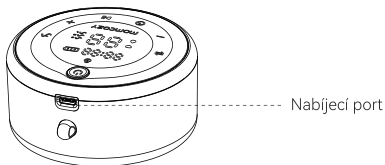

Obr. 4 Umístění nabíjecího portu

Plné nabití zařízení trvá přibližně 120 minut. Když je odsávačka nabitá, ukazatel stavu nabití baterie se postupně zvyšuje z jednoho na tři čárky, poté se vypne a tento proces se opakuje, dokud není odsávačka plně nabitá. Zobrazení tří čárek znamená, že je baterie plná.

Po ukončení nabíjení odpojte napájecí adaptér ze zásuvky, odpojte nabíjecí kabel od napájecího adaptéru a hlavní jednotky.



Varování

- Nabíjecí kabel slouží pouze k propojení mezi napájecím adaptérem a jednotkou nositelné odsávačky mateřského mléka Momcozy za účelem nabíjení, nepřipojujte jej k jiným zařízením, jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem!
- Pokud se kryt napájecího adaptéru uvolní, oddělí nebo roztřepí, okamžitě přestaňte napájecí adaptér používat a kontaktujte výrobce napájecího adaptéru.
- Pokud je nabíjecí kabel poškozený, zlomený nebo prasklý, okamžitě přestaňte nabíjecí kabel používat a obraťte se na výrobce, aby vám vyměnil nový kabel (kontaktní informace naleznete na poslední straně tohoto návodu).
- Pokud zaznamenáte kouř nebo plameny z jednotky odsávačky nebo napájecího adaptéru, okamžitě přestaňte zařízení používat.



Upozornění:

Použitím nesprávného typu adaptéru nebo zakoupením nekvalitního adaptéru může být snížena bezpečnost zařízení a může dojít k poškození vašeho majetku a zdraví. Zakupte prosím adaptér, který splňuje normy IEC 60601-1 a IEC 60601-1-2 na profesionálních trzích, a ujistěte se, že výstup napájecího adaptéru je DC 5V=2A.

Poznámky:

- Pokud je po úplném nabití baterie její provozní doba kratší než předtím a chcete ji vyměnit, nepokoušejte se vyměnit dobíjecí baterii sami. Pro výměnu se obraťte na výrobce. Samostatná demontáž a výměna akumulátoru může způsobit poškození hlavní jednotky a baterie.
- Pokud se výrobek delší dobu nepoužívá, baterie se pomalu vybíjí. Aby nedošlo k poškození baterie v důsledku nízkého napětí po dlouhou dobu, nabíjejte zařízení každé tři měsíce.

6.3 Čištění a dezinfekce

6.3.1 Obecný popis/požadavky

Poskytování mateřského mléka je jednou z nejlepších věcí, které můžete pro zdraví a vývoj svého dítěte udělat. Odsávání mléka je jedním ze způsobů, jak dítěti poskytnout mateřské mléko. Udržování částí odsávačky v čistotě je velmi důležité, protože v mateřském mléce nebo ve zbytcích mateřského mléka, které zůstávají na částech odsávačky, se mohou rychle množit choroboplodné zárodky. Dodržování těchto kroků může pomoci zabránit kontaminaci a ochránit vaše dítě před infekcí. Pokud se vaše dítě narodilo předčasně nebo má jiné zdravotní problémy, mohou mít zdravotníci vašeho dítěte další doporučení pro bezpečné odsávání mateřského mléka.

1) PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

Zkontrolujte a sestavte čistou sadu odsávačky.

Vyčistěte motor odsávačky dezinfekčními ubrousky..

2) PO KAŽDÉM POUŽITÍ

Bezpečně skladujte mléko: Ke skladování odstříkaného mateřského mléka používejte sáčky na uchovávání mateřského mléka nebo čisté, potravinářské nádoby. Ujistěte se, že nádoby jsou vyrobeny ze skla nebo plastu a mají těsně přiléhající víčka, a označte je datem a časem a ihned je vložte do chladničky, mrazničky nebo chladicího sáčku s ledem. Vyčistěte prostor pro odsávání: Vyčistěte povrch odsávačky dezinfekčními ubrousky.


3) Části, které je třeba vyčistit a vydezinfikovat

Před prvním použitím odsávačky a po každém použití vyčistěte a vydezinfikujte všechny části, které přicházejí do styku s prsy a mateřským mlékem. Čištění a dezinfekce nejsou totéž. Odsávačku je nutné čistit a dezinfikovat odděleně, aby byla zajištěna bezpečnost maminek i dětí a zachována výkonnost odsávačky.

- Části přicházející do styku s mateřským mlékem a pokožkou prsu: části sady pro sběr mléka, včetně příruby, víka, membrány, ventilu a sběrné nádoby na mléko.

4) Před čištěním/dezinfekcí:

- a. Dobře si umyjte ruce vodou a mýdlem po dobu 20 sekund.
- b. Rozeberte všechny díly následujícím způsobem:

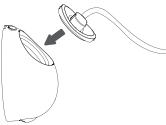 Obr. 5	 Obr. 6
1). Oddělte hadičku od odsávačky.	2). Oddělte hadičku od sběrné nádoby na mléko.
 Obr. 7	 Obr. 8
3). Oddělte přírubu od sběrné nádoby na mléko.	4) Oddělte ventil od sběrné nádoby na mléko.



Upozornění:

Nikdy nevkládejte hlavní jednotku, nabíjecí kabel ani adaptér (pokud jste si zakoupili adaptér) do vody nebo myčky nádobí, protože by došlo k trvalému poškození těchto částí.

6.3.2 Čištění a dezinfekce částí přicházejících do styku s mlékem

Krok 1: Čištění

Přístroj čistěte ručně! Bezpečnost použití myčky nádobí k čištění a dezinfekci tohoto výrobku nebyla ověřena.




Varování

K čištění částí odsávačky mateřského mléka nepoužívejte antibakteriální nebo abrazivní čisticí prostředky, protože by mohlo dojít k jejich poškození.

1) Připravte si níže uvedené položky:

- Mýdlo a horkou vodu
- Vodu v pitné kvalitě
- Čistou mísu používanou pouze pro kojenecké potřeby
- Čistý kartáč používaný pouze pro kojenecké potřeby
- Nepoužitou utěrku na nádobí nebo papírovou utěrku


2) Opláchněte: Opláchněte části sběrné soupravy na mléko a všechny ostatní předměty pro krmení tak, že je podržíte pod tekoucí vodou, abyste odstranili zbytky mléka nebo nečistoty. Voda může být teplá nebo studená, podle toho, čemu dáváte přednost.

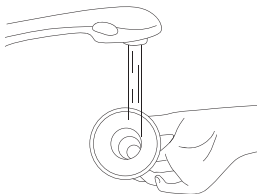

Obr. 9


3) Omyjte části pro sběr mléka:

- Části sběrné soupravy na mléko do čisté mísy používané pouze pro kojenecké potřeby. Neumývejte je přímo v umyvadle, protože může obsahovat zárodky, které by mohly tyto položky kontaminovat.
- Části sběrné soupravy na mléko do teplé mýdlové vody o teplotě 40–60 °C (104–140 °F) na 3–5 minut.

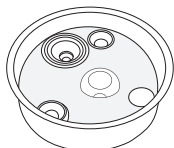

Obr. 10

- Čištění předmětů používejte čistý kartáč používaný pouze na kojenecké potřeby.
- 4) Opět opláchněte: Opláchněte je podržením pod tekoucí vodou nebo ponořením do čerstvé vody v samostatné míse, která se používá pouze k čištění kojeneckých potřeb. Pokud se na nich stále vyskytují nečistoty, zopakujte krok 3 a znovu je oplachujte, dokud zcela nezmizí.
- 5) Důkladně vysušte na vzduchu: Umístěte části sběrné soupravy na mléko, mísu a kartáč na láhve na čistou nepoužitou utěrku na nádobí nebo papírovou utěrku na místo chráněné před nečistotami a prachem. Nepoužívejte utěrku na nádobí k otírání nebo vysušování předmětů, protože by se tak na ně mohly přenést choroboplodné zárodky!

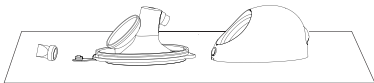

Obr. 11

- 6) Vyčistěte mísu a kartáč na láhve: Po každém použití mísu a kartáč dobře opláchněte a nechte je uschnout na vzduchu. Každých několik dní je ručně umyjte mýdlem a teplou vodou. Pokud je vaše dítě mladší než 3 měsíce, narodilo se předčasně nebo má oslabený imunitní systém v důsledku nemoci (např. HIV) nebo léčby (např. chemoterapie rakoviny), umyjte umyvadlo a kartáč na láhve po každém použití.

Po čištění:

Pro dodatečné odstranění zárodků dezinfikujte části sběrné soupravy na mléko, mísu na mytí a kartáč na láhve alespoň jednou denně po jejich vyčištění. Předměty lze dezinfikovat pomocí vařící vody s nastavením dezinfekce. Dezinfekce je obzvláště důležitá, pokud je vaše dítě mladší než 3 měsíce, narodilo se předčasně nebo má oslabený imunitní systém v důsledku nemoci nebo léčby.

Dezinfekci částí, které přicházejí do styku s mlékem, naleznete v kroku 2.

Krok 2: Dezinfekce**Upozornění:**

- Části odsávačky nesterilizujte v mikrovlnné troubě ani v UV sterilizátoru. Vysoká teplota ($> 110^{\circ}\text{C}$) zkrátí jejich životnost a způsobí ohrožení bezpečnosti.
- Nesterilizujte víko.

Před dezinfekcí se ujistěte, že máte vyčištěnou sběrnou soupravu na mléko, kartáče na láhve a umyvadla pomocí výše uvedených metod. Všechny předměty, které přicházejí do styku s mlékem (dokonce i kartáč na láhve a umyvadlo!), vydezinfikujte jednou z následujících metod.


1) Připravte si níže uvedené položky:

- Hrnec
- Vodu v pitné kvalitě
- Čisté kleště

Upozornění:

Během dezinfekce vroucí vodou zabraňte tomu, aby se láhev nebo jiné části dotýkaly stěn hrnce. To může způsobit nevratnou deformaci nebo poškození výrobku.

2) Umístěte rozebranou sadu na sběr mléka do hrnce a naplňte hrnec takovým množstvím vody, aby byly součásti, které chcete dezinfikovat, pokryty. Nechte vodu vařit 5 až 10 minut a dbejte na to, aby se součásti nedotýkaly stěn hrnce.

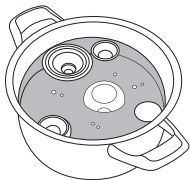


Obr.12

3) Vyměňte předměty čistými kleštěmi.



Obr. 13

4) Důkladně vysušte na vzduchu.

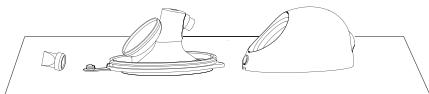

Obr. 14

Krok 3: Skladujte bezpečně

Suché předměty skladujte bezpečně, dokud je nebudete potřebovat. Před uskladněním se ujistěte, že čisté části odsávačky, kartáče na láhve a umyvadla důkladně vyschly na vzduchu. Předměty musí být zcela suché, aby se zabránilo růstu bakterií a plísní. Suché položky skladujte na čistém, chráněném místě, abyste zabránili kontaminaci.

1. Umyjte si ruce: Ruce si dobře umyjte vodou a mýdlem.
2. Sestavte dohromady: Čisté a suché části odsávačky sestavte dohromady.
3. Skladujte bezpečně: Znovu sestavené části odsávačky a další předměty pro krmení, mísu na mytí a suchý kartáč na láhve uložte do čistého, chráněného prostoru, například do uzavřené kuchyňské skříňky, která se používá pouze k ukládání čistého nádobí.

6.3.3 Čištění / dezinfekce ostatních částí

Plášť hlavní jednotky je třeba poprvé a po každém použití vyčistit a vydezinfikovat. Ostatní části, nepřicházejí během odsávání do styku s lidským tělem ani s mlékem a je třeba je čistit pouze tehdy, když jsou znečištěné.

Čištění/dezinfekce předmětů při pokojové teplotě 5 °C~ 40 °C, jak je uvedeno níže:

Připravte si níže uvedené položky:

- Dezinfekce
- 70% izopropylalkoholové ubrousky
- Čistý měkký hadřík

Způsob čištění:

1. Před provedením tohoto čištění si nejprve umyjte ruce dezinfekcí.
2. Pomocí čistého měkkého hadříku odstraňte z hlavní jednotky a/nebo nabíjecího kabelu všechny zbytky.
3. Kouskem 70% izopropylalkoholového ubrousku a stírejte jím části, dokud nezůstanou žádné viditelné nečistoty.
4. Přístroj vysušte umístěním na 10 min při pokojové teplotě, aby se odpařil zbytkový roztok čistícího činidla na výrobku.

Dezinfekční metoda:

případě, že je zařízení v rozporu s požadavky na dezinfekci, je třeba provést dezinfekci.

1. Plášť hlavní jednotky dezinfikujte měkkým hadříkem navlhčeným 70% izopropanolem po dobu 3 minut.
2. Osušte ji umístěním hlavní jednotky na 10 minut při pokojové teplotě, aby se odpařil zbytkový dezinfekční roztok.

6.4 Návod k použití

6.4.1 Příprava před použitím



Upozornění:


1. Umyjte si ruce vodou a mýdlem a zkontrolujte a sestavte čistou soupravu odsávačky.

2. Doba trvání odsávání:

Tento výrobek je napájen dobíjecí lithiovou baterií, po úplném nabití jej lze používat po dobu 8–9 sezení (cca 270 minut) odsávání, 30 minut na jedno sezení. Typické odsávání trvá přibližně 10–15 minut na jeden prs, ale měli byste odsávat jen tak dlouho, jak je to pro vás pohodlné a produktivní.

1. Výběr velikosti příruby

Tato odsávačka obsahuje 24mm silikonovou přírubu. Pokud vám dodávaná příruba nesedí, můžete si na Amazonu / „momcozy.com“ zakoupit přírubu nebo vložky do příruby o průměru 21 mm, 19 mm a 17 mm. Do vyhledávacího řádku zadejte „momcozy breast pump accessories“ a najdete velikost příruby a vložky příruby, která vám vyhovuje.

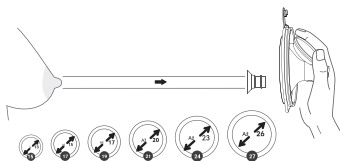

Obr. 15 vyberte správnou velikost

Měření bradavky (mm)	11-13	13-15	15-17	17-20	20-23	23-26	26-29
Příruba (mm)	15	17	19	21	24	27	30


Obr. 16 Tabulka velikostí bradavek

2. Stimulace bradavek

- Stimulujte bradavku, abyste získali plnou velikost (tento krok nevynechávejte!).
- Vložte bradavku do nejmenšího otvoru, do kterého se pohodlně vejde, aniž byste ji tlačili.
- Zvolte otvor, do kterého se pohodlně vejde samotná báze vaší bradavky.
- Zjistěte si míry na základě tabulky velikostí.

3. Testování pasování příruby

- Chcete-li najít vhodnou velikost příruby, musíte se nejprve ujistit, že přírubu umístíte na správné místo na prsou.
- Přitiskněte přírubu na prsa, dokud mezi nimi nezůstane mezera. Ujistěte se, že je vaše bradavka přesně uprostřed příruby.

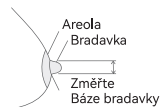

Obr. 17



Obr. 18

Příliš malá

Příliš malá: Pokud se vaše bradavka během odsávání stále tře o vnitřní stěnu příruby, je pro vás tato příruba příliš malá.

Dobře padnoucí

Vhodné pasování: Pokud se vaše bradavka při odsávání pohybuje hladce, aniž by se třela nebo dotýkala vnitřní stěny příruby, a uvnitř není téměř žádná areola nasávána, pak je pro vás tato příruba vhodná.


Příliš velká

Příliš velká: Pokud je při odsávání nasávána velká plocha areoly, pak je pro vás tato příruba příliš velká.


4. POŘÍDTE SI VHODNOU PODPRSENKU

Obr. 19

- ① Vyrobeno z elastické tkaniny ② Bez výztuže a vycpávek
③ Má klopou ④ Plně krytí

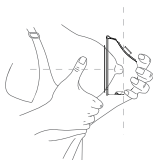

Obr. 20

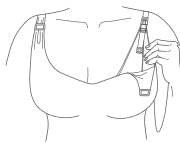

Obr. 21

BEZ MEZERY

Když vložíte odsávačku do podprsenky, silikonová příruba této odsávačky by měla být pevně přitisknutá k vaší pokožce bez mezery.

POKUD SE POHYBUJE

Pokud máte pocit, že se odsávačka během používání pohybuje, utáhněte si ramínko podprsenky, abyste odsávačku znovu nastavili, nebo si vyberte jinou podprsenku.

5. DOPORUČENÉ DRŽENÍ TĚLA



Upozornění:

Při odsávání vždy sedněte nebo stůjte vzpřímeně, abyste zabránili úniku mléka. Tato odsávačka se nesmí používat vleže nebo ve spánku, aby byla při používání zachována správná orientace.

DRŽENÍ TĚLA

Dbejte na to, aby odsávačka a sběrná nádobka na mléko vždy zůstaly ve svislém úhlu. V opačném případě dojde k vylití mléka.



Obr. 22 správné držení těla

6.4.2 Sestavení odsávačky



Upozornění:

Ujistěte se, že jste vyčistili a vydezinfikovali části odsávačky, které přicházejí do styku s mlékem nebo prsy.





Varování

- Buďte opatrní, pokud jste vyvařením vydezinfikovali části odsávačky mateřského mléka, mohou být velmi horké. Abyste předešli popáleninám, začněte odsávačku mateřského mléka sestavovat až po vychladnutí vydezinfikovaných částí.
- Než se dotknete částí odsávačky a prsou, důkladně si umyjte ruce vodou a mýdlem, abyste zabránili kontaminaci. Nedotýkejte se vnitřku sběrné soupravy na mléko.

Poznámky:

- Správné umístění příruby, membrány, sběrné nádoby na mléko, ventilu, víka, atd. je nezbytné k tomu, aby odsávačka vytvořila správný podtlak.
- Před každým použitím vizuálně zkontrolujte jednotlivé součásti, zda na nich nejsou praskliny, vrypy, trhliny, změna barvy nebo poškození. V případě, že zjistíte poškození přístroje, přestaňte jej používat, dokud nebudou součásti vyměněny.

Důkladně si umyjte ruce vodou a mýdlem a poté odsávačku sestavte následujícím způsobem:

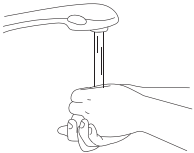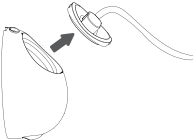 Obr. 23	 Obr. 24
1. Důkladně si umyjte ruce vodou a mýdlem.	2. Opatrně zatlačte ventil do sběrné nádoby na mléko. Ujistěte se, že nevznikají žádné mezery.
 Obr. 25	 Obr. 26
3. Nejprve vyrovnejte sběrnou nádobku na mléko s horní částí příruby a poté ji přitlačte, abyste zajistili těsné spojení.	4. Připevněte membránu se sběrnou nádobkou na mléko a zajistěte víko tak, aby těsnilo.



Obr. 27

5. Připojte dlouhý konec hadičky k motoru odsávačky.

Odsávačka mateřského mléka je nyní připravena k použití.

6.4.3 Pokyny pro odsávání



Varování

- Než tělo odsávačky vyjmete z prsu, vždy odsávačku vypněte, aby se uvolnil podtlak.
- Pokud se vám nepodaří odsát žádné mléko, nepokračujte v odstříkávání déle než 5 minut v kuse. Zkuste odstříkat mléko v jinou denní dobu.
- Pokud se proces stane velmi nepříjemným nebo bolestivým, přestaňte odsávačku používat a poraďte se s lékařem.



Upozornění:

- Kontrola hladiny mléka během odsávání, aby nedošlo k přeplnění.

1. Jednotlivé odsávání


- Sestavte jednu sběrnou nádobku na mléko.
- Vložte nepoužitý konec hadičky do držáku hadičky ve tvaru Y.
- Sestavte odsávačku pro jednotlivé odsávání.
- Nasaďte si odsávačku do podprsenky.

2. Dvojité odsávání

- Sestavte dvě sběrné nádobky na mléko.
- Sestavte odsávačku pro dvojité odsávání.
- Vložte odsávačku do podprsenky.

3. Zarovnání

a. Před odsáváním se ujistěte, že je odsávačka pevně přitisknutá k prsu bez mezery.

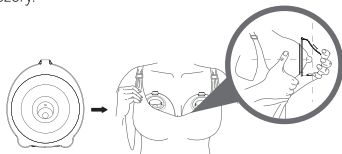


Obr. 28

b. Pro vyrovnání přidržte přírubu u prsu, abyste viděli, zda je vaše bradavka vycentrovaná v tunelu příruby. Možná se budete muset předklonit.

c. Po zarovnání se podívejte skrz přírubu, abyste se přesvědčili, že je vaše bradavka vycentrovaná, a teprve potom začněte odsávat. Špička bradavky by se NEMĚLA dotýkat horní, boční ani spodní části tunelu příruby. Pokud se tak stane, zkuste to znovu.

První pohled

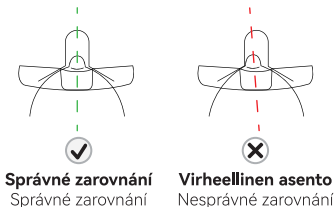

Obr. 29

Poznámka:

Správné zarovnání bradavek je klíčem k pohodlnému odstříkávání a výkonu.

Abyste se předešlo nepříjemným pocitům, musí být bradavka před odsáváním správně umístěna v tunelu příruby.

Viz část 7.4.1 Příprava před použitím – výběr velikosti příruby.

4. Zajištění odsávačky v podprsence

Zajistěte odsávačku na místě pomocí podprsenky a dbejte na to, aby byla odsávačka pevně přitisknutá k prsu. V případě potřeby utáhněte podprsenku, aby odsávačka bezpečně držela na místě, a začněte odsávat.



Obr. 30

5. Zahájení odsávání

Nezasouvejte odsávačku přímo do podprsenky, postupujte podle pokynů krok za krokem.

Před použitím ji odpojte od nabíječky.

A. Zapněte odsávačku

Dlouhým stisknutím tlačítka Zap/Vyp  odsávačku zapnete.

B. Zvolte režim

Režimy: Režim stimulace  a Režim odstříkávání  a Smíšený režim 
 Krátkým stisknutím tlačítka volby režimu měňte mezi 3 režimy.

C. Výběr úrovně podtlaku

Odsávačka Momcozy má 15 nastavení podtlaku pro každý režim, což vám dává kontrolu nad tím, co je pro vás příjemné a funguje neefektivněji ve všech režimech.

Jakmile se budete cítit nepohodlně, použijte tlačítko Zvýšit / Snížit  a nastavte podtlak.

D. Zámek obrazovky

Po spuštění odsávačky mateřského mléka, pokud po dobu 30 sekund neproběhne žádná operace, začne  blikat obrazovka zámku a po 3 sekundách zůstane stálá. Tsvětla klávesnice se také vypnou, abyste nenarušili nastavení odsávačky kvůli náhodnému stisknutí kláves. Pro odemknutí stačí krátce stisknout tlačítko  napájení.

Po uzamčení obrazovky a po dobu 10 sekund neprovedete žádnou operaci, kontrolky obrazovky i klávesnice automaticky zhasnou.

Dotykem libovolného tlačítka rozsvítíte obrazovku a krátkým stisknutím tlačítka napájení ji  odemknete.

E. Tlak

Vždy se ujistěte, že odsáváte při pohodlné úrovni.

F. Volba cyklu

V rámci každé úrovně sání si můžete vybrat ze tří možností cyklu:

H-  odpovídá vysokému cyklu při aktuální úrovni sání,

M-  odpovídá střednímu cyklu při aktuální úrovni sání,

L-  odpovídá nízkému cyklu při aktuální úrovni sání.

Odsávačka mateřského mléka má při spuštění výchozí střední cyklus při každém stupni odsávání; cyklus můžete změnit pomocí tlačítka  pro nastavení cyklu, abyste našli pohodlný rytmus odsávání. Při přepnutí na jiný režim si odsávačka zapamatuje aktuální úroveň a bude v tomto režimu pokračovat v cyklu.

Každá žena je jiná, proto upravte nastavení rychlosti cyklu tak, abyste našli rychlost, která vám nejlépe vyhovuje.

G. Nastavení časovače odsávačky mateřského mléka

Výchozí časovač na odsávačce mateřského mléka začne odpočítávat od 30 minut. Pokud chcete nastavit jiný čas, postupujte podle níže uvedených kroků:

Před zahájením odsávání stiskněte tlačítko časovače . Indikátor  časovače blikat. Pomocí tlačítek „+“ a „-“   nastavte dobu odsávání v pětiminutových intervalech. Časovač můžete nastavit maximálně na 40 minut a minimálně na 5 minut.

Tip: Vyšší podtlak nemusí vždy znamenat větší objem mléka. Nadměrné zatížení bradavek může snížit tvorbu mléka. Vždy se ujistěte, že odsáváte při pohodlné úrovni. Pokud necítíte sání, zkontrolujte, zda je odsávačka správně sestavena.



Upozornění:

- * Odsávačku nepoužívejte vleže, při namáhavých činnostech nebo při činnostech s rizikem úrazu.
- * Používání odsávačky mateřského mléka by nemělo způsobovat bolest. Nesnažte se odstříkávat s příliš vysokým nebo nepříjemným nastavením podtlaku. Pokud během odsávání pociťujete nadměrné nepohodlí nebo bolest, přestaňte odsávat, porušte těsnění kolem bradavky a přerušte sezení.

6. Přerušení / pokračování v odsávání

Stisknutím tlačítka Pauza / Pokračovat zastavíte odsávání a na displeji LED se zobrazí doba odsávání.

Opětovným stisknutím tlačítka Pauza / Pokračovat budete pokračovat v odsávání.

7. Vypnutí odsávačky

Dlouhým stisknutím tlačítka Zap / Vyp odsávačku vypnete.

8. Vyjmutí odsávačky

Prstem porušte těsnění mezi přírubou a prsní tkání.

Po odsávání se mírně předkloňte, abyste mohli odsávačku z prsu vyjmout, a pak držte přírubu otevírací stranou nahoru, abyste zabránili přelévání mléka.



Obr. 31

Doporučujeme uživateli přerušit odsávání, jakmile se objem odstříkaného mléka ve sběrné nádobce přiblíží 180 ml, aby nedošlo k jeho přetečení.



Varování

- Odstříkané mléko ihned uložte do chladničky nebo zmrazte, případně jej před podáním dítěti uchovávejte 2–4 hodiny při teplotě 16 °C~ 25 °C.

6.5 Skladování mateřského mléka

6.5.1 Správné skladování mateřského mléka

Dodržování doporučených postupů skladování a přípravy může zachovat bezpečnost a kvalitu odstříkaného mateřského mléka pro zdraví dítěte.

Jedná se o obecné pokyny pro skladování lidského mléka při různých teplotách. Na to, jak dlouho lze lidské mléko bezpečně skladovat, mají vliv různé faktory. Mezi tyto faktory patří objem mléka, pokojová teplota v době odstříkávání mléka, kolísání teplot v chladničce a mrazničce a čistota prostředí.

Skladování mateřského mléka po odstříkání:

- Pokud je to možné, uložte mléko ihned po odsátí do chladničky nebo do chladu. Můžete ho dát do ledničky, umístit do chladicího boxu nebo izolovaného chladicího obalu nebo ho v malých dávkách (2 až 4 unce) zmrazit pro pozdější krmení.
- Ke skladování odstříkaného mateřského mléka používejte sáčky na uchovávání mateřského mléka nebo čisté, potravinářské nádoby. Ujistěte se, že nádoby jsou skleněné nebo plastové a mají těsně přiléhající víka. --Vyvarujte se lahví s recyklačním symbolem číslo 7, který znamená, že nádoba může být vyrobená z plastu obsahujícího BPA.
- Před uzavřením odstraňte vzduch.
- Sáčky položte na plochu, aby se zmrazily. Abyste zabránili slepení sáčků, oddělte je papírovými utěrkami.
- Mateřské mléko nikdy neskladujte v jednorázových vložkách do lahví nebo v plastových sáčcích, které nejsou určeny ke skladování mateřského mléka.
- Nádobou jemně otáčejte, aby se tučnější část mateřského mléka, která může stoupat k horní části, promíchala zpět se zbytkem mléka. Mléko neprotřepávejte. Mohlo by dojít k rozpadu cenných složek mléka.
- Čerstvě odstříkané nebo odsáté mléko můžete skladovat:

Typ mateřského mléka	Místa a teploty skladování		
	Pracovní deska 77°F (25°C) nebo chladnější (pokojová teplota)	Chladnička 40°F (4°C)	Mraznička 0 °F (-18°C) nebo chladnější
Čerstvě odstříkané nebo odsáté	Až 4 hodiny	Až 4 dny	Nejlépe do 6 měsíců Přijatelné do 12 měsíců
Rozmražené, dříve zmražené	1-2 hodiny	Až 1 den (24 hodin)	NIKDY znovu nezmrazujte lidské mléko poté, co bylo rozmrazeno
Zbytek po krmení (dítě nedopilo láhev)	Použijte do 2 hodin po ukončení krmení dítěte		

Tyto pokyny platí pouze pro zdravé donošené děti a mohou se lišit u nedonošených nebo nemocných dětí. Informujte se u svého lékaře.

Tipy pro skladování:

- V případě, že mléko předáváte pečovateli, uveďte na nádobě datum, kdy bylo mléko odstříkáno, a jméno dítěte.
- Mateřské mléko neskladujte ve dveřích chladničky nebo mrazničky. Pomůže to ochránit mateřské mléko před změnami teploty způsobenými otevíráním a zavíráním dveří.
- Pokud si myslíte, že čerstvě odstříkané mateřské mléko nepoužijete do 4 dnů, ihned ho zmrazte. Pomůže to ochránit kvalitu mateřského mléka.
- Při zmrazování mateřského mléka:
- Skladujte malá množství, abyste zabránili plýtvání mlékem, které by mohlo zůstat nespoteřované. Skladujte 2 až 4 unce nebo množství nabízené při jednom krmení.
- V horní části nádoby ponechte asi jeden centimetr místa, protože mateřské mléko se při mražení rozpíná.
- Mateřské mléko můžete na cestách skladovat v izolované chladicí nádobě se zmraženými sáčky s ledem po dobu až 24 hodin. V cílové destinaci mléko ihned použijte, uložte ho do chladničky nebo ho zmrazte.

6.5.2 Bezpečné rozmrazování mateřského mléka

- Vždy nejprve rozmrazujte nejstarší mateřské mléko. Pamatujte si, že jako první je třeba spotřebovat to, co bylo vloženo jako první. V průběhu času se může kvalita mateřského mléka snižovat.
- Existuje několik způsobů rozmrazování mateřského mléka:
- V chladničce přes noc.
- V nádobě s teplou nebo vlažnou vodou.
- Pod vlažnou tekoucí vodou.
- Mateřské mléko nikdy nerozmrazujte ani neohřívejte v mikrovlnné

troubě. Mikrovlnná trouba může zničit živiny v mateřském mléce a vytvořit horká místa, která mohou dítě popálit v ústech.

- Pokud mateřské mléko rozmrazíte v chladničce, použijte ho do 24 hodin. Začněte počítat 24 hodin od chvíle, kdy je mateřské mléko zcela rozmražené, nikoli od chvíle, kdy jste ho vyndali z mrazáku.
- Jakmile mateřské mléko uvedete do pokojové teploty nebo ohřejete, použijte ho do 2 hodin.
- Mateřské mléko po rozmrazení nikdy znovu nezmrazujte.

7. Přesun

Při cestování použijte dodaný nabíjecí kabel a nastavte jej na správný zdroj napájení pro vaši aktuální polohu. Před nástupem do letadla se poraďte s leteckou společností ohledně přepravy nebo používání této odsávačky v letadle.

Teplota: -20 až 60 °C / -4 až 140 °F

Relativní vlhkost: 15 % – 90 %

Okolní tlak: 90 – 106 kPa

8. Podmínky skladování

Jak skladovat odsávačku

* Krátkodobé skladování

* Odsávačku uchovávejte mimo dosah přímého slunečního světla.

Odsávačku mateřského mléka a její příslušenství skladujte na bezpečném, čistém a suchém místě a mimo dosah dětí.

* Dlouhodobé skladování

Před dlouhodobým skladováním odsávačku nejprve nabijte, čímž se prodlouží životnost této odsávačky. Za druhé, uchovávejte ji na místě mimo dosah přímého slunečního světla, aby nedošlo ke změně barvy. Za třetí, před uskladněním vyčistěte a vysušte omyvatelné části.

* Teplota: -20 až 60 °C / -4 až 140 °F

* Relativní vlhkost: 15 % – 90 %

* Okolní tlak: 90 až 106 kPa

9. Specifikace

Model č.	BP137
Název	Nositelná odsávačka mateřského mléka
Požadavky na napájení	Příkon: 100-240Vac, 50/60Hz; Výkon: 5V $\Rightarrow$ 2A (Charge through provided USB 2.0/Type-C Charging cable and self-purchased power adapter)
Napájení	Nabíjecí lithiová baterie 3.7 V / 2300 mAh
Možnosti odsávačky	Jedna odsávačka
Režimy sání	JRežim stimulace, režim odšťikávání a smíšený režim

Rozsah podtlaku	Režim stimulace: -30~-150 mmHg Režim odstříkávání: -60~-300 mmHg Smíšený režim: -60~-300 mmHg
Rychlost cyklu	Režim stimulace: 48~98 cyklus/min Režim odstříkávání: 22~60 cyklus/min Smíšený režim: 53~76 cyklus/min
Rozměr odsávačky	97.09mm X 104.12mm X 50mm (pump motor) 134mm X 109.2mm X 67.6mm (milk collector)
Hmotnost (s veškerým příslušenstvím)	240g (pump motor weight) 120g (single milk collector weight)
Životnost výrobku	500 hodin
Hladina hluku	<48 dB
Typ ochrany před úrazem elektrickým proudem	Vnitřně napájené zařízení
Provozní podmínky	Teplota: 0 °C až 40 °C; vlhkost: 15% až 90%, Atmosférický tlak: 70 kPa až 106 kPa
Prostředí pro přepravu a skladování	Teplota: -20 °C až 60 °C; vlhkost: 15% až 90%, Atmosférický tlak: 70 kPa až 106 kPa
Doba nabíjení baterie	120 minut
Doba používání baterie	270 minut

10. Údržba a náhradní díly

Zařízení neobsahuje žádné díly, které by mohl uživatel opravovat: Otevřením nebo zásahem do tohoto zařízení zaniká záruka. V případě, že zařízení vyžaduje opravu, je třeba jej vrátit společnosti dodávající zařízení nebo přímo prodejci. Jakékoli úpravy jsou zakázány. VÝROBCE na požádání zpřístupní schémata zapojení, seznamy součástí, popisy, pokyny ke kalibraci nebo jiné informace, které pomohou SERVISNÍMU PRACOVNÍKOVÍ opravit ty části zařízení, které VÝROBCE označil jako opravitelné servisním pracovníkem. Pokud se výrobek delší dobu nepoužívá, baterie se pomalu vybíjí. Aby nedošlo k poškození baterie v důsledku nízkého napětí po dlouhou dobu, nabíjete zařízení každé tři měsíce.



Varování

Varování: Výměna lithiových baterií nedostatečně vyškoleným personálem může vést k ohrožení.

Zařízení nečistěte ani neprovádějte jeho údržbu, pokud je v provozu nebo pokud se nabíjí.

11. Prohlášení o shodě

Prohlášení o souladu s předpisy EU: Shenzhen Root Innovation Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice LVD 2014/35/EU a směrnice EMC 2014/30/EU.

12. Řešení problémů

Problémy	Řešení
Odsávačka nefunguje	• Pokud ještě nedošlo ke spuštění, zvažte ponechání odsávačky na prsu po delší dobu a sledujte, zda nedochází ke zpožděnému spuštění. Poznámka: Počáteční doba spouštění mléka je u každého člověka jedinečná a liší se v závislosti na mnoha faktorech. • Zkontrolujte zarovnání bradavek, zastavte odsávačku a vyjměte ji z prsu. Odsávačku znovu nastavte podle níže uvedeného popisu. • Možná nemáte správnou velikost příruby (Viz část 7.3 Návod k použití – výběr velikosti příruby).
Mléko nevytéká	• Zastavte odsávačku a vyjměte ji z prsu. Znovu ji správně nastavte. (viz část 7.3 Návod k použití – Zarovnání). • K opětovnému seřízení můžete také oddělit odsávačku od příruby. Poté vycentrujte bradavku v tunelu příruby a přiložte odsávačku k prsu (viz část 7.3 Návod k použití – Zarovnání).
Potřeba opětovného zarovnání	• Zastavte odsávačku a vyjměte ji z prsu. Znovu ji správně nastavte. (viz část 7.3 Návod k použití – Zarovnání). • K opětovnému seřízení můžete také oddělit odsávačku od příruby. Poté vycentrujte bradavku v tunelu příruby a přiložte odsávačku k prsu (viz část 7.3 Návod k použití – Zarovnání).

Cítíte se při odsávání nepohodlně	• Pokud pociťujete nadměrné nepohodlí, zkuste následující postup (viz část 7.3 Návod k použití – Zarovnání): • Ujistěte se, že během stimulační fáze pevně přitisknete odsávačku Momcozy k prsu. • Utáhněte podprsenku, abyste se ujistili, že je odsávačka Momcozy pevně přiložena k prsu. • Snižte intenzitu sání. • Znovu nastavte odsávačku Momcozy. • Možná odsáváte příliš dlouho. Odsávačka Momcozy se po 30 minutách automaticky vypne. • Možná nemáte správnou velikost příruby (viz část 7.3 Směr použití – výběr velikosti příruby). Zastavte se a navštivte odborníka nebo specialistu na kojení.
Snížené (nízké) sání odsávačky	• Odsávačka má 9 nastavení sání. Stisknutím tlačítka zvýšení zvýšíte intenzitu sání. • Zkontrolujte stav omyvatelných částí. Měly by být vyměněny po třech měsících používání. • Pokud to nepomůže, zkuste následující postup: 1. Zkontrolujte spoje mezi všemi omyvatelnými částmi, zda jsou všechny zajištěny. 2. Vizuálně zkontrolujte všechny omyvatelné části a v případě poškození je vyměňte. 3. Zkontrolujte, zda je zapnuté napájení. • Pevně přiložte odsávačku k prsu.
Přestaňte odsávat	• Odsávačka přestane automaticky odsávat po 30 minutách. • Krátkým stisknutím tlačítka Zap / Vyp / Pauza se odsávačka pozastaví, dalším stisknutím se obnoví.
Odsávačka nepřestane odsávat	• Stiskněte tlačítko Zap / Vyp / Pauza. • Pokud problém přetrvává, porušte těsnění vložením prstu mezi prsní tkáň a přírubu. Poté stiskněte tlačítko Zap / Vyp / Pauza a odsávačku vypněte.
Odsávačka nebo nabíječka se namočí (ponoří do vody).	• Odsávačku ihned vysušte. Podepřete odsávačku ve svislé poloze nabíjecím otvorem dolů a ovládacími prvky sání nahoru a nechte přes noc vyschnout. Nepoužívejte odsávačku ani nabíječku po dobu 24 hodin. • Kontaktujte oddělení péče o zákazníky.
Odsávačka se nenabíjí.	• Ujistěte se, že je kabel USB typu C se standardní nabíječkou (není součástí dodávky) zcela zapojen do nabíjecího portu odsávačky.

Poznámka: Pokud výše uvedené metody problém nevyřeší, obraťte se na výrobce, kontaktní informace naleznete na poslední straně.

13. Likvidace



Po skončení životnosti výrobku jej nevyhazujte do běžného domácího odpadu, ale odevzdejte jej na sběrném místě pro recyklaci elektronických zařízení a baterií. Odpad z elektrických a elektronických zařízení může mít potenciálně škodlivé účinky na životní prostředí. Nesprávná likvidace může vést k hromadění škodlivých toxinů v ovzduší, vodě a půdě, což je škodlivé pro lidské zdraví. máte povinnost zařízení správně zlikvidovat. Informace o likvidaci získáte na obecním úřadě. Informace o likvidaci získáte na obecním úřadě.

14. Záruka

V případě reklamace v rámci záruky se obraťte na výrobce, kontaktní informace naleznete na poslední straně tohoto návodu k použití. Pokud musíte přístroj zaslat, přiložte kopii účtenky s jasným popisem závady.

Záruční podmínky jsou uvedeny níže:

1. Záruční doba na zařízení je jeden rok od data zakoupení. V případě reklamace je třeba prokázat datum nákupu prodejním dokladem nebo fakturou.
2. Záruční opravy neprodlužují záruční dobu ani na zařízení, ani na náhradní díly.
3. Ze záruky jsou vyloučeny následující případy
 - Veškerá poškození, která vznikla v důsledku nesprávného zacházení, např. nedodržení návodu k použití.
 - Veškeré škody, které vznikly v důsledku oprav nebo zásahů ze strany zákazníka nebo neoprávněných třetích osob.
 - Poškození, která vznikla během přepravy od výrobce ke spotřebiteli nebo během přepravy do servisního střediska.
 - Příslušenství, které podléhá běžnému opotřebení.
 - Poškození zařízení v důsledku soukromé demontáže zařízení.
 - Odpovědnost za přímé nebo nepřímé následné škody způsobené přístrojem je vyloučena, i když je poškození přístroje uznáno jako záruční reklamace.

15. Prohlášení o používání na cestách nebo v zahraničí

Vzhledem k tomu, že výkon nositelné odsávačky mateřského mléka Momcozy může být ovlivněn vnějším prostředím, nepoužívejte přístroj s ohledem na nejistotu a nestabilitu cestovního prostředí během cestování nebo v letadle.

Nositelnou odsávačku mateřského mléka Momcozy lze používat v mezinárodním měřítku, ale musí být používána a skladována v prostředí uvedeném v této uživatelské příručce a ujistěte se, že vstupní napájení vašeho napájecího adaptéru je AC 100~240V 50/60 Hz a výstupní napájení je DC 5V 1A, a ujistěte se, že máte převodník pro převod na správné napětí cílové země. Abyste se ujistili, že nositelná odsávačka mateřského mléka Momcozy nebude během nošení ovlivněna, zkontrolujte před použitím následující položky, abyste se ujistili, že může normálně fungovat:

- Před každým použitím zkontrolujte stav nositelné odsávačky mateřského mléka Momcozy, abyste se ujistili, že může normálně fungovat. Pokud se vyskytne jakákoli abnormalita, přestaňte ji používat.

16. Informace o výrobcí

Výrobce: Shenzhen Root Innovation Technology Co., Ltd.

Adresa: #2-201, Floor 2, Hasee Computer Building, No.2 Beier Rd, Bantian Street, Longgang, Shenzhen, Guangdong, Čína, 518129

E-mail: support@momcozy.com

V případě potřeby pomoci s nastavením, používáním nebo údržbou zařízení nebo v případě hlášení neočekávaného provozu nebo události nás prosím kontaktujte.

17. Důležité bezpečnostní informace

- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím;
- Se spotřebičem si nesmí hrát děti;
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru;
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.

图档名称	Momcozy V1pro吸奶器说明书-捷克语			版本号	C0	日期	2025-02-27
规格尺寸	80*130 (h) mm	印刷颜色	CMYK	设计师			
材质工艺	封面105g铜版纸过油+内页80g 书纸/胶装						
项目负责人	肖莹	文案编写/审核人	肖莹		设计审核人	/	
备注	出血线为3mm；红色线为刀模，请勿印刷；图档版权归深圳市路特佳成网络科技有限公司所有，私自泄露、修改、使用文档所产生的一切责任后果我司将追究到底。						ROOT 路特