




momcozy Mobile Flow™ Pikaopas

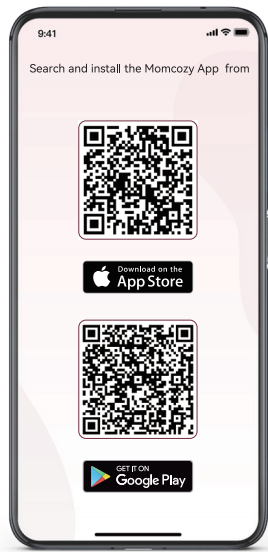



Vaihe 1:

Etsi aluksi Momcozy-sovellus älypuhelimesi sovelluskaupasta (Google Play Store tai App Store). Sovellus on yhteensopiva iOS 13:n ja Android 8.0:n tai uudempien versioiden kanssa. Huomioi, että sovelluksen Bluetooth-yhteys saattaa riippua laitteen yhdistetystä älypuhelimesta.

1

Vaihe 2:



Rekisteröi tili asennuksen jälkeen. Jos sinulla on jo Momcozy-tili, kirjaudu sisään.

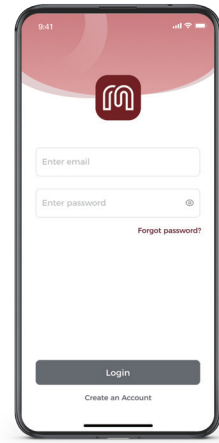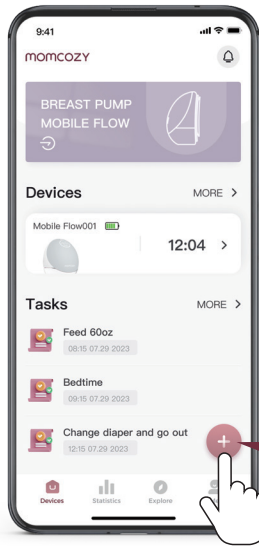

Vaihe 3:

Varmista, että olet ottanut Bluetooth-yhteyden käyttöön puhelimesi ja että rintapumppu pysyy käynnissä. Lisää laitteita napauttamalla painikkeita "+" ja "Laitteet".

2

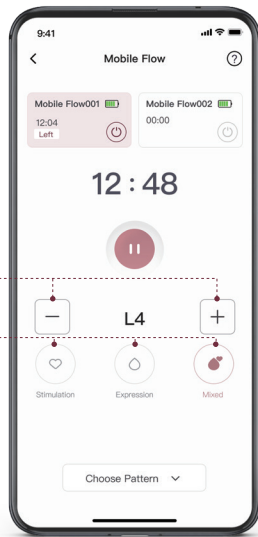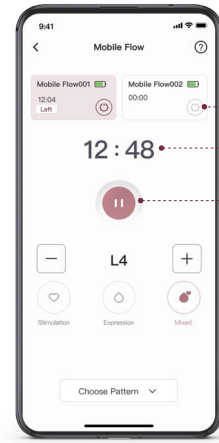


Off
Käyttöaika
Keskeytä/jatka

Imutaso
Toimintatilan valinta


Vaihe 4:
Voit ohjata rintapumppua sovelluksessa yhteyden muodostamisen jälkeen.

3


Asennusohjeet

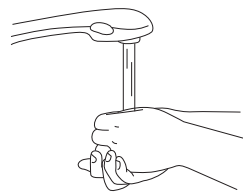


1
Pese kädet huolellisesti saippualla ja vedellä.

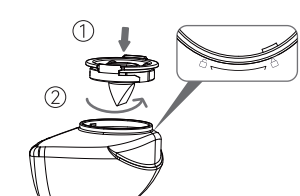

2
Kokoa maidonkerääjää kiertämällä sitä pullon kaulassa olevan lukituskuvakkeen suuntaan.

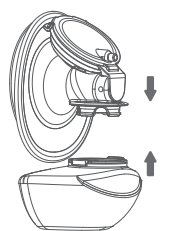

3
Kiinnitä rintasuppilo pullon kaulaan ja asenna maidonkerääjä paikalleen.

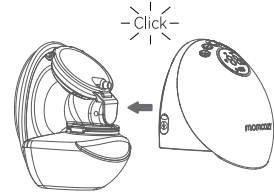

4
Kokoa moottori ja rintasuppilo.

4

Puhdistus ja sterilointi

*Ei-pestävät osat

Pumpun moottori



*Pestävät osat



Rintasuppilo



Kalvo



Maidonkerääjä




Venttiili

Pestävien osien puhdistaminen ja sterilointi

1. Puhdista saippuavedellä (40–60 °C) 3–5 minuutin ajan.
2. Käytä sterilointiin kiehuvaa vettä / höyryä / sterilointiastiaa, 100 °C (212 °F) 5–10 minuutin ajan.

* Pumpun osia ei kannata mikroaaltouunissa tai UV-sterilointilaitteissa. Korkea lämpötila (> 110 °C) lyhentää osien käyttöikää ja aiheuttaa turvallisuusriskejä.

Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä ongelmia, pyri etsimään ratkaisu käyttöohjevideosta. Siirry käyttöohjevideoon skannaamalla alla oleva QR-koodi.

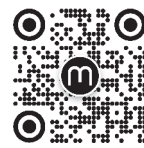

5

Akun merkkivalo



- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Akun varauksen osoitus
Paina pitkään: Kytke päälle tai pois päältä (on/off) | 2 Muistutus maidon ylivirtauksesta |
| 3 Paina lyhyesti: Keskeytä/jatka | 4 Toimintatilan valinta |
| 5 Suunnan vaihtaminen | 6 Bluetooth-ilmaisim |
| 7 Käyttöajan/mutason osoitus | 8 Toimintatilan osoitus |
| 9 Lisäys/vähennys | |

Vinkkejä

- 1) Pestävien osien odotettu käyttöikä on 1–3 kuukautta. Pestävät osat on suositeltavaa vaihtaa pitkäaikaisen säilytyksen jälkeen tai ennen maidon pumpaamista toiselle lapselle.
- 2) Rintapumppu sammuu automaattisesti, kun sitä ei ole käytetty 30 minuuttia.
- 3) Jos ärsytystä ilmenee tai pumpaus tuntuu epämiellyttävältä, vapauta tiiviste työntämällä sormesi rintasuppilon ja rinnan väliin, lopeta pumpun käyttö ja ota yhteys terveydenhuollon ammattilaisiin.

Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä sähköpostitse.
support@momcozy.com

6