




momcozy Mobile Flow™ Hurtigstartveiledning

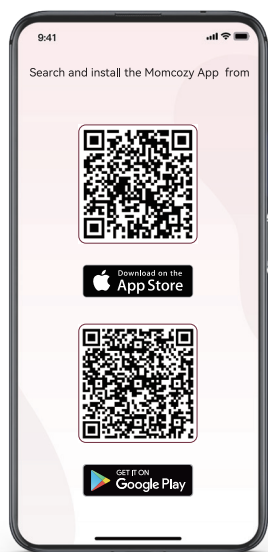



Steg 1:

Søk på Momcozy-appen i smarttelefonens app-butikk for å komme i gang, enten Google Play Store eller App Store. Appen er kompatibel med iOS 13 og Android 8.0 eller nyere versjoner. Vær oppmerksom på at appens Bluetooth-tilkobling kan avhenge av hvilken smarttelefon som er koblet til enheten.

1


Steg 2:

Registrer kontoen din etter installasjon. Logg på hvis du har en Momcozy-konto.

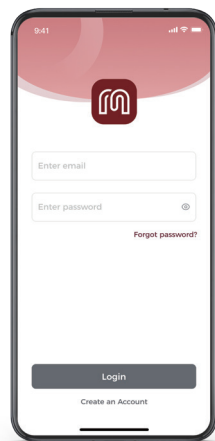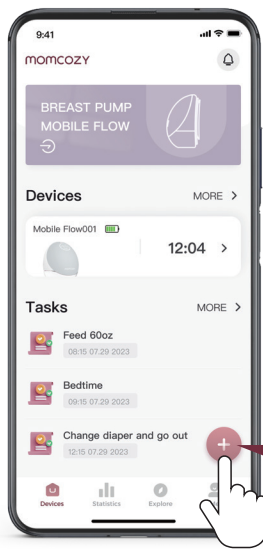


Steg 3:

Sørg for at du har skrudd på Bluetooth på telefonen. Brystpumpen bør være påslått. Legg til enheter gjennom "+" og "Enheter"-knappene.

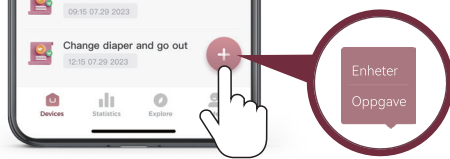


2

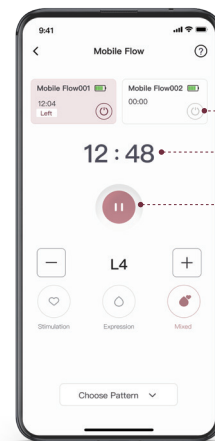

Av
Brukstid
Pause/fortsett


Sugenivå
Modusvalg

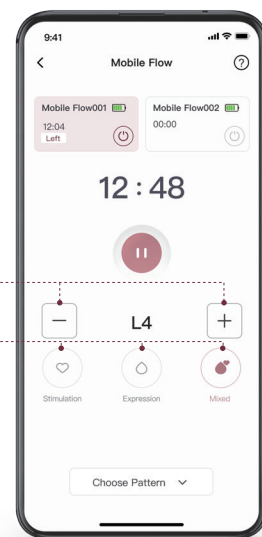


Steg 4:
Når den er tilkoblet kan du bruke appen til å kontrollere brystpumpen.

3


Veiledning for montering

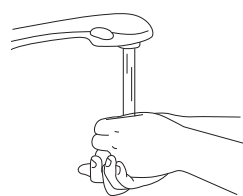


1
Vask hendene grundig med såpe og vann.

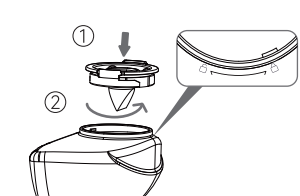

2
Monter melkesamleren ved å rotere den i retning lås-ikonet ved munningen av flasken.

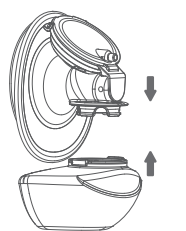

3
Fest brysttrakten til munningen av flasken og monter med melkeoppsamleren.

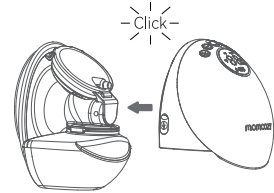

4
Monter motoren og flensen.


4

Vasking og sterilisering

***Ikke-vaskbare deler**
Pumpemotor



***Vaskbare deler**

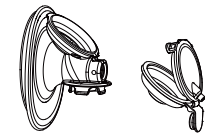

Brysttrakt Membran



Melkeoppsamler Ventil

Rengjøring og sterilisering av vaskbare deler
1. Rengjør med såpevann (40–60 °C) i 3–5 minutter.
2. Bruk kokende vann/damp/steriliseringskar. Det kreves 100 °C (212 °F) i 5–10 minutter.

* Det anbefales ikke å sterilisere pumpedeler i mikrobølgeovn eller UV-sterilisator. Høye temperaturer (> 110 °C) vil forkorte brukstiden og forårsake sikkerhetsrisiko.

Hvis du har problemer med produktet, kan du finne flere løsninger i bruksveiledningsvideoen. Skann QR-koden under for å åpne bruksveiledningsvideoen.



5

Batteriindikator



- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Batterivisning | 2 Påminnelse om melkeoverløp |
| 3 Langt trykk: Slå på/av | 4 Modusvalg |
| 5 Kort trykk: Pause/fortsett | 6 Bluetooth-indikator |
| 6 Bytte retning | 7 Løpetid/visning av sugenivå |
| 7 Løpetid/visning av sugenivå | 8 Modusindikator |
| 8 Minske/øke | |

Tips

- Den forventede levetiden på de vaskbare delene er 1–3 måneder. Det anbefales å skifte ut de vaskbare delene etter langtidsoppbevaring eller før du skal bruke pumpen til ditt neste barn.
- Brystpumpen slår seg automatisk av etter 30 minutters pumping.
- Hvis det oppstår iritasjon eller ubehag, bruker du fingeren til å bryte forseglingen mellom flensen og brystvevet, stopp bruken og kontakter helsepersonell.

Kontakt oss på e-post hvis du har spørsmål.
support@momcozy.com

6