

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## Naudojimo instrukcijos

Giovanni D-21 vapozone su didinamąja lempa



### Importuotojas:

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Lenkija

[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl) Rev.

A/04/2025



Skenavima  
s  
skirtingomi  
s kalbomis



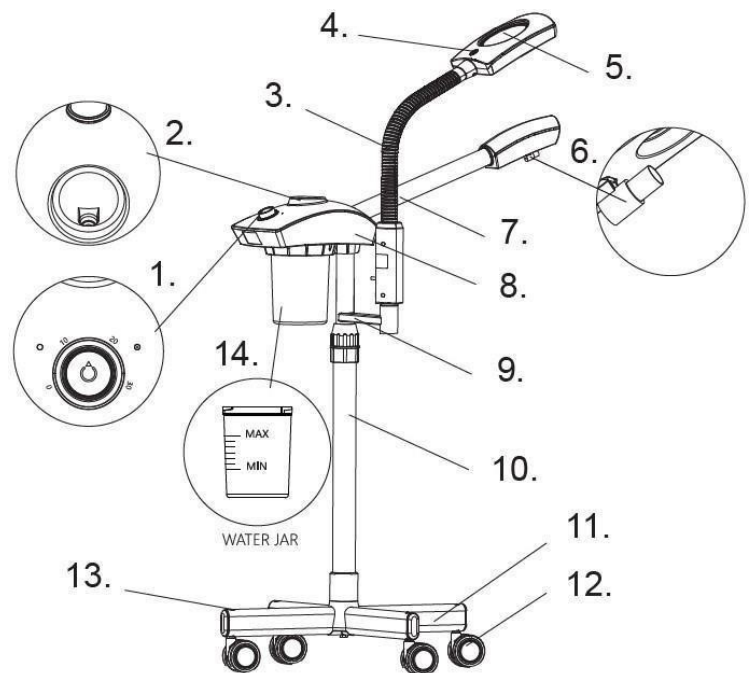
**Vapozonas Giovanni D-20. Daugiafunkcis vapozonas su šiltais garais ir ozonu.** Pasižymi aukšta atlikimo kokybe. Intuityvus naudojimas suteikia puikią galimybę dirbti bet kuriame grožio salone. Lengvas, funkcionalus, su stabiliu stovu. Teleskopinė rankena leidžia greitai reguliuoti. Vapozonas pastatytas ant reguliuojamo aukščio trikojo.

#### PRIETAISO FUNKCIJA:

1. Dezinfekuoja odą
2. Išplečia poras
3. Palengvina juodųjų taškelių ir negyvos odos šalinimą, nes garai prasiskverbia giliai į odą
4. Palengvina toksinų išsiskyrimą
5. drėkina ir gaivina odą
6. Skatina odos kraujotaką
7. Ženkliai pagerina masažo rezultatus

#### SPECIFIKACIJOS:

1. Įjungimo / išjungimo jungiklis ir jungiklis laikmatis
2. Skylė/užpildas
3. Žąsies kaklelio vamzdis
4. Šviesos įjungimo ir išjungimo jungiklis
5. Didinamasis lęšis x3
6. Antgalis, išskiriantis karštus garus
7. Purškimo vamzdis
8. Pagrindinis korpusas
9. Teleskopinis stovas (viršutinis stovas; 2in1)
10. Teleskopinis stovas (apatinis stovas)
9. Pagrindas
10. Ratukai
13. Dangtis
14. Vandens talpykla



#### NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:

1. Pastatykite įrenginį ant stabilaus, lygaus paviršiaus.
2. Patikrinkite, ar karšto vandens sandariklis yra priveržtas. Papildykite vandens lygį, kol jis priartės prie MAX lygio.
3. Pasukite laikmačio rankenėlę, kad nustatytumėte pageidaujamą prietaiso veikimo laiką (nuo 0 iki 30 minučių).
4. Įjunkite prietaisą paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką. Prietaisas pradės šildyti vandenį, tuo pat metu įsijungs UV lemputė. Garai pradės purkšti praėjus maždaug 5 minutėms po to, kai vanduo užvirs. Laikas gali skirtis priklausomai nuo vandens kiekio.
5. UV šviesą galima valdyti atskirai. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ir palaikykite 5 sekundes, UV lemputė įsijungs arba išsijungs.
6. Kai garai pradės sklisti, priartinkite prietaisą prie kliento veido. Idealus atstumas tarp antgalio ir kliento veido yra ne mažesnis kaip 20 cm.
7. Jei prietaisas ilgą laiką nenaudojamas, išpilkite vandenį ir išdžiovinkite indą.

### DĖMESIO!!!

Nepriartinkite prietaiso per arti kliento veido ar kūno. Kyla rimtų odos nudegimų pavojus.

### DĖMESIO!

Veikiant įrenginiui, jo nelenkite ir neapverskite. Nenaudokite prietaiso, jei jame nėra vandens.

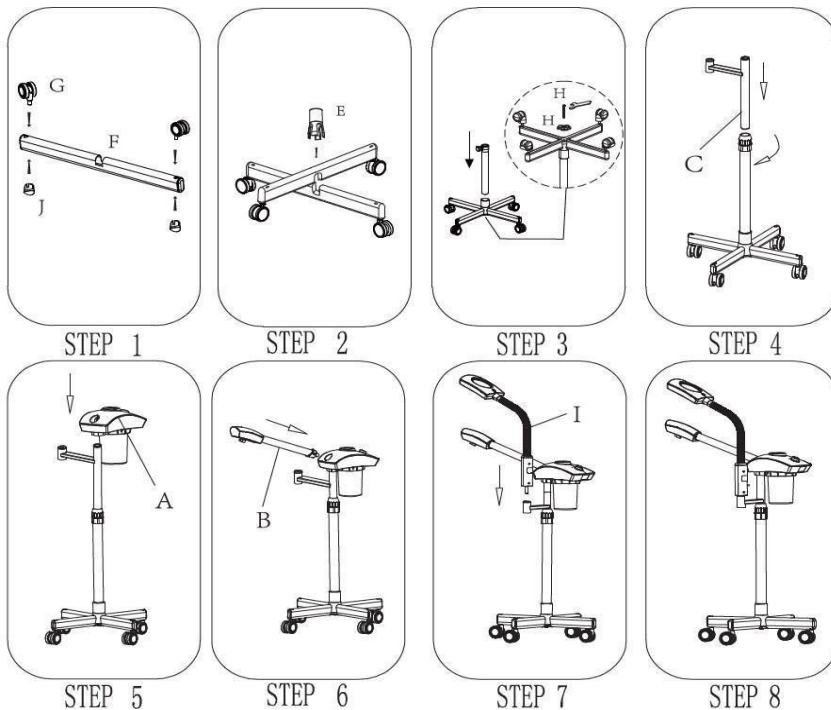
### DĖMESIO!!!

Nepilkite į vandens rezervuarą eterinių aliejų ar bet kokio kito skysčio, išskyrus vandenį. Tai gali sugadinti prietaisą arba sukelti fizinių sužalojimų.

### REKOMENDACIJOS:

1. Niekada nepalikite prijungto prietaiso be priežiūros. Būtina atidžiai prižiūrėti, kai tai prietaisą naudoja vaikai arba neįgalūs asmenys, ant jų arba šalia jų.
2. Naudokite prietaisą instrukcijoje aprašyta paskirtimi.
3. Niekada nenaudokite šio prietaiso, jei jo laidas ar kištukas yra pažeistas. Nenaudokite prietaiso, jei jis veikia netinkamai arba jei jis buvo numestas, sugadintas ar įkrito į vandenį.
4. Niekada nenaudokite prietaiso miegodami.
5. Prietaisą naudokite tik ant lygaus paviršiaus.
6. Niekada nenaudokite prietaiso per arti odos, nes kyla nudegimų pavojus.
7. Nepilkite į rezervuaro vandenį eterinių aliejų ar kitų priedų. Jei to nepadarysite, prietaisas gali būti sugadintas.
8. Nenaudokite prietaiso, jei jame nėra vandens.
9. Nepilkite jokių priedų į vandens talpyklą.
10. Reguliariai valykite vandens talpyklą. Prieš valydami nepamirškite išjungti prietaiso ir atjungti jį nuo elektros tinklo.
11. Nelieskite karšto vandens bako.
12. Nelieskite vandens bako, kai prietaisas yra įjungtas.
13. Baigę darbą, išpilkite vandenį ir išdžiovinkite talpyklą.

### ĮRENGINIO ĮRENGIMAS (vadovaukitės toliau pateikta schema):



### DĖMESIO!!!

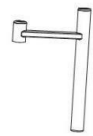
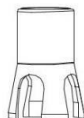
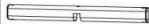
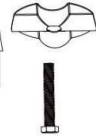
Nenaudokite šiurkščios šluostės lęšiui valyti. Tai darydami tai gali subraižyti objektyvą ir sumažinti jo skaidrumą.

### DĖMESIO!!!

Neapsaugotų akių nelaikykite tiesioginėje LED šviesoje, tai gali sukelti diskomfortą arba pakenkti regėjimui

### DĖMESIO!!!

Vandens talpyklą reikia reguliariai valyti. Prieš išimdami vandens talpyklą, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A:                                                                                | B:                                                                                | C:                                                                                | D:                                                                                | E:                                                                                  |
| 1PCS                                                                              | 1PCS                                                                              | 1PCS                                                                              | 1PCS                                                                              | 1PCS                                                                                |
|  |  |  |  |  |
| F:                                                                                | G:                                                                                | H:                                                                                | I:                                                                                | J:                                                                                  |
| 2PCS                                                                              | 4PCS                                                                              | 1PCS                                                                              | 1PCS                                                                              | 4PCS                                                                                |
|  |  |  |  |  |

Įrenginio aukštį galima reguliuoti nuo 78 iki 95 cm, todėl įrangą galima pastatyti tinkamame lygyje, kad gydytojui ir klientui būtų kuo patogiau. LED didintuvą ir wapozone antgalį galima pasukti, kad padidėtų gydymo diapazonas ir laukas.

### Techniniai duomenys

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Įtampa          | 120-220 V 50/60 Hz |
| Maitinimas      | 750W               |
| Lempos ryškumas | 1000-1600 Lx       |
| Lempos galia    | 9.5W               |

### Įrenginio matmenys:



## SAUGOS PRIEMONĖS

1. Šis prietaisas yra profesionali įranga, skirta naudoti kosmetinėse operacijose. Naudojant prietaisą tik kvalifikuotam kosmetikos specialistų personalui, galima išvengti nepageidaujamo poveikio gydymo metu.
2. Prietaiso negalima ardyti ar bandyti naudoti kitais tikslais, nei nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje. Visus aptarnavimo ir remonto darbus turi atlikti tik įgaliotasis techninės priežiūros specialistas (ACTIVESHOP Sp. z o.o. įmonė).
3. Nemontuokite ir nenaudokite įrenginio šalia skysčių, drėgnose vietose arba su drėgnomis rankomis - taip, kad į prietaisą nepatektų skysčių.
4. Nedelsdami ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo ir kreipkitės į įgaliotąją aptarnavimo įmonę ACTIVESHOP Sp. z o.o. šiais atvejais: a) į prietaisą pateko skysčio, b) prietaisas skleidžia keistą kvapą, dūmus arba skleidžia keistus garsus, c) pažeistas maitinimo laidas, d) prietaisas buvo nuverstas arba pažeistas jo korpusas.
5. Ant kabelių nedėkite jokių daiktų. Nemontuokite įrenginio ten, kur kas nors gali užlipti ant maitinimo laido.
6. Saugumo sumetimais ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo kiekvieną kartą, kai baigsite dirbti su įrenginiu.
7. Nieko neįkiškite į prietaiso angą. Jei į angą pateko pašalinis daiktas, ištraukite laidą iš lizdo ir kreipkitės į platintoją arba gamintoją.
8. Nestatykite prietaiso ant nestabilaus vežimėlio, lentynos ar transporto priemonės. Prietaisas gali būti sugadintas, jei nukris gali būti sugadintas.
9. Siekiant užtikrinti fiksuotą prietaiso tarnavimo laiką, prieš dar kartą paspaudžiant maitinimo mygtuką (tarp įjungimo ir išjungimo ir a t v i r k š č i a i ) rekomenduojama išlaikyti vienos minutės intervalą.
10. Maitinimo šaltinis turi atitikti vardinėje plokštelėje nurodytus techninius duomenis. Priešingu atveju yra kyla pavojus, kad prietaisas gali sugesti, sugesti ar net sudegti.

## DĖMESIO:

1. Sugedus maitinimo kabeliui ar įvykus kitiems gedimams, kreipkitės į įgaliotąją aptarnavimo centrą, kad išvengtumėte bet kokio pavojaus.
2. Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni kaip 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fizinės ir protinės galimybės yra ribotos, o patirtis ir žinios apie įrangą nepakankamos, jei prižiūrima arba instruktuojama, kaip saugiai naudotis įranga, kad būtų suprasta su tuo susijusi rizika.
3. Įrangą nėra skirta vaikams žaisti. Neleiskite vaikams žaisti su įrenginiu.
4. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai vaikai ar asmenys, neturintys pakankamai žinių apie naudotis prietaisu šalia jo.
5. Šis elektros prietaisas nėra žaislas. Netinkamas elektros prietaiso naudojimas ar sąlytis su juo gali kelti pavojų sveikatai arba sukelti mirtį, todėl prietaisą reikia naudoti ir laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.



### PRIETAISO ŠALINIMAS

Panaudotus elektros prietaisus, armatūrą ir pakuotes utilizuokite perdirbimo centruose, laikydamiesi aplinkos apsaugos principų. Elektros prietaisų negalima išmesti į buitinių atliekų kontenerius. Laikykitės šio tipo įrangos šalinimo taisyklių. Siekdami apsaugoti aplinką pagal Direktyvą 2012/19/EB

dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų Elektros ir elektroninės įrangos atliekos turėtų būti renkamos atskirai ir perduodamos į elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktus.

Nebenaudojamuose ir senuose prietaisuose yra visiškai perdirbamų komponentų, todėl jie turėtų būti atiduodami perdirbti. Todėl jie turėtų būti atiduodami į atitinkamus surinkimo punktus, taip pat bendrovei ACTIVESHOP Ltd.

## SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Prietaisas turėtų būti transportuojamas nuo (-)20 °C iki (+)50 °C temperatūroje tik originalioje pakuotėje. Prietaisas turėtų būti laikomas gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje santykinė oro drėgmė neviršija 75 %. Darbinė temperatūra nuo (+)10°C iki (+)40°C. Sandėliavimo ir transportavimo procesų metu prietaiso negalima mėtyti ar mėtyti, jis neturi būti veikiamas mechaninių smūgių ar atmosferos veiksnių.

