

正面

130 mm

对折线



### Hoe voorkomt u melkverlies en Afkolftips voor meer moedermelk.

- 1 Zorg ervoor dat de borstkolf goed gemonteerd is.
- 2 Buig naar voren om ervoor te zorgen dat uw nippel in het midden van de borstschildtunnel zit. De borstkolf moet stevig tegen uw borst aan zitten.



- 3 We raden gebruikers aan een volledig bedekkende borstvoedingsbeha te dragen om een goede afsluiting te vormen tussen hun borsten en het borstschild.
- 4 Leun iets voorover om de borstkolf na het kolven van de borst te halen.

**Tips**

- 1) De verwachte levensduur van de wasbare onderdelen is 1-3 maanden. Het wordt aanbevolen om de wasbare onderdelen te vervangen na langdurige bewaring of voordat u gaat kolven voor uw volgend kind.
- 2) De borstkolf schakelt automatisch uit na 30 minuten kolven.
- 3) Als er irritatie of ongemak optreedt, gebruik dan uw vinger om de afsluiting tussen het borstschild en het borstweefsel te verbreken. Stop met het gebruik en raadpleeg een zorgverlener.

Als u vragen hebt, kunt u per e-mail contact met ons opnemen.  
[support@momcozy.com](mailto:support@momcozy.com)

4


## momcozy

### Draagbare Borstkolf

**Installatierichtlijnen** (raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie)

\*Zorg ervoor dat uw handen schoon zijn voor de installatie.

- 1 Bevestig de melkopvangbak en zet het deksel vast om een goede afsluiting te krijgen.

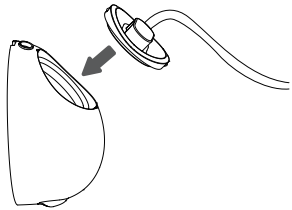

- 2 Duw de ventiel voorzichtig in de melkopvangbak. Controleer of er geen tussenruimten zijn.




Raadpleeg voor uw gebruiksgemak de video in de bedieningshandleiding voor verdere oplossingen. Scan de QR-code hierboven om toegang te krijgen tot de video van de bedieningshandleiding.


1

背面


- 3 Lijn eerst de melkopvangbak uit met de bovenkant van het borstschild en druk dan goed aan voor een stevige verbinding.

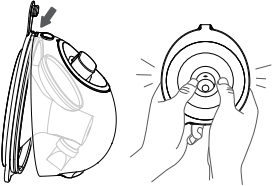

- 4 Sluit het lange uiteinde van de slang aan op de motor van de kolf.

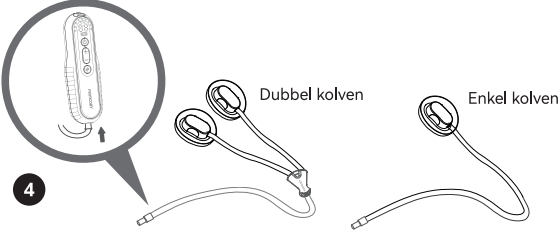

### Melk schenken

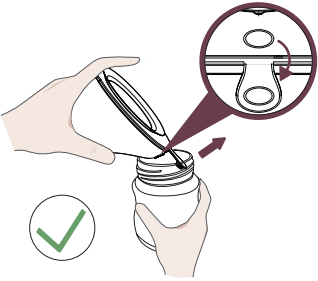

Zorg ervoor dat u de melkopvangbak in de juiste richting houdt wanneer u melk overgiet. Giet de melk vervolgens uit de borstschildstunnel.


Als u vragen hebt, kunt u per e-mail contact met ons opnemen.  
[support@momcozy.com](mailto:support@momcozy.com)

2

### Reiniging en sterilisatie

**\* Niet wasbare onderdelen**

Slangen  
Motor kolf

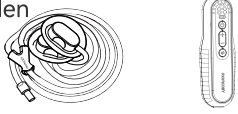

**\*Wasbare onderdelen**


Wasbare onderdelen reinigen en steriliseren

1. Schoonmaken met zeepwater (40-60 °C) gedurende 3-5 minuten.
2. Gebruik kokend water/stoom/sterilisatiepot voor sterilisatie. Er is gedurende 5-10 minuten 100°C (212°F) nodig.

\* Het wordt niet aanbevolen om kolfonderdelen te steriliseren in een magnetron of uv-sterilisator. Hoge temperaturen (>110°C) verkorten de levensduur en veroorzaken veiligheidsrisico's.

Borstschild  
Ventiel  
Melkopvangbak

### Bedieningspaneel

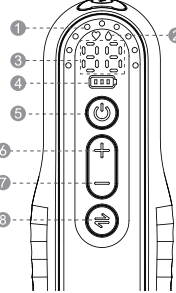

- 1 Indicator voor zuigniveau
- 2 Modusindicator
- 3 Gebruiksduur/Weergave zuigniveau
- 4 Batterijweergave
- 5 Aan/Uit
- 6 Verhogen
- 7 Verlagen
- 8 Kiezen modus

- Druk lang op en houd ingedrukt om aan/uit te zetten;
- Druk kort op om de pompessie te pauzeren / door te gaan.
- Stimulatie Expressie Gemengd

3

180 mm