

REF **A0022584, A0025025****Starrsed PC****Fournisseur:**
Mechatronics Instruments B.V.
De Corantijn 13
1689 AN Zwaag
Pays-Bas
T: +31 229 291 129**Destination**

Réactif pour le nettoyage automatique des pipettes dans les analyseurs de VS Starrsed.

Mode d'emploi

Ce produit est destiné à être utilisé sur les analyseurs Starrsed uniquement. Consultez le manuel de l'instrument pour obtenir des instructions détaillées.

1. Retirez le bouchon du nouveau flacon.
2. Retirez le bouchon avec le tube de prélèvement du flacon vide.
3. Retirez le flacon vide.
4. Posez le nouveau flacon.
5. Placez le bouchon avec le tube de prélèvement sur le nouveau flacon. Évitez de toucher le tube de prélèvement qui pénètre dans le réservoir.

Données chimique/physiques

Contient des tensioactifs principaux (0,5 % en poids au total) en tant que principe actif, certains excipients avec un pH élevé pour améliorer les performances de nettoyage (< 0,25 % en poids au total), un agent colorant pour la distinction et un conservateur (< 0,5 % en poids).

Emballages

A0022584 flacon de 500 ml

A0025025 boîte de 6 flacons de 500 ml A0022584

Sécurité

Tout incident grave survenu en relation avec le produit doit être signalé au distributeur et/ou au fabricant et aux autorités locales compétentes.

La version la plus récente de la Fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.rrmechatronics.com

Stockage et stabilité

Stabilité au transport à 5 - 60 °C (maximum 1 mois)

Durée de conservation après fabrication: 2 ans, mais pas plus que la date d'expiration.

à conserver au sec dans des récipients hermétiquement fermés, à des températures de 5 à 35 °C.

Stabilité en cours d'utilisation: Un maximum de 2 mois à température conseillée de 5 à 30 °C.

Informations écologiques

Généralement pas dangereux pour l'eau.

Traitement des déchets et nettoyage

Ne déversez pas dans les lacs, les ruisseaux, les égouts, etc. Evacuation conformément aux prescriptions légales.

Nettoyez autant que possible avec des produits de nettoyage ordinaires. Évitez les solvants.



RR Mechatronics Manufacturing B.V.
De Corantijn 13, 1689 AN Zwaag,
The Netherlands
www.rrmechatronics.com



Qserve Group UK Ltd
282 Farnborough Road,
Farnborough, GU14 7NA
United Kingdom



QUNIQUE GmbH
Bahnhofweg 17
5610 Wohlen
Switzerland

rev. A01
Initial release