

* 红色框不印刷

Sinocare三诺

公司名称	三诺生物传感股份有限公司	须符合HSF检测	
文件名称	Safe AQ Smart 操作指南	文件编号	C-36300492
文件版本	B.3	物料编码	36300492
图文尺寸	展开尺寸197*260mm	图文比例	1: 1
制作材料	128g铜版纸, 四等分, 双面印刷	单位	毫米 (mm)

文件版本	变更时间	变更说明	变更人
B.1	2018.12.14	初版编制	黎辉雄
B.2	2022.02.25	依据ECR202201007 CE标志由5mm改为6mm; 修改制造商符号及信息中的电话、邮箱、网址; 增加Test strip文字; 删除采血笔中的Sinocare文字	刘松艳
B.3	2022.11.14	应ECR-PPL202211012需求, Safe AQ Smart 操作指南上配套的试条产品型号修正为“Safe AQ”	吴莉情

编制:	_____ 吴莉情 _____	_____ 2022 年 11 月 14 日 _____
审核:	_____	_____ 年 ____ 月 ____ 日 _____
批准:	_____	_____ 年 ____ 月 ____ 日 _____


Safe AQ Smart

Beknopte Handleiding


⚠ Lees voor de test de beknopte handleiding en gebruikersaanwijzing zorgvuldig door.



STAP 1: Was uw handen met zeep of gebruik een alcoholdoekje om de vingertop schoon te maken.

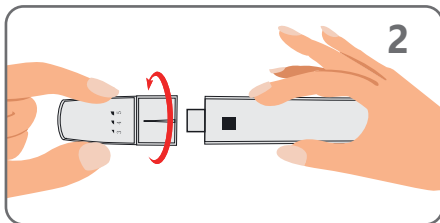

STAP 2: Schroef de dekking van het prikapparaat los.

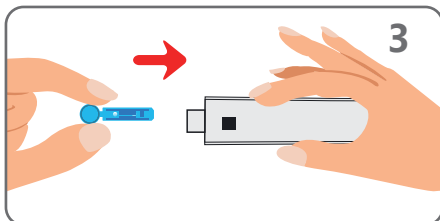

STAP 3: Steek een lancet in het prikapparaat totdat het volledig tot stilstand komt.

Materialen voorbereiden


Safe AQ Smart Meter



Lancet





Prikapparaat

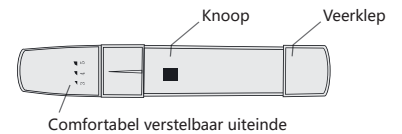


Stripflacon




Teststrip

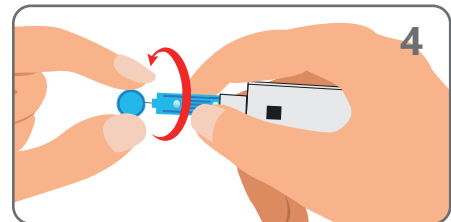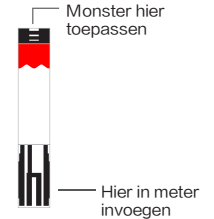


STAP 4: Draai en trek om de lancetbeschermer te verwijderen. Bewaar de lancetbeschermer voor een veilige verwijdering van de lancet.

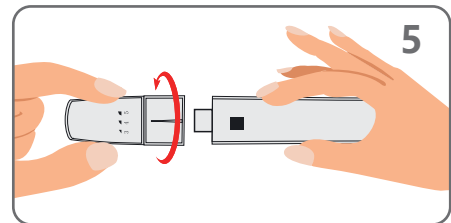


STAP 5: Schroef de dekking van het prikapparaat weer vast.

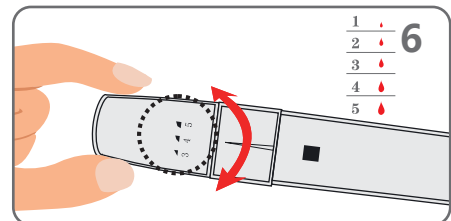


STAP 6: Draai het Comfortabel verstelbaar uiteinde om de punctiediepte aan te passen.

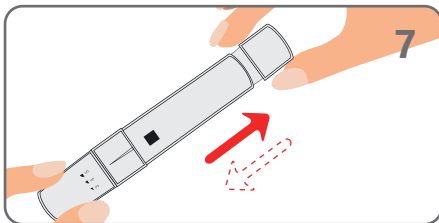

STAP 7: Trek de veerklep volledig terug om het prikapparaat in te schakelen.

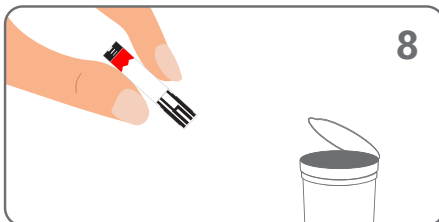


STAP 8: Neem een strip uit de stripflacon. Sluit onmiddellijk het deksel van de injectieflacon.

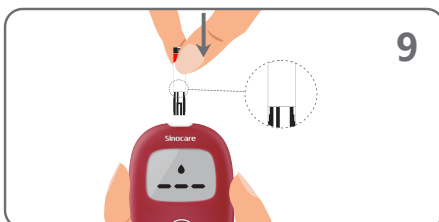


STAP 9: Steek de teststrip volledig in de teststrippoot van de meter totdat deze stopt.




STAP 12: Na een aftelling van 5 seconden geeft de meter het testresultaat weer.

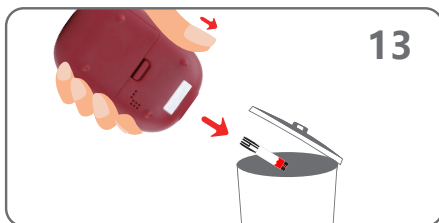

STAP 13: Werp de strip uit. Gooi de gebruikte Safe AQ-bloedglucose-teststrip voorzichtig weg om besmetting te voorkomen.

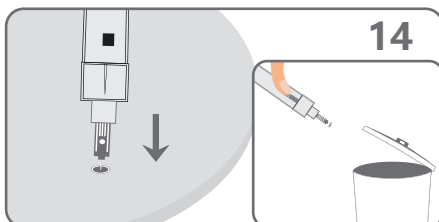

STAP 14: Verwijder het deksel van het prikapparaat. Met de lancetbeschermer op tafel steek de naald van de lancet in de beschermer. Werp de lancet uit en schroef het lancetafdekking weer vast.

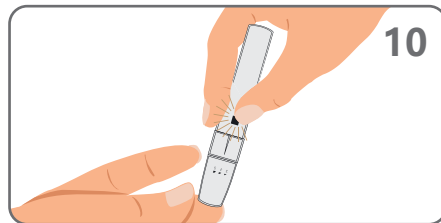

STAP 10: Zorg ervoor dat het prikapparaat stevig tegen uw vinger is gedrukt. Druk op de knop om te lanseren.

Aandacht: Als u geen voldoende bloedmonster hebt gemaakt, masseer dan uw vinger zachtjes. **KNIJP IN UW VINGER NIET.** Raadpleeg stap 6 om de punctiediepte en lans opnieuw aan te passen.



STAP 11: Wanneer het scherm van de Safe AQ Smart-bloedglucosemeter een knipperend bloeddruppelsymbool weergeeft, breng dan het bloedmonster aan op de punt van de Reactiezone. U kunt het bloedmonster aanbrengen op de linker-, midden- of rechterpunt van de Reactiezone.

Aandacht

1. Lancets en strips zijn alleen voor eenmalig gebruik. Niet hergebruiken.
2. Deel uw prikapparaat niet met anderen.
3. Gebruik geen verlopen strip.



Changsha Sinocare Inc.
Guyuan-weg 265, Hi-Tech Zone, Stad Changsha,
Provincie Hunan, Volksrepubliek China, postcode: 410205
E-mail: intl_mkt@sinocare.com
Website: www.sinocareintl.com
Klantenservice: +86-731-89935929



Shanghai Internationale Holding Corp. B.V. (Europa)
Eiffestraat 80, 20537 Hamburg, Duitsland.
Tel.: +49-40-2513175
Fax: +49-40-255726
E-mail: shholding@hotmail.com