

momCOZY

Kannettava rintapumppu

Mobile Style™ Käyttöohje



Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten.

→ SUOMI

SISÄLTÖ

1. Tuotteen johdanto	01
2. Varoitukset ja varotoimet	01
3. Vasta-aiheet	02
4. Turvallisuustiedot	02
5. Tuotteen kuvaus	05
6. Käyttöohjeet	28
7. Säilytysolosuhteet	29
8. Tekniset tiedot	29
9. Huolto ja varaosat	30
10. Vaatimustenmukaisuusvakuutus	31
11. Vianmääritys	31
12. Hävittäminen	33
13. Takuu	33
14. Matkustamista tai kansainvälistä käyttöä koskeva lausunto	34
15. Valmistajan tiedot	34

1. Tuotteen johdanto

Imettävät naiset voivat pumpata ja kerätä maitoa rinnoista Momcozy-rintapumpulla. Momcozy-rintapumppu pumpppaa maitoa luomalla alipaineen nänнин ympärille. Maito kerätään maidonkerääjään.

Laitteessa on stimulointitila, puristustila ja yhdistelmätila. Stimulointitilassa rintapumppu saa maidon virtaamaan nopean ja lyhyen imemiskuvion mukaan. Puristustilassa rintapumppu pumpppaa maitoa syvemmältä ja hitaammin hitaan imemiskuvion mukaan. Yhdistelmätilassa rintapumppu aloittaa pumpppauksen nopean ja lyhyen imemiskuvion mukaan ja jatkaa sitten hitaan ja pitkän imemiskuvion mukaan. Rintapumpussa on silikonikalvo, joka estää maidon virtaamisen alipainejärjestelmään pitämällä fyysisesti maidon kanssa kosketuksiin joutuvan väylän erillään alipainejärjestelmästä.

Laitte on tarkoitettu yhdelle käyttäjälle.

2. Varoitukset ja varotoimet

Käyttöoppaassa esitettävien varoitusmerkkien ja symbolien tarkoituksena on auttaa käyttämään tuotetta turvallisesti ja oikein sekä estää käyttäjän ja muiden vahingoittumisen. Seuraavassa taulukossa kuvataan tarkemmin varoitusmerkit ja symbolit:

Varoitusten/varotoimien symbolit	
 Varoitus	Varoitus varoittaa lukijaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, josta voi olla seurauksena kuolema tai vakava vamma, jos tilannetta ei vältetä. Tällä symbolilla voidaan myös kuvata mahdollisia vakavia haittavaikutuksia ja turvallisuusriskejä.
 Varotoimet	Tämä symboli varoittaa lukijaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, josta voi olla seurauksena käyttäjän tai potilaan lievä tai kohtalainen loukkaantuminen tai laitteen tai muun omaisuuden vahingoittuminen, jos tilannetta ei vältetä. Tällä symbolilla voidaan myös varoittaa vaarallisista käytännöistä. Käyttäjän on tällöin toimittava erityisen huolellisesti varmistaakseen laitteen turvallisen ja tehokkaan käytön sekä välttääkseen laitteen käytöstä tai väärinkäytöstä johtuvan laitteen vahingoittumisen.
Vasta-aiheet	Vasta-aiheet tarkoittavat tilanteita, joissa laitetta ei saa käyttää, koska käyttöön liittyy selkeästi enemmän riskejä kuin hyötyjä. Tiettyjen henkilöiden ei tule käyttää laitetta heidän terveydentilansa vuoksi.
Huomiot	Edellyttää kiinnittämään huomiota, sillä huomiotta jättäminen voi johtaa tuotteen virheelliseen käyttöön tai laitteen vaurioitumiseen.

Symbolin kuvaus

	CE-merkintä		UKCA-merkintä
	Säilytettävä kuivana		Pinottavissa enintään 5 päällekkäin
 MEHRWEG	Kierrätysmerkintä		Katso käyttöohjeet.
	Eräkoodi		Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuva laite
	FCC-merkintä		Sarjanumero
	Jakelupakkaukset tulee suojata auringonvalolta		
IP22	Ensimmäinen numero 2: Suojattu halkaisijaltaan vähintään 12,5 mm:n kiinteitä vieraita esineitä vastaan. Toinen numero 2: Suojattu pystysuoraan putoavilta vesipisaroilta, kun kotelo on suunnattu 15°:een asti		
	Hävittäminen direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaisesti		
	Tätä laitetta ei ole testattu magneettikuvausympäristössä, eikä sitä saa käyttää magneettikuvausympäristöissä, kun potilaat käyttävät laitetta. Älä vie laitetta magneettikuvaushuoneeseen.		
	Edustaja Yhdistyneessä kuningaskunnassa		Ranskalainen ERP-pakkaus
	Valtuutettu edustaja EU:ssa		

3. Turvallisuustiedot

Noudata aina seuraavia perusturvallisuustietoja käyttäessäsi sähkölaitteita, erityisesti jos lapsia on paikalla.

3.1 Varoitus

- 1) Älä käytä tätä laitetta, jos sinulla on sydämentahdistin, implantoitu defibrillaattori tai muu implantoitu metallinen tai elektroninen laite. Laitteen käyttö voi aiheuttaa sähköisiä häiriöitä tai kuoleman.
- 2) Tätä laitetta eivät saa käyttää sellaiset henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt eivät ole tavanomaisella tasolla, tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa. Tällaiset henkilöt voivat käyttää tätä rintapumppua vain, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä tai on antanut heille asianmukaiset ohjeet laitteen käytöstä.
- 3) Vaara: Sähköiskun vaaraa voi vähentää seuraavasti:
 - Irrota sähkölaitteet pistorasiasta aina heti latauksen jälkeen.
 - Tuotetta ei saa käyttää kylpemisen, suihkussa käymisen, ajamisen tai uimisen aikana.
 - Älä tartu veteen pudonneeseen sähkötuotteeseen, vaan irrota virtasovitin pistorasiasta välittömästi.
- 4) Momcozy-rintapumppu on henkilökohtainen hoitotuote, jota ei saa hygieniasyistä koskaan antaa tai myydä toisille äideille. Nämä mitätöivät takuun.
- 5) Jos sinulla on hepatiitti B-, hepatiitti C- tai HIV-tartunta, rintamaidon pumppaaminen Momcozy-rintapumpulla ei vähennä tai poista riskiä viruksen välittymisestä vauvalle rintamaidon kautta.
- 6) Tuotteen käyttäminen lasten tai vammaisten läheisyydessä edellyttää tarkkaa valvontaa. Älä anna lasten tai lemmikkien leikkiä moottoriyksiköllä, pakkausmateriaaleilla tai lisävarusteilla.
- 7) Käytä tuotetta ainoastaan tässä käyttöoppaassa kuvattuihin käyttötarkoituksiin.
- 8) Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia lisävarusteita tai muita maidon keräämiseen tarkoitettuja komponentteja.
- 9) Tarkista virtasovitin ennen lataamista. Älä koskaan käytä vaurioitunutta virtasovitinta.
- 10) Älä koskaan jätä tuotetta ilman valvontaa latauksen aikana.
- 11) Älä aseta tuotetta ja lisävarusteita kuumille pinnoille.
- 12) Älä koskaan käytä tuotetta nukkuessasi tai väsyneenä.
- 13) Älä käytä laitetta paikoissa, joissa käytetään aerosolisuihkeita tai annetaan happea.
- 14) Älä käytä laitetta räjähtävien tai syttyvien materiaalien läheisyydessä, magneettikuvausympäristössä, ylipainehappokammiossa tai takan tai lämmittimien lähellä.
- 15) Vältä latauskaapelin aiheuttama kuristuminen.
- 16) Käyttäjät eivät saa korjata tuotetta. Tuotteen korjaaminen itse mitätöi takuun. Tuotteen voi lähettää korjattavaksi valmistajalle tai valtuutetulle jälleenmyyjälle.

- 17)Vapauta alipaine kytkemällä rintapumpun virta pois päältä, ennen kuin otat pumpun pois rinnan päältä.
- 18)Yksittäisille käyttäjille tarkoitettuja sähkökäyttöisiä rintapumppuja ei saa koskaan vuokrata tai jakaa.
- 19)Älä käytä rintapumppua raskaana, sillä pumppaus voi käynnistää synnytyksen.
- 20)Sovelletun osan enimmäislämpötila on 43,9 °C. Liian korkea lämpötila voi aiheuttaa palovammoja. Varmista ennen käyttöä, että rintojen ihon on ehjä ja terve. Jos havaitset ylikuumenemista, kytke laite pois päältä. Tuotetta saa käyttää kerrallaan enintään 30 minuuttia. Laitteen on annettava jäähtyä vähintään viiden minuutin ajan käyttökertojen välillä.

21)Tuotteen käyttöikä

- Tuotteen käyttöikä on 500 tuntia. Pestävien osien odotettu käyttöikä on 1–3 kuukautta. Tarkista ennen käyttöä, että tuote toimii normaalisti. Tuotteen toiminta saattaa heikentyä odotetun käyttöiän jälkeen. Tuote ei esimerkiksi pysty hallitsemaan alipainetta asianmukaisesti, ja liian suuri alipaine voi aiheuttaa vammoja.
- 22)Tätä laitetta voivat käyttää henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut, tai joilta puuttuu tarvittavaa kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai opastetaan käyttämään laitetta turvallisesti sekä ymmärtämään siihen liittyvät vaaratekijät.
 - 23)Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
 - 24)Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
 - 25)Akun hävittäminen polttamalla tai akun mekaaninen hajottaminen tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.
 - 26)Akun jättäminen erittäin korkeaan lämpötilaan voi aiheuttaa räjähdyksen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen.
 - 27)Akun jättäminen erittäin alhaiseen ilmanpaineeseen voi aiheuttaa räjähdyksen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen.

3.2 Varotoimi


- Älä aseta tuotetta sellaiseen paikkaan, josta se voi pudota tai päätyä kylpyammeeseen, lavuaariin tai uima-altaaseen.
 - Älä aseta tai pudota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen.
 - Älä upota tuotetta mihinkään nesteeseen tai kohdista siihen äärimmäisiä iskuja, kuten pumpun pudotus.
 - Pumppaa kerrallaan enintään viiden minuutin ajan, vaikka et onnistuisi pumppaamaan yhtään maitoa. Yritä saada maitoa herumaan toisena ajankohtana.
 - Jos pumppaus tuntuu epämukavalta, imu voidaan katkaista asettamalla sormi rinnan ja rintasuppilon väliin.
 - Jos ilmenee ärsytystä tai epämukavia tuntemuksia, lopeta käyttö ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.
 - Jos virtasovittimen kotelo tai johdot löystyvät, irtoavat tai rispaantuvat, lopeta virtasovittimen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä laitteen valmistajaan. Lopeta laitteen käyttö välittömästi, jos havaitset pumppuyksikön tai virtasovittimen savuavan tai palavan.
- Ilmoitus: Jos rintapumppu kuumenee liikaa pumppauksen aikana, lopeta pumppaus välittömästi ja ota pumppu pois paikaltaan.

Huomiot:

Suoraa pääyksikkö suoralta auringonvalolta.

4. Tuotteen kuvaus

Tuotteessa on pääyksikkö ja maidonkeräyssarja jne.

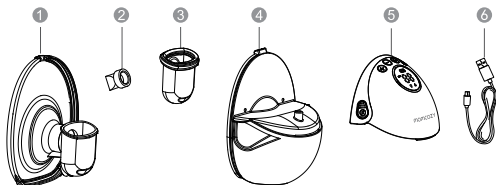

Kuva 1. Laitteen kuvaus

Rintapumpun kuvaus

Nro.	Osa	Kuvaus
①	24 mm:n rintasuppilo	Kaikki nämä osat muodostavat maidonkeräyssarjan
②	Venttiili	
③	Kalvo	
④	Maidonkerääjä (180 ml)	
⑤	Pääyksikkö	Pumpun moottori
⑥	USB Type-C -kaapeli	Tulopäässä on USB 2.0 -liitäntä ja lähtöpäässä Type-C-liitäntä

Muut lisävarusteet:

17mm:n rintasuppilo

19mm:n rintasuppilo

21mm:n rintasuppilo


Pikaopas

Rintasuppilon suojus

Rintasuppilon koon mittausväline

Säilytuspussi

Käyttöopas

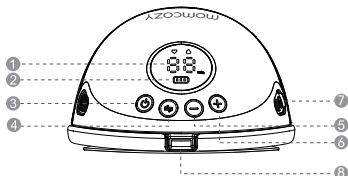

Kuva 2. Ohjauspaneeli

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ① Käyttöajan/imutason osoitus | ② Akun varauksen osoitus |
| ③ On / Off / Keskeytys -painike | ④ Toimintatilan valinta |
| ⑤ Vähennyspainike | ⑥ Lisäyspainike |
| ⑦ Latausportti | ⑧ Maidon ulostuloaukko |

Ohjauspaneelin kuvaus

Nro.	Painikkeet ja LED-merkkivalot	Toiminnot
1		Kytke virta päälle tai pois päältä painamalla pitkään. Keskeytä pumppaus painamalla kerran ja jatka pumppausta painamalla mitä tahansa painiketta.
2		Toimintatilan valinta
3		Pienennä imutehoa
4		Lisää imutehoa
5		Stimulointitila: Tässä tilassa rintapumppu saa maidon virtaamaan nopean ja lyhyen imemiskuvion mukaan.
6		Puristustila: Tässä tilassa rintapumppu pumpkaa maitoa syvemmältä ja hitaammin hitaan imemiskuvion mukaan.
7		Yhdistelmätila: Tässä tilassa rintapumppu aloittaa pumppauksen nopean ja lyhyen imemiskuvion mukaan ja jatkaa sitten hitaan ja pitkän imemiskuvion mukaan.
8		Imutason osoitus: Rintapumpussa on yhdeksän eri imutilaa. Käyttöajan osoitus: Näyttää pumppausajan (00–29 minuuttia), näyttää sekunnit, jos aika on alle 1 minuutti
9		Akun varauksen osoitus

Akun varaustason osoitus		
Akku vähissä: Vilkkuu	Ladataan: Palaa yksi kerrallaan	Ladattu täyteen: Palaa tasaisena
		

Kun akku on tyhjentynyt ja laite sammuu automaattisesti, laite näyttää vain ilmoituksen akun alhaisesta varauksesta.


5. Käyttöohjeet

5.1 Akun lataaminen

Lataa tuote ennen ensimmäistä käyttökertaa. Rintapumpulle virtaa syötetään sisäisestä ladattavasta litiumakusta.

Tuotteidemme mukana toimitetaan latauskaapeli (USB2.0 / Type-C) mutta ei virtasovitinta. Hanki virtasovitin itse ennen lataamista. Osta USB 2.0 -liitäntää vastaava virtasovitin ja varmista, että virtasovittimen syöttöteho on AC 100~240 V 50/60 Hz ja lähtöteho DC 5 V 1 A.


- Kun ensimmäinen akun merkkivalopalkki vilkkuu, akun varaus on vähissä ja käyttöaikaa on jäljellä 30 minuuttia. Lataa laite.
- Täyteen ladattua laitetta voidaan käyttää 5–6 pumppauskertaa (noin 180 minuuttia) 30 minuuttia kerrallaan.

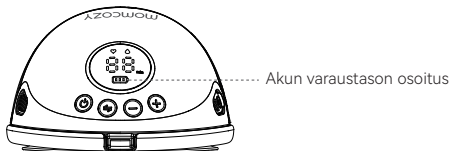

Kuva 3

Lataa akku seuraavasti:

- Aseta latauskaapelin USB-pää virtasovittimen USB-liitäntään.
- Työssä virtasovittimen pistoke pistorasiaan.
- Työnnä latauskaapelin Type-C-pää latausporttiin.

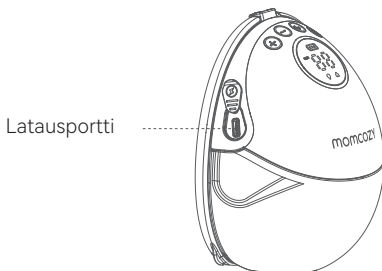

Kuva 4. Latausportin sijainti

Laitteen latautuminen täyteen kestää noin 150 minuuttia.

Varaustason osoitus			
Akkua ladataan, yksi akkupalkki: Yksi valo vilkkuu seuraavassa järjestyksessä vasemmalta oikealle: palkki 1 – palkki 2 – palkki 3	Akkua ladataan, kaksi akkupalkkia. Palkki 1 palaa ja toinen valo vilkkuu palkin 2 ja palkin 3 välillä	Akkua ladataan, kolme akkupalkkia. Palkit 1 ja 2 palavat. Palkki 3 vilkkuu	Ladattu täyteen: kaikki kolme valopalkkia palavat

Irrota virtasovitin pistorasiasta sekä irrota latauskaapeli virtalähteestä ja pääyksiköstä latauksen päätyttyä.



Varoitus

Rintapumppua ei saa käyttää lataamisen aikana!

Latauskaapelia käytetään ainoastaan verkkosovittimen ja Momcozy-rintapumpun välillä lataamista varten. Älä liitä latauskaapelia muihin laitteisiin, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun!

- Jos virtasovittimen kotelo löystyy, irtoa tai rispaantuu, lopeta virtasovittimen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä virtasovittimen valmistajaan.
- Jos latauskaapeli on vaurioitunut, katkennut tai rispaantunut, lopeta latauskaapelin käyttö välittömästi ja tilaa uusi kaapeli valmistajalta (yhteystiedot ovat tämän käyttöoppaan viimeisellä sivulla).
- Lopeta laitteen käyttö välittömästi, jos havaitset pumppuyksikön tai virtasovittimen savuavan tai palavan.



Huomio:

Väärän sovittimen käyttäminen tai heikkolaatuisen sovittimen ostaminen voi heikentää laitteen turvallisuutta ja vahingoittaa omaisuutta ja terveyttä. Osta lääkinällisen luokan sovitin, joka täyttää lääketieteen ammattimarkkinoiden IEC 60601-1- ja IEC 60601-1-2 -standardien vaatimukset, ja varmista, että virtasovittimen lähtöteho on DC 5 V 1 A.

Huomiot:

- Jos täyteen ladatun akun käyttöaika on aiempaa lyhyempi, älä yritä vaihtaa akkua itse. Pyydä valmistajaa vaihtamaan akku. Akun purkaminen ja vaihtaminen itse saattaa vaurioittaa pääyksikköä ja akkua.
- Akun varaus purkautuu hitaasti, kun tuotetta ei käytetä pitkään aikaan. Lataa laite kolme kuukauden välein, jotta akku ei vaurioidu alhaisen jännitteen vuoksi.

5.2 Puhdistus ja desinfiointi

5.2.1 Yleinen kuvaus/vaatimus

Rintamaidon tarjoaminen auttaa tukemaan vauvan terveyttä ja kehittymistä. Voit ruokkia rintamaitoa vauvalle pumpppaamalla maitoa. Pumpun osien puhtauden varmistaminen on äärimmäisen tärkeää, koska rintamaidossa tai pumpun osiin jäävissä rintamaidon jäämissä voi kasvaa nopeasti bakteereita. Näiden ohjeiden noudattaminen voi auttaa ehkäisemään kontaminaation ja suojaamaan vauvaa tartunnoilta. Jos vauvasi on keskosvauva tai jos hänellä on muita terveysongelmia, voit pyytää lisää suosituksia rintamaidon turvallisesta pumpppaamisesta vauvan terveydenhuoltopalveluiden tarjoajalta.

1) ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖKERTAA

Tarkista ja kokoa puhdistettu pumpppusarja.
Puhdista pumpun moottori puhdistusliinoilla.

2) JOKAISEN KÄYTTÖKERRAN JÄLKEEN

Säilytä maito asianmukaisesti: Säilytä äidinmaitoa äidinmaidolle tarkoitetuissa säilytyspusseissa tai puhtaissa, elintarvikekäyttöön soveltuissa astioissa. Käytä lasisia tai muovisia astioita, joissa on tiiviit kannet. Merkitse astioihin päivämäärä ja kellonaika ja aseta ne välittömästi jääkaappiin, pakastimeen tai jääpusseilla täytettyyn kylmälaukuun.

Puhdista pumpppausalue: Puhdista säätimet, virtakytkin ja työtaso puhdistusliinoilla.



3) Puhdistettavat ja desinfioitavat osat

Puhdista ja desinfioi kaikki rinnan ja äidinmaidon kanssa kosketuksiin joutuvat osat ennen rintapumpun ensimmäistä käyttökertaa ja jokaisen käyttökerran jälkeen.

- Maidon kanssa kosketuksiin joutuvat osat: maidonkeräyssarjan osat, mukaan lukien rintasuppilo, kalvo, venttiili ja maidonkerääjä.
- Ainoastaan rinnan ihon kanssa kosketuksiin joutuvat osat: rintasuppilo.

4) Ennen puhdistusta/desinfiointia:

- a. Pese käsiä huolellisesti saippualla ja vedellä 20 sekunnin ajan.
- b. Pura kaikki osat seuraavasti:

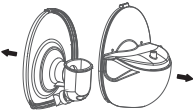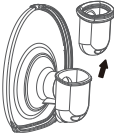 Kuva 5	 Kuva 6
1). Pidä kiinni moottorin kummallakin puolella sijaitsevista osista ja irrota sitten pumpun moottori maidonkerääjästä.	2). Irrota rintasuppilo maidonkerääjästä.
 Kuva 7	 Kuva 8
3). Irrota venttiili rintasuppilosta.	4). Irrota kalvo rintasuppilosta.



Huomio:

Älä koskaan aseta pääyksikköä, latauskaapelia tai sovitinta (jos olet ostanut sovittimen) veteen tai astianpesukoneeseen, sillä se vahingoittaa näitä osia pysyvästi.

5.2.2 Maidon kanssa kosketuksiin joutuvien osien puhdistus ja desinfiointi

Vaihe 1: Puhdistus

Puhdista laite manuaalisesti! Tämä tuotteen puhdistamista ja desinfiointia astianpesukoneessa ei ole varmistettu turvalliseksi.



Varoitus

Älä puhdista rintapumpun osia antibakteerisilla tai hankaavilla puhdistusaineilla, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.

1) Valmistele seuraavat:

- saippua ja kuuma vesi
- juomavesi
- puhdas pesuallas, jota käytetään ainoastaan vauvojen ruokintatarvikkeiden puhdistamiseen
- puhdas harja, jota käytetään ainoastaan vauvojen ruokintatarvikkeiden puhdistamiseen
- käyttämätön tiskirätti tai talouspaperi


2) Huuhtelee: Poista maito- tai likajäämät huuhtelemalla maidonkeräyssarjan ja muiden ruokintatarvikkeiden osat juoksevan veden alla. Voit käyttää huuhtelemiseen lämmintä tai kylmää vettä.



Kuva 9

3) Pese maidonkeruuosat:

- Aseta maidonkeräyssarjan osat puhtaaseen pesualtaaseen, jota käytetään ainoastaan vauvojen ruokintatarvikkeiden puhdistamiseen. Älä pese osia suoraan altaassa, koska se voi sisältää bakteereja, jotka voivat kontaminoida nämä osat.
- Liota maidonkeräyssarjan osia lämpimässä 40–60-asteisessa (104–140 °F) saippuavedessä 3~5 minuutin ajan.

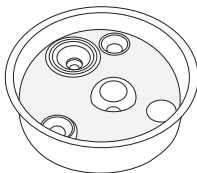


Kuva 10

- Puhdista osat puhtaalla harjalla, jota käytetään ainoastaan vauvojen ruokintatarvikkeiden puhdistamiseen.

4) Huuhtelee uudelleen: Huuhtelee osia juoksevan veden alla tai upottamalla ne veteen erillisessä altaassa, jota käytetään ainoastaan vauvojen ruokintatarvikkeiden puhdistamiseen. Jos osissa on edelleen likaa, toista vaihe 3 ja huuhtelee osat uudelleen, kunnes likaa ei ole enää näkyvissä.

5) Anna kuivua hyvin: Aseta maidonkeräyssarjan osat, pesuallas ja pulloharja puhtaan, käyttämättömän tiskirätin tai talouspaperin päälle lialta ja pölyltä suojattuun paikkaan. Älä kuivaa osia tiskirätillä, sillä se saattaa siirtää bakteereja osiin!

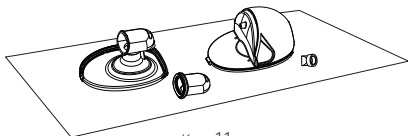

Kuva 11

6) Puhdista pesuallas ja pulloharja: Huuhtelee pesuallaat ja harja hyvin ja anna niiden kuivua hyvin jokaisen käyttökerran jälkeen. Pese ne muutaman päivän välein käsin saippualla ja lämpimällä vedellä. Jos vauva on alle kolmen kuukauden ikäinen, keskosvauva tai jos hänen immuunijärjestelmänsä on heikentynyt sairauden (kuten HIV) tai lääkinnällisen hoidon (kuten syövän sytostaattihoidon) vuoksi, pese allas ja pulloharja jokaisen käyttökerran jälkeen.

Puhdistamisen jälkeen:

Voit poistaa bakteerit huolellisemmin desinfioimalla maidonkeräyssarjan osat, pesuallas ja pulloharja vähintään kerran päivässä niiden puhdistuksen jälkeen. Osat voidaan desinfioida kiehuvalle vedelle. Desinfiointi on erityisen tärkeää, jos vauva on alle kolme kuukauden ikäinen, keskosvauva tai jos hänen immuunijärjestelmänsä on heikentynyt sairauden tai lääkinnällisen hoidon vuoksi.

Katso lisätietoja maidon kanssa kosketuksiin joutuvien osien desinfioinnista kohdasta 2.

Vaihe 2: Desinfiointi

Huomio: Älä steriloi pumpun osia mikroaaltouunissa tai UV-sterilointilaitteessa. Korkea lämpötila (> 110 °C) lyhentää osien käyttöikää ja aiheuttaa turvallisuusriskejä.

Varmista ennen desinfiointia, että maidonkeräyssarja, pulloharjat ja pesuallaat on puhdistettu edellä kuvatulla tavalla. Desinfioi kaikki maidon kanssa kosketuksiin joutuvat osat (myös pulloharja ja pesuallas!) jollakin seuraavista menetelmistä.

1) Valmistelee seuraavat:


- kattila
- juomavesi
- puhtaat pihdit



Huomio:

Estä pullon tai muiden osien joutuminen kosketuksiin kattilan reunojen kanssa desinfioidessasi osia kiehuvaassa vedessä. Tämä voi vaurioittaa tuotetta peruuttamattomasti.

2) Aseta purettu maidonkeräyssarja kattilaan ja täytä kattilaan niin paljon vettä, että desinfioitavat osat peittyvät. Anna veden kiehua **3 minuutin** ajan ja varmista, että osat eivät kosketa kattilan reunoja.

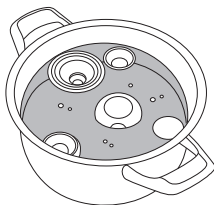


Kuva12

3) Ota osat kattilasta puhtailla pihdeillä.



Kuva13

4) Anna kuivua hyvin.

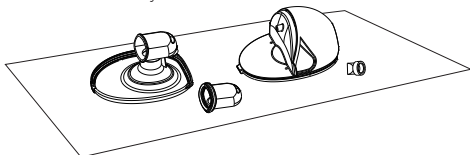

Kuva 14

Vaihe 3: Säilytä asianmukaisesti

Säilytä kuivia osia asianmukaisesti seuraavaa käyttökertaa varten. Varmista, että puhdistetut pumpun osat, pulloharjat ja pesualtaat ovat kuivuneet kunnolla ennen varastointia. Osien on oltava täysin kuivia, jotta niihin ei pääse kasvamaan bakteereja ja homeetta. Estä osien kontaminoituminen säilyttämällä niitä puhtaassa paikassa.

1. Pese kädet: Pese kädet hyvin saippualla ja vedellä.
2. Kokoa osat: Kokoa puhtaat ja kuivuneet pumpun osat.
3. Säilytä asianmukaisesti: Aseta kootut pumpun osat ja muut tarvikkeet, pesuallas ja kuiva pulloharja puhtaaseen paikkaan, kuten suljettuun keittiökaappiin, jota käytetään vain puhtaiden astioiden säilyttämiseen.

5.2.3 Muiden osien puhdistaminen/desinfiointi

Pääyksikön pinta on puhdistettava ja desinfioitava ennen ensimmäistä käyttökertaa ja jokaisen käyttökerran jälkeen. Muut osat eivät joudu kosketuksiin ihmiskehon tai maidon kanssa pumppauksen aikana, joten ne on puhdistettava vain silloin, kun ne ovat likaisia.

Puhdista/desinfioi osat 5~40 °C:ssa seuraavasti:

Valmistele seuraavat:

- desinfiointiaine
- 70 % alkoholia sisältävät puhdistusliinat
- puhdas puhdistusliina

Puhdistaminen:

1. Pese kädet käsien desinfiointiaineella ennen osien puhdistamista.
2. Pyyhi kaikki vieraat aineet pääyksiköstä ja/tai latauskaapelista puhtaalla ja pehmeällä liinalla.

3. Pyyhi osat 70 % alkoholia sisältävillä puhdistusliinoilla, kunnes näkyvää likaa ei ole enää havaittavissa.
4. Kuivaa laitetta huoneenlämmössä 10 minuutin ajan siten, että tuotteeseen jäänyt puhdistusliuos haihtuu.

Desinfiointi:

Puhdista pääyksikön pinta edellä kuvatulla tavalla ennen desinfiointia.

1. Desinfioi pääyksikön pintaa 70-prosenttiseen isopropanoliin kostutetulla pehmeällä liinalla kolmen minuutin ajan.
2. Kuivaa pääyksikköä huoneenlämmössä 10 minuutin ajan siten, että tuotteeseen jäänyt desinfiointiliuos haihtuu.

5.3 Käyttöohjeet

5.3.1 Valmistelu ennen käyttöä




Huomio:

1. Pese kädet saippualla ja vedellä, ja tarkista ja kokoa puhdistettu pumppusarja.
2. Pumppauksen kesto:
Tuotteelle virtaa syötetään ladattavasta litiumakusta. Täyteen ladattua laitetta voidaan käyttää 5–6 pumppauskertaa (noin 180 minuuttia) 30 minuuttia kerrallaan. Tyypillisesti pumppaus kestää noin 10–15 minuuttia rintaa kohti. Pumppaa maitoa kuitenkin vain niin kauan kuin se on sinulle mukavaa ja maitoa heruu.

1. Valitse rintasuppilon koko

Momcozy-rintapumpun mukana toimitetaan 24 mm:n rintasuppilo ja 17/19/21 mm:n lisäosa. Jos mukana toimitettu rintasuppilo ja lisäosat ovat väärän kokoiset, voit ostaa erikokoisia rintasuppiloita ja lisäosia Amazonista tai Momcozyn viralliselta verkkosivustolta. Kirjoita hakupalkkiin "momcozy" ja etsi itsellesi sopivan kokoinen rintasuppilo ja lisäosa.

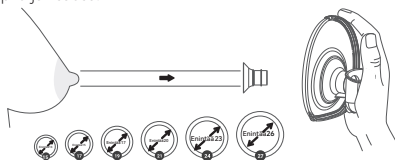


Kuva 15. Oikean koon valinta

2. Stimuloi nänniä

- Stimuloi nänniä siten, että se turpoaa täyteen kokoonsa (älä ohita tätä vaihetta!).
- Aseta nänni pienimpään reikään, johon se mahtuu helposti ilman pakottamista.
- Valitse reikä, joka mahtuu vaivattomasti nännin tyveen.
- Ota mitat kokotaulukon perusteella.

3. Testaa rintasuppilon sopivuutta

- Sijoita rintasuppilo oikeaan kohtaan rintaa, jotta voit löytää sopivan kokoisen rintasuppilon.
- Paina rintasuppiloa rintaa vasten, kunnes väliin ei jää rakoa. Varmista, että nänni on aivan rintasuppilon keskellä.

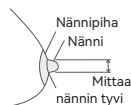

Kuva16



Kuva17

Liian pieni

Liian pieni: tämä rintasuppilo on liian pieni, jos nänni hankaa pumppauksen aikana rintasuppilon sisäseinämää vasten.

Sopivan kokoinen

Sopiva koko: tämä rintasuppilo sopii sinulle, jos nänni liikkuu pumppauksen aikana sujuvasti hankaamatta tai koskettamatta rintasuppilon sisäseinämää ja lähes yhtään nännipihaa ei imetä rintasuppilon sisään.

Liian suuri

Liian suuri: tämä rintasuppilo on liian suuri, jos suuri alue nännipihaa imetään rintasuppilon sisään pumppauksen aikana.

4. Valitse sopivat rintaliivit



Kuva18

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Valmistettu joustavasta kankaasta | 2 Ei kaaritukea tai toppausta |
| 3 Avattava läppä | 4 Täysi peittävyys |



Kuva19

EI RAKOA

Kun asetat pumpun rintaliivien sisään, pumpun silikonisen rintasuppilon on painuttava tiukasti ihoa vasten ilman rakoja.



Kuva 20

JOS SE LIIKKUU

Jos huomaat, että pumppu liikkuu käytön aikana, säädä pumpppua kiristämällä rintaliivien olkaisia tai valitse toiset rintaliivit.

5. Suositeltava asento



Huomio:

Istu tai seiso pumpppauksen aikana, jotta maitoa ei pääse valumaan. Tätä pumpppua ei tule käyttää makuuasennossa tai nukkuessa, jotta pumppu pysyy oikeassa asennossa käytön aikana.

ASENTO

Varmista, että pumppu ja maidonkerääjä pysyvät aina pystyasennossa. Muussa tapauksessa maitoa valuu.



Kuva 21. Oikea asento

5.3.2 Pumpun kokoaminen



Huomio:

Varmista, että olet puhdistanut ja desinfioinut maidon tai rinnan kanssa kosketuksiin joutuvat rintapumpun osat.






Varoitus


- Käsittele keittämällä desinfioituja rintapumpun osia varoen, sillä ne voivat olla todella kuumia. Vältä palovammat aloittamalla rintapumpun kokoaminen vasta, kun desinfioidut osat ovat jäähtyneet.
- Pese kädet huolellisesti saippualla ja vedellä, ennen kuin kosketat rintapumpun osia ja rintoja. Älä kosketa maidonkeräyssarjan sisäpuolta.

Huomiot:

- Asianmukaisen alipaineen luominen edellyttää rintasuppilon, kalvon, maidonkerääjän, venttiilin jne. asianmukaista sijoittamista.
- Tarkista ennen jokaista käyttökertaa silmämääräisesti, onko yksittäisissä komponenteissa halkeamia, lohkeamia, repeämiä, värjäymiä tai vaurioita. Jos havaitset laitteessa vaurioita, lopeta laitteen käyttö, kunnes osat on vaihdettu.

Pese kädet huolellisesti saippualla ja vedellä. Kokoa sitten pumppua seuraavasti:

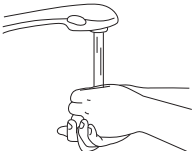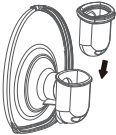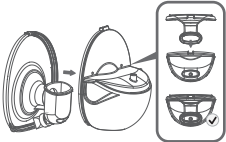 Kuva 22	 Kuva 23
1. Pese kädet huolellisesti saippualla ja vedellä.	2. Kiinnitä kalvo rintasuppiloon ja paina kevyesti sen reunaa, jotta kalvo asettuu tiiviisti paikalleen.
 Kuva 24	 Kuva 25
3. Paina venttiili kevyesti rintasuppiloon. Varmista, että väliin ei jää rakoja.	4. Kohdista kuvan mukaisesti rintasuppilo maidonkerääjän kanssa. Aseta ensin maidon ylempi ulostuloaukko paikalleen ja varmista sitten asianmukainen asennus painamalla rintasuppilon reunaa kämmenelläsi.

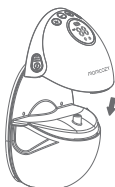

Kuva 26

5. Kokoa pumpun moottori ja maidonkerääjä.

Rintapumppu on nyt käyttövalmis.

5.3.3 Pumppausohjeet



Varoitus

- Vapauta alipaine kytkemällä rintapumppu pois päältä, ennen kuin otat pumpun pois rinnan päältä.
- Pumpkaa kerrallaan enintään viiden minuutin ajan, vaikka et onnistuisi pumppaamaan yhtään maitoa. Yritä saada maitoa herumaan toisena ajankohtana.
- Jos pumppaus tuntuu todella epä mukavalta tai kivuliaalta, lopeta pumpun käyttö ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.




Huomio:

- Maidon määrän seuraaminen pumppauksen aikana auttaa estämään ylitäyttymisen.

1. Pumpun asettaminen paikalleen

a. Varmista ennen pumppaamista, että pumppu on asetettu tiukasti rintaa vasten ja että väliin ei ole jäänyt rakoa (kuva 27).

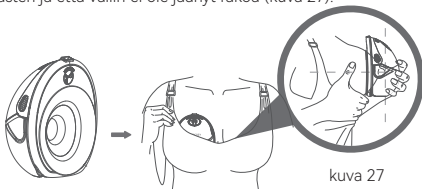


kuva 27

b. Aseta pumpppu paikalleen pitämällä rintasuppiloa rintaa vasten siten, että nänni näkyy rintasuppilon keskellä. Voit joutua nojautumaan eteenpäin.


c. Kun olet asettanut pumpun paikalleen, varmista ennen pumppauksen aloittamista, että nänni on rintasuppilon keskellä. Nännin kärki ei saa koskettaa rintasuppilon yläosaa, reunoja tai alaosaa. Jos nänni osuu rintasuppiloon, yritä uudelleen.

Ensimmäisen persoonan kuvakulma

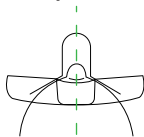

Oikea asento

Maidon heruminen

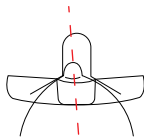

Virheellinen asento

Yritä uudelleen

kuva 28

Huomautus:


Nännin oikea asento auttaa varmistamaan mukavan ja tehokkaan pumppauksen.

Pumppauksen tuntuminen epämukavalta voidaan välttää asettamalla nänni oikein rintasuppiloon.

Katso kohta 7.3.1 Valmistelu ennen käyttöä – valitse rintasuppilon koko.

2. Pumpun asettaminen rintaliiveihin

Aseta pumpppu rintaliiveihin ja varmista, että pumpppu on painettu kunnolla rintaa vasten. Kiristä rintaliivejä tarvittaessa, jotta pumpppu pysyy kunnolla paikallaan ja voit aloittaa pumppauksen.

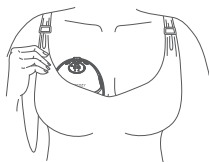

kuva 29

3. Pumppauksen aloittaminen

Älä liu'uta pumppua suoraan rintaliiveihin, vaan noudata vaiheittaisia ohjeita.

Irrota laturi ennen käyttöä.

A. Käynnistä pumppu

Voit keskustella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa pumppauksen kestosta. Momcozy-pumppu sammuu automaattisesti 30 minuutin pumppauksen jälkeen.

Kytke pumppu päälle tai pois päältä painamalla pitkään On / Off / Keskeytys -painiketta.

Keskeytä pumppaus painamalla On / Off / Keskeytys -painiketta kerran ja jatka pumppausta painamalla mitä tahansa painiketta.

- Pumpun ensimmäisellä käyttökerralla oletustila on stimulointitila.
- Alipaineen oletustaso on 1 (tällä hetkellä imutasoa osoittava LED-näyttö 1 näyttää tasoa 1).

B. Valitse toimintatila

Toimintatilat: Stimulointitila, puristustila ja yhdistelmätila. Pumpun ensimmäisellä käyttökerralla oletusasetus on stimulointitilan imutaso 1.

C. Valitse alipainetaso.

Momcozy-pumpussa on kussakin toimintatilassa yhdeksän alipaineasetusta, joista voit valita mukavimman ja tehokkaimman asetuksen.

Kun alipaine tuntuu nännissä, voit etsiä haluamasi asetuksen eri toimintatiloissa säätämällä alipainetta lisäys- ja vähennyspainikkeilla. LED-näyttö sammuu, kun se on ollut käyttämättömänä 60 sekuntia. Voit käynnistää LED-näytön uudelleen painamalla mitä tahansa painiketta.

Vinkki: Suurempi alipaine ei aina tehosta maidon pumppausta. Nännin liiallinen rasitus voi vähentää maidon herumista. Pumppaa maitoa aina mukavalla tuntuvalta tasolla. Jos imu ei tunnu, varmista, että pumppu on koottu oikein.

Huomio:

- * Momcozy-pumppua ei voi käyttää latauksen aikana. Irrota laite aina laturista ja sulje latausluukku ennen käyttöä.
- * Momcozy-pumppua ei tule käyttää makuuasennossa, rasittuneena tai mahdollisesti haitallisen toiminnan aikana.
- * Rintapumpun käyttäminen ei saa aiheuttaa kipua. Älä yritä saada maitoa herumaan liian suurella tai epämiellyttävällä alipaineasetuksella. Jos pumppaus on epämiellyttävää tai aiheuttaa kipua, lopeta pumppaus, katkaise tiiviste sormella nännin ympäriltä ja lopeta tuotteen käyttö.

4. Pumppauksen keskeyttäminen/aloittaminen

Jos haluat keskeyttää pumppauksen, paina virtapainiketta, jolloin toimintatilan merkkivalo alkaa vilkkua. Voit jatkaa pumppausta painamalla mitä tahansa painiketta.

5. Pumpun kytkeminen pois päältä

Kytke pumppu pois päältä painamalla pitkään On / Off / Keskeytys -painiketta.

Lisäksi tuote sammuu automaattisesti 30 minuutin pumppauksen jälkeen.

Huomio: Pumppauksen keskeyttäminen tai aloittaminen tai toimintatilan ja alipainetason valitseminen eivät käynnistä pumppausaikaa alusta.

6. Pumpun irrottaminen

Katkaise sormellasi rintasuppilon ja rintakudoksen välinen tiiviste. Irrota pumppu rinnasta pumppauksen jälkeen nojaamalla hieman eteenpäin. Estä maidon valuminen pitämällä rintasuppilon aukkopuoli ylöspäin.




kuva 30

Suosittellemme ylivuotojen välttämiseksi lopettamaan pumppauksen, kun maitoa on kertynyt maidonkerääjään lähes 120 ml.

7. Maidon kaataminen

Huomautus: Älä avaa rintasuppilaa suoraan maidon kaatamista varten, sillä maitoa voi päätyä pääyksikköön aiheuttaen vaurioita. Sammuta rintapumppu, irrota pääyksikkö ja kaada sitten rintamaitoa maidonkerääjän yläosassa olevan maidon ulostuloaukon kautta. Kaada pumpatut maidot muihin korkillisiin maidonkerääjiin tai maidon säilytyspusseihin. Kierrä toisen maidonkerääjän korkki tiukasti kiinni ja vie maito säilytykseen.

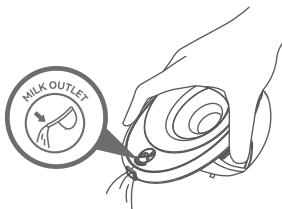

kuva 31



Varoitus

- Tuotteen mukana toimitettavat maidonkerääjät on tarkoitettu maidon keräämiseen pumppauksen aikana. Jos haluat ruokkia vauvaa tai säilyttää pumpattua rintamaitoa, käytä toista korkillista maidonkerääjää.



Varoitus

- Jäähdytä tai pakasta pumpattu maito välittömästi tai säilytä sitä 16–25 °C:n lämpötilassa 2–4 tuntia ennen vauvan ruokkimista.

5.4 Rintamaidon säilyttäminen

5.4.1 Rintamaidon asianmukainen säilyttäminen

Pumpatun äidinmaidon turvallisuus ja laatu voidaan varmistaa noudattamalla suositeltuja säilytys- ja valmistustekniikoita.

Nämä ovat yleisiä rintamaidon säilytyslämpötiloja koskevia ohjeita. Rintamaidon säilymiseen vaikuttavat monet eri tekijät, kuten maidon määrä, ympäristön lämpötila maitoa pumpattaessa, jääkaapin ja pakastimen lämpötilavaihtelut ja ympäristön puhtaus.

Pumpatun rintamaidon säilyttäminen:

- Jäähdytä tai pakasta maito mahdollisuuksien mukaan välittömästi pumppauksen jälkeen. Maidon voi säilyttää jääkaapissa, eristetyssä kylmälaukussa tai pienissä erissä (2–4 unssia/0,5–1 dl) pakastimessa.
- Säilytä äidinmaitoa äidinmaidolle tarkoitetuissa säilytyspusseissa tai puhtaissa, elintarvikekäyttöön soveltuissa astioissa. Säilytä maitoa muovisissa tai lasisissa astioissa, joissa on tiiviit kannet.
-- Älä säilytä maitoa pulloissa, joissa on kierrätysymboli 7, joka tarkoittaa, että pullo voi olla valmistettu BPA:ta sisältävästä muovista.
- Poista pakkauksesta ylimääräiset ilmat ennen sulkemista.
- Jäähdytä pussit litteäksi. Estä pussien tarttuminen toisiinsa asettamalla palat talouspaperia pussien väliin.
- Älä koskaan säilytä rintamaitoa kertakäyttöisissä pullonsuojissa tai muovipusseissa, joita ei ole tarkoitettu rintamaidon säilytykseen.
- Sekoita rintamaidon kermainen osa, joka saattaa nousta pinnalle, takaisin maidon joukkoon pyörittelemällä astiaa kevyesti. Älä ravista maitoa. Tämä saattaa hajottaa joitakin maidon arvokkaista osista.
- Juuri pumpatun maidon säilytysolosuhteet:

Rintamaidon tyyppi	Säilytyspaikat ja -lämpötilat		
	Työtaso 25 °C (77 °F) tai kylmempi (huoneenlämpö)	Jääkaappi 4 °C (40 °F)	Pakastin -5 °C (23 °F) tai kylmempi
Juuri pumpattu maito	Säilyy 2–4 tuntia	Säilyy 24 tuntia	Säilyy kolme kuukautta
Pakastimesta sulatettu maito	Käytä kahden tunnin kuluessa siitä, kun vauva on lopettanut syömisen		

Nämä ohjeet koskevat vain terveitä täysiaikaisia vauvoja. Keskosvauvat ja sairaat vauvat saattavat edellyttää erilaisia vaatimuksia. Kysy neuvoja terveydenhuollon ammattilaiselta.

Säilytysvinkkejä:

- Merkitse maidon säilytysastiaan selkeästi pumppauspäivä ja myös lapsen nimi, jos maito annetaan säilytettäväksi lastenhoitajalle.

- Älä säilytä rintamaitoa jääkaapin tai pakastimen ovessa. Tämä auttaa suojaamaan rintamaitoa oven avaamisen ja sulkemisen aiheuttamilta lämpötilan muutoksilta.
- Pakasta rintamaito heti pumppauksen jälkeen, jos et usko sen tulevan käyttöön neljän päivän kuluessa. Tämä auttaa varmistamaan rintamaidon laadun.
- Rintamaidon pakastaminen:
- Pakasta maito pienissä erissä, jotta käyttämättömät maidot eivät mene hukkaan. Pakasta maito 2–4 unssin (0,5–1 dl:n) erissä tai kerta-annoksina.
- Jätä astiaan noin sentin verran ylimääräistä tilaa, sillä rintamaito laajenee jäätyessään.
- Rintamaitoa voi säilyttää eristetyssä kylmävaraajilla täytetyssä kylmälaukussa enintään 24 tunnin ajan matkan aikana. Määränpäässä voit käyttää maidon heti tai säilyttää sen jääkaapissa tai pakastimessa.

5.4.2 Rintamaidon asianmukainen sulattaminen

- Sulata aina vanhin rintamaito ensin. Muista käyttää aina vanhimmat maidon ensin. Rintamaidon laatu voi heikentyä ajan myötä.
- Rintamaidon voi sulattaa monella tapaa:
- jääkaapissa yön yli
- astiassa lämpimässä tai haaleassa vedessä
- haalean juoksevan veden alla
- Älä koskaan sulata tai kuumenna rintamaitoa mikroaaltouunissa. Lämmittäminen mikroaaltouunissa voi tuhota äidinmaidon ravintoaineita ja kuumentaa maidon osittain liian kuumaksi, mikä voi polttaa vauvan suun.
- Käytä jääkaapissa sulatettu rintamaito 24 tunnin kuluessa. Aloita 24 tunnin aikarajan laskeminen siitä hetkestä, kun rintamaito on täysin sulanut.
- Käytä huoneenlämpöön jätetty tai lämmitetty rintamaito kahden tunnin kuluessa.

Sulatettua rintamaitoa ei saa koskaan pakastaa uudelleen.

6. Siirtäminen

Käytä matkoilla mukana toimitettua latauskaapelia ja käytä sopivaa virtasovitinta. Kysy ennen lentokoneeseen nousemista lentoyhtiöltä neuvoja tämän pumpun kuljettamisesta tai käyttämisestä lentokoneessa.

Lämpötila: -20 – 60 °C / -4 – 140 °F

Suhteellinen kosteus: 15–90 %

Ilmanpaine: 70–106 kPa

7. Säilytysolosuhteet

Pumpun säilyttäminen

* Lyhytaikainen säilytys

* Suojaa rintapumppu suoralta auringonvalolta. Säilytä rintapumppu ja sen lisävarusteet turvallisessa, puhtaassa ja kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.

* Pitkäaikainen säilytys

Voit pidentää pumpun käyttöikää lataamalla sen ennen pitkäaikaista varastointia. Estä pumpun värjäytyminen suojaamalla se suoralta auringonvalolta. Puhdista ja kuivaa pestävissä olevat osat ennen varastointia.

* Lämpötila: -20 – 60 °C / -4 – 140 °F

* Suhteellinen kosteus: 15–90 %

* Ilmanpaine: 90–106 kPa

8. Tekniset tiedot

Mallin numero	BP311
Nimi	Puettava rintapumppu
Tehovaatimukset	Syöttö: 5 V $\equiv$ 1 A Teho: 5 W
Virtalähde	DC 3.7 V/ 1350 mAh:n ladattava litiumakku
Pumppu	Yksi pumppu
Imutilat	Stimulointitila, puristustila, yhdistelmätila
Alipainealue	Stimulointitila: -75 ~ -145 mmHg Puristustila: -120 ~ -295 mmHg Yhdistelmätila: -75 ~ -295 mmHg
Syklinopeus	Stimulointitila: 70 ~ 88 sykliä/min Puristustila: 27 ~ 60 sykliä/min Yhdistelmätila: 56 ~ 82 sykliä/min

Pumpun mitat	130mm X 114mm X 73mm
Paino (sis. kaikki lisävarusteet)	287g
Tuotteen käyttöikä	500 tuntia
Melutaso	≤50dB
Suojaustaso sähköiskua vastaan	Sisäisellä virtalähteellä varustettu laite
Käyttöolosuhteet	Lämpötila: 0–40 °C, ilmankosteus: 15–90 %, ilmanpaine: 70–106 kPa
Kuljetus- ja säilytysolosuhteet	Lämpötila: –20–60 °C, ilmankosteus: 15–90 %, ilmanpaine: 70–106 kPa
Akun latausaika	150 minuuttia
Akun käyttöaika	180minuuttia

9. Huolto ja varaosat

Laite sisältää osia, jotka eivät ole käyttäjän huollettavissa. Tämän laitteen avaaminen tai peukalointi mitätöi takuun. Viallinen laite on lähetettävä korjattavaksi laitteen valmistajalle tai suoraan jälleenmyyjälle. Laitteeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia. VALMISTAJA toimittaa pyynnöstä piirikaaviot, komponenttiluettelot, kuvaukset, kalibrointiohjeet tai muut tiedot, joiden avulla KORJAAJA voi korjata sellaiset laitteen osat, jotka VALMISTAJA on nimennyt KORJAAJAN korjaamaan. Akun varaus purkautuu hitaasti, kun tuotetta ei käytetä pitkään aikaan. Lataa laite kolme kuukauden välein, jotta akku ei vaurioidu alhaisen jännitteen vuoksi.



Varoitus

Varoitus: litiumakkua ei saa vaihtaa ilman asianmukaista koulutusta, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Älä puhdista tai huolla käytössä tai latauksessa olevaa laitetta.

10. Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus: Shenzhen Root Innovation Technology Co., Ltd. vakuuttaa, että tämä laite täyttää LVD-direktiivin 2014/35/EU ja EMC-direktiivin 2014/30/EU olennaiset vaatimukset ja muut asiaa koskevat määräykset.

11. Vianmääritys

Ongelmat	Ratkaisut
Pumppu ei toimi	• Jos maito ei ole vielä alkanut herua, jatka pumppaamista ja seuraa, alkaako maito herua viiveellä. Huomautus: Maidon heruminen on yksilöllistä, ja siihen vaikuttavat monet eri tekijät. • Tarkista nännin asento, keskeytä pumppaus ja ota pumppu pois rinnalta. Aseta pumppu takaisin paikoilleen alla kuvatulla tavalla. • Rintasuppilo saattaa olla väärän kokoinen (katso lisätietoja kohdasta 7.3 Käyttöohjeet – valitse rintasuppilon koko).
Maito ei heru	• Keskeytä pumppaus ja ota pumppu pois rinnalta. Aseta pumppu takaisin paikoilleen oikealla tavalla. (Katso lisätietoja kohdasta 7.3 Käyttöohjeet – Pumpun asettaminen paikalleen). • Voit myös kokeilla irrottaa pumpun rintasuppilosta ja koota pumpun sitten uudelleen. Aseta sitten nänni rintasuppilon keskelle ja aseta pumppu rintaa vasten (katso lisätietoja kohdasta 7.3 Käyttöohjeet – Pumpun asettaminen paikalleen).
Pumppu on asetettava paremmin paikoilleen	• Keskeytä pumppaus ja ota pumppu pois rinnalta. Aseta pumppu takaisin paikoilleen oikealla tavalla. (Katso lisätietoja kohdasta 7.3 Käyttöohjeet – Pumpun asettaminen paikalleen). • Voit myös kokeilla irrottaa pumpun rintasuppilosta ja koota pumpun sitten uudelleen. Aseta sitten nänni rintasuppilon keskelle ja aseta pumppu rintaa vasten (katso lisätietoja kohdasta 7.3 Käyttöohjeet – Pumpun asettaminen paikalleen).

Kipu pumpppauksen aikana	• Jos pumpppaus aiheuttaa kipua, kokeile seuraavia vinkkejä (katso lisätietoja kohdasta 7.3 Käyttöohjeet – Pumpun asettaminen paikalleen): • Paina Momcozy-pumppua tiukasti rintaa vasten stimulointivaiheen aikana. • Kiristä rintaliivejä, jotta Momcozy-pumppu pysyy tiukasti rintaa vasten. • Pienennä imutehoa. • Aseta Momcozy-pumppu takaisin paikoilleen. • Pumpppaus on saattanut kestää liian kauan. Momcozy-pumppu sammuu automaattisesti 30 minuutin jälkeen. • Rintasuppilo saattaa olla väärän kokoinen (katso lisätietoja kohdasta 7.3 Käyttöohjeet – valitse rintasuppilon koko). Lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteyttä ammattilaiseen tai imetyksen asiantuntijaan.
Heikentynyt imuteho	• Pumpussa on yhdeksän imuasetusta. Lisää imutehoa painamalla lisäyspainiketta. • Tarkista pestävien osien kunto. Osat on vaihdettava kolmen kuukauden käytön jälkeen. • Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, kokeile seuraavaa: 1.Tarkista, että kaikki pestävät osat on kiinnitetty asianmukaisesti. 2.Tarkista silmämääräisesti kaikki pestävät osat ja vaihda vaurioituneet osat. 3.Tarkista, että virta on kytketty päälle. 4.Paina pumpppua tiukasti rintaa vasten.
Pumpppaus loppui	• Pumpppaus loppuu automaattisesti 30 minuutin kuluttua. • Virtapainikkeen painallus keskeyttää pumpppauksen. Voit jatkaa pumpppausta painamalla painiketta uudelleen.
Pumppu ei lopeta pumpppausta	• Paina On / Off / Keskeytys -painiketta. • Jos ongelma jatkuu, tiiviste voidaan katkaista asettamalla sormi rintakudoksen ja rintasuppilon väliin. Kytke sitten pumppu pois päältä painamalla On / Off / Keskeytys -painiketta.
Pumppu tai laturi on kastunut (uponnut veteen)	• Kuivaa pumppu välittömästi. Aseta pumppu pystyasentoon siten, että latausportti osoittaa alaspäin ja imusäätimet ylöspäin. Anna pumpun sitten kuivua yön yli. Älä käytä pumpppua ja laturia 24 tuntiin. • Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Pumppu ei lataudu.	• Varmista, että USB Type-C -latauskaapeli on liitetty asianmukaisesti pumpun latausporttiin.

Huomio: Jos ongelma ei ratkea näillä vinkeillä, ota yhteyttä valmistajaan (katso lisätiedot viimeiseltä sivulta).

12. Hävittäminen



Älä hävitä käytöstä poistettavaa tuotetta tavanomaisen kotitalousjätteen seassa. Toimita laite elektroniikkalaitteiden ja akkujen kierrätyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu voi aiheuttaa haitallisia ympäristövaikutuksia. Virheellinen hävitystapa voi kerryttää haitallisia myrkkyjä ilmaan, veteen ja maaperään, mikä on haitallista ihmisten terveydelle. Velvollisuutesi on hävittää laite oikein. Saat lisätietoja tuotteen hävittämisestä paikallisilta viranomaisilta.

13. Takuu

Takuuvaatimukset tulee esittää tuotteen valmistajalle (yhteystiedot löytyvät tämän käyttöoppaan viimeiseltä sivulta). Jos lähetät laitteen tutkittavaksi, liitä mukaan kopio kuitista ja selkeä kuvaus viasta.

Takuuehdot:

1. Laitteelle on myönnetty yhden vuoden takuu ostopäivästä alkaen. Takuuvaatimusta esitettäessä ostopäivä on todistettava kuitilla tai laskulla.

2. Takuukorjaukset eivät pidennä laitteen tai varaosien takuuaikaa.

3. Takuu ei kata seuraavia tapauksia:

- kaikki väärinkäytöstä, kuten käyttöohjeiden laiminlyönnistä, aiheutuvat vahingot
- kaikki asiakkaan tai luvattoman kolmannen osapuolen tekemistä korjauksista tai peukaloinneista johtuvat vahingot
- vahingot, jotka syntyvät kuljetuksessa valmistajalta kuluttajalle tai kuljetuksen aikana huoltokeskukseen
- lisävarusteiden normaali kuluminen
- laitteen luvattomasta purkamisesta aiheutuvat vahingot
- vastuu laitteen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista on rajattu soveltamisalan ulkopuolelle, vaikka laitteen vahinko hyväksyttäisiin takuuvaatimuksena.

14. Matkustamista tai kansainvälistä käyttöä koskeva lausunto

Älä käytä Momcozy-rintapumppua matkan aikana epävarmoissa ja epävakaisissa ympäristöissä, kuten lentokoneessa, sillä ulkoinen ympäristö voi vaikuttaa laitteen toimintaan.

Momcozy-rintapumppua voi käyttää ympäri maailmaa. Sitä on kuitenkin käytettävä ja säilytettävä tässä käyttöoppaassa kuvatussa ympäristössä. Varmista, että virtasovittimen syöttöteho on AC 100~240 V 50/60 Hz ja lähtöteho DC 5 V 1 A. Käytä tarvittaessa muuntajaa, jolla voit muuntaa jännitteen vastaamaan kohdemaan jännitettä. Varmista seuraavasti, että Momcozy-rintapumppu ei ole vahingoittunut matkan aikana:

- Tarkista, että Momcozy-rintapumppu ei ole vahingoittunut.

Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että Momcozy-rintapumppu toimii asianmukaisesti. Jos rintapumppu toimii poikkeavalla tavalla, lopeta käyttö.

15. Valmistajan tiedot

Valmistaja: Shenzhen Root Innovation Technology Co., Ltd.

Osoite: #2-201, Floor 2, Hasee Computer Building, No.2 Beier Rd, Bantian Street, Longgang, Shenzhen, Guangdong, Kiina, 518129

Sähköposti: support@momcozy.com

Jos tarvitset laitteen käyttöönottoon, käyttöön tai huoltoon liittyviä neuvoja tai jos haluat ilmoittaa odottamattomasta toiminnasta tai tapahtumista, ota meihin yhteyttä.

