

ACTIVESHOP[®]

Kasutusjuhend

Saeyang Marathon 3 Champion freespinker



Importija:

ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, hoone
DC2A 54-610 Wrocław,
Poola

w

w.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024




Marathon-3 Champion professionaalne freespink, mida iseloomustab kvaliteetne töötlus, väikesed mõõtmed ja kaasaegne disain. Selge ja loetav juhtpaneel, intuiitivne juhtimine, pakub suurepäraseid töövõimalusi nii kogenud kui ka algajatele kasutajatele. Masin on varustatud väga võimsa peaga, mis toodab 2,9 NCm pöördemomenti, nii et saavutab maksimaalse võimsuse juba 3000 pööret minutis. Pea vibratsioon on täielikult välistatud ning selle ergonoomilise kuju ja kerge kaalu tõttu on sellega meeldiv töötada.

Peal on TWIST-LOCK tüüpi lõikurilukk, mis võimaldab lõikuri vahetamist ühe liigutusega. Lihtsalt keerake käepidet (10) päripäeva ja vahetage lõikur välja, seejärel vastupidises suunas, et lõikur lukustada.

Juurdelõikuri juhtimine on võimalik nii aluselt kui ka jalgajamilt.

Seadme külge saab kinnitada ka täiendava peahoidiku.

ENNE SEADME SISSELÜLITAMIST KONTROLLIGE, ET PINGETASEME LÜLITI OLEKS SEATUD 220V PEALE. SEADME SISSELÜLITAMINE, MIS ON SEADISTATUD 110V PEALE, PÕHJUSTAB SELLE LÄBIPÕLEMIST.

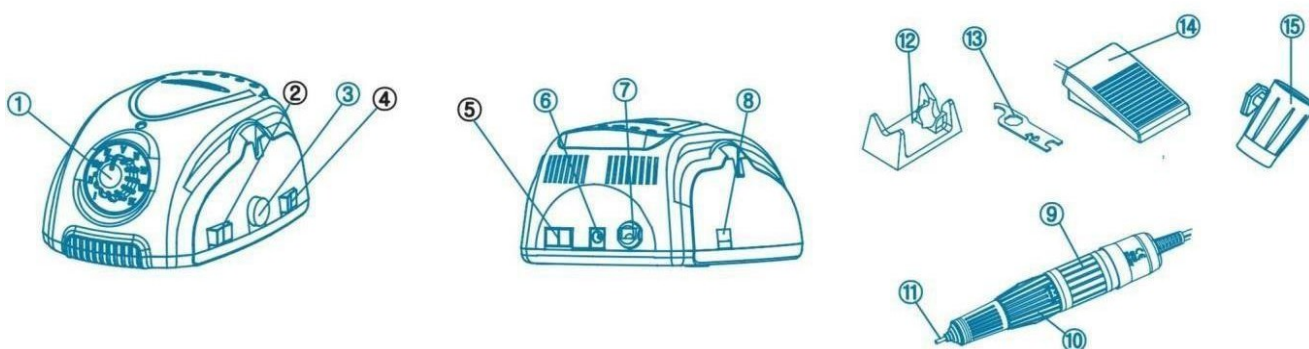

1. Kiiruse reguleerimine 2. Sisse/välja lüliti 3. Pea pesa 4. Pööramislüliti 5. Käsi/jalgjuhtimise lüliti 6. Jalgajami pistikupesa 7. Toitejuhe	8. Pinge valik (mitte lülitada 110 V peale) 9. Mikromootor 10. Käepide 11. Lõikur 12. Pea statiiv 13. Lõikuri reguleerimise võti 14. Jalamootor 15. Peatugi
---	--

Ettevaatust!

Käepideme lahti lukustamine töö ajal kahjustab masinat. Lõikurite vahetamine mootori töötamise ajal kahjustab sidurit. See kahju ei kuulu garantii. Freesid tuleb vahetada pingi avatud asendis (lukustamata) ja freespink peab sel ajal olema välja lülitatud.

SOOVITATAV KIIRUS SÕLTUVALT FREESITÜÜBIST

Freesimisfreesi läbimõõt Maksimaalne kiirus

5mm	41 000
7mm	30 000
10mm	20 000
13mm	16 000
16mm	10 000




TÄHELEPANU!

Pea tuleb puhastada ja kaitsta tolmu eest.


Reklamatsioone ei võeta vastu halva kasutamise ja tolmu tõttu pea kahjustamise tõttu.

Alus

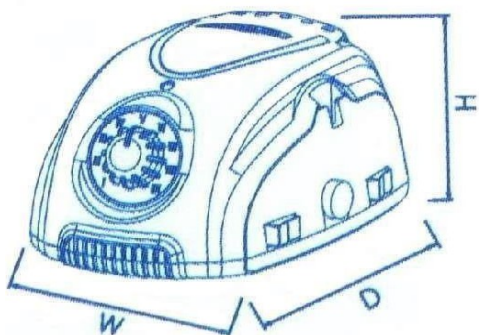

Tehnilised andmed:

- toiteallikas: 110-240 V/50-60Hz
- ergonoomiline korpus
- parempoolne ja vasakpoolne pööramine
- sisse-väljalüliti ja kiiruse reguleerimine aluse peal
- sujuvalt reguleeritav kiirus vahemikus 0 kuni 35 000 pööret minutis.
- Twist-lukuga käepide (ühe sammuga lõikuri vahetus)
- lõiketera läbimõõt 2,32 mm
- pöördemoment 2,9 Ncm
- lõikur on saadaval erinevates värvid

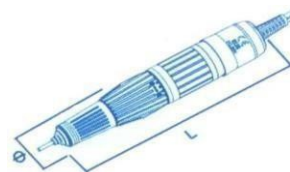

MUDEL	MÕÕTMED mm			MASS
	Laius	Pikkus	Kõrgus	
Champion	118 mm	156 mm	78 mm	1300 g

HEADING	RPM	MÕÕTMI NE	VÕIMALU S	MÕÕTMED		MASS
				Pikkus	läbimõõt	
H20	0 - 30 000	2,9 Ncm	45 W	151	26	156 g
H200	0 - 30 000	2,9 Ncm	45 W	129	22	143 g
SH30N	0 - 30 000	2,9 Ncm	45 W	129	22	160 g
SH20N	0 - 30 000	2,7 Ncm	45 W	128	22	146 g
SH37LN	0 - 40 000	4,5 Ncm	45 W	152	28	210 g

H35SP1	0 - 35 000	3,2 Ncm	45 W	152	28	210
H37LSP	0 - 35 000	3,2 Ncm	45 W	154	30	215

Põhiprobleemid ja lahendus:

Freespingi ei lülitu sisse.

- Kontrollige, kas see on ühendatud - ühendage freespink voluvõrku.
- Kontrollige, et freespingi on sisse lülitatud - lülitage freespingi sisse lüliti abil (skeemil nr 2).
- Kontrollige, et käsijalgade lüliti (joonisel nr 5) oleks seatud asendisse "Hand".
- Kontrollige, et peakaabel ei oleks kahjustatud - vahetage peakaabel välja (saadaval Activeshopist).
- Kontrollige, et toitejuhe poleks kahjustatud - võtke ühendust Activeshopi teenindusega. - Kontrollige, et pinge muutmise nupp (skeemil nr 8) on seatud asendisse 220V. Kui see ei ole ja ruuter on ühendatud, siis on ruuter kahjustatud - võtke ühendust Activeshopi teenindusega, et seda tasuta remonti teostada.

Pea on ülekuumenenud.

- Kontrollige, et Twist-Lock oleks õigesti suletud.

Freesi tuleb vahetada, kui freespink välja lülitatakse, kasutades lüliti (joonisel nr 2). Pöörates kiiruse reguleerimise potentsiomeetri (joonisel nr. 1) miinimumini, ei lülitata freesi välja, vaid vähendatakse ainult selle kiirust miinimumini (mis ei ole palja silmaga nähtav). Kui freesi lülitatud freespingil minimaalsel kiirusel vahetada, võib see põhjustada freesipea ülekuumenemist ja sellest tulenevat freesi kahjustumist (ei kuulu garantii alla).

Ettevaatust!!! Ärge leotage freesipead. Ärge desinfitseerige liigse vedelikuga. Peasse sattuv vesi või desinfitseerimisvahend võib seda kahjustada. Enne võimalikku desinfitseerimist eemaldage pea tolm. Soovitav on hooldada pead spetsiaalse hooldusvahendiga.

OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mida kasutatakse kosmeetilistes operatsioonides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikute poolt väldib ebasoovitavaid mõjusid ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud eesmärgil. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab teostama ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP Sp. z o.o. poolt pakutava volitatud teenindusega:
 - a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra,
 - c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
6. Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.

7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) säilitada üheminutilise intervall.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii väldite igasugust ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamisel, kui nad saavad järelevalvet või juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta, et nad mõistaksid sellega seotud riske.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjätmete konteinerites. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jätmete kohta, kasutatud elektriseadmed

elektriseadmed tuleb eraldi koguda ja anda kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunktidesse.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need ringlussevõtuks ära anda. Seepärast tuleks need anda üle asjakohastes kogumispunktides ja ka ACTIVESHOP Ltd. aadressil.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.

