

momcozy

Draagbare Borstkolf

M9

Gebruikershandleiding



SV

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

→ BELGISCH-NEDERLANDS

INHOUDSTAFEL

1. Productintroductie	01
2. Waarschuwingsinstructies en Voorzorgsmaatregelen	01
3. Veiligheidsinformatie	02
4. App-snelle gebruikersgids	05
5. Productbeschrijving	06
6. Bedieningsinstructies	09
7. Opslagcondities	28
8. Specificatie	28
9. Onderhoud en vervangingsonderdelen	29
10. Conformiteitsverklaring	30
11. Probleemoplossing	30
12. Verwijdering	32
13. Garantie	32
14. Verklaring voor reizen of internationaal gebruik	32
15. Informatie van de fabrikant	33
16. Belangrijke veiligheidsinformatie	33

1. Productintroductie

De Momcozy draagbare borstkolf is bedoeld voor gebruik door vrouwen die borstvoeding geven om melk uit hun borsten te kolven en op te vangen. De Momcozy draagbare borstkolf vormt een vacuüm rond de tepel om moedermelk af te kolven. De melk wordt opgevangen in een melkverzamelaar.

Het hulpmiddel heeft een stimulatiestand, kolfstand en gemengde stand. In de stimulatiestand begint de borstkolf met een snel en kort zuigpatroon om uw melk te laten stromen. In de kolfstand begint de borstkolf met een langzaam zuigpatroon voor het afkolven van melk, waarbij dieper en langzamer wordt gezogen. In de gemengde stand begint de borstkolf met een snel en kort zuigpatroon en vervolgens met een langzaam en lang zuigpatroon. Om te voorkomen dat er melk in het vacuümsysteem stroomt, bevatten de melkverzamelsets een siliconen membraan dat het melkcontactpad fysiek scheidt van het vacuümsysteem.

Het hulpmiddel is voor één gebruiker bestemd.

2. Waarschuwingsinstructies en Voorzorgsmaatregelen

De waarschuwingstekens en grafische symbolen in de handleiding zijn bedoeld om u in staat te stellen het product veilig en correct te gebruiken en om schade aan u en anderen te voorkomen. Waarschuwingstekens en grafische symbolen worden als volgt beschreven:

Symbolen voor waarschuwing en voorzorgsmaatregelen	
 Waarschuwing	Een waarschuwing waarschuwt de lezer voor een situatie die, als deze niet wordt vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben. Het kan ook potentiële ernstige bijwerkingen en veiligheidsrisico's beschrijven.
 Voorzorgsmaatregelen	Geeft een gevarenwaarschuwing aan die de lezer waarschuwt voor een potentieel gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt vermeden, licht of matig letsel voor de gebruiker of de patiënt of schade aan de apparatuur of andere eigendommen tot gevolg kan hebben. Het kan ook worden gebruikt om te waarschuwen tegen onveilige praktijken. Dit omvat de speciale zorg die nodig is voor een veilig en effectief gebruik van het hulpmiddel en de zorg die nodig is om schade aan een apparaat als gevolg van gebruik of misbruik te voorkomen.
Contra-indicaties	Contra-indicaties zijn omstandigheden waaronder het hulpmiddel niet mag worden gebruikt omdat het risico van het gebruik duidelijk groter is dan het mogelijke voordeel. Er kunnen personen zijn bij wie het hulpmiddel niet mag worden gebruikt vanwege hun gezondheidstoestand.
Opmerkingen	Geeft aan dat er aandacht moet worden besteed; als hier geen aandacht aan wordt besteed, kan dit leiden tot onjuist gebruik van het product of beschadiging van het apparaat.

Symboolbeschrijving

	CE-LOGO		UKCA-LOGO
	Droog houden		Stapelgrens 5 lagen
 MEHRWEG	Recycling LOGO		Zie de instructiehandleiding.
	Batchcode		Producten in contact met voedsel
	FCC-LOGO		Serienummer
	Distributieverpakkingen mogen niet worden blootgesteld aan zonlicht		Houdbaarheidsdatum
IP22	Het eerste nummer 2: Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen met een diameter van 12,5 mm en groter. Het tweede nummer 2: Beschermd tegen verticaal vallende waterdruppels wanneer de behuizing een hoek van 15° maakt		
	Verwijdering in overeenstemming met richtlijn 2012/19/EU (WEEE)		
	Dit apparaat is niet getest voor gebruik in een MR-omgeving en mag niet worden gebruikt in een MR-omgeving wanneer patiënten het hulpmiddel dragen. Houd het apparaat buiten de MRI-scannerruimte.		
	Gemachtigde vertegenwoordiger voor het VK		Franse ERP-verpakking
	Gemachtigde vertegenwoordiger voor het EU		

3. Contra-indicaties

Gebruik deze kolf niet als u een actief geïmplantéerd apparaat bij u draagt dat kan worden beïnvloed door een magnetisch veld (bijv. pacemaker; implanteerbare cardioverter-defibrillator).

4. Veiligheidsinformatie

Bij het gebruik van elektrische producten, dient de volgende basisveiligheidsinformatie altijd in acht worden genomen, vooral als er kinderen in de buurt zijn.

4.1 Waarschuwing

- 1) Gebruik dit apparaat niet als u een pacemaker, geïmplanteerde defibrillator of ander geïmplanteerd metalen of elektronisch apparaat bij u draagt. Dergelijk gebruik kan elektrische storingen of de dood tot gevolg hebben.
- 2) Deze borstkolf is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis. Dergelijke personen mogen deze borstkolf alleen gebruiken onder toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, of als zij het vermogen hebben om de juiste instructies over het gebruik van het apparaat op te volgen.
- 3) Gevaar: Om het risico op elektrocutie te verminderen:
 - Haal elektrische apparaten altijd onmiddellijk uit het stopcontact na het opladen.
 - Niet gebruiken tijdens het baden, douchen, autorijden of zwemmen.
 - Grijp niet naar een elektrisch product dat in het water is gevallen, neem in dit geval onmiddellijk de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact.
- 4) De Momcozy draagbare borstkolf is een persoonlijk verzorgingsartikel en mag om hygiënische redenen nooit tussen moeders worden gedeeld of doorverkocht van de ene moeder aan de andere. Deze handelingen zullen de garantie ongeldig maken.
- 5) Als u een moeder bent die besmet is met hepatitis B, hepatitis C of het Human Immunodeficiency Virus (HIV), zal door het afkolven van moedermelk met behulp van de Momcozy draagbare borstkolf het risico van overdracht van het virus naar uw baby via uw moedermelk niet verminderen of wegnemen.
- 6) Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer het product wordt gebruikt in de nabijheid van kinderen of personen met een handicap. Kinderen of huisdieren mogen nooit spelen met de motor, het verpakkingsmateriaal of de accessoires.
- 7) Gebruik het product alleen voor het bedoelde gebruik zoals beschreven in deze handleiding.
- 8) Gebruik geen andere opzetstukken of andere melkverzamelcomponenten dan aanbevolen door de fabrikant.
- 9) Controleer de voedingsadapter voor het opladen en gebruik nooit een beschadigde voedingsadapter.
- 10) Laat het product nooit onbeheerd achter tijdens het opladen.
- 11) Houd het product en alle hulpstukken uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- 12) Gebruik het nooit als u slaapt of slaperig bent.
- 13) Niet gebruiken waar spuitbussen worden gebruikt of zuurstof wordt toegediend.

- 14) Gebruik het hulpmiddel niet in de buurt van explosief of ontvlambaar materiaal, in een MRI-omgeving, in een hyperbare kamer of in de buurt van een open haard of straalkachel.
- 15) Vermijd beklemming door de oplaadkabel.
- 16) Gebruikers mogen het product niet repareren. Als u dit wel doet, vervalt de garantie. Stuur het product voor reparaties naar de fabrikant of naar een aangewezen franchisedistributeur.
- 17) Schakel de borstkolf altijd uit voordat u het kolfstuk van uw borst haalt, om het vacuüm op te heffen.
- 18) Elektrische borstkolven die zijn ontworpen voor één gebruiker mogen nooit worden gehuurd of gedeeld.
- 19) Gebruik de borstkolf nooit als u zwanger bent, want afkolven kan weeën opwekken.
- 20) De temperatuur op hoog niveau van het toegepaste onderdeel kan max.43,9°C bereiken; een te hoge temperatuur kan brandwonden aan de huid veroorzaken, dus zorg ervoor dat uw borsthuid intact en gezond is voor gebruik. Als u voelt dat het te warm raakt, schakelt u het hulpmiddel uit. Om verbranding bij lage temperatuur te voorkomen, mag het apparaat niet langer dan 30 minuten achtereen worden gebruikt. Het interval tussen twee gebruiksmomenten moet ten minste 5 minuten zijn, zodat het apparaat kan afkoelen.
- 21) Gebruiksduur van het product (d.w.z. de bedrijfsduur)
Dit is geen houdbaar apparaat, de gebruiksduur van het product is 500 uur. De verwachte gebruiksduur van de wasbare onderdelen is één tot drie maanden. Controleer voor gebruik of het product normaal werkt. Gebruik na de aangegeven gebruiksduur kan leiden tot verslechtering van de productprestaties. Het product kan het vacuüm bijvoorbeeld niet goed regelen, overmatig vacuüm kan letsel veroorzaken.
- 22) Dit hulpmiddel kan worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen;
- 23) Kinderen mogen niet met het apparaat spelen;
- 24) Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht;
- 25) Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch breken of snijden van een batterij, kan leiden tot een explosie;
- 26) Als een batterij wordt achtergelaten in een omgeving met extreem hoge temperaturen, kan dit een explosie of lekkage van brandbare vloeistoffen of gas tot gevolg hebben;
- 27) Als een batterij aan een extreem lage luchtdruk wordt blootgesteld, kan dit een explosie of lekkage van brandbare vloeistoffen of gas tot gevolg hebben.

4.2 Voorzorgsmaatregelen

- Plaats of bewaar het product niet op een plek waar het in het bad, in de gootsteen of in een zwembad kan vallen of getrokken kan worden.
- Plaats of laat het product niet in water of in een andere vloeistof vallen.
- Dompel het hulpmiddel niet onder in vloeistoffen en stel het niet bloot aan extreme schokken, zoals het laten vallen van de kolf.
- Ga niet langer dan vijf minuten achter elkaar door met kolven als het niet lukt om melk af te kolven. Probeer het op een andere tijd van de dag nog eens.
- Als u ongemak voelt, kunt u de zuigkracht onderbreken door een vinger tussen de borst en de flens te steken.
- Als irritatie of ongemak optreedt, dient u met het gebruik van het apparaat te stoppen en een arts te raadplegen.
- Als de behuizing van de voedingsadapter of de bedrading losraakt, versleten of gerafeld is, dient u onmiddellijk het gebruik van de voedingsadapter te stoppen en contact op te nemen met de fabrikant. Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als u rook of brand waarneemt uit de kolfeenheid of de voedingsadapter.

Verklaring: Als u tijdens het afkolven overmatige warmte van de draagbare borstkolf voelt, dient u onmiddellijk met het afkolven te stoppen en de kolf te verwijderen.

Opmerkingen:

Vermijd direct zonlicht op de hoofdeenheid.

4. App-snelle gebruikersgids

Voordat u een nieuwe borstkolf in gebruik neemt, raadpleegt u de volgende bedieningsinstructies op de App, die u kunnen helpen het product effectiever te gebruiken.

Stap 1:

Om te beginnen, zoekt u naar de Momcozy-app in de app store van uw smartphone, Google Play Store of App Store. De app is compatibel met iOS 13 en Android 8.0 of hogere versies. Houd er rekening mee dat de Bluetooth-verbinding van de app afhankelijk kan zijn van de smartphone die op het apparaat is aangesloten.

Stap 2:

Registreer uw account na de installatie. U kunt inloggen als u een Momcozy account hebt.

Stap 3:

U dient de Bluetooth op uw telefoon in te schakelen waarbij de borstkolf ingeschakeld moet blijven.

Voeg apparaten toe met behulp van de knoppen "+" en "Apparaten".

Gebruik na het aansluiten de app om de borstkolf te bedienen.

5. Productbeschrijving

Het product bestaat voornamelijk uit een hoofdeenheid en een melkverzamelset enz.

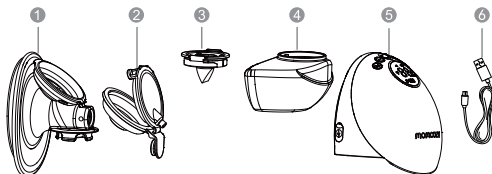


Fig. 1 Apparaatbeschrijving

Beschrijving van het borstkolfapparaat		
Nr.	Onderdeel	Beschrijving
1	Dubbele flensafdichting 24mm	Al deze onderdelen vormen samen de melkverzamelset
2	Membraan	
3	Klep	
4	Melkverzamelaar (150 ml)	
5	Hoofdeenheid	Kolfmotor
6	USB-type C-kabel	De ingang is een USB 2.0-interface, de uitgang is een type-C-interface

Andere meegeleverde accessoires:

Flensinzetstuk
Klep
Flensafdekking
Opslagdeksel
Bewaardoos

Snelstartgids
Flensmaatlineaal
Gebruiksaanwijzing
Melkverzamelaar (150 ml)

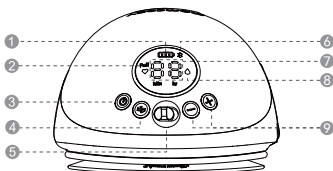


Fig.2 Bedieningspaneel

- 1 Batterij-display
- 2 Herinnering melkoverloop
- 3 Aan / Uit
- 4 Keuzeknop standen
- 5 Schakelrichting
- 6 Bluetooth-indicatorlampje
- 7 Display voor werkingstijd /zuigniveau
- 8 Stand-indicatorlampje
- 9 Verhogen / verlagen

Beschrijving van het bedieningspaneel

Nr.	Knoppen en LEDs	Functies
1		Lang indrukken en ingedrukt houden om in/uit te schakelen; Druk kort op om te pauzeren en vervolgens op een willekeurige knop drukken om uw kolfessie voort te zetten.
2		Keuzeknop standen
3		Verminder de zuigkracht
4		Verhoog de zuigkracht
5		Schakelknop voor het selecteren van de richting van de borstkolf, L of R.

6		Stimulatiestand: In deze stand begint de borstkolf met een snel en kort zuigpatroon om uw melk te laten stromen.
7		Kolfstand: De borstkolf begint met een langzaam zuigpatroon voor het afkolven van melk, waarbij dieper en langzamer wordt gezogen.
8		Gemengde stand: In deze stand begint de borstkolf met een snel en kort zuigpatroon en vervolgens met een langzaam en lang zuigpatroon.
9		Display zuigniveau: De borstkolf heeft 15 zuigkrachtniveaus om uit te kiezen. Display werkingstijd: Wordt weergegeven in seconden als dit korter dan 1 minuut is.
10		Batterij-display

Batterijniveau-indicatorlampje		
Batterij bijna leeg: Knippert	Tijdens het opladen: Brandt een voor een	Volledig opgeladen: Blijft vast branden
		

Als de batterij leeg is en het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld, kan het niet meer werken en geeft het alleen de status 'batterij bijna leeg' weer.

6. Bedieningsinstructies

6.1 Batterij opladen

Laad het product op voor het eerste gebruik. De borstkolf wordt gevoed door een interne oplaadbare lithiumbatterij.

Onze producten zijn verpakt met een oplaadkabel (USB2.0/Type-C lijn) maar niet met een voedingsadapter. U dient zelf de voedingsadapter te kopen voordat u het apparaat oplaadt. U dient een voedingsadapter aan te schaffen die geschikt is voor de USB 2.0-interface. Let erop dat de voedingsadapter een ingangsvermogen heeft van AC 100~240V 50/60 Hz en een uitgangsvermogen van DC 5V = 2A.

- Als het eerste batterij-indicatorlampje knippert, betekent dit dat de batterij bijna leeg is en dat er nog 30 minuten gebruikstijd over is. Laad het apparaat tijdig op.
- Nadat de kolf volledig is opgeladen, kan hij worden gebruikt voor 4-5 sessies (ongeveer 150 minuten) kolven, 30 minuten per sessie.

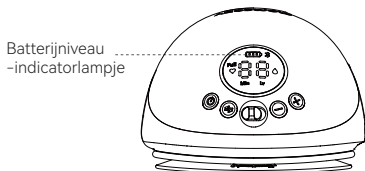


Fig. 3

Laad de batterij op volgens de onderstaande beschrijving:

- Steek het USB-uiteinde van de oplaadkabel in de USB-interface van de voedingsadapter;
- Steek de stekker van de voedingsadapter in het stopcontact;
- Steek het type-C uiteinde van de oplaadkabel in de oplaadpoort.

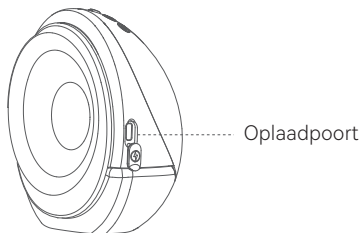


Fig. 4 Positie van oplaadpoort

Het duurt ongeveer 150 minuten om het hulpmiddel volledig op te laden.



Waarschuwing

De borstkolf mag niet worden gebruikt tijdens het opladen!

De oplaadkabel wordt alleen gebruikt om verbinding te maken tussen de voedingsadapter en het Momcozy draagbare borstkolfapparaat voor het opladen. Verbind deze niet met andere apparatuur, want dit kan elektrische schokken en ongevallen veroorzaken!

- Als de behuizing van de voedingsadapter losraakt, uiteenvalt of gerafeld is, dient u onmiddellijk met het gebruik van de voedingsadapter te stoppen en contact op te nemen met de fabrikant.
- Als de oplaadkabel beschadigd, gebroken of gerafeld is, dient u onmiddellijk met het gebruik van de oplaadkabel te stoppen en contact op te nemen met de fabrikant om deze door een nieuwe te vervangen (zie de laatste pagina van deze handleiding voor contactgegevens).
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als u rook of brand waarneemt uit de kolfeenheid of de voedingsadapter.



Voorzorgsmaatregel:

Het gebruik van het verkeerde type adapter of de aankoop van een adapter van slechte kwaliteit kan de veiligheid van het hulpmiddel verminderen en uw eigendommen en gezondheid beschadigen. Koop de medische adapter die voldoet aan de IEC 60601-1 en IEC 60601-1-2 normen voor professionele markten. De uitgang van de voedingsadapter moet gelijkstroom DC 5V $\equiv$ 2A zijn.

Opmerkingen:

- Als na het volledig opladen van de batterij de werktijd korter is dan voorheen en u wilt de batterij vervangen, mag u de oplaadbare batterij niet zelf vervangen. Neem voor vervanging contact op met de fabrikant. Het zelf uittrekken en vervangen van de batterij kan schade aan de hoofdeenheid en de batterij tot gevolg hebben.
- Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, zal de batterij langzaam ontladen. Om schade aan de batterij als gevolg van te lage spanning gedurende lange tijd te voorkomen, dient u het apparaat om de drie maanden op te laden.

6.2 Reiniging en desinfectie

6.2.1 Algemene beschrijving/vereiste

Het geven van moedermelk is een van de beste dingen die u kunt doen voor de gezondheid en ontwikkeling van uw baby. Uw melk afkolven is een manier om uw baby moedermelk te geven. Het is belangrijk om de onderdelen van uw kolf schoon te houden, want ziektekiemen kunnen snel groeien in moedermelk of moedermelkresten die achterblijven op kolfonderdelen. Als u deze stappen volgt, kunt u besmetting voorkomen en uw baby beschermen tegen infectie. Als uw baby te vroeg is geboren of andere gezondheidsproblemen heeft, kunnen de zorgverleners van uw baby mogelijk meer aanbevelingen geven voor het veilig afkolven van moedermelk.

1) VOOR ELK GEBRUIK

Controleer of de kolfset schoon is en zet deze in elkaar.
Reinig de kolfmotor met desinfectiedoekjes.

2) NA ELK GEBRUIK

Bewaar de melk veilig: Gebruik bewaarzakjes voor moedermelk of schone, voedselveilige bakjes om afgekolfde moedermelk in te bewaren. De bakjes moeten van glas of plastic zijn en goed sluitende deksels hebben, label ze met de datum en tijd en plaats ze onmiddellijk in een ijskast, vrieskast of koeltas met ijsblokjes.
Reinig het kolfgebied: Reinig de wijzerplaten, de aan/uit-schakelaar en het aanrecht met desinfectiedoekjes.




3) Onderdelen die moeten worden gereinigd en gedesinfecteerd

Reinig en desinfecteer alle onderdelen die in contact komen met de borst en moedermelk voordat u de borstkolf voor het eerst gebruikt en na elk gebruik.

- Onderdelen die in contact komen met moedermelk: onderdelen van de melkverzamelset, waaronder flens, verbingsstuk, membraan, klep en melkverzamelaar.
- Onderdelen die alleen met de borsthuid in contact komen: Flens.

4) Vóór reiniging/desinfectie:

- Was uw handen goed met water en zeep gedurende 20 seconden.
- Haal alle onderdelen uit elkaar zoals volgt:

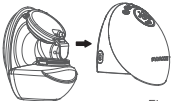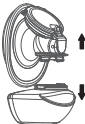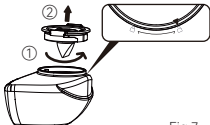 Fig.5	 Fig.6
1). Demonteer de hoofdeenheid en de flens.	2). Trek de flens omhoog om hem van de melkverzamelaar los te koppelen.
 Fig.7	 Fig.8
3). Draai de dop open in de richting van het ontgrendelingspictogram aan de flesmond.	4). Verwijder het membraan uit de flens.



Voorzorgsmaatregel:

Plaats de hoofdeenheid, de oplaadkabel of de adapter (als u een adapter hebt gekocht) nooit in water of een vaatwasmachine, want dit veroorzaakt permanente schade aan deze onderdelen.

6.2.2 Reinigen en desinfecteren van onderdelen die in contact komen met de melk

Stap 1: Reiniging

Maak het apparaat met de hand schoon! De veiligheid van het gebruik van een vaatwasser voor het reinigen en desinfecteren van dit product is niet getest.



! Waarschuwing

Gebruik geen antibacteriële of schurende reinigingsmiddelen om de borstkolfonderdelen schoon te maken, want dit kan schade veroorzaken.

1) Maak de onderstaande artikelen klaar:

- Warm water en zeep
- Drinkwaterkwaliteit
- Schone wasbak alleen gebruikt voor babyvoedingsartikelen
- Een schone borstel die alleen voor babyvoedingsartikelen wordt gebruikt
- Ongebruikte theedoek of papieren tissue

2) Afspoelen: Spoel de onderdelen van de melkverzamelset en andere voedingsmiddelen af door ze onder stromend water te houden om achtergebleven melk of vuil te verwijderen. Het water kan warm of koud zijn, naar wens.

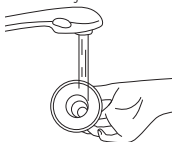


Fig. 9

3) Onderdelen melkverzameling:

- Plaats de onderdelen van de melkverzamelset in een schone wasbak die alleen voor babyvoedingsartikelen wordt gebruikt. Was het hulpmiddel niet direct in de gootsteen, want dit kan ziektekiemen bevatten die deze artikelen kunnen besmetten.
- Dompel de onderdelen van de melkverzamelset 3~5 minuten in warm zeepwater van 40-60 °C (104-140 °F).

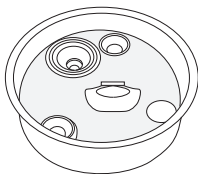


Fig.10

- Gebruik voor het reinigen van de artikelen een schone borstel die alleen voor babyvoedingsartikelen wordt gebruikt.

4) Nogmaals spoelen: Spoel de artikelen af door ze onder stromend water te houden of door ze onder te dompelen in schoon water in een aparte wasbak die alleen gebruikt wordt voor het reinigen van babyvoedingsartikelen. Als er nog steeds vuil is, herhaalt u stap 3 en spoelt u opnieuw af totdat er geen zichtbaar vuil meer is.

5) Grondig drogen aan de lucht: Plaats delen van de melkverzamelset, de wasbak en flessenborstel op een schone, ongebruikte theedoek of papieren tissue op een plek die beschermd is tegen vuil en stof. Gebruik geen theedoek om artikelen droog te wrijven of te deppen, want dat kan ziektekiemen overbrengen op de artikelen!

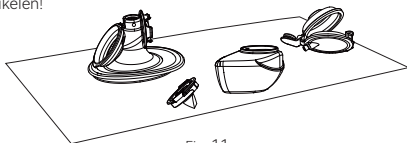


Fig. 11

6) Wasbak en flessenborstel reinigen: Spoel de wasbakken en borstel goed af en laat ze na elk gebruik aan de lucht drogen. Was ze om de paar dagen met de hand met warm water en zeep. Als uw baby jonger is dan 3 maanden, te vroeg geboren is of een verzwakt immuunsysteem heeft door ziekte (zoals HIV) of medische behandeling (zoals chemotherapie voor kanker), dient u de wasbak en flessenborstel na elk gebruik te wassen.

Na het reinigen:

Voor extra kiemverwijdering desinfecteert u de onderdelen van de melkverzamelset, de wasbak en de flessenborstel minstens eenmaal per dag nadat ze zijn gereinigd. De artikelen kunnen worden gedesinfecteerd met kokend water in een desinfectie-opstelling. Desinfecteren is vooral belangrijk als uw baby jonger is dan 3 maanden, te vroeg geboren is of een verzwakt immuunsysteem heeft door ziekte of medische behandeling. Raadpleeg stap 2 voor het desinfecteren van onderdelen die met melk in contact komen.

Stap 2: Desinfectie

Voorzorgsmaatregel: Steriliseer kolfonderdelen niet in een microgolfoven of UV-sterilisator. Hoge temperaturen (> 110 °C) verkorten de gebruiksduur en veroorzaken veiligheidsrisico's.

Voor het desinfecteren moeten de gereinigde melkverzamelset, flessenborstels en wasbakken zijn gereinigd met behulp van de bovenstaande methoden.

Desinfecteer alle artikelen die in contact komen met melk (zelfs de flessenborstel en de wasbak!) door een van de volgende methoden te gebruiken.

1) Maak de onderstaande artikelen klaar:

- Een huishoudpan
- Drinkwaterkwaliteit
- Schone grijptang



Voorzorgsmaatregel:

Tijdens het desinfecteren met kokend water mogen de fles of andere onderdelen de zijkanten van de pan niet raken. Dit kan leiden tot onomkeerbare vervorming of beschadiging van het product.

2) Plaats de gedemonteerde melkverzamelset in de pan en vul de pan met voldoende water om de te desinfecteren onderdelen te bedekken. Laat het water 5-10 minuten koken. De onderdelen mogen niet de zijkanten van de pan raken.

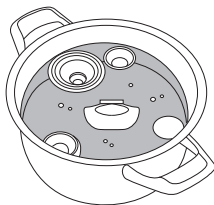


Fig. 12

3) Verwijder de artikelen met een schone grijptang.



Fig. 13

4) Grondig drogen aan de lucht.

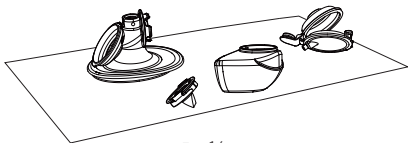


Fig. 14

Stap 3: Veilig bewaren

Berg de artikelen veilig op tot het volgende gebruik. De schone kolfonderdelen, flessenborstels en wasbakken moeten goed aan de lucht zijn gedroogd voordat u ze opbergt. De artikelen moeten volledig droog zijn om de groei van ziektekiemen en schimmel te voorkomen. Bewaar droge artikelen in een schone, beschermde ruimte om besmetting te voorkomen.

1. Handsen wassen: Was uw handen goed met water en zeep.
2. In elkaar zetten: Zet de schone, droge kolfonderdelen in elkaar.
3. Veilig bewaren: Plaats de opnieuw gemonteerde kolfonderdelen en andere voedingsartikelen, de wasbak en de droge flessenborstel op een schone, beschermde plek, zoals in een gesloten keukenkastje dat alleen wordt gebruikt om schone vaat te bewaren.

6.2.3 Reinigen / desinfecteren van overige onderdelen

De behuizing van de hoofdeenheid moet de eerste keer en na elk gebruik worden gereinigd en gedesinfecteerd. De andere onderdelen komen tijdens het kolven niet in contact met het menselijk lichaam of de melk en hoeven alleen te worden gereinigd als ze vuil zijn.

Reinig/desinfecteer de artikelen bij kamertemperatuur 5 °C~ 40 °C zoals hieronder weergegeven:

Maak de onderstaande artikelen klaar:

- Desinfectie
- 70% isopropylalcohol doekjes
- Schone zachte doek

Reinigingsmethode:

1. Was eerst uw handen met een handdesinfectiemiddel voordat u deze reinigingsprocedure uitvoert.
2. Verwijder alle achtergebleven vreemde stoffen van de hoofdeenheid en/of de oplaadkabel met een schone zachte doek.
3. Neem een doekje met 70% isopropylalcohol om de onderdelen af te vegen totdat er geen zichtbare verontreinigingen meer zijn.
4. Droog het apparaat door het 10 minuten bij kamertemperatuur te plaatsen om de resterende reinigungsoplossing op het product te laten verdampen.

Desinfectiemethode:

Reinig vóór desinfectie de behuizing van de hoofdeenheid volgens de bovenstaande methode.

1. Desinfecteer de behuizing van de hoofdeenheid met een zachte doek die 3 minuten met 70% isopropanol is bevochtigd.
2. Droog de hoofdeenheid door deze 10 minuten bij kamertemperatuur te plaatsen om de resterende desinfectieoplossing te laten verdampen.

6.3 Gebruiksaanwijzing

6.3.1 Voorbereiding voor gebruik



Voorzorgsmaatregel:

1. Was uw handen met water en zeep, controleer of het schoon is en monteer een schone kolfset.

2. Duur van de kolfsessie:

Nadat het product volledig is opgeladen met een oplaadbare lithiumbatterij, kan het worden gebruikt voor 4~ 5 sessies (ongeveer 150 minuten) kolven, 30 minuten per sessie. Een typische kolfsessie duurt ongeveer 10-15 minuten per borst, maar het is goed om alleen zo lang te kolven als voor u comfortabel en productief is.

1. Flensmaat selecteren

De Momcozy draagbare borstkolf is voorzien van een 24 mm flens en een 17/19/21 mm kolfinzetstuk. Als de meegeleverde flens en het flensinzetstuk niet de juiste maat zijn, kunt u verschillende maten flenzen en flensinzetstukken aanschaffen op Amazon of op de officiële website van Momcozy. Typ "momcozy" in de zoekbalk en vind de flensmaat en het flensinzetstuk die bij u passen.

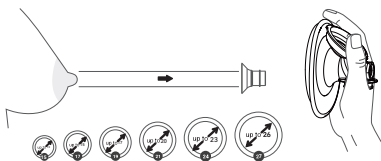


Fig.15 Juiste maat selecteren

2. Stimuleer uw tepel

- Stimuleer uw tepel om een volledige omvang te krijgen (sla deze stap niet over!).
- Plaats uw tepel in het kleinste gaatje waar u comfortabel in kunt zonder te forceren.
- Kies een gaatje waar de basis van uw tepel goed in past.
- Neem de maat op basis van de maattabel.

3. De pasvorm van de flens uitproberen

- Om de juiste maat flens te vinden, plaatst u de flens eerst op de juiste plaats op uw borst.
- Druk de flens op uw borst totdat er geen ruimte meer is. Plaats uw tepel precies in het midden van de flens.

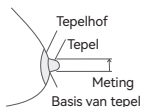


Fig. 16



Fig. 17

Te klein

Te klein: Als tijdens het kolven uw tepel tegen de binnenwand van de flens blijft schuren, dan is deze flens te klein voor u.

Goede pasvorm

Geschikte pasform: Als tijdens het kolven uw tepel soepel beweegt zonder tegen de binnenwand van de flens te wrijven of deze te raken, en als er bijna geen tepelhof naar binnen wordt gezogen, dan is deze flens geschikt voor u.

Te groot

Te groot: Als tijdens het kolven een groot stuk tepelhof naar binnen wordt gezogen, dan is deze flens te groot voor u.

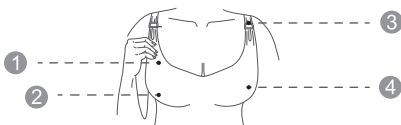
4. Voor de juiste bh zorgen

Fig. 18

- 1 Gemaakt van rekbare stof
- 2 Geen beugels of vulling
- 3 Heeft een klepje
- 4 Bedekt volledig

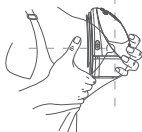


Fig. 19

GEEN RUIMTE

Wanneer u de kolf in uw bh doet, moet de siliconen flens van deze kolf stevig tegen uw huid worden gedrukt zonder enige ruimte.

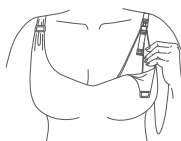


Fig. 20

ALS DEZE BEWEEGT

Als u voelt dat de kolf beweegt tijdens het gebruik, dient u uw bh-bandje strakker aan te trekken om de kolf opnieuw af te stellen, of u kiest een andere bh.

5. Aanbevolen houding**Voorzorgsmaatregel:**

Ga tijdens het kolven altijd rechtop zitten of staan om te voorkomen dat de melk weglekt. Deze kolf mag niet worden gebruikt als u ligt of slaapt zodat u tijdens het gebruik de juiste oriëntatie behoudt.

HOUDING

De kolf en de melkverzamelaar moeten altijd in een verticale hoek staan. Anders loopt de melk eruit.



Fig.21 Correcte houding

6.3.2 De kolf monteren



Voorzorgsmaatregel:

De delen van de borstkolf die in contact komen met de melk of borst moeten goed zijn gereinigd en gedesinfecteerd.







Waarschuwing

- Let erop dat als u de onderdelen van de borstkolf hebt ontsmet door ze uit te koken, ze erg heet kunnen zijn. Om brandwonden te voorkomen, mag u de borstkolf pas in elkaar zetten als de gedesinfecteerde onderdelen zijn afgekoeld.
- Was uw handen grondig met water en zeep voordat u de onderdelen van de borstkolf en borsten aanraakt om besmetting te voorkomen. Raak de binnenkant van de melkverzamelset niet aan.

Opmerkingen:

- De juiste plaatsing van flens, membraan, melkverzamelaar, klep, enz. is essentieel voor een goede vacuümvorming in de borstkolf.
- Voor elk gebruik moeten de afzonderlijke onderdelen visueel worden geïnspecteerd op scheuren, barsten, afbrokkeling, verkleuring of beschadiging. Als er schade aan het hulpmiddel wordt geconstateerd, stop dan met het gebruik totdat de onderdelen zijn vervangen.

Was uw handen grondig met water en zeep en zet de kolf dan in elkaar als volgt:

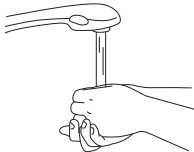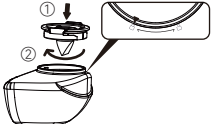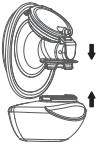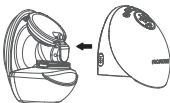 Fig. 22	 Fig. 23
1. Was uw handen goed met water en zeep.	2. Monteer de melkkom door deze te draaien in de richting van het vergrendelingspictogram aan de flesmond.
 Fig. 24	 Fig. 25
3. Bevestig de flens aan de flesmond en monteer deze op de melkverzamelaar.	4. Monteer de hoofdeenheid en flens.

De borstkolf is nu klaar voor gebruik.

6.3.3 Instructies voor het afkolven



Waarschuwing

- Voordat u de kolfbehuizing van uw borst haalt, dient u de borstkolf altijd uit te schakelen om het vacuüm op te heffen.
- Ga niet langer dan vijf minuten achter elkaar door met kolven als het u niet lukt om melk af te kolven. Probeer het op een andere tijd van de dag nog eens.
- Als het proces erg ongemakkelijk of pijnlijk wordt, dient u met het gebruik van de kolf te stoppen en een arts te raadplegen.



Voorzorgsmaatregel:

- Het melkniveau controleren tijdens het kolven om te voorkomen dat de melk te vol raakt.

1. Aanpassing

a. Voordat u gaat kolven, controleer of de kolf stevig op uw borst wordt gedrukt zonder dat er ruimte over is (Fig.26).


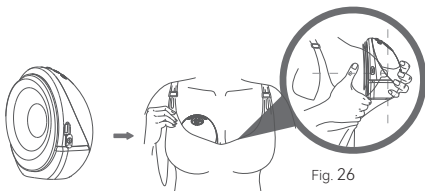


Fig. 26

b. U past de kolf aan door de flens tegen uw borst te houden om te kijken of uw tepel in het midden van de flens zit. U hoeft hierbij niet naar voren te leunen.

c. Als hij goed is aangepast, kijkt u door de flens om te controleren of uw tepel gecentreerd is voordat u gaat kolven. Het uiteinde van uw tepel mag de bovenkant, zijkanten of onderkant van het flenskanaal NIET raken. Als dit het geval is, probeert u het opnieuw.

Eerste aanzicht

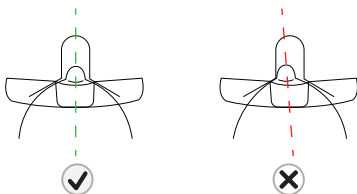

Juiste aanpassing
Melk afkolven

Onjuiste aanpassing
Probeer het opnieuw

Fig. 27

Opmerking:

De juiste tepelaanpassing is zeer belangrijk voor een comfortabel afkolven en prestaties.

De tepel moet correct in het flenskanaal worden geplaatst voor het kolven wordt om ongemak te voorkomen.

Zie hoofdstuk 8.3.1 Voorbereiding voor gebruik – Flensmaat selecteren.

2. De kolf in uw bh bevestigen

Bevestig de kolf op zijn plaats in uw bh, en druk de kolf stevig tegen uw borst aan. Maak indien nodig uw bh strakker vast om de kolf goed op zijn plaats te houden en begin met afkolven.

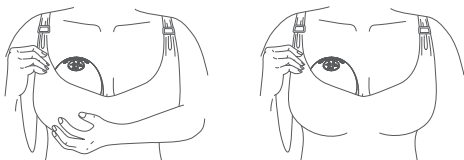


Fig. 28

3. Afkolven starten

Steek de kolf niet direct in uw beha, volg de stapsgewijze instructies. Onkoppel de kolf van de oplader voor gebruik.

A. Schakel de kolf in

Raadpleeg uw arts om te begrijpen hoe lang u kunt kolven. De Momcozy kolf schakelt automatisch uit na 30 minuten kolven.

Druk lang op de Aan / Uit/ Pauze-knop om de kolf uit te schakelen.

Druk kort op de Aan / Uit/ Pauze-knop om te pauzeren en druk vervolgens op een willekeurige knop om door te gaan met afkolven.

- Als u de kolf voor het eerst gebruikt, staat hij in de standaard Stimulatie-stand.
- Het standaard vacuümniveau is 1.

B. De stand selecteren

Standen: Stimulatiestand en kolfstand en gemengde stand Wanneer u de kolf voor het eerst gebruikt, is de standaardinstelling zuigkracht 1 van de Stimulatiestand.

C. Het vacuümniveau selecteren.

Odsávačka Momcozy má 15 nastavení podtlaku pro každý režim, což vám dává kontrolu nad tím, co je pro vás příjemné a funguje neefektivněji ve všech režimech.

Jakmile ucítíte tlak podtlaku na bradavce, pomocí tlačítka Zvýšit/Snížit nastavte tlak podtlaku tak, abyste našli preferované nastavení ve všech režimech. Po 60 sekundách bez provozu se LED displej vypne, stisknutím libovolného tlačítka můžete LED displej opět aktivovat.

Tip: Een hogere vacuümdruk betekent niet altijd een hoger melkvolume. Als uw tepel overmatig wordt belast, kan dit de melkproductie verminderen. Zorg er altijd voor dat u op een comfortabel niveau kolft. Als u geen zuigkracht voelt, controleer dan of de kolf juist is gemonteerd.



Voorzorgsmaatregel:

- * De Momcozy kolf ondersteunt geen gebruik tijdens het opladen. Ontkoppel de kolf altijd van de oplader en sluit het laaddeksel voor gebruik.
- * De Momcozy kolf mag niet worden gebruikt tijdens het liggen, inspannende activiteiten of activiteiten met risico op letsel.
- * Het gebruik van een borstkolf mag geen pijn doen. Probeer niet te kolven met een te hoge of oncomfortabele vacuümdrukinstelling. Als u tijdens het kolven overmatig ongemak of pijn voelt, stop dan met kolven, maak de afsluiting rond uw tepel los en stop de sessie.

4. Afkolven pauzeren / starten

Om het afkolven te pauzeren, drukt u kort op de aan/uit/pauzeknop. Het indicatorlampje voor de standen knippert nu. Druk op een willekeurige knop om uw kolfsessie voort te zetten.

5. De kolf uitschakelen

Druk lang op de Aan / Uit/ Pauze-knop om de kolf uit te schakelen. Bovendien zal het product automatisch uitschakelen na 30 minuten kolven.

6. De kolf afnemen

Met uw vinger kunt u de afsluiting tussen de flens en het borstweefsel verbreken.

Leun iets naar voren om de kolf van de borst af te nemen na uw kolfsessie. Houd de flensopening naar boven gericht zodat er geen melk overloopt.



Fig. 29

Wij bevelen aan dat gebruikers de kolfsessie stoppen als het afgekolfd melkvolume van de melkverzamelaar 120 bereikt om overlopen te voorkomen.



Waarschuwing

De bijgeleverde melkverzamelaars dienen voor het opvangen van de melk tijdens het afkolven. Als u uw baby niet hoeft te voeden of de afgekolfd melk wilt bewaren, dient u een andere melkverzamelaar met een dop te gebruiken.



Waarschuwing

Zet afgekolfd melk onmiddellijk in de ijskast of vries het in, of bewaar het 2-4 uur bij een temperatuur van 16 °C~ 25 °C voordat u uw baby voedt.

6.4 Moedermelk bewaren

6.4.1 Juiste opslag van moedermelk

U kunt de veiligheid en kwaliteit van afgekolfd moedermelk behouden voor de gezondheid van de baby, door de aanbevolen bewaar- en bereidingstechnieken te volgen.

Er zijn algemene richtlijnen voor het bewaren van moedermelk bij verschillende temperaturen. Verschillende factoren hebben invloed op de periode gedurende welke moedermelk kan worden bewaard. Zulke factoren omvatten het melkvolume, de kamertemperatuur waarbij de melk wordt afgekolfd, temperatuurschommelingen in de ijskast en vrieskast, en de reinigingsgraad van de omgeving.

Bewaren van melk na afkolven:

- Zet de melk in de ijskast of laat de melk afkoelen onmiddellijk na het kolven, indien dit mogelijk is. U kunt de melk in de ijskast plaatsen, in een koelkast of in een thermisch geïsoleerde koeltas, of het invriezen in kleine batches (2 à 4 ounces [60 à 120 ml]) voor latere voedingen.
- Gebruik bewaarzakjes voor moedermelk of schone, voedselveilige bakjes om afgekolfdde moedermelk in te bewaren. De containers voor het bewaren van de melk moeten van glas of plastic zijn en van goed sluitende deksels zijn voorzien.
-- Gebruik geen flessen met het recyclingsymbool 7, wat aangeeft dat de container mogelijk van BPA-plastic gemaakt is.
- Verwijder de lucht alvorens de container af te sluiten.
- Leg de zakjes plat om in te vriezen. Om te voorkomen dat de zakjes aan elkaar plakken, kunt u deze scheiden met papieren zakdoekjes.
- Bewaar de moedermelk nooit in wegwerpflesjes of plastic zakjes die niet bedoeld zijn voor het bewaren van moedermelk.
- Gebruik een spatel om het romige deel van de moedermelk dat naar de boven kan komen, terug in de rest van de moedermelk te doen. De melk niet schudden. Hierdoor kunnen sommige waardevolle bestanddelen van de melk verloren gaan.
- Verse afgekolfdde of gekolfdde melk kan worden bewaard:

Soort moedermelk	Opslagplaats en -temperatuur		
	Aanrecht 25 °C (77 °F) (of kouder (kamertemperatuur)	ijskast 4°C (40 °F)	Vrieskast 23 °F (-5 °C) of kouder
Vers afgekolfdde of gekolfdde melk	Binnen 2-4 uur	Binnen 24 uur	Binnen drie maanden
Ontdooit, na invriezen	Gebruik de melk binnen 2 uur na de laatste babyvoeding		

Deze richtlijnen zijn alleen voor gezonde voldragen baby's en kunnen verschillend zijn voor vroeggeboren of zieke baby's. Raadpleeg uw arts.

Bewaartips:

- Plak een duidelijk etiket op de bewaarcontainer met de datum waarop de melk is afgekolfd en vermeld de naam van uw kind als u de melk aan een kinderverzorger geeft.
- Bewaar moedermelk niet in de deur van de ijskast of vrieskast. Dit helpt de moedermelk te beschermen tegen temperatuurschommelingen door het openen en sluiten van de deur.
- Als u denkt dat u vers afgekolfdde melk niet binnen 4 dagen gaat gebruiken, is het verstandig om de melk direct in te vriezen. Dit helpt de kwaliteit van de moedermelk te beschermen.

- Als u moedermelk invriest:
- Bewaar de melk in kleine hoeveelheden om geen melk te verspillen die niet is opgedronken. Bewaar (2 à 4 ounces [60 à 120 ml]) of de hoeveelheid melk die u voor een voeding gebruikt.
- Laat ongeveer 2,5 cm (1 inch) ruimte vrij boven in de container omdat moedermelk uitzet bij het invriezen.
- Moedermelk kunt u tot 24 uur bewaren in een thermische koeltas met bevroren ijszakjes als u op reis bent. Gebruik de melk meteen op uw bestemming, plaats het anders in de ijskast of vries het in.

6.4.2 Veilig ontdooien van moedermelk

- Ontdooi altijd eerst de oudste moedermelk. Onthoud: het eerst erin, het eerst eruit. De kwaliteit van de moedermelk kan na enige tijd verminderen.
 - Er zijn verschillende manieren om uw moedermelk te ontdooien:
 - In de ijskast 's nachts.
 - Door de melk in een container met warm of lauw water te plaatsen.
 - Onder lauw stromend water.
 - Ontdooi of verwarm moedermelk nooit in de microgolfoven. Microgolfovenstraling kunnen de voedingsstoffen in de moedermelk vernietigen en hete plekken veroorzaken die brandwonden aan het babymondje kunnen geven.
 - Als u moedermelk in de ijskast ontdooit, gebruik het dan binnen 24 uur. U begint met het aftellen van 24 uur vanaf het moment dat de moedermelk volledig is ontdooit, niet vanaf het moment dat u het uit de vrieskast hebt genomen.
 - Zodra moedermelk op kamertemperatuur is gebracht of opgewarmd, dient u het binnen 2 uur te gebruiken.
- Vries moedermelk nooit opnieuw in nadat het ontdooit is.

7. Opslagcondities

Bewaren van de kolf

- * Kortetermijnopslag
- * Houd de borstkolf uit direct zonlicht. Bewaar de borstkolf en de accessoires op een veilige, schone en droge plaats en buiten bereik van kinderen.

* Langetermijnopslag

Ten eerste, laad de kolf op voor langdurige opslag, zodat de gebruiksduur van deze kolf kan worden verlengd. Ten tweede, bewaar de kolf op een plek uit de buurt van direct zonlicht om verkleuring te voorkomen. Ten derde, reinig en droog de wasbare onderdelen voordat u ze opbergt.

* Temperatuur: -20 tot 60 °C / -4 tot 140 °F

* Relatieve vochtigheid: 15% - 90%

* Omgevingsdruk: 90 tot 106 kPa

8. Specificatie

Modelnr.	BP223
Naam	Draagbare borstkolf
Stroomvereisten	Ingang: 100-240Vac, 50/60Hz; Uitgang: 5V $\Rightarrow$ 2A (Opladen via meegeleverde USB 2.0/Type-C oplaadkabel en zelf gekochte voedingsadapter)
Ingang	5V $\Rightarrow$ 2A
Stroomvoorziening	3,7V / 1800mAh oplaadbare lithiumbatterij
Nominaal vermogen	10 W
Zuigstanden	Stimulatiestand, kolfstand en gemengde stand
Vacuümbereik	Stimulatiestand: -67mmHg~-172mmHg Kolfstand: -105mmHg~-300mmHg Gemengde stand: -105mmHg~-300mmHg

Cyclussnelheid	Stimulatiestand: 62~ 90 cyclus/min Kolfstand: 26~ 66 cyclus/min Gemengde stand: 50~85 cyclus/min
Kolfafmetingen	127 mm X 109 mm X 77 mm
Gewicht (met alle accessoires)	302 g
Gebruiksduur van het product	500 uur
Ruisniveau	≤48 dB
Type bescherming tegen elektrisch schokken	Intern aangedreven apparatuur
Bedrijfscondities	Temperatuur: 0°C tot 40°C; vochtigheid: 15% tot 90%, atmosferische druk: 70 kPa tot 106 kPa
Transport- en opslagomgeving	Temperatuur: -20°C tot 60°C; vochtigheid: 15% tot 90%, atmosferische druk: 70 kPa tot 106 kPa
Batterijoplaadtijd	150 minuten
Gebruiksduur van de batterij	150 minuten

9. Onderhoud en vervangingsonderdelen

Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd: Als u dit apparaat opent of uit elkaar haalt, vervalt de garantie. Als het apparaat moet worden gerepareerd, dient u het terug te sturen naar de fabrikant of rechtstreeks naar de verkoper. Elke wijziging is verboden.

De FABRIKANT zal op verzoek schakelschema's, onderdelenlijsten, beschrijvingen, kalibratie-instructies of andere informatie ter beschikking stellen die het ONDERHOUDSPERSONEEL zullen helpen bij het repareren van die onderdelen van het apparaat die door de FABRIKANT als repareerbaar door het ONDERHOUDSPERSONEEL zijn aangewezen. Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, zal de batterij langzaam ontladen. Om schade aan de batterij als gevolg van te lage spanning gedurende lange tijd te voorkomen, dient u het apparaat om de drie maanden op te laden.



Waarschuwing

Waarschuwing: het vervangen van lithiumbatterijen door onvoldoende opgeleid personeel kan gevaar geven.

Reinig of onderhoud het apparaat niet terwijl het in gebruik is of tijdens het opladen.

10. Conformiteitsverklaring

EU-nalevingsverklaring: Shenzhen Root Innovation Technology Co., Ltd. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de LVD-richtlijn 2014/35/EU en de EMC-richtlijn 2014/30/EU.

11. Probleemoplossing

Problemen	Oplossingen
De kolf werkt niet	• Als er nog geen aflat heeft plaatsgevonden, overweeg dan om de kolf langer aan de borst te laten om te kijken of het aflaten mogelijk vertraagd is. Opmerking: De tijd die nodig is om de melk af te laten is voor iedereen anders en varieert door veel factoren. • Controleer de juiste plaatsing van de tepel, pauzeer de kolf en haal hem van de borst. Pas de kolf opnieuw aan zoals hieronder beschreven. • Mogelijk hebt u niet de juiste flensmaat (Zie paragraaf 7.3 Gebruiksaanwijzing – Flensmaat selecteren).
De melk stroomt niet	• Pauzeer de kolf en haal hem van de borst. Pas hem opnieuw op de juiste wijze aan. (zie hoofdstuk 7.3 Gebruiksaanwijzing – Aanpassing). • U kunt de kolf ook losmaken van de flens om hem opnieuw aan te passen. Centreer vervolgens uw tepel in het flensvormstuk en breng de kolf naar uw borst (zie hoofdstuk 7.3 Gebruiksaanwijzing – Aanpassing).
Nieuwe aanpassing nodig	• Pauzeer de kolf en haal hem van de borst. Pas hem opnieuw op de juiste wijze aan. (zie hoofdstuk 7.3 Gebruiksaanwijzing – Aanpassing). • U kunt de kolf ook losmaken van de flens om hem opnieuw aan te passen. Centreer vervolgens uw tepel in het flensvormstuk en breng de kolf naar uw borst (zie hoofdstuk 7.3 Gebruiksaanwijzing – Aanpassing).

Gevoel van ongemak tijdens het kolven	• Als u overmatig ongemak ervaart, probeer dan het volgende (zie hoofdstuk 7.3 Gebruiksaanwijzing – Aanpassing): • Druk de Momcozy kolf stevig tegen uw borst aan tijdens de Stimulatie-fase. • Trek de bh wat strakker aan om er zeker van te zijn dat de Momcozy kolf stevig tegen de borst gehouden wordt. • Verminder de zuigkracht. • Pas de Momcozy kolf opnieuw aan. • Misschien kolft u de lang af. De Momcozy kolf schakelt automatisch uit na 30 minuten. • Mogelijk hebt u niet de juiste flensmaat (zie hoofdstuk 7.3 Gebruiksaanwijzing – Flensmaat selecteren). Stop met kolven en raadpleeg een vakkundig persoon of borstvoedingsdeskundige.
Verminderde (lage) zuigkracht van de kolf	• De kolf heeft 9 zuigkrachtinstellingen. Druk op de knop verhogen om de zuigkracht te verhogen. • Controleer de conditie van de wasbare onderdelen. Ze moeten na drie maanden gebruik worden vervangen. • Als dat niet werkt, probeer dan het volgende: 1. Controleer of de verbindingen tussen alle afwasbare onderdelen goed vastzitten. 2. Inspecteer alle wasbare onderdelen visueel en vervang ze als ze beschadigd zijn. 3. Controleer of het apparaat is ingeschakeld. - Druk de kolf stevig tegen uw borst.
Stop met kolven	• De kolf stopt het kolven automatisch na 30 minuten. • Druk kort op de Aan / Uit / Pauze-knop om de kolf te pauzeren; als u opnieuw drukt, zal de kolf weer in werking treden.
De kolf stopt niet met kolven	• Druk op de Aan / Uit / Pauze-knop • Als het probleem aanhoudt, kunt u de afdichting doorbreken door een vinger tussen de borst en de flens te steken. Druk vervolgens op de Aan / Uit / Pauze-knop om de kolf uit te schakelen.
Kolf of oplader wordt nat (ondergedompeld in water).	• Droog de kolf onmiddellijk. Zet de kolf rechtop met de oplaadpoort omlaag en de zuigkrachtknoppen omhoog, en laat hem een nacht aan de lucht drogen. Gebruik de kolf of oplader niet binnen 24 uur. • Neem contact op met de klantendienst.
De kolf laadt niet op.	• De USB type-C-kabel met standaard oplader (niet meegeleverd) moet volledig in de oplaadpoort van de kolf zijn gestoken.

Opmerking: Als bij de bovenstaande methoden het probleem nog steeds niet is opgelost, kunt u contact opnemen met de fabrikant; zie de laatste pagina voor contactgegevens.

12. Verwijdering



Gooi dit product aan het einde van de gebruikscyclus niet bij het normale huisvuil, maar breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektronische apparatuur en batterijen.

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kan mogelijk schadelijke gevolgen hebben voor het milieu. Onjuiste verwijdering kan leiden tot de ophoping van schadelijke stoffen in de lucht, het water en de bodem, wat schadelijk is voor de menselijke gezondheid. U bent verplicht om het apparaat op de juiste manier weg te gooien. Raadpleeg uw gemeente voor informatie over de verwijdering van het product.

13. Garantie

Neem contact op met de fabrikant in geval van een garantieclaim. De contactgegevens vindt u op de laatste pagina van deze gebruiksaanwijzing. Als u het apparaat moet opsturen, dient u een kopie van uw aankoopbewijs bij te voegen met een duidelijke beschrijving van het defect.

De garantievoorwaarden zijn als volgt:

1. De garantieperiode voor het apparaat is één jaar vanaf de aankoopdatum. In geval van een garantieclaim moet de aankoopdatum worden aangetoond met de kassabon of factuur.
2. Reparaties onder garantie verlengen de garantieperiode voor het apparaat of voor de vervangende onderdelen niet.
3. De volgende gevallen zijn uitgesloten van de garantie
 - Alle schade die is ontstaan door onjuiste behandeling, bijvoorbeeld door het niet naleven van de gebruiksinstructies.
 - Alle schade die is ontstaan als gevolg van reparaties of het demonteren van het product door de klant of onbevoegde derden.
 - Schade die is ontstaan tijdens het transport van de fabrikant naar de consument of tijdens het transport naar het servicecentrum.
 - Accessoires die onderhevig zijn aan normale slijtage.
 - Apparaatbeschadiging als gevolg van het demonteren van apparaten door onbevoegden.
 - Aansprakelijkheid voor directe of indirecte gevolgschade veroorzaakt door het apparaat is uitgesloten, zelfs als de schade aan het apparaat wordt geaccepteerd als garantieclaim.

14. . Verklaring voor reizen of internationaal gebruik

Het wordt sterk aanbevolen het apparaat niet tijdens het reizen of in het vliegtuig te gebruiken omdat de prestaties van de Momcozy draagbare borstkolf kunnen worden beïnvloed door de externe omgeving, vanwege de onzekerheid en instabiliteit van het reizen.

De Momcozy draagbare borstkolf kan internationaal worden gebruikt, maar hij moet worden gebruikt en bewaard in de omgeving die wordt

gespecificeerd in deze gebruiksaanwijzing. Let erop dat de voedingsadapter een ingangsvermogen heeft van AC 100~240V 50/60 Hz en een uitgangsvermogen van DC 5V 1A. Ingeval van een omvormer, dient u deze om te zetten naar de juiste spanning van het land van bestemming. Om ervoor te zorgen dat de goede werking van de Momcozy draagbare borstkolf niet wordt beïnvloed tijdens het dragen, dient u voor gebruik de volgende artikelen te controleren op de goede werking ervan:

- Controleer de Momcozy draagbare borstkolf om ervoor te zorgen dat hij vrij is van schade. Controleer voor elk gebruik de status van uw Momcozy draagbare borstkolf zodat het hulpmiddel goed werkt. Bij abnormale werking dient u het gebruik te stoppen.

15. Informatie van de fabrikant



Manufacturer: Shenzhen Root Innovation Technology Co., Ltd.
Adres: #2-201, 2e verdieping, Hasee Computergebouw, No.2 Beier Rd, Bantian Street, Longgang, Shenzhen, Guangdong, China, 518129



E-mail: support@momcozy.com

Neem contact met ons op als u hulp nodig hebt bij het instellen, gebruiken of onderhouden van het apparaat of als u onverwachte bediening of gebeurtenissen wilt melden.

Gemaakt in China

16. Belangrijke veiligheidsinformatie

- Dit hulpmiddel kan worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen;

- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen;
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht;

- Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch breken of snijden van een batterij, kan leiden tot een explosie;

- Als een batterij wordt achtergelaten in een omgeving met extreem hoge temperaturen, kan dit een explosie of lekkage van brandbare vloeistoffen of gas tot gevolg hebben;

- Als een batterij aan een extreem lage luchtdruk wordt blootgesteld, kan dit een explosie of lekkage van brandbare vloeistoffen of gas tot gevolg hebben.