



Empulse®

E|m90

ELEGANCKIE, STYLÓWE WSPOMAGANIE
DLA TWOJEGO WÓZKA MANUALNEGO

– BEZ ZBĘDNEGO OBCIĄŻENIA.

To jest wyrób medyczny. Używaj go
zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

TWÓJ WÓZEK + WSPOMAGANIE. BEZ KOMPROMISÓW

Urządzenie wspomagające **Empulse M90** zmniejsza obciążenie związane z manualnym napędzaniem wózka, pomagając zaoszczędzić energię na to, co najważniejsze.

M90 posiada innowacyjny **podwójny kontroler**, oferujący **dwa intuicyjne tryby jazdy** w jednym urządzeniu. Przełącz się na sterowanie joystickiem, aby prowadzić wózek jak elektryczny, lub pozostań przy kontrolerze prędkości ze sterowaniem za pomocą obręczy.

Jako **najlżejszy** w swojej klasie, M90 dodaje elegancji, stylowy napęd bez obciążaania użytkownika.



Zeskanuj kod QR za pomocą aparatu telefonu, aby obejrzeć wideo.



LEKKI

Najlżejsze... zdecydowanie!

Kompaktowy i lekki, cały pakiet waży zaledwie 12,2 kg - wszystko w zestawie! Każde koło ze zintegrowanym akumulatorem waży zaledwie 5,9 kg, dzięki czemu transport jest łatwy i wydajny. Minimalizuje to wagę wózka, zachowując jego zwrotność i łatwość użytkowania w codziennych czynnościach.



PODWÓJNY KONTROLER

Natychmiastowe przełączanie między trybami jazdy

Dzięki inteligentnemu podwójnemu kontrolerowi możesz z łatwością przełączać się między trybem jazdy z **joystickiem** a trybem z **kontrolerem prędkości i sterowaniem obręczami**, używając przycisku trybu/profilu – dostosowując się do swojego poziomu energii, otoczenia i preferencji – bez potrzeby zmiany sprzętu.

Łatwo zdejmij i umieść bezprzewodowy kontroler tam, gdzie jest to najwygodniejsze.



TRYB JAZDY (Metoda sterowania)	JOYSTICK 	KONTROLER PRĘDKOŚCI ZE STEROWANIEM OBRĘCZAMI 
Start/Stop	Popchnij joystick do przodu, aby ruszyć. Puść joystick , aby się zatrzymać. Obręcze nie wpływają na prędkość.	Dotknij kontrolera prędkości , aby ruszyć. Naciśnij kontroler w dół lub użyj obręczy , aby stopniowo się zatrzymać.
Kontrola prędkości	Popchnij joystick do przodu/do tyłu, aby proporcjonalnie przyspieszyć lub zwolnić.	Dotknij kontrolera prędkości , aby stopniowo zwiększać lub zmniejszać prędkość – do poziomu 5 w obu profilach .
Sterowanie	Przesuń joystick w wybranym kierunku, aby skręcać.	Steruj ręcznie , korzystając z obręczy.
Tempomat	Naciśnij joystick w dół przy wybranej prędkości, aby aktywować. Kieruj za pomocą joysticka. Zatrzymaj się, poruszając joystickiem lub naciskając.	Dotknij kontrolera prędkości , aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom prędkości. Steruj ręcznie za pomocą obręczy. Zatrzymaj się, naciskając kontroler prędkości w dół , stukając w tył aż do poziomu zero lub chwytając i przytrzymując obręcze.
Wspomaganie ręczne	-	Subtelne wsparcie, które uruchamia się po zatrzymaniu z użyciem obręczy , umożliwiając zmianę pozycji.
Profil jazdy	Wybierz za pomocą aplikacji lub podwójnego kontrolera (wewnątrz lub na zewnątrz).	Wybierz za pomocą aplikacji lub podwójnego kontrolera (wewnątrz lub na zewnątrz).
Ustawienia jazdy	Wybierz zakres prędkości (Podstawowy / Standardowy / Maksymalny) za pomocą aplikacji .	Wybierz zakres prędkości (Podstawowy / Standardowy / Maksymalny) za pomocą aplikacji .

Niektóre funkcje mogą działać inaczej w zależności od wybranego trybu jazdy: joysticka lub kontrolera prędkości ze sterowaniem obręczami. Zalecamy, aby użytkownicy poświęcili chwilę na zapoznanie się z działaniem funkcji w wybranym trybie, co zapewni płynną i pewną jazdę.



Za pomocą przycisku Tryb/Profil kontrolujesz zarówno Tryb jazdy, jak i Profile jazdy, aby zoptymalizować działanie M90 zgodnie z Twoimi preferencjami. Wskaźnik Trybu/Profilu pokazuje wybrany Tryb lub Profil.

Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć sposób sterowania wózkiem (Tryb jazdy):

- Tryb joysticka (Białe światło LED)
- Kontroler prędkości z kierowaniem obręczami (Niebieskie światło LED)

Dotknij, aby przełączyć się między profilami jazdy: Wewnątrz i Na zewnątrz:

- Wewnątrz (stałe światło LED) – do ostrzejszych zakrętów i płynnej nawigacji wewnątrz pomieszczeń
- Na zewnątrz (migające światło LED) – dla responsywnej jazdy na różnorodnym terenie

Pełna integracja z Twoim wózkiem i stylem życia

W pełni zintegrowana konstrukcja piasty zapewnia płynne wspomaganie napędu, zachowując elegancki i kompaktowy wygląd wózka – bez dodatkowych elementów czy wystających przewodów.

Ładuj poza wózkiem, zostaw M90 na miejscu

Bez problemu wymieniaj lub zastępuj baterie, by cieszyć się nieprzerwaną mobilnością. Ładuj je zarówno w urządzeniu, jak i poza nim, a dodatkowa bateria pozwoli Ci zwiększyć zasięg – idealne rozwiązanie dla osób aktywnych i zawsze w ruchu.





Po prostu obróć piastę M90, aby włączyć wspomaganie elektryczne lub przełącz na tryb swobodny, umożliwiający manualną jazdę bez oporu.

Styl jazdy dopasowany do Ciebie >

Wybierz **swoje ulubione opony i obręcze**:
Potrzebujesz obręczy dostosowanych do ograniczonej zręczności lub siły chwytu? Mamy to, czego potrzebujesz. Szukasz opon, które sprawdzą się zarówno na gładkich podłogach wewnątrz, jak i na nierównym terenie na zewnątrz? Wybór należy do Ciebie..



APLIKACJA M90



Mode



All-Way



Outdoor

Profile

Base

Standard

Max

Jeźdź wszędzie, bez wysiłku.

Szybko przełączaj się między **trybami jazdy** i **profilami jazdy**, aby płynnie poruszać się w każdym środowisku i znaleźć idealne połączenie mocy i efektywności.

Dopasuj jazdę do siebie.

Wybierz tryb jazdy: Podstawowy, Standardowy lub Maksymalny, aby idealnie dostosować je do swoich potrzeb i otoczenia.

Wykorzystaj potencjał swojego M90 od pierwszego dnia. Podczas konfiguracji użyj aplikacji M90, aby zoptymalizować działanie wózka.

Wybierz tryby jazdy i profile jazdy dopasowane do otoczenia – wewnątrz lub na zewnątrz – z gotowymi ustawieniami prędkości, momentu obrotowego i nachylenia.

Kompatybilna z Android™ i Apple® iOS.



DYNAMICZNA WYDAJNOŚĆ

Bezpiecznie, łatwo i inteligentnie

Tempomat oraz kontrola prędkości podczas zjazdu sprawiają, że jazda z M90 jest bezpieczna, prosta i intuicyjna. Elementy umieszczone centralnie w piaście zapewniają lepszą zwrotność i wyższy komfort jazdy.

Zasięg do 15 km

Zasilany lekką baterią (0,6 kg), M90 oferuje zasięg do 15 km* – dzięki czemu możesz podróżować bez obaw, bez konieczności ładowania między trasami.

*Zasięg zależy od rodzaju nawierzchni, wagi użytkownika, stylu jazdy, temperatury oraz ukształtowania terenu.



ŁATWY TRANSPORT

Bezproblemowe podróżowanie – zawsze i wszędzie

Zaprojektowane z myślą o łatwym transporcie. Koła M90 wyposażone są w standardową oś z szybkozłączką i ważą zaledwie 5,9 kg – bez problemu zmieszczą się w bagażniku nawet małego samochodu. Dzięki baterii z certyfikatem IATA, M90 to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących wygodnego sposobu podróżowania zarówno na krótkich, jak i długich dystansach.

* Poszczególne linie lotnicze mają różne wymagania dotyczące przewozu produktów z bateriami litowo-jonowymi. Przed zaplanowaniem podróży lotniczej z wózkiem należy skontaktować się z przewoźnikiem i upewnić się, że akceptuje on pojazdy zasilane bateriami zgodnie z klasyfikacją ONZ: UN3171. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi.

Wytrzymała, wysokiej jakości torba podróżna została zaprojektowana tak, aby bezpiecznie pomieścić koła wraz z bateriami, utrzymując wszystko w porządku i w wygodnej, łatwej do przenoszenia formie.

Torba podróżna może nie być dostępna we wszystkich regionach.



DANE TECHNICZNE

Kod HCPCS	E0986
Waga użytkownika	100 kg
Rozmiar tylnych kół wózka	540 mm (24")
Zasięg baterii ¹	15 km
Maks. nachylenie terenu	6°
Całkowita waga urządzenia	12.2 kg
Każde koło (z baterią)	5.9 kg
Każde koło (bez baterii)	5.3 kg
Waga baterii	0.6 kg
Kompatybilność z ramą	Ramy składane Ramy sztywne
Maks. prędkość	6 km/h
Elektronika	Bluetooth / Wireless
Baterie Dopuszczone do transportu lotniczego ²	Litowo-jonowe (<100 Wh – granica klasyfikacji jako materiały niebezpieczne)
Silniki	150 W / 24 V

1. Zasięg zależy od rodzaju nawierzchni, wagi użytkownika, stylu jazdy, temperatury oraz ukształtowania terenu.

2. Zawsze sprawdzaj aktualne przepisy u swojego przewoźnika lotniczego.

⚠ OSTRZEŻENIE

Korzystanie z urządzenia wspomagającego napęd może zmienić środek ciężkości lub sposób poruszania się wózka. Aby zmniejszyć ryzyko przewrócenia się lub upadku, skonsultuj się z pracownikiem służby zdrowia w celu odpowiedniego skonfigurowania wózka, w tym zastosowania kółek przeciwwywrótnych oraz innych niezbędnych regulacji.

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.


Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel.: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
E-Mail: pl@sunrisemedical.pl



03.2025



Teraz, gdy poznałeś wszystkie zalety Empulse M90, umów się na bezpłatną prezentację i przekonaj się o tym osobiście!

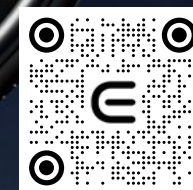

M90 strona internetowa



M90 formularz zamówienia

Aby uzyskać więcej informacji na temat pełnej specyfikacji, dostępnych opcji i akcesoriów, zapoznaj się z formularzem zamówienia. Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z firmą Sunrise Medical.



Jeśli jesteś osobą niedowidzącą, ten dokument jest dostępny w formacie PDF na stronie www.Sunrise-Medical.pl.



www.Sunrise-Medical.pl

Producent:

Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/HD, Germany

Empulse

