

momCOZY

Bærbar Brystpumpe

Mobile Style™ Brukerhåndbok



Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker enheten, og oppbevar håndboken for fremtidig referanse.

→ NORSK

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. Introduksjon av produktet	01
2. Instruksjon om advarsler og forholdsregler	01
3. Kontraindikasjoner	02
4. Informasjon om sikkerhet	02
5. Produktbeskrivelse	05
6. Brukerinstrukser	28
7. Oppbevaringsforhold	29
8. Spesifikasjon	29
9. Vedlikehold og erstatningsdeler	30
10. Samsvarserklæring	31
11. Feilsøk	31
12. Avhending	33
13. Garanti	33
14. Reise og internasjonal brukererklæring	34
15. Produsentinformasjon	34

1. Introduksjon av produktet

Momcozy wearable brystpumpe er beregnet på å brukes av ammende kvinner for å drive ut og samle melk fra brystene. Momcozy wearable brystpumpe skaper et vakuum rundt brystvorten for å drive ut brystmelk. Melken samles i en melkeoppsamler.

Apparatet har stimuleringsmodus, utdrivingsmodus og miksmodus. I stimuleringsmodus starter brystpumpen med et raskt og kort sugemønster for å få melken til å renne. I utdrivingsmodus begynner pumpen med et rolig sugemønster som suger dypere og roligere for å drive ut melken. I miksmodus starter brystpumpen med et raskt og kort sugemønster for så å gå over i rolig og langt mønster. For å hindre at melk flyter inn i vakuumsystemet, inkluderer melkeoppsamlingssettet en silikonmembran som fysisk skiller banen som er i kontakt med melken fra vakuumsystemet. Apparatet er beregnet til en enkelt bruker.

2. Instruksjon om advarsler og forholdsregler

Advarselstegnene og de grafiske symbolene i manualen, er beregnet til å gjøre deg i stand til å bruke produktet på en sikker og korrekt måte, og for å hindre skade på deg og andre.

Advarselsmarkeringer og grafiske symboler er beskrevet som følger:

Symboler for advarsler/forholdsregler	
 Advarsel	En advarsel varsler leseren om en situasjon som kan resultere i død eller alvorlig skade hvis den ikke blir unngått. Den kan også beskrive potensielt alvorlige bivirkninger og sikkerhetsrisikoer.
 Forholdsregler	Indikerer et farevarsel som varsler leseren om en potensielt farlig situasjon som kan resultere i mindre alvorlige eller moderate skader på brukeren eller pasienten om den ikke blir unngått, eller skade utstyret eller annen eiendom. Det kan også brukes til å varsle mot usikker bruk. Dette inkluderer ekstra varsomhet er nødvendig for sikker og effektiv bruk av apparatet, og varsomhet for å unngå skade på apparatet som kan oppstå som et resultat av bruk eller misbruk.
Kontraindikasjoner	Kontraindikasjoner er tilstander der apparatet ikke bør brukes fordi risikoen ved bruk er høyere enn de potensielle fordelene. Det kan være personer som ikke bør bruke apparatet på grunn av helsetilstand.
Merknader	Indikerer behov for tilsyn. Bruk uten tilsyn kan føre til ukorrekt bruk av produktet eller skade på apparatet.

Symbolbeskrivelse

	CE LOGO		UKCA LOGO
	Hold tørr		Søylegrense 5 lag
 MEHRWEG	Resirkulering LOGO		Se i instruksjonsmanualen.
	Partikode		Produkter med matkontakt
	FCC LOGO		Serienummer
	Distribusjonspakker skal ikke utsettes for sollys		
IP22	Første nummer 2: Beskytt mot faste ukjente objekter med 12,5 mm i diameter og større. Andre nummer 2: Beskytt mot vertikaltfallende vanndråper når kabinettet tipper opp til 15°		
	Avhending i samsvar med direktiv 2012/19/EU (WEEE)		
	Dette apparatet har ikke blitt testet for bruk i MR-miljø, og bør ikke brukes når det er eksponert for MR-miljø mens pasienter bruker apparatet. Hold utenfor MRI-skannerrom.		
	UK Autorisert representant		Fransk ERP-innpakning
	EU-autorisert representativ		

3. Informasjon om sikkerhet

Når en bruker elektriske produkter skal følgende grunnleggende sikkerhetsinformasjon alltid opprettholdes. Dette gjelder særlig når barn er tilstede.

3.1 Advarsel

- 1) Ikke bruk dette apparatet hvis du har pacemaker, implanterbar hjertestarter eller annen implantert metallisk eller elektronisk apparat. Slik bruk kan føre til elektriske forstyrrelser eller død.
- 2) Denne brystpumpen er ikke beregnet til å brukes av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller som mangler erfaring eller kunnskap. Slike personer kan kun bruke brystpumpen hvis de får veiledning eller har fått tilstrekkelig instruksjon om bruk av apparatet av en person med ansvar for deres sikkerhet.
- 3) Fare: For å redusere risikoen for skade/død som følge av elektrisk støt:
 - Trekk alltid ut kontakten fra elektriske apparater umiddelbart etter lading.
 - Ikke bruk mens du bader, dusjer, kjører bil eller svømmer.
 - Ikke plukk opp elektriske apparater som har falt i vann. Trekk adapteren ut fra stikkkontakten umiddelbart.
- 4) Momcozy wearable brystpumpe er en personlig pleieartikkel, og bør av hygieniske grunner ikke deles mellom mødre eller selges fra en mor til en annen. Slike handlingene gjør garantien ugyldig.
- 5) Hvis du er infisert med hepatitt B, hepatitt C eller HIV (humant immunsviktivirus), vil pumping av melk med Momcozy wearable brystpumpe ikke fjerne risikoen for å overføre viruset til barnet ditt via brystmelken.
- 6) Nøye tilsyn er nødvendig når produktet brukes nær barn eller funksjonshemmede. Ikke la barn eller kjæledyr leke med motorenhet, pakningsmateriell eller tilbehør.
- 7) Bruk produktet kun slik det er tiltenkt og beskrevet i denne manualen.
- 8) Ikke bruk tilbehør eller komponenter fra andre melkekolleksjoner enn dem som er anbefalt av produsenten.
- 9) Sjekk strømadapteren før lading. Bruk aldri en skadet strømadapter.
- 10) La aldri produktet være uten tilsyn mens det lader.
- 11) Hold produktet og alt tilbehør borte fra oppvarmede overflater.
- 12) Bruk det aldri mens du sover eller er trøtt.
- 13) Ikke bruk i rom hvor aerosolsprayprodukter brukes, eller hvor oksygen blir administrert.
- 14) Ikke bruk apparatet rundt eksplosiver eller brennbart materiale, i MRI-miljø, i trykkammer, nært ildsted eller radiator.
- 15) Unngå kvelning ved bruk av ladekabel.
- 16) Brukere har ikke lov å reparere produktet. Hvis du gjør det, blir garantien ugyldig. Send til produsenten eller en franchise-distributør for reparasjon.

- 17) Skru alltid av brystpumpen før du fjerner pumpedelen fra brystet, for å få vakuemet til å slippe.
- 18) Elektriske brystpumper som er laget for enkeltbrukere, bør aldri leies ut eller deles.
- 19) Aldri bruk brystpumpen mens du er gravid, siden pumping kan sette i gang fødsel.
- 20) Den høyeste temperaturen på delen i bruk, kan nå maks 43,9 °C. For høy temperatur kan føre til brannskader. Forsikre deg om at huden på brystet ikke er skadet før bruk. Skru av apparatet hvis du føler deg veldig varm. For å unngå lave temperaturer eller brannskade, bør sammenhengende brukstid være maksimum 30 minutter hver gang. Intervallen mellom bruk må være minst fem minutter så apparatet får kjøle seg ned.
- 21) For produktets funksjonstid (dvs. levetid)**
Apparatet har ikke levetid på en hylle. Funksjonstiden på produktet er 500 timer. Den forventede operasjonstiden på de vaskbare delene er én til tre måneder. Sjekk at produktet kan fungere som normalt før bruk. Bruk lengre enn funksjonstiden kan føre til dårligere produktfunksjon. Som for eksempel at produktet ikke kan kontrollere vakuemet skikkelig. Overdrevet vakkum kan føre til skader.
- 22) Dette apparatet kan brukes av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller personer med mangel på erfaring og kunnskap, hvis de har fått veiledning eller instruksjon om bruken av apparatet på en sikker måte og forstår hvilke farer som kan oppstå;
- 23) Barn skal ikke leke med apparatet;
- 24) Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn;
- 25) Avhending av batteri i bål eller varm ovn, mekanisk knusing eller oppkutting av batteri kan føre til eksplosjon;
- 26) Å la batteriet ligge i et miljø med ekstremt høye temperaturer kan resultere i eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass;
- 27) Et batteri utsatt for ekstremt lavt trykk kan føre til eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.

3.2 Forholdsregler

- Ikke plasser eller oppbevar hvor produktet kan falle eller bli trukket opp i et badekar, en vask eller et badebasseng.
- Ikke plasser eller slipp produktet i vann eller annen væske.
- Ikke senk i noen form for flytende væske uansett grunn, eller utsett enheten for ekstreme sjokk, slik som å slippe pumpen i bakken.
- Ikke pump i mer enn fem minutt om gangen hvis du ikke klarer å drive melken ut. Prøv igjen senere på dagen.
- Hvis du føler ubehag, kan du bryte vakuemet ved å sette en finger mellom brystet og brysttrakten.
- Avslutt bruken hvis det oppstår irritasjon eller ubehag og søk hjelp hos helsepersonell.
- Slutt å bruke strømadapteren umiddelbart hvis strømadapterens kabinett eller ledninger løsner, deler seg eller blir frynsete. Kontakt produsenten av apparatet. Slutt å bruke apparatet umiddelbart hvis du observerer røyk eller brann fra pumpeenheten eller strømadapteren.

Erklæring: Slutt å pumpe umiddelbart hvis du føler høy varme fra brystpumpen mens du pumper. Fjern pumpen.

Merknader:

Unngå direkte sollys på hovedenheten.

4. Produktbeskrivelse

Produktet består hovedsakelig av hovedenhet og melkeoppsamlingssettet osv.

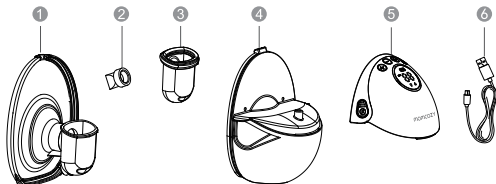


Fig.1 beskrivelse av enheten

Beskrivelse av brystpumpeenheten		
NR.	Vare	Beskrivelse
①	24 mm Brysttrakt	Melkeoppsamlingssettet består av alle disse komponentene
②	Ventil	
③	Membran	
④	Melkeoppsamler (180 ml)	
⑤	Hovedenhet	Pumpemotor
⑥	USB Type-C kabel	Inngangssiden har USB 2.0-kontakt, utgangssiden er Type-C-kontakt

Annet tilbehør innbefatter:

17mm brysttraktinnsats

19mm brysttraktinnsats

21mm brysttraktinnsats

Hurtigstartveiledning

Brysttraktdeksel

Størrelseslinjal for brysttrakt

Oppbevaringsbag

Bruksanvisning

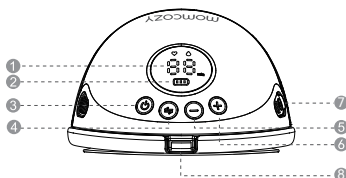


Fig.2 kontrollpanel

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| ① Løpetid/ visning av sugenivå | ② Batterivisning |
| ③ På / Av / Pause | ④ Valg av modus |
| ⑤ Minske | ⑥ Øke |
| ⑦ Ladeport | ⑧ Melkeuttak |

Beskrivelse av kontrollpanel		
Nr.	Knapper og LED	Fuksjoner
1		Trykk kort og hold for å skru på / av, kort trykk for å sette på pause, trykk deretter en hvilken som helst knapp for å fortsette pumpingen.
2		Valg av modus
3		Minske sugestyrken
4		Øke sugestyrken
5		Stimuleringsmodus: I dette moduset starter brystpumpen med et raskt og kort sugemønster for å få melken til å renne.
6		Utdrivingsmodus: Brystpumpen begynner med et rolig sugemønster som suger dypere og roligere for å drive ut melken.
7		Miksmodus: I dette moduset starter brystpumpen med et raskt og kort sugemønster for så å gå over i rolig og langt mønster.
8		Sugenivåvisning: Brystpumpen har 9 sugenivå å velge mellom. Tidsvisning: Visning av tid for melkeuttak mellom 00-29 minutter (sekunder vises hvis kortere enn ett minutt)
9		Batterivisning

Indikator for batterinivå		
Lavt batteri: Blinkende	Lades: Ett og ett lys på	Fulladet: Holder seg på solid

Etter at batteriet er utladet og apparatet slår seg av automatisk, kan det ikke fungere igjen og kan bare vise lav batteristatus.

5. Brukerinstrukser

5.1 Batteri lades

Sørg for å lade produktet før det brukes for første gang.

Brystpumpen drives ved hjelp av en internt ladbart lithiumbatteri.

Vårt produkt er pakket med ladekabel (USB2.0/Type-C-linje), men ikke med strømadapter. Du må kjøpe strømadapter selv før du kan lade. Sørg for å kjøpe en strømadapter som passer USB 2.0-kontakten. Sørg også for at inngangseffekten på strømadapteren er AC 100~240V 50/60 Hz og utgangseffekten er DC 5V 1A.

- Når det første batteriindikatorlyset blinker, betyr det at batteriet nærmer seg utladet og at det er 30 minutter igjen av brukstiden.

Sørg for å lade apparatet i tide.

- Etter at apparatet er fulladet kan det brukes i 5-6 økter (rundt 180 minutter) med pumping, 30 minutter per økt.

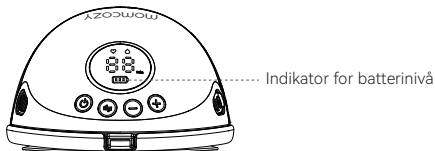


Fig. 3

Lad batteriet som nedenfor:

- Sett inn USB-enden av ladekabelen i USB-kontakten i strømadapteren;
 - Sett inn strømadapterenpluggen i en AC-sokkel;
- Sett inn Type-C-enden av ladekabelen i ladeporten.

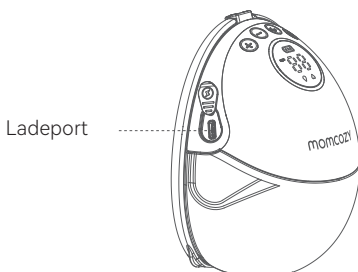


Fig. 4 Plassering av ladeporten

Apparatet bruker ca. 150 minutter på å bli fulladet.

Ladevisning			
Lader med ett batterily: Sekvensen går i kontinuerlig syklus fra venstre til høyre: Lys1 - Lys2 - Lys3	Lader med to batterily: Lys 1 lyser konstant mens det veksler kontinuerlig mellom Lys 2 og Lys 3	Lader med tre batterily: Lys 1 og 2 lyser konstant, mens Lys 3 blinker	Fulladet: alle tre lys lyser konstant
			

Dra ut strømadapteren fra sokkelen, løsne ladekabelen fra strømadapteren og hovedenheten etter at ladingen er fullført.



Advarsel

Brystpumpen kan ikke brukes under lading!

Ladekabelen brukes kun som en kobling mellom strømadapteren og Momcozy wearable brystpumpe-enheten til lading. Ikke koble annet utstyr med ledningen, det kan føre til elektrisk sjokk!

- Slutt å bruke strømadapteren umiddelbart hvis strømadapterens kabinett løsner, deler seg eller blir frynsete. Kontakt produsenten av strømadapteren.
- Slutt å bruke ladekabelen umiddelbart hvis den er skadet, ødelagt eller knekt. Kontakt produsenten og erstatt den med en ny (se siste side i bruksanvisningen for kontaklinformasjon).
- Slutt å bruke apparatet umiddelbart hvis du observerer røyk eller brann fra pumpeenheten eller strømadapteren.



Advarsel:

Hvis du bruker feil type adapter eller kjøper en av dårlig kvalitet, kan det redusere apparatets sikkerhet og kan føre til skade på eiendom og helse. Kjøp den medisinske adapteren som møter IEC 60601-1 og IEC 60601-1-2-standardene på det profesjonelle medisinske markedet. Sørg for at utgangen fra strømadapteren er DC 5V 1A.

Merknader:

- Hvis batteriet har kortere brukstid enn tidligere etter at det er fulladet og du ønsker å erstatte det, ikke prøv å erstatte det ladbare batteriet selv. Kontakt produsenten for å få det erstattet. Å demontere og erstatte batteriet på egen hånd, kan føre til skade på hovedenheten og batteriet.
- Når produktet ikke er i bruk over lang tid, vil batteriet sakte lades ut. Lad apparatet hver tredje måned for å hindre batteriskade på grunn av lav spenning over tid.

5.2 Rengjøring og desinfisering

5.2.1 Generell beskrivelse/vilkår

Å gi brystmelk er noe av det beste du kan gjøre for ditt barns helse og utvikling. Å pumpe ut melken er en måte å sørge for at barnet ditt får brystmelk. Å holde pumpen ren er svært avgjørende. Bakterier vokser raskt i brystmelk og melkerester som fester seg i pumpedelene. Å følge disse stegene kan hindre kontaminasjon og beskytte barnet ditt mot infeksjon. Hvis barnet ditt er født prematurt eller har andre helseutfordringer, kan helsepersonell ha flere anbefalinger for trygg pumping av brystmelk.

1) FØR HVER BRUK

Se over og sett sammen et rent pumpesett.
Rengjør pumpemotoren med desinfiserende servietter.

2) ETTER HVER BRUK

Oppbevar melken sikkert: Bruk lagringsposer for brystmelk eller rene, næringsmiddelgodkjente beholdere for å lagre overflødig brystmelk. Sørg for at beholdere er laget av glass eller plastikk og har tettsittende lokk. Merk dem med dato og tid og sett dem umiddelbart i kjøleskap, fryser eller kjølebag med ispakker.
Rengjør pumpeområdet: Rengjør tallskive, strømbryter og benkeplate med desinfiserende servietter.



3) Deler som trenger å rengjøres og steriliseres

Rengjør og steriliser alle deler som kommer i kontakt med brystet og brystmelken før du bruker brystpumpen for første gang og etter hvert bruk.

- Deler som kommer i kontakt med melk: deler av melkeoppsamlingssettet inkludert brysttrakt, membran, ventil og melkeoppsamler.
- Deler som kun kommer i kontakt med huden på brystet: Brysttrakt.

4) Før rengjøring/desinfisering:

- a. Vask hendene grundig med såpe og vann i minst 20 sekunder.
- b. Demonter delene slik:

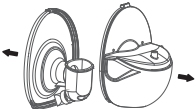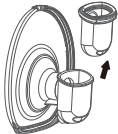 Fig. 5	 Fig. 6
1). Hold de utstikkende delene som du finner på hver side av pumpemotoren, skill pumpemotoren fra melkeoppsamleren.	2). Løsne brysttrakten fra melkeoppsamleren.
 Fig. 7	 Fig. 8
3). Skill ventilen fra brysttrakten.	4). Fjern membranen fra brysttrakten.

Advarsel:

Aldri legg hoveddelen, ladekabel eller adapter (hvis du har kjøpt en adapter) i vann eller oppvaskmaskin. Det forårsaker permanent skade på disse delene.

5.2.2 Rengjøring og sterilisering av deler som kommer i kontakt med melken

Steg 1: Rengjøring

Rengjør apparatet manuelt! Det er ikke verifisert at det er sikkert å bruke oppvaskmaskin til rengjøring og desinfeksjon av produktet.

Advarsel

Ikke bruk antibakteriell eller rengjøringsmidler med slipende effekt til å vaske pumpedelene. Dette kan forårsake skade.

1) Finn frem disse tingene:

- Såpe og varmt vann
- Vann i drikke kvalitet
- Rent vaskefat som kun brukes til artikler for mating av spedbarn
- Ren børste som kun brukes til artikler for mating av spedbarn
- Ubrukt oppvaskhåndkle eller papirhåndkle

2) Skyll: Skyll delene i melkeoppsamlersettet og eventuelt andre artikler for mating ved å holde dem under rennende vann for å fjerne gjenværende melk eller skitt. Vannet kan være varmt eller kaldt, alt etter hva du foretrekker.



Fig. 9

3) Vask melkeoppsamlerdelene:

- Plasser delene fra melkeoppsamlersettet i en ren beholder som kun brukes til artikler for mating av spedbarnet. Ikke vask direkte i vasken siden den kan ha bakterier som kan kontaminere disse artiklene.
- Bløtlegg delene fra melkeoppsamlingssettet i varmt såpevann som holder 40–60 °C (104–140 °F) i 3–5 minutter.

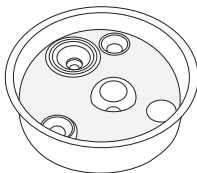


Fig. 10

- Bruk en ren børste som kun brukes til artikler for mating av spedbarn til å skrubbe delene med.

4) Skyll en gang til: Skyll ved å holde delene under rennende vann eller ved å bløtlegge dem i friskt vann i en egen beholder som kun brukes til rengjøring av artikler for mating av spedbarnet. Hvis der fremdeles er skitt igjen, gjenta steg 3 og skyll igjen helt til der ikke finnes synlig skitt.

5) Lufttørk grundig: Plasser delene fra melkeoppsamlersettet, vaskebeholderen og flaskeborste på et rent, ubrukt oppvaskhåndkle eller papirhåndkle i et område beskyttet fra skitt og støv. Ikke bruk oppvaskhåndkle til å gni eller klappe på delene fordi dette kan overføre bakterier til delene!

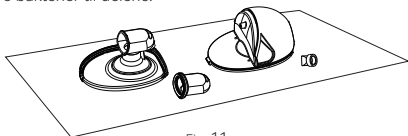


Fig. 11

6) Rengjør vaskebeholder og flaskeborste: Skyll vaskebeholderen og kosten nøye og la dem lufttørke etter hvert bruk. Vask dem annenhver dag for hånd med varmt såpevann. Vask beholder og flaskeborste etter hvert bruk hvis barnet ditt er under tre måneder, er prematurt eller har nedsatt immunsystem på grunn av sykdom (som HIV) eller behandling (som cellegiftbehandling mot kreft).

Etter rengjøring:

Sterilisere melkeoppsamlingssettet, vaskebeholderen og flaskeborste minst én gang for dagen etter vask for å være sikker på at bakteriene er fjernet. Delene kan desinfiseres ved hjelp av kokende vann med steriliseringsinnstilling. Desinfisering er spesielt viktig hvis barnet ditt er under tre måneder, er prematurt, eller har svekket immunsystem på grunn av sykdom eller medisinsk behandling.

Se steg 2 for desinfisering av delene som er i kontakt med melk.

Steg 2: Desinfisering

Advarsel: Ikke sterilisere pumpedeler i mikrobølgeovn eller UV-sterilisator. Høye temperaturer (> 110 °C) vil forkorte brukstiden og forårsake sikkerhetsrisiko.

Før desinfisering må du sørge for å ha rengjort melkeoppsamlingssettet, flaskeborste og vaskebeholder ved hjelp av ovennevnte metoder. Sterilisere alle deler som er i kontakt med melk (selv flaskeborste og vaskebeholder!) ved hjelp av følgende metoder.

1) Finn frem disse tingene:

- En gryte
- Vann i drikke kvalitet
- Ren klype



Advarsel:

Unngå at flaske eller andre deler berører sidene i gryta under sterilisering med kokende vann. Dette kan føre til deformasjon av produktet eller skade.

2) Plasser det demonterte melkeoppsamlingssettet i gryta og fyll med nok vann til dekke komponentene som skal steriliseres. La vannet koke i **tre minutter** og sørg for at delene ikke berører sidene i gryta.

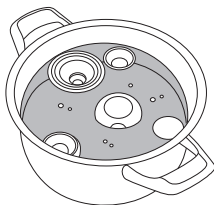


Fig.12

3) Plukk opp delene med en ren klype.

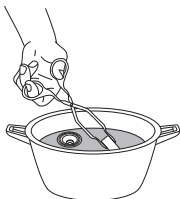


Fig.13

4) Lufttørk grundig.

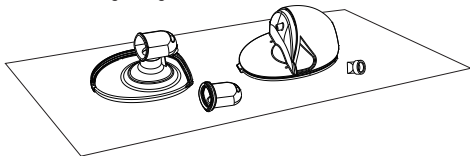


Fig.14

Steg 3: Oppbevar sikkert

Oppbevar de tørre delene sikkert til neste gang de trengs. Sørg for at de rene pumpedelene, flaskebørster og vaskebeholder er skikkelig lufttørket før oppbevaring. Delene må være helt tørre for å hindre bakterier og at mugg får utvikle seg. Oppbevar delene i et rent, beskyttet område for å unngå kontaminering.

1. Vask hendene: Vask hendene nøye med såpe og vann.
2. Sett sammen igjen: Sett sammen de rene, tørre pumpedelene.
3. Oppbevar sikkert: Plasser de sammensatte pumpedelene og andre artikler for mating, vaskebeholderen og tør flaskebørste på et rent, beskyttet område, som for eksempel i et lukket kjøkkenskap som kun brukes til å oppbevare rene tallerkener.

5.2.3 Rengjøre / Desinfisere andre deler

Skallet på hovedenheten trenger å bli rengjort og sterilisert før det tas i bruk og etter hver bruk. De andre delene trenger ikke å være i kontakt med kroppen eller melken under pumping, og trenger bare å bli rengjorte når de er skitne.

Rengjør/desinfiser delene i romtemperatur 5 °C – 40 °C som beskrevet under:

Finn frem disse tingene:

- Desinfisering
- Våtservietter med 70 % isopropylalkohol
- Ren, myk klut

Rengjøringsmetode:

1. Vask hendene med desinfeksjonsmiddel før du utfører denne rengjøringsprosedyren.
2. Fjern rester av fremmedlegemer fra hovedenheten og/eller ladekabelen ved hjelp av en ren, myk klut.
3. Bruk en våtserviett med 70 % isopropylalkohol for å rense delene til ingen synlig kontaminering er igjen.

4. Tørk apparatet ved å plassere det i romtemperatur i 10 minutter for at gjenværende rengjøringsoppløsning på produktet skal fordampe.

Desinfiseringsmetode:

Rengjør skallet på hovedenheten med ovennevnte metode før desinfisering.

1. Desinfiser skallet på hovedenheten med en myk klut fuktet med 70 % isopropylalkohol i tre minutter.
2. Tørk ved å plassere hovedenheten i romtemperatur i 10 minutter for at gjenværende rengjøringsoppløsning på produktet skal fordampe.

5.3 Brukerveiledning

5.3.1 Forberedelser før bruk



Advarsel:

1. Vask hendene med såpe og vann, inspiser og sett sammen rent pumpesett.
2. Varighet av pumpeøkt:
 Dette produktet er drevet av et ladbart lithiumbatteri. Når det er fulladet kan det brukes i 5-6 økter (rundt 180 minutter) med pumping, 30 minntter per økt. En typisk pumpeøkt varer i rundt 10-15 minutter per bryst, men du bør bare pumpe så lenge det er komfortabelt og produktivt.

1. Velg størrelse på brysttrakt

Momcozy wearable brystpumpe kommer med 24 mm brysttrakt og 17/19/21 mm traktinnsett. Hvis den medfølgende brysttrakten og traktinnsettet ikke er i riktig størrelse, kan du kjøpe brysttrakter og traktinnsett i ulike størrelser på Amazon, eller på Momcozys offisielle nettside. Skriv inn "mumcozy" i søkefeltet og finn den traktinnsatsen som passer deg.

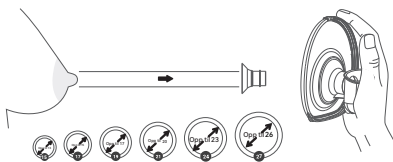


Fig.15 velg riktig størrelse

2. Stimuler brystvorten

- Stimuler brystvorten til full størrelse (ikke hopp over dette steget!).
- Plasser brystvorten i det minste hullet den passer komfortabelt i uten å presse.
- Velg hullet som passer komfortabelt basen på brystvorten din.
- Finn målet ditt basert på størrelsestabellen.

3. Test passformen til brysttrakten

- For å finne brysttrakt i egnet størrelse må du sørge for å plassere trakten riktig på brystet.
- Press brysttrakten mot brystet til der ikke er mellomrom. Sørg for at brystvorten er i midten av brysttrakten.

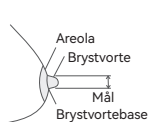


Fig.16



Fig.17

For liten

For liten: Hvis brystvorten gnir mot innerveggen i brysttrakten, er trakten for liten for deg.

Passer bra

Passende form: Denne brysttrakten passer til deg hvis brystvorten beveger seg problemfritt uten å gnis mot eller berøre innerveggen av brysttrakten og nesten ingenting av areola blir sugt inn under pumping.

For stor

For stor: Hvis en stor del av areola blir sugt inn, er brysttrakten for stor for deg.

4. Finn den rette BH-en



Fig.18

- ① Laget av strechmateriale ② Uten bøyle eller vattering
- ③ Har en åpning ④ Full dekning

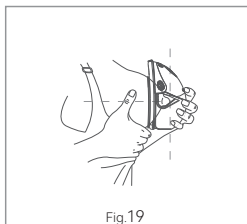


Fig.19

INGEN MELLOMROM

Når du legger pumpen i BH-en, skal silikonekontrakten på denne pumpen være tett presset mot huden din uten mellomrom.

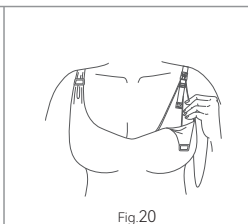


Fig.20

HVIS DEN FLYTTER PÅ SEG

Hvis pumpen flytter på seg under bruk, må du stramme BH-stroppen for å justere pumpen, eller velge en annen BH.

5. Anbefalt stilling



Advarsel:

Sitt eller stå mens du pumper for å hindre at melken lekker. Denne pumpen skal ikke brukes når du ligger flatt eller sover. Dette er for å sikre at riktig orientering opprettholdes under bruk.

STILLING

Sørg for at pumpen og melkeoppsamleren alltid er i vertikal posisjon. Ellers vil melken renne ut.



Fig.21 riktig stilling

5.3.2 Sette sammen pumpen



Advarsel:

Sør for å ha rengjort og desinfisert de delene av brystpumpen som kommer i kontakt med melk eller bryst.






Advarsel

- Vær forsiktig når du har desinfisert brystpumpedelene ved å koke dem. De kan være veldig varme. For å unngå brannskader må du bare sette sammen brystpumpen når de desinfiserte delene har kjølt seg ned.
- Vask hendene grundig med såpe og vann før du tar på delene til brystpumpen og brystene, for å unngå kontaminering. Unngå å ta på innsiden av melkeoppsamlingssettet.

Merknader:

- Korrekt plassering av brysttrakten, membranen, melkeoppsamleren, ventilen osv. er viktig for at brystpumpen skal skape skikkelig vakuum.
- Før hver bruk bør du se over hver komponent etter sprekker, fliser, rifter, misfarging eller forringelse. Hvis skade på apparatet oppdages, må du slutte å bruke det frem til delene er erstattet.

Vask hendene grundig med såpe og vann og sett sammen pumpen slik:

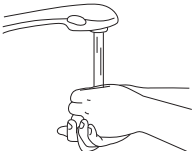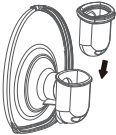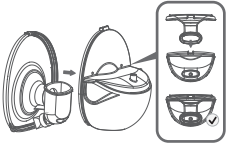 Fig.22	 Fig.23
1. Vask hendene grundig med såpe og vann.	2. Fest membranen på brysttrakten og bruk lett press rundt kanten til membranen tetter godt.
 Fig.24	 Fig.25
3. Dytt forsiktig ventilen inn i brysttrakten. Sørg for at der ikke er mellomrom.	4. Juster brysttrakten med melkeoppsamleren som vist på bildet. Juster det øvre melkeuttaket først og trykk kanten av brysttrakten med håndflaten for å sikre installasjonen.

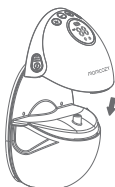


Fig.26

5. Sett sammen pumpemotoren og melkeoppsamleren.

Brystpumpen er nå klar til bruk.

5.3.3 Pumpeinstruksjoner



Advarsel

- Skru alltid av brystpumpen før du fjerner pumpen fra brystet for å oppheve vakuum.
- Ikke pump i mer enn fem minutt om gangen hvis du mislykkes i å drive ut melk. Prøv igjen senere på dagen.
- Hvis prosessen blir svært ukomfortabel og smertefull, må du slutte å bruke pumpen og konsultere helsepersonell.



Advarsel:

- Følg med på melkenivået under pumping for å forsikre deg om at det ikke blir overfylt.

1. Justering

a. Sikre deg om at pumpen sitter godt festet rundt brystet uten mellomrom før du begynner å pumpe (Fig. 27).


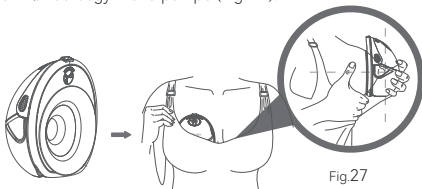


Fig.27


b. For å justere, kan du holde brysttrakten mot brystet så du kan se om brystvorten er sentrert i trakttunnelen. Du må kanskje bøye deg fremover.

c. Når den er justert, se gjennom brysttrakten for å forsikre deg om at brystvorten er sentrert før du begynner å pumpe. Tuppen av brystvorten skal IKKE berøre toppen, sidene eller bunnen av trakttunnelen. Hvis den gjør det, prøv på nytt.

Første perspektiv

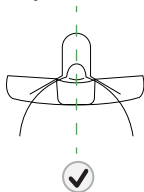

Korrekt justering
Melkeutdrivelse

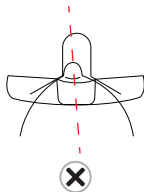

Feil justering
Prøv igjen

Fig.28

Merk:

Korrekt brystvortejustering er nøkkelen til en komfortabel utdrivelse og resultat.

Brystvorten må plasseres korrekt i trakttunnelen før pumping for å unngå ubehag.

Se seksjon 7.3.1 Forberedelser før bruk – Velg størrelse på brysttrakt.

2. Sikre pumpen i BH-en

Sikre at pumpen sitter på plass i Bh-en ved å sørge for at pumpen er presset tett mot brystet. Stam BH-en for å holde pumpen på plass hvis det er nødvendig, og start pumping.

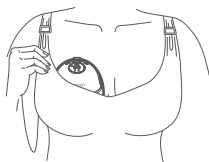


Fig.29

3. Start pumpen

Ikke la pumpen gli på plass i BH-en, følg steg-for-steg instruksjonene.

Koble fra lader før bruk.

A. Skru på pumpen

Konsulter helsepersonell for å få vite hvor lenge du bør pumpe. Momcozypumpen slår seg automatisk av etter 30 minutter med pumping.

Langt trykk på På / Av / Pause-knappen for å skru av pumpen.

Kort trykk på På / Av / Pause-knappen for å sette på pause, press deretter en hvilken som helst knapp for å fortsette pumpingen.

- Når du bruker pumpen for første gang, er stimuleringsmodus standardmodus.
- Standard sugenivå er nivå 1 (nå viser LED sugenivået 1 som nivå 1).

B. Velg modus

Moduser: Stimuleringsmodus og Utdrivesmodus og Miksmodus Når du først begynner å bruke pumpen, er standardinnstillingen sugenivå 1 i stimuleringsmodus.

C. Velg vakuumnivå.

Momcozypumpen har 9 innstillinger for vakuumtrykk for hvert modus. Det gir deg kontroll over hva som føles komfortabelt og hva som virker mest effektivt i alle modusene.

Når du kjenner vakuumtrykke t på brystvorten, kan du bruke Øke/Minske-knappen for å justere vakuumtrykket og finne den foretrukne innstillingen i alle moduser. LED skjermen slår seg av etter 60 sekunder uten aktivitet. Aktiver LED skjermen igjen ved å trykke på hvilken som helst knapp.

Tips: Høyere vakuumtrykk betyr ikke alltid større volum med melk. Å utsette brystvorten din for overdrevet stress kan redusere melkeproduksjonen. Sørg alltid for å pumpe på et komfortabelt nivå. Hvis du ikke føler at det suger, sjekk om pumpen er satt sammen korrekt.

Advarsel:

- * Momcozy-pumpen støtter ikke bruk ved lading. Koble alltid fra lader og lukk ladeluken før bruk.
- * Momcozy-pumpen må ikke brukes mens en ligger flatt, deltar i anstrengende aktiviteter eller utføre aktiviteter med risiko for skade.
- * Å bruke brystpumpen bør ikke gi smerte. Ikke prøv å drive ut melken med en vakuuminstilling som er for høy eller ukomfortabel. Hvis du kjenner overdreven smerte under pumping, stopp pumping, bryt forseglingen rundt brystvorten og avslutt økten.

4. Pause / Start pumpen

For å pause mens du pumper, trykker du kort på På / Av / Pause-knappen. Da vil modusindikatoren blinke. Trykk på hvilken som helst knapp for å fortsette pumpeøkten.

5. Skru av pumpen

Langt trykk på På / Av / Pause-knappen for å skru av pumpen. I tillegg vil pumpen automatisk slå seg av etter 30 minutter med pumping.

Bemerkning: Pause / Start pumpen, valg av modus og vakuumnivå vil ikke tilbakestille pumpingen.

6. Fjern pumpen

Bruk en finger for å bryte forseglingen mellom brysttrakten og brystvevet.

Len deg litt fremover for å fjerne pumpen fra brystet etter pumpeøkten. Hold traktåpningen opp for å hindre at melken renner over.



Fig.30

Vi anbefaler brukerne å stoppe pumpeøkten når melkenivået i melkeoppsamleren når 120 ml for å hindre at det renner over.

7. Helling av melk

Merk: Ikke åpne brysttrakten direkte for å helle ut melken. Det kan føre til at melken kommer inn i hovedenheten og kan resultere i skade!

Skrus av brystpumpen først, fjern hovedenheten og hell brystmelken fra melkeuttaket på toppen av melkeoppsamleren. Etter at du er ferdig med melkeoppsamlingen, heller du melken i andre melkeoppsamlere med lokk eller oppbevaringsposer for melk i tide. Skru lokket godt til på melkeoppsamleren og oppbevar melken.

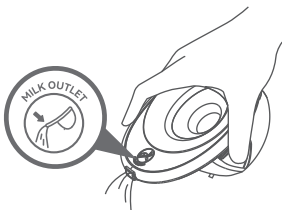


Fig.31



Advarsel

- Melkeoppsamleren som følger med er beregnet for å samle opp melk under pumping. Bruk en annen melkeoppsamler med lokk hvis du trenger å mate barnet eller oppbevare brystmelken.



Advarsel

- Sett melken umiddelbart i kjøleskapet eller fryseboksen, eller oppbevar i en temperatur på 16 °C - 25 °C i 2-4 før du gir barnet ditt mat.

5.4 Lagring av brystmelk

5.4.1 Riktig lagring av brystmelk

Å følge anbefalte lagrings- og tilberedelsesteknikker, kan opprettholde sikkerheten og kvaliteten på brystmelken for barnets helse.

Dette er de generelle retningslinjene for å lagre menneskemelk ved ulike temperaturer. Ulike faktorer påvirker hvor lenge menneskemelk kan lagres sikkert. Slike faktorer inkluderer melkevolum, romtemperatur når melken ble pumpet, temperatursvingninger i kjøleskapet og fryseren og renholdet i miljøet.

Lagre brystmelk etter pumping:

- Sett melken i kjøleskapet rett etter at den er pumpet, hvis mulig. Du kan sette den i kjøleskapet, plassere den i en kjølebeholder eller isolert kjølebag, eller fryse den i små porsjoner (2 til 4 ounce/0,5–1 dl) til senere måltid.
- Bruk lagringsposer for brystmelk eller rene, næringsmiddelgodkjente beholdere for å lagre overflødig brystmelk. Sørg for at beholderne er laget av glass eller plastikk og har tetsittende lokk.
-- Unngå flasker med resirkuleringssymbol 7. Det indikerer at beholderen kan være laget av plastikk som inneholder BPA.
- Fjern luft før forsegling.
- Legg posene flatt i fryseren. For å unngå at posene limer seg sammen, kan du skille dem med papirhåndklær.
- Aldri oppbevar brystmelk i engangsflasker eller poser som ikke er beregnet for oppbevaring av brystmelk.
- Snu beholderen forsiktig rundt for å blande den fløteaktige delen av brystmelken som kan samle seg på toppen, sammen med resten av brystmelken. Ikke rist melken. Dette kan gjøre at noen av melkens verdifulle bestanddeler brytes ned.
- Ny melk som er drevet ut eller pumpet, kan oppbevares:

Type brystmelk	Lagringsplass og temperaturer		
	Benkeplate 25 °C (77 °F) eller kaldere (romtemperatur)	Kjøleskap 4 °C (40 °F)	Fryseren -5 °C (23 °F) eller kaldere
Nylig drevet ut eller pumpet	Innen 2–4 timer	Innen 24 timer	Innen 3 måneder
Tint, tidligere frosset	Brukes innen to timer etter at barnet har ammet		

Disse retningslinjene gjelder kun fullbårne barn og kan variere for premature eller syke barn. Sjekk med helsepersonell.

Lagringstips:

- Merk lagringsbeholderen tydelig med datoen melken ble pumpet. Ta med barnets navn hvis du gir melken til helsepersonell.

- Ikke oppbevar brystmelk i døren på kjøleskapet eller fryseren. Dette beskytter melken fra temperaturrendringer når døren åpnes og lukkes.
- Frys den pumpede brystmelken med en gang hvis du ikke tror du kommer til å bruke den innen fire dager. Dette beskytter kvaliteten på brystmelken.
- Når du skal fryse brystmelk:
- Oppbevar små mengder så du unngår å sløse melk som kanskje ikke blir brukt. Oppbevar 2 til 4 ounce (0,5–1 dl) i hver beholder, eller mengden som blir tilbudt ved et måltid.
- Brystmelk utvider seg når den fryses, så la det være igjen litt plass på toppen av beholderen.
- Når du er ute og reiser, kan brystmelk oppbevares i en isolert kjølebagg med ispakker i opptil 24 timer. Ved ankomst må du bruke melken med en gang, lagre den i kjøleskap eller fryse den.

5.4.2 Riktig tining av brystmelk

- Tin alltid den eldste melken først. Husk først inn, først ut. Over tid kan kvaliteten på brystmelken forringes.
 - Der finnes flere måter å tine brystmelk på:
 - I kjøleskapet over natten.
 - Satt i en beholder med varmt eller lunkent vann.
 - Under rennende lunkent vann.
 - Aldri tine eller varme brystmelk i mikrobølgeovn. Mikrobølger kan ødelegge næringsinnholdet i brystmelken og kan skape varme parti som kan brenne barnet i munnen.
 - Hvis du tiner brystmelk i kjøleskapet, må den brukes innen 24 timer. Begynn å telle de 24 timene når brystmelken er helt tint, ikke fra når du tok den ut av fryseren.
 - Når brystmelken er i romtemperatur eller varmere, må den brukes innen to timer.
- Aldri frys brystmelk på nytt når den er tint.

6. Forflytting

Når du reiser må du bruke vedlagte ladekabel og tilpasse den til riktig strømkilden der du er. Før du går ombord i flyet, kan du spørre flyselskapet om råd når det gjelder transport og bruk av pumpen på flyet.

Temperatur: -20 til 60 °C / -4 til 140 °F

Relativ fuktighet: 15 % – 90 %

Trykk i omgivelsene: 70 – 106kPa

7. Oppbevaringsforhold

Hvordan oppbevare pumpen

- * Korttidslagring
 - * Hold brystpumpen unna direkte sollys. Oppbevar brystpumpen og tilbehøret på et sikkert, rent og tørt sted, borte fra barn.
 - * Langtidslagring
- Først av alt bør du lade pumpen før du langtidslagrer den, slik at brukstiden til pumpen blir forlenget. For det andre bør den lagres unna direkte sollys for å unngå misfarging. For det tredje bør de vaskbare delene rengjøres og tørkes før de lagres.
- * Temperatur: -20 til 60 °C / -4 til 140 °F
 - * Relativ fuktighet: 15 % - 90 %
 - * Trykk i omgivelsene: 90 til 106 kPa

8. Spesifikasjon

Model nr.	BP311
Navn	Wearable brystpumpe
Strømkrav	Inngang: 5V=1A Strøm: 5W
Strømforsyning	DC 3.7 V/ 1350mAh Ladbart lithium batteri
Pumpevalg	Enkeltpumpe
Sugemodus	Stimuleringsmodus, Utdrivingsmodus og Miksmodus
Vakuuminnstilling	Stimuleringsmodus: -75 til ~-145mmHg Utdrivingsmodus: -105 til ~-295 mmHg Miksmodus: -75til ~ -295mmHg
Syklusfart	Stimuleringsmodus: 70~88syklus/min Utdrivingsmodus: 27~60 syklus/min Miksmodus: 56~82syklus/min

Pumpedimensjon	130mm X 114mm X 73mm
Vekt (med alt tilbehør)	287g
Produktets brukstid	500 timer
Lydnivå	≤50dB
Type beskyttelse mot elektrisk sjokk	Internt drevet utstyr
Driftsbetingelser	Temperatur: 0 °C to 40 °C; Fuktighet: 15 % til 90 %, Atmosfærisk trykk: 70 til 106 kPa
Transport og lagringsmiljø	Temperatur: -20 °C til 60 °C; Fuktighet: 15 % til 90 %, Atmosfærisk trykk: 70 til 106 kPa
Batteriets ladetid	150 minutter
Batteriets brukstid	180 minutter

9. Vedlikehold og erstatningsdeler

Apparatet inneholder ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren: Å åpne eller manipulere dette apparatet vil forringe garantien. Hvis det skjer at apparatet trenger reparasjon, bør det returneres til utstyrsleverandøren eller direkte til forhandler. All modifisering er forbudt.

PRODUSENTEN vil gjøre kretsdiagrammer, liste over komponentens deler, beskrivelser, kalibreringsinstruksjoner, eller annen informasjon tilgjengelige på forespørsel for å assistere SERVICEPERSONELL med å reparere de delene som er angitt av PRODUSENTEN som mulig å reparere for SERVICEPERSONELL. Når produktet ikke er i bruk over lang tid, vil batteriet sakte lades ut. Lad apparatet hver tredje måned for å hindre batteriskade på grunn av lav spenning over tid.



Advarsel

Advarsel: hvis utilstrekkelig opplært personell skifter lithiumbatteriene, kan det resultere i fare.

Ikke rengjør eller vedlikehold apparatet mens det er i bruk eller er under lading.

10. Samsvarserklæring

EU Erklæring om samsvar: Shenzhen Root Innovation Technology Co., Ltd. Erklærer herved at dette apparatet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i LVD Direktiv 2014/35/EU og EMC Direktiv 2014/30/EU.

11. Feilsøk

Problemer	Løsninger
Pumpen virker ikke	• Hvis laktasjonen ennå ikke er kommet i gang, vurder å la pumpen være på brystet i en lengre periode for å være oppmerksom på mulig forsinket laktasjon. Merk: Tid for begynnende laktasjon er unik for hver person og er avhengig av flere faktorer. • Sjekk justering av brystvorte, sett pumpen på pause og fjern den fra brystet. Juster pumpen på nytt som beskrevet under. • Du har kanskje ikke riktig traktstørrelse (Se avsnitt 7.3 Brukerveiledning – Velg traktstørrelse).
Melken renner ikke	• Sett pumpen på pause og fjern den fra brystet. Juster den riktig. (Se avsnitt 7.3 Brukerveiledning – Justering). • Du kan også skille pumpen fra brysttrakten for å justere på nytt. Sentrer brystvorten i trakttunnelen og sett pumpen på brystet (se avsnitt 7.3 Brukerveiledning – Justering).
Behov for å justere på nytt	• Sett pumpen på pause og fjern den fra brystet. Juster den riktig. (Se avsnitt 7.3 Brukerveiledning – Justering). • Du kan også skille pumpen fra brysttrakten for å justere på nytt. Sentrer brystvorten i trakttunnelen og sett pumpen på brystet (se avsnitt 7.3 Brukerveiledning – Justering).

Føler ubehag ved pumping	• Hvis du føler kraftig ubehag, kan du prøve følgende (se avsnitt 7.3 Brukerveiledning – Justering). • Sørg for å trykke Momcozy-pumpen fast mot brystet under stimuleringsfasen. • Stram BH-en for å være sikker på at Momcozy-pumpen ligger fast mot brystet. • Minske sugestyrken. • Juster Momcozy-pumpen på nytt. • Kanskje du pumper for lenge. Momcozy-pumpen slår seg automatisk av etter 30 minutter. • Du har kanskje ikke riktig traktstørrelse (Se avsnitt 7.3 Brukerveiledning – Velg traktstørrelse). Stopp pumpingen og konsulter helsepersonell eller en ammespesialist.
Minsk (lav) pumpesuget	• Pumpen har ni sugeinnstillinger. Trykk på øke-knappen for å øke sugestyrken. • Sjekk tilstanden til de vaskbare delene. De bør erstattes etter tre måneders bruk. • Hvis det ikke virker, prøv følgende: 1.Sjekk kontakten mellom alle vaskbare deler for å forsikre deg om at de er sikre. 2.Se over alle vaskbare deler og erstatt dem hvis de er skadet. 3.Sjekk at strømmen er på. 4.Press pumpen tett mot brystet.
Stopp pumpingen	• Pumpen stopper automatisk å pumpe etter 30 minutter. • Kort trykk på På / Av / Pause-knappen vil sette pumpen på pause. Et trykk til vil starte den igjen.
Pumpen stopper ikke å pumpe	• Trykk på På / Av / Pause-knappen. • Hvis problemet fortsetter, kan du bryte vakuuemet ved å sette en finger mellom brystvevet og brysttrakten. Trykk deretter på På / Av / Pause-knappen for å skru av pumpen.
Pumpen eller laderen blir våt (nedsenket i vann).	• Tørk pumpen umiddelbart. La pumpen stå oppreist med ladeporten pekende ned og sugekontrollen opp. La den lufttørke over natten. Ikke bruk pumpen eller laderen de første 24 timene. • Kontakt kundeservice.
Pumpen lader ikke.	• Sørg for at USB Type-C-kabel med standard lader (ikke inkludert) er skikkelig plugget i pumpens ladeport.

Bemerkning: Hvis de ovennevnte metoden ikke løste problemet, kontakt produsenten. Se siste side for kontaktinformasjon.

12. Avhending



Ikke kast dette produktet i husholdningsavfallet, men lever til et oppsamlingspunkt for resirkulering av elektronisk utstyr og batterier ved slutten av produktets levetid. Elektronisk og elektrisk avfall kan potensielt ha skadefull virkning på miljøet. Uriktig avhending kan føre til akkumulasjon av skadelige giftstoffer i luft, vann og jord som kan skade menneskers helse. Du er pliktig å avhende apparatet på korrekt måte. Ta kontakt med kommunen din for informasjon om avhending.

13. Garanti

Kontakt produsenten om du har krav i henhold til garantien. For informasjon, se siste side i denne bruksanvisningen. Hvis du må sende inn apparatet, legg ved en kopi av kvitteringen sammen med en tydelig angivelse av skadebeskrivelse.

Garantivilkårene er som følger:

1. Garantiperioden for apparatet er ett år fra kjøpsdato. Om du har garantikrav må kjøpsdato bevises ved salgskvittering eller faktura.
2. Reparasjoner på garantien utvider ikke garantiperioden for hverken apparatet eller erstatningsdelene.
3. Følgende tilfeller er utelukket under garantien
 - All skade som oppstår på grunn av uriktig behandling, f.eks. manglende overholdelse av brukerinstruksjonene.
 - All skade som oppstår på grunn av reparasjoner eller manipulering utført av kunden eller uautorisert tredjepart.
 - Skader som oppstår under transport fra produsenten til kunden eller under transport til servicesenter.
 - Tilbehør som utsettes for normal bruk og slitasje.
 - Skade på apparatet på grunn av privat demontering.
 - Ansvar for direkte eller indirekte følgeskader forårsaket av apparatet er ekskludert, selv om skaden på apparatet er akseptert som et garantikrav.

14. Reise og internasjonal brukererklæring

Siden ytelsen fra Momcozy wearable brystpumpe kan bli påvirket av eksternt miljø, bør du i lys av usikkerhet og ustabilitet i reiseomgivelser, ikke bruke apparatet under reise med fly.

Momcozy wearable brystpumpe kan brukes internasjonalt, men må oppbevares i et slik miljø som er spesifisert i denne bruksanvisningen. Kontroller at inngangseffekten til strømadapteren er AC 100~240V 50/60 Hz og at utgangseffekten er DC 5V 1A. Sørg også for å ha en omformer for å konvertere til riktig spenning i landet du reiser til. For å sikre at Momcozy wearable brystpumpe ikke påvirkes under transport, sjekk følgende artikler før bruk for å sikre at den fungerer normalt:

- Sjekk Momcozy wearable brystpumpe for å sikre at den er skadefri, og
- Sjekk tilstanden på Momcozy wearable brystpumpe før hver bruk for å sikre at den fungerer normalt. Hvis noe er unormalt må du slutte å bruke den.

15. Produsentinformasjon

Produsent: Shenzhen Root Innovation Technology Co., Ltd.

Adresse: #2-201, Floor 2, Hasee Computer Building, No.2 Beier Rd, Bantian Street, Longgang, Shenzhen, Guangdong, China, 518129

E-mail: support@momcozy.com

Kontakt oss hvis du trenger hjelp til å sette opp, bruke eller vedlikeholde apparatet, eller rapportere uventet fungering.

